



Etac Swift Commode

La sedia WC 3 in 1

 **etac**[®]

Etac Swift Commode

Swift Commode è una soluzione estremamente versatile che può essere utilizzata come sedia da comodo, sedia doccia o rialzo WC.

E' ideale per coloro che necessitano di una soluzione vicina al letto ma discreta.

La Swift Commode è altrettanto adatta all'uso in bagno: i materiali resistenti all'acqua rendono possibile l'uso sia come sedia da doccia sia come rialzo WC.

Funzionalità 3 in 1

Nella camera da letto, Swift Commode può essere utilizzata come WC portatile. Progettata come una poltroncina, è dotata di morbide imbottiture rimovibili che nascondono la padella. La Swift Commode è utilizzabile anche in bagno come sedia da doccia con o senza imbottiture. Posizionata sul WC, funge da rialzo indipendente. La sedia può essere facilmente regolata all'altezza desiderata, i robusti braccioli offrono supporto nell'alzarsi e nel sedersi.

Progettata per essere versatile

Swift Commode è leggera e facile da spostare dalla camera al bagno. La sua portata massima è di 160 kg, è regolabile in altezza da 42 a 57 cm e la seduta può essere inclinata leggermente in avanti per facilitare i trasferimenti.


Facile da montare e pulire

Swift Commode è facile da montare senza attrezzi. I braccioli e lo schienale possono essere rimossi facilmente per una pulizia più accurata. Le superfici sono lisce con trattamento anticorrosivo. Viene fornita di serie con imbottitura sedile, imbottitura schienale e padella.



Etac Swift Commode	Codice numero.	Peso	
Swift Commode Swift Commode senza imbottiture	81702030 81702060	5.4 kg	
Dimensioni		Portata massima	
Larghezza totale: 56 cm Larghezza seduta: 54 cm Altezza seduta: 42-57 cm Distanza braccioli: 45 cm		160 kg	
Materiali		Manutenzione	
Seduta, schienale e braccioli: polipropilene Gambe: alluminio e poliammide Puntali antiscivolo: TPE Imbottitura schienale e seduta: Polietilene con tessuto di nylon			
		Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessario.	

Caratteristiche

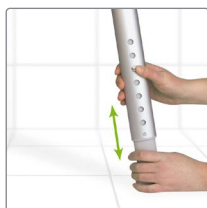

Regolabile in altezza

È facile regolare l'altezza. Basta premere sul tasto e far scorrere fino all'altezza desiderata. La forma ovale impedisce alle gambe telescopiche di girare durante la regolazione.



Stabile

La sedia ha un'ampia base d'appoggio che la rende estremamente stabile. La portata massima è di 160 kg. I puntali antiscivolo delle gambe si adattano al pavimento e offrono un'ottima presa su superfici bagnate o irregolari.



Facile da trasportare

Swift Commode viene fornito smontato in una pratica confezione per il trasporto. La sedia è facile da montare e smontare, l'imballaggio può essere conservato per successivi trasporti.



Padella con coperchio

La padella è disponibile come accessorio e si inserisce perfettamente nella seduta. E' dotata di una maniglia posteriore e di una superiore che automaticamente blocca il coperchio quando viene sollevata.



Swift Commode senza padella



Swift Commode con padella



Swift Commode con imbottiture

Accessori



Supporto per carta igienica

80301629

Un supporto per carta igienica può essere agganciato indifferentemente al bracciolo destro o sinistro.

Materiali: Poliammide, Acciaio



Imbottitura seduta

84005064

Il cuscinetto imbottito è antiscivolo e dona una piacevole sensazione di comfort. Impermeabile, è facile da pulire con un panno morbido.

Materiale: Polietilene




Porta sapone

80209266

Si inserisce sul lato della seduta, è perfetto per riporre il sapone, il coperchio della padella. E' anche dotato di un alloggiamento per la cornetta della doccia.

Materiale: Polipropilene

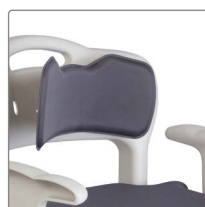

Imbottitura schienale

84005065

E' inclusa di serie l'imbottitura dello schienale: impermeabile, facile da pulire e antiscivolo dona una piacevole sensazione di comfort.

Materiale: Polietilene



Paraspruzzi

80209430

Il paraspruzzi può essere facilmente applicato nella parte anteriore della seduta.

Materiale: Poliuretano



Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti,
visita il nostro sito web: www.etac-it.com

Etac s.r.l.
Via XXV Aprile 1945, n.17
San Giorgio di Piano (BO), 40016
Tel +39 051 2819228
www.etac-it.com

etac[®]
Creating Possibilities