



etac®

Etac Swift

Duschstol / duschpall

Etac Swift duschstol /duschpall

Utformad för säker och hållbar användning

I över 20 år har användare runt om i världen förlitat sig på Etac Swift duschpallar och stolar för att känna sig trygga och säkra i badrummet.

Etacs produkter är utformade med säkerhet, hygien och hållbarhet i åtanke. Swift duschpall/-stol är noggrant testad i enlighet med europeiska och internationella standarder och tål rigorös användning och rekonditionering.

Anpassningsbart stöd

Grundversionen av Swift levereras utan armstöd. Öppningarna på sidorna ger ett stabilt grepp och ett utmärkt stöd. Genom att komplettera med armstöd får du extra stöd när du sätter dig ner och reser dig upp. För en komplett Swift duschstol adderar du både arm- och ryggstöd. Om du behöver extra komfort finns det sitt- och ryggdynor att tillgå.

Med sin prisbelönta design och omsorgsfullt utformade funktioner är Swift duschstol ett äkta Etac-original!



Swift har 5 års garanti och 10 års livslängd.



Etac Swift duschstol



Etac Swift duschpall med armstöd



Etac Swift duschpall

Etac Swift

	Vit	Grå
- Duschpall	81701610	81701410
- Duschpall med armstöd	81701620	81701420
- Duschpall med ryggstöd och armstöd	81701630	81701430
- Duschpall låg		81701450
- Duschstol låg med ryggstöd och armstöd		81701460

Färg

Vit

Grå

Dimensioner

Totalhöjd med ryggstöd: 80–95 cm
Totalhöjd Swift låga modellen med ryggstöd: 72.5–80 cm
Totalbredd, pall: 54 cm
Totalbredd, med armstöd: 54.5 cm
Djup: 50 cm
Djup Swift låg: 46.5 cm
Bredd mellan armstöd: 45 cm
Sithöjd: 42–57 cm
Sithöjd Swift låg: 34.5–42 cm
Sitsyta: 54 x 41 cm

Vikt

Swift duschpall: 3.1 kg
Swift duschpall låg: 2.9 kg
Swift duschstol: 4.7 kg
Swift duschstol låg: 4.5 kg

Material

Sits: Polypropylen
Ben: Aluminium, polyamid
Doppskor: TPE
Mjuksits: Polypropylen

Max brukarvikt

Max brukarvikt: 160 kg

Rengöring



Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel och med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70% desinfektionssprit. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 85 °C i 3 minuter.



Detaljer



Lättjusterad höjd

Höjden är lätt att reglera, utan lösa delar, med de teleskopade benen.



Står stadigt på golvet

De mjuka doppskorna anpassar sig efter ojämna golvytor och har en form och ett material som gör att de inte glider.



Anpassningsbar

Enkel att anpassa med avtagbart rygg- och armstöd som enkelt klickas på plats utan att du behöver använda verktyg. Lätt att anpassa för olika användarbehov.



Enkel åtkomst

En vändbar sits med en generös fördjupning och en slät yta ger god åtkomst och komfort. Sitsens antihalkmönster ger säkerhet och stabilitet.

Två höjder, två färger

Swift duschpallar/-stolar har en max användarvikt på 160 kg och finns i två olika storlekar, som båda är fullt justerbara. Den lägre modellen kan ställas in i fyra olika höjdlägen och den högre modellen kan ställas in i sju lägen.

Den höjdjusterbara funktionen kan också användas för att luta duschstolen något framåt. Detta är särskilt användbart för den som har svårt att ta sig upp och ner från sittande ställning. Swift duschpallar/-stolar finns i två färger: grå och vit.



Tillbehör



Ryggstöd

Avtagbart, modulärt ryggstöd som lätt sätts på plats utan verktyg.

Grå.....84006181
Vit.....84006196



Armstöd par

Avtagbara, modulära armstöd som lätt sätts på plats utan verktyg.

Grå.....84006184
Vit.....84006197



Tvålkopp

Fästes på sitsens sida. Inbyggd hållare för duschhandtag.

Grå80209266



Mjukdyna sits

De mjuka dynorna ger en omedelbar varm känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på plats.

Grå84005073



Mjukdyna rygg

De mjuka dynorna ger en omedelbar varm känsla. Lätt att torka och enkelt att klicka på plats.

Grå.....84005072



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities