



HÖJD BRUKARVIKT  
160  
KG

# Etac Swift Kommod

En tre-i-ett lösning

 **etac**<sup>®</sup>

# Etac Swift Kommod

Swift kommod passar bra för personer som behöver ha tillgång till en toalett nära sängen. Den är en anpassningsbar, höjjusterbar stol med avtagbara dynor på sits och rygg. Bäckenet har lock med handtag och kan enkelt lyftas upp. Liksom andra produkter i Swift-serien har kommoden utformats med tanke på funktionalitet och enkelhet.

## Flera användningsområden

Förutom kommodfunktionen kan Swift kommod även användas som duschstol eller över toaletten som en fristående toalettstolsförhöjare.

Swift kommod är mycket stabil och den flexibla konstruktionen gör att alla fyra benen står stadigt även om golvet är ojämnt. Sitthöjden kan regleras mellan 42 till 57cm och kan även vinklas en aning framåt så att det blir lättare för användaren att resa sig upp.

## Enkel montering och rengöring

Swift är lätt att montera utan några verktyg. Armstöd och ryggstöd kan enkelt tas bort vid behov, vilket också förenklar rengöringen. Stolen har släta ytor och är inte korroderande. Ryggstöd, armstöd, mjukdynor samt potta inkl lock ingår som standard.



Beskrivning	Item no.	Vikt
Swift Kommod	81702030	5.4 kg
Swift Kommod Basic utan mjukdynor	81702060	
<b>Dimensioner</b>		<b>Max brukarvikt</b>
Total bredd: 56 cm		160 kg
Sitsbredd: 54 cm		
Sitshöjd (min-max): 42-57 cm		<b>Maintenance</b>
Bredd mellan armstöden: 45 cm		
Öppning: djup x bredd 30 cm x 21,5 cm		
<b>Material</b>		
Sits, rygg och armstöd: Polypropen		
Ben: Aluminium and polyamid		
Doppskor: TPE		
Rygg- och sittdyna: Polytylen med nylontyg		
		Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pHvärde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C i 3 minuter.



## Detaljer



### Smart höjjustering

Teleskopbenen kan snabbt justeras till önskad höjd tack vare en självlåsande knapp som klickar på plats. Den ovala formen hindrar benen från att vrida sig när justeringen görs. Det finns inga lösa delar att som kan placeras fel.



### Säkert stabil

Stolen har ett stort fotavtryck vilket gör den extremt stabil och har en generös maximal brukarvikt på 160 kg. De mjuka doppskorna anpassar sig efter ojämna golvytor och har en form och ett material som gör att de inte glider.



### Enkel hantering

Swift Kommod kommer plattpackat i en lättburen förpackning. Eftersom stolen enkelt kan monteras och demonteras kan förpackningen sparas och användas för ytterligare transporter om stolen används på flera ställen.



### Potta med integrerat, självlåsande lock

En potta finns som tillbehör. Den har ett tätt självlåsande lock, passar smidigt och blir ett med sitsen. Pottan har ett handtag i bakänden samt ett upprätt handtag som automatiskt låser locket när pottan lyfts upp.



Swift Kommod utan potta



Swift Kommod med potta



Swift Kommod med mjukdynor

## Tillbehör



### Tvålkopp/lockstöd

80209266

Fästs på sitsens sida. Perfekt plats för att förvara duschgel, schampo, pottlock eller toalettpapper. Utrustad med en inbyggd duschhållare.

Material: Polypropylen



### Mjukdyna sits

84005064

Ingår som standard i Swift kommod 81702030 Den halkfria sittdynan ger en omedelbar varm känsla och gör sittandet mer bekvämt. Lätt att torka av.

Material: Polyeten




### Stänkskydd

80209430

Ett mjukt skydd mot urinstänk framåt. Fästs över sitsens främre urtag och kan enkelt tas bort, alternativt hållas på plats vid användande med hjälp av det greppvänliga handtaget.

Material: Polyuretan

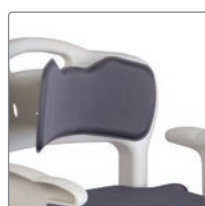

### Mjukdyna rygg

84005065

Ingår som standard i Swift kommod 81702030 Monteras på ryggstödet för extra komfort och ger en varm känsla. Det är halkfritt, enkelt att klicka på plats och lätt att rengöra.

Material: Polyeten



“Alla människor skall ha möjlighet att skapa en egen tillvaro och en egen vardag på sina egna villkor oavsett sina fysiska förutsättningar”

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB  
Box 203, 334 24 Anderstorp  
tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
[info@etac.com](mailto:info@etac.com) [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities