



# Etac Swift Mobil-2

Sedie da doccia/wc  
personalizzabili

 **etac**

# La famiglia delle Swift Mobil-2

La gamma delle sedie doccia/wc Swift Mobil-2 sono facili da manovrare e agevolano i trasferimenti dei pazienti ed il trasporto da e per il bagno. Sono progettate per rendere più facile la vita delle persone che le usano. Abbiamo realizzato questi ausili tenendo conto dei suggerimenti di caregivers ed utilizzatori. Abbiamo capito l'importanza della facilità di accesso alla seduta, della possibilità di personalizzarle con vari accessori e del comfort.



## Facilità di accesso

La maggioranza dei caregivers sottolinea l'importanza di un accesso facilitato per semplificare le attività di igiene. A questo scopo la seduta di Swift Mobil-2 è aperta nella parte posteriore e libera da entrambi i lati. Il piano di seduta sagomato contribuisce al comfort generale ed evita di assumere posture inappropriate.

## Versatilità e comfort

Tutti i modelli Swift Mobil-2 hanno una portata massima di 160 kg e possono essere facilmente adattate alle varie esigenze degli utilizzatori. Le Swift hanno molte regolazioni e offrono un'ampia gamma di accessori pensati per aumentare il comfort e la stabilità. Piccole modifiche possono fare una grande differenza per la sicurezza e il benessere dell'utilizzatore ma anche dei loro caregivers.

# Scopri le caratteristiche

Swift Mobil-2 è una linea di sedie da doccia/wc personalizzabili e funzionali, progettate per facilitare le attività di igiene dell'utilizzatore e dei caregivers. Sono disponibili tre diversi modelli: la versione standard non basculante, quella ad autospinta con le ruote da 24" e la versione Tilt basculante.

## Poggiatesta regolabile

Progettato per donare il massimo del comfort e del supporto; facilmente regolabile per adattarsi alle diverse esigenze dell'utilizzatore.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2

## Schienale tensionabile

Si asciuga rapidamente ed è facilmente regolabile tramite le cinghie posizionate nella parte posteriore dello schienale.

## Braccioli regolabili

Regolabili in altezza e in larghezza.

## Facilità di accesso

Seduta aperta nella parte posteriore, con incavo nella parte anteriore e libera da entrambi i lati.

## "Etac Easy-Clean"

La particolare superficie, sviluppata in esclusiva per Etac, rende la seduta facile da igienizzare e antiscivolo.

## Regolabile in altezza

Facilmente regolabile a diverse altezze di seduta predefinite, senza l'utilizzo di attrezzi.

## Pedana ergonomica

La forma leggermente curva della pedana poggiapiedi fornisce un supporto ottimale all'arcata plantare garantendo comfort, stabilità e relax.



Etac Swift Mobil Tilt-2

# Etac Swift Mobil-2

The Swift Mobil-2 è una sedia doccia/wc manovrabile dall'accompagnatore che facilita le attività di igiene e assistenza da parte dei caregivers. E' estremamente maneggevole e può essere personalizzata per adattarsi alle varie esigenze.

## Una seduta dal design unico

La seduta ha un'apertura posteriore che permette al caregiver un accesso facilitato per le attività di igiene. E' antiscivolo e facile da pulire grazie alla superficie "Etac Easy Clean".

## Postura e comfort

Sono disponibili imbottiture sedile di vari spessori e densità per offrire il giusto supporto posturale. Lo schienale tensionabile traforato e la pedana ergonomica aumentano la sensazione di comfort.

## Personalizzabile

Swift Mobil-2 ha una portata massima di 160 kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza. Le pedane poggiatepiedi estraibili sono regolabili in altezza e disponibili anche in versione accorciata, da utilizzare ad esempio in abbinamento alle imbottiture sedile maggiorate.

## Etac Swift Mobil-2 XL

Sono disponibili varianti con uno schienale più ampio, che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli. In questi modelli, grazie ad un kit di adattatori, lo spazio disponibile tra le pedane è aumentato di 12 cm. Sia lo schienale XL che gli adattatori per le pedane sono disponibili come accessori per gli altri modelli Swift Mobil.



### Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2, assemblata

### Codice n.

80229401

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

### Peso

16,6 kg

### Dimensioni

Larghezza totale: 57/58/64 cm. Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm.

Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Distanza tra i braccioli XL: 48/54/60 cm.

### Portata Massima

160 kg

### Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere

Seduta, Braccioli: polipropilene

Schienale: poliestere/Velcro

Pedana: polipropilene

Ruote: poliammide/TPE,



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessari.

## Caratteristiche



### Seduta con apertura posteriore

L'ampio accesso posteriore facilita al caregiver le attività di igiene, garantendo comunque un ampio appoggio all'utilizzatore. La seduta è antiscivolo e facile da pulire grazie alla superficie "Etac Easy Clean" sviluppata in esclusiva.



### Schienale tensionabile

Facilmente regolabile tramite le cinghie posizionate nella parte posteriore dello schienale, offre una migliore postura e un maggior comfort. Materiale morbido e ad asciugatura rapida.



### Braccioli regolabili di serie

Facilmente adattabili a varie esigenze. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza.



### Pedana ergonomica

La forma leggermente curva della pedana poggiapiedi fornisce un supporto ottimale all'arcata plantare garantendo comfort, stabilità e relax.



# Etac Swift Mobil Tilt-2

La Swift Mobil Tilt-2 è stata progettata pensando ai bisogni degli utilizzatori e dei loro caregivers. Permette di gestire facilmente le varie attività assistenziali offrendo al tempo stesso sicurezza e comfort.

## Basculamento facilitato

La Swift Mobil Tilt-2 ha un sistema di basculamento facilitato che offre una sensazione di maggiore sicurezza all'utilizzatore e una posizione di lavoro ergonomica per il caregiver. Il basculamento da  $-5^\circ$  a  $35^\circ$  può essere azionato da entrambi i lati della seduta permettendo così un continuo controllo visivo da parte dell'operatore.

## Facilità di accesso e comfort

Grazie alla facilità di accesso al piano di seduta le attività di assistenza sono agevolate per il caregiver e per l'utilizzatore. Lo schienale tensionabile traforato e la pedana ergonomica rendono l'ausilio particolarmente confortevole. Sono inoltre disponibili imbottiture sedile di vari spessori e densità.

## Adatta a tutti

La Swift Mobil Tilt si adatta a varie tipologie di utilizzatori e alle loro esigenze. Ha una portata massima di 160 kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza. Le pedane poggiatepiedi estraibili sono regolabili in altezza e disponibili anche in versione accorciata.

## Etac Swift Mobil Tilt-2 XL

Sono disponibili varianti con uno schienale più ampio, che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli e lo spazio disponibile tra le pedane è aumentato di 12 cm.



### Etac Swift Mobil Tilt-2

	Codice numero.
Swift Mobil Tilt-2	80229410
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per secchio	80229411
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella	80229412
Swift Mobil Tilt-2, con attacchi per padella e padella	80229415
Swift Mobil Tilt-2 XL	80229480
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per padella	80229481
Swift Mobil Tilt-2 XL con attacchi per secchio	80229485

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

#### Peso

20,4 kg

#### Dimensioni

Larghezza totale: 57/56/64 cm. Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm  
Larghezza totale XL: 61/64/70 cm. Distanza tra i braccioli: 48/54/60 cm.

### Portata Massima

160 kg

### Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere  
Seduta, Braccioli: polipropilene  
Schienale: poliestere/Velcro  
Pedana: polipropilene  
Ruote: poliammide/TPE



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di  $85^\circ\text{C}/185^\circ\text{F}$  per 3 minuti se necessari.

## Caratteristiche



### Seduta con apertura posteriore

L'ampio accesso posteriore facilita al caregiver le attività di igiene, garantendo comunque un ampio appoggio all'utilizzatore. La seduta è antiscivolo e facile da pulire grazie alla superficie "Etac Easy Clean" sviluppata in esclusiva.



### Basculamento pratico e sicuro

Il basculamento può essere azionato da entrambi i lati della seduta, garantendo al caregiver una posizione di lavoro ottimale per mantenere costantemente il contatto visivo con l'utilizzatore.



### Braccioli regolabili di serie

Facilmente adattabili a varie esigenze. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza.



### Poggiatesta regolabile

Progettato per donare il massimo del comfort e della flessibilità; può essere regolato in più posizioni per adattarsi alle esigenze dell'utilizzatore.



# Etac Swift Mobil 24"-2

Per gli utilizzatori più attivi, esiste un modello ad autospinta: Etac Swift Mobil 24"-2.

## Facilità di manovra

La Swift ad autospinta è facile da usare e semplice da manovrare. Le ruote posteriori sono posizionate in modo da ottimizzare la maneggevolezza di spinta e sono facili da raggiungere. I braccioli ribaltabili, la sagoma anatomica del sedile ed un ampio spazio davanti alle ruote facilitano i trasferimenti laterali.

## Seduta confortevole

Per facilitare le attività di igiene, la seduta ha un'apertura nella parte posteriore ed un incavo in quella anteriore. Sono inoltre disponibili imbottiture sedile di vari spessori e densità per aumentare la sensazione di comfort.

## Adatta a tutti

Swift Mobil 24"-2 si adatta a varie tipologie di utilizzatori e alle loro esigenze. Ha una portata massima di 160 kg ed è regolabile in altezza da 45 a 60 cm. I braccioli hanno un range di regolazione di 6 cm in altezza e larghezza. Lo schienale tensionabile permette di posizionare anche quadri posturali complessi garantendo un elevato comfort.

E' disponibile una versione con schienale più ampio, che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli e con distanziatori per aumentare lo spazio tra le pedane di 12 cm.



### Etac Swift Mobil 24"-2

	Codice numero.
Swift Mobil 24"-2	80229402
Swift Mobil 24"-2, con attacchi per secchio	80229407
Swift Mobil 24"-2, con attacchi per padella	80229408

Di serie: schienale, seduta, braccioli, pedane e 4 ruote frenabili.

#### Peso

25,1 kg

#### Dimensioni

Larghezza totale: 74 cm  
Distanza tra i braccioli: 42/48/54 cm

#### Portata Massima

160 kg

### Codice numero.

### Materiali

Telaio: Acciaio verniciato a polvere  
Seduta, Braccioli: polipropilene  
Schienale: poliestere/Velcro  
Pedana: polipropilene  
Ruote: poliammide/TPE  
Ruote posteriori: pneumatici pieni, poliammide, ball bearing  
Freni: poliammide, acciaio



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%. Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessari.



## Caratteristiche



### Facilità di manovra

La posizione delle ruote posteriori facilita la spinta e i trasferimenti laterali.



### Schienale tensionabile

Facilmente regolabile tramite le cinghie posizionate nella parte posteriore dello schienale, offre una migliore postura e un maggior comfort. Materiale morbido e ad asciugatura rapida.



### Seduta regolabile in altezza

La Swift Mobil 24"-2 ad autospinta può essere facilmente regolata a diverse altezze predefinite senza l'uso di attrezzi.



### Pedana ergonomica

La forma leggermente curva della pedana poggipiedi fornisce un supporto ottimale all'arcata plantare garantendo comfort, stabilità e relax.





## Accessori



### Sedile Soft Comfort, 4 cm apertura posteriore

80209519  
Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.  
Materiale: Poliuretano



### Sedile Soft Comfort, 2 cm apertura posteriore

80209518  
Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.  
Materiale: Poliuretano



### Sedile Soft Comfort, 4 cm

Apertura centrale 15 cm: 80209507  
Apertura centrale 18 cm: 80209506  
Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.  
Materiale: Poliuretano



### Sedile Soft Comfort, 2 cm

Apertura centrale 18 cm: 80209306  
Morbida seduta ergonomica con incavo anteriore che riduce la pressione di contatto aumentando il comfort.  
Materiale: Poliuretano



### Sedile senza foro

80209434  
Sedile planare per coprire l'apertura da utilizzare nella doccia.  
Altezza imbottitura 2 cm.  
Materiale: Poliuretano



### Cuscino con apertura standard

80209065  
Cuscino in espanso con fodera impermeabile.  
Altezza 2 cm.  
Materiale: Polietere/rivestimento in plastica



### Cuscino con apertura ovale

80209067  
Cuscino in espanso con fodera impermeabile.  
Altezza 4 cm.  
Materiale: Polietere/rivestimento in plastica



### Poggiatesta

80209521  
Poggiatesta multifunzione con imbottitura anatomica regolabile lateralmente, in altezza, profondità ed inclinazione.  
Materiali: Imbottitura: Poliuretano  
Staffa di supporto: Acciaio



### Imbottitura Comfort

80209455  
Schienale morbido con imbottiture braccioli. Una superficie d'appoggio morbida e confortevole che permette comunque l'appoggio durante i trasferimenti.  
Materiale: Polietilene



### Supporti laterali tronco

80209509  
Supporti laterali imbottiti che migliorano la postura e aumentano il comfort. Regolabili in larghezza.  
Materiali: Tessuto di poliestere, Velcro, Polietilene



### Schienale XL

80209454  
Schienale più ampio che aggiunge 6 cm extra tra i braccioli permettendo una regolazione in larghezza di 48/54/60. (Schienale XL non disponibile come accessorio per Swift Mobil Tilt-2)  
Materiale: Poliestere, Acciaio verniciato a polvere, acciaio, polipropilene.



### Schienale dritto

80209529  
Per uso su WC con montaggio a parete: permette di posizionare la Swift 70 mm più vicina al muro rispetto allo schienale standard (non disponibile per Swift Mobil Tilt-2).  
Materiali: vedi Schienale XL



### Barra di appoggio anteriore

60.5 cm 80303034 / 66.5 cm 80209452  
Può essere utilizzata come punto d'appoggio anteriore e/o per aumentare la sensazione di sicurezza dell'utilizzatore. Si fissa facilmente ai braccioli.  
Materiali: Alluminio, polietilene

## Accessori



### Imbottitura schienale Soft

80209448  
Offre una piacevole sensazione di comfort e permette di ribaltare i braccioli per facilitare i trasferimenti laterali.  
Materiale: Polietilene



### Imbottitura braccioli

80209508  
Una superficie d'appoggio morbida e confortevole che permette comunque l'appoggio durante i trasferimenti. Venduti a coppia.  
Materiale: Polietilene



### Braccioli per emiplegici

80209035  
Bracciolo sagomato per posizionare l'arto plegico. Utilizzabile su entrambi i braccioli (destra/sinistra).  
Materiale: Polietilene



### Sistema di bloccaggio per bracciolo

80209445  
Sistema di bloccaggio che permette di fissare il bracciolo in posizione alzata o abbassata.  
Materiale: Acciaio



### Paraspruzzi

80209430  
Il paraspruzzi viene applicato nella parte anteriore della seduta e può essere facilmente rimosso.  
Materiale: Poliuretano



### Cintura tronco/bacino

80209524  
Cintura imbottita ad asciugatura rapida per il controllo posturale. Può essere usata sia come cintura per il tronco che come cintura per il bacino. Lunghezza regolabile da 65 a 130 cm.



### Cinghia pelvica

80209440  
Offre un buon posizionamento posturale del bacino. Facile da regolare attraverso la fibbia centrale. Si fissa intorno ai tubi dello schienale con appositi fissaggi in velcro.  
Materiale: Poliestere



### Cintura per il tronco

80209442  
Offre un buon supporto anteriore del tronco. Viene fissata nella parte posteriore dello schienale e se ne raccomanda l'utilizzo associato ad una cinghia pelvica.  
Materiale: Poliestere



### Padella con coperchio e maniglia

80209255  
E' dotata di una maniglia posteriore e di una superiore che automaticamente blocca il coperchio quando viene sollevata. Gli attacchi per la padella non sono inclusi.  
Materiale: Polipropilene



### Padella

Padella senza coperchio 80209254  
Coperchio con maniglia 80209256  
Materiale: Polipropilene



### Attacchi per padella

80209257  
Adatti per qualsiasi tipo di padella con il bordo sottile. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.  
Materiale: Polipropilene



### Sistema di bloccaggio per padella

80209049  
Mantiene la padella in posizione quando la Swift è basculata. Utilizzabile sui vari modelli Swift Mobil Tilt-2.  
Materiale: Polipropilene



### Set di fissaggio per attacco padella

80209435  
Da utilizzare per fissare sotto la seduta gli agganci per padella.  
Materiale: Poliammide



### Attacchi per montaggio ribassato

80209259  
Permettono di abbassare gli attacchi per padella/secchio di 6 cm.  
Materiale: Polipropilene

## Accessori



### Attacchi per secchio

80209258

Adatti per qualsiasi tipo di secchio. Vengono fissati sotto al sedile utilizzando gli appositi alloggiamenti.

Materiale: Polipropilene



### Pedane con poggipiedi ribaltabili

80209446

Pedane regolabili in altezza ed estraibili con poggipiedi ribaltabili. Complete di cinturini fermatalloni. Vendute al paio.

Materiale: Acciaio e polipropilene



### Secchio con maniglia e coperchio

80209265

Capiente secchio con maniglia e coperchio. Gli attacchi non sono inclusi e vanno ordinati separatamente.

Materiale: Polipropilene



### Distanziatori per pedane

80209525

Permettono di aumentare lo spazio tra le pedane di 12 cm. Di serie in tutte le versioni con Schienale XL.

Venduti al paio.

Materiale: Poliammide



### Antiribaltamento per Swift Mobil Tilt-2

80209459

Evita il ribaltamento posteriore della Swift aumentando la sicurezza durante il basculamento.

Materiali: Polipropilene e Alluminio



### Poggiagambe regolabile in altezza

80209437

Permette di variare l'inclinazione dell'arto inferiore in 4 posizioni predefinite. Venduto singolarmente, utilizzabile a destra o a sinistra. Materiale: Acciaio e plastica ABS



### Antiribaltamento per Swift Mobil-2

Con kit di fissaggio: 80209439

Senza kit di fissaggio: 80209438

Evita il ribaltamento posteriore della Swift. Venduti al paio.

Material: Polypropylene and Aluminium



### Pedana poggipiedi elevabile

80209443

Kit con pedana poggipiedi da utilizzare con il poggiagambe regolabile in altezza.

Materiale: plastica ABS



### Antiribaltamento anteriore per Swift Mobil-2

80209526

Evita il ribaltamento in avanti della Swift. Con kit di fissaggio. Venduti al paio.

Per tutti i modelli Swift Mobil.

Materiali: Acciaio e polipropilene



### Poggiagambe per amputati

80209510

Regolabile in altezza, lunghezza ed inclinazione. utilizzabile a destra o a sinistra. Con pazienti amputati si consiglia l'utilizzo del dispositivo di antiribaltamento.

Materiale: acciaio and poliuretano



### Staffa per il superamento di ostacoli

80209449

Per facilitare il superamento di piccoli dislivelli. Completa di attacchi.

Materiali: Polipropilene e Alluminio



### Cinturini fermatalloni

80209432

Da fissare sulla pedana poggipiedi. Impedisce lo scivolamento posteriore del piede. Regolabile.

Venduti al paio.

Materiale: Poliestere



### Pedane ridotte

80209520

Pedane ridotte ribaltabili e regolabili da 24 a 36,5 cm. Poggipiedi ergonomico. Vendute al paio.

Materiali: acciaio e polipropilene



### Kit ruote 24" ad autopinta

80209436

Ruote 24" posteriori con pneumatici pieni. Facili da montare. Completa di sistema di fissaggio e freni. Utilizzabile solo su Swift Mobil. Materiali: Poliammide, acciaio, poliuretano e alluminio

## Istruzioni di pulizia e lavaggio

Sedili Comfort, Poggiatesta, Sistema di bloccaggio per braccioli, Paraspruzzi, Padella, Attacchi padella, Fissaggi per attacco padella, Attacchi per montaggio ribassato, Attacchi Secchio, Secchio, Antiribaltamento, Staffa per superamento ostacoli, Pedane, Poggiagambe regolabili in altezza, Poggiagambe per amputati, Kit ruote 24" ad autospinta.



Schienali morbidi, Cintura tronco/bacino, Cingia pelvica, Cintura per il tronco, Cinturini fermatallonni



Cuscini, Sedile senza foro, Imbottitura schienale soft, imbottiture braccioli, Bracciolo per emiplegici, Barra di appoggio anteriore



Cuscini di protezione



10 min



### Legenda simboli istruzioni di lavaggio



Lavabile in lavatrice - temperatura massima 60 °C / 140 °F



Lavare il prodotto utilizzando agenti pulenti senza solventi con pH compreso tra 5 e 9 oppure un prodotto disinfettante al 70%.



Il prodotto può essere decontaminato a una temperatura massima di 85° C/185° F per 3 minuti se necessari



Non lavare a secco




Il prodotto può essere pulito con un panno morbido

## Dimensioni



Modello	Lunghezza	Larghezza	Altezza seduta	Altezza schienale	Profondità seduta	Profondità schienale
Swift Mobil-2	93 cm	57/58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5cm	21 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	57/58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5cm	25 cm

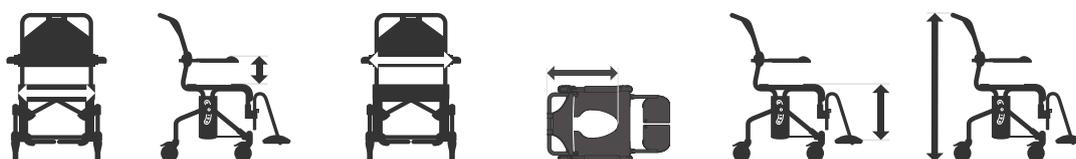

Modello	Larghezza seduta	Altezza braccioli	Distanza tra i braccioli	Profondità totale	Altezza pedane	Altezza totale
Swift Mobil-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil 24"-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm	34 / 46,5 cm	95-110 cm
Swift Mobil Tilt-2	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm	34 / 46,5 cm	100-115 cm

\* Schienale dritto, codice numero. 80229489, 80229490, 80229491





Etac è azienda leader a livello mondiale nella produzione e fornitura di dispositivi di assistenza e di attrezzature per la movimentazione dei pazienti. Il nostro scopo è fornire soluzioni che migliorino la qualità di vita della persona, della sua famiglia e dei caregivers.

Per le ultime novità e aggiornamenti sui prodotti,  
visita il nostro sito web: [www.etac-it.com](http://www.etac-it.com)