



# Etac Prio 3A

Actieve en multifunctionele  
kantelrolstoel

 **etac**<sup>®</sup>

# Behoud maximale activiteit met de Prio 3A

Wanneer iemand niet langer rechtop kan zitten in een actieve rolstoel, wordt een kantelrolstoel ingezet voor extra ondersteuning. Een kantelrolstoel biedt meer comfort en een goede houding om uit te rusten. Dit kan echter ook leiden tot een onnodige toename van de afhankelijkheid van anderen.

De Prio 3A is ontworpen om de activiteit maximaal te behouden, op basis van individuele mogelijkheden. Daarnaast biedt de rolstoel de ondersteuning en het comfort die nodig zijn. De Prio 3A is de enige rolstoel die het bekken kan ondersteunen wanneer het lichaam actief en rechtop zit én wanneer het wordt gekanteld. Dit noemen we **Dynamic Pelvic Support**.

Met het individueel instelbare **Etac 3A rugsysteem** kan de gebruiker zo actief mogelijk zitten. De Prio 3A kan daardoor aangepast worden aan de behoeften van vandaag én morgen.

Wanneer een gebruiker overgaat van een semi-actieve rolstoel naar een Prio 3A in actieve opstelling wordt de ondersteuning verbeterd. Tegelijkertijd blijft met een goed uitgebalanceerd frame, een middelhoge rugondersteuning en beperkte kanteling een behoorlijke mate van activiteit gewaarborgd.

Als de gebruiker op een bepaald punt meer ondersteuning nodig heeft, kan dit met een passievere balanspositie, met een stabielere frame-instelling, hoge rugondersteuning en een grotere kanteling.

*Kortom, de Prio 3A gaat uit van de mogelijkheden van de gebruiker.*



Etac Cross 6

*Stap over naar een semi-actieve rolstoel zodra er behoefte bestaat aan meer activiteit en zelfstandigheid.*

*Stap over van een semi-actieve rolstoel naar een Prio 3A actieve setup en gebruik de kantel- en rughoekfunctie met behoud van enige activiteit*



Etac Prio 3A (active instelling)

*Stap over naar een Prio 3A actieve setup en gebruik de kantel- en rughoekfunctie met behoud van enige activiteit*

*Verlaat de actieve setup van de Prio 3A voor nog meer ondersteuning en comfort.*



Etac Prio 3A (comfort setup)

*Prio 3A is ingesteld voor volledig comfort en ondersteuning.*





## Benut de mogelijkheden

Zitten gaat niet alleen over houding, drukverdeling en comfort. Ook kleine instellingen kunnen sterk bijdragen aan het vermogen om actief te zitten.

Actief zitten kan in de praktijk betekenen dat iemand zelfstandig iets kan aanpakken, het hoofd rechtop kan houden of oogcontact kan maken. Of in staat is zelfstandig de rolstoel te draaien en iemand aan te kijken.

Dat noemen wij Ability Based Seating; benut de mogelijkheden.



Kijk voor meer informatie op:  
[www.etac.nl/shapeup](http://www.etac.nl/shapeup)

## Etac 3A rugstelsysteem

Langdurig zitten in een slechte lichaamshouding kost bijzonder veel energie. Om zo actief mogelijk te zitten hebben rolstoelgebruikers een rugstelsysteem nodig dat individueel instelbaar is: het Etac 3A rugstelsysteem. Met het Etac 3A rugstelsysteem stel je de rolstoel in op basis van individuele capaciteiten en lichaamsvorm. Dit verbetert de mobiliteit én zelfstandigheid.



### Hoogteverstelling rugleuning

Instelbaar tussen 46 en 62 cm

Met rugverlenging 52-68 cm



### Hoekverstelling lumbaal

Instelbaar tussen -12° tot +10°

### Verstelbare zitting naar rughoek (kanteling)

Instelbaar tussen -3° tot +20°


->



### Dynamic Pelvic Support

De Prio 3A heeft een unieke meebewegende bekkenondersteuning in combinatie met de rughoekverstelling. Laat het bekken iets kantelen bij een grotere rughoek voor maximale ontspanning.

De Prio 3A is de enige rolstoel die het bekken kan ondersteunen wanneer het lichaam actief en rechtop zit én wanneer het wordt gekanteld.

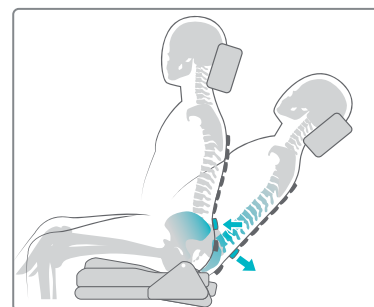

# Aanpassen naar verschillende lichaamsvormen

Ieder mens is anders, met verschillende lichaamsvormen, capaciteiten en behoeften. In een zittende positie is de vorm en ondersteuning van het bovenlichaam van groot belang, vanaf het bekken en omhoog. Met behulp van het 3A-rugsysteem, slimme accessoires zoals wiggen, rugverbreding en het gepatenteerde 3D-rugkussen creëer je ruimte en ondersteuning in alle richtingen voor de meer actieve gebruikers en voor gebruikers die behoefte hebben aan meer vorm en ondersteuning zoals kyfose en andere asymmetrieën.

## Actief maar behoefte aan rust

Ook een actieve gebruiker kan behoefte hebben aan comfort en ondersteuning. Configureer de Etac Prio 3A in dat geval met verschillende achterwielposities (1), standaard beensteunen (2) en een standaard 3A rugleuning (3). Kies bij behoefte aan meer comfort eventueel ook een 3D rugleuning of een door de gebruiker te bedienen kantelfunctie (4).



## Kyfose en asymmetrie

Voor personen met een kyfotische wervelkolom moet er voldoende ruimte zijn voor de gebruiker om in het zitgedeelte te zitten. Bij asymmetrie is op verschillende plaatsen ondersteuning nodig om de romp te stabiliseren.

Creëer de juiste vorm en ondersteuning in alle richtingen. Voor een kyfotische rug of asymmetrie gebruikt u de verstelbare hoofdsteen (1), de lendenhoek van de 3A rugleuning (2), het 3D rugkussen (3) en de dynamische bekkensteen (4). Gebruik daarbij eventueel rughoek-begrenzing.

## Brede schouders

In plaats van de rugleuning te verlagen om gebruikers met brede schouders meer stabiliteit en comfort te bieden, kunnen rugverbreedende accessoires worden gebruikt. Om de rugleuning te verbreden, kunt u de verbredingsset (1) gebruiken en de verbrede vorm volgen om comfort te creëren met het 3D-kussen (2).



## Ondersteuning en comfort

Sommige gebruikers hebben net dat beetje extra ondersteuning en comfort nodig.

Om steun en comfort te creëren, kun je accessoires zoals zijkussens (1) en gepolsterde armsteunhoezen (2) gebruiken in combinatie met een hoofdsteun (3) en het 3D-rugkussen (4).

## Opties voor rugkussens



### Rugkussens

Zacht en flexibel rugkussens, verkrijgbaar in grijs velours of platilon.



### 3D rugkussens

3-delig rugkussens (3 panelen) in grijs velours. Biedt ondersteuning en creëert vorm omdat het de rug van de gebruiker volgt.



# Prio 3A

Heupbreedte is maatgevend



Het enige dat u hoeft te weten om de juiste rolstoelmaat te bepalen is de heupbreedte. De rest kan worden aangepast aan de behoefte van de individuele gebruiker. Prio 3A biedt u talloze mogelijkheden om vorm en ondersteuning te creëren voor de gebruiker. Zodat zowel een actieve zithouding als ondersteuning en comfort tijdens het rusten gevonden kunnen worden. Gebruik de verstelmogelijkheden en diverse eenvoudige accessoires om de rolstoel helemaal naar de behoefte van de gebruiker te vormen. Benut de mogelijkheden. Met de Prio 3A kunt u uw positionerings- en activiteitsdoelen bereiken.

## Kenmerken



### Zitdiepte

Verstelbaar van 39 - 51 cm. Het gebruik van zowel de achter- als de voorverstelling vereenvoudigt het vinden van een optimale balanspositie. Instelbereik voor 7 cm. Instelbereik achter 5 cm.



### Kantel- en rugverstelling

Kantel- ( $-3^{\circ}$  ( $0^{\circ}$ ) tot  $+20^{\circ}$ ) en rugverstelling ( $0$  tot  $+30^{\circ}$ ) bediend door de verzorger is standaard. Elektrische hoekverstellingen of een bediening door de gebruiker zijn optioneel beschikbaar.



### Optimale balans

Optimaliseer de wielpositie in relatie tot de geselecteerde zitdiepte om de optimale balanspositie te vinden.

## Shape Up-oplossingen

Met een kleine selectie slimme accessoires binnen handbereik kun je de benodigde ondersteuning en vorm creëren.



### 3D rugkussen

Het 3D-rugkussen heeft drie zacht gepolsterde panelen die zijn verbonden met een glijdende stof. Vorm en optimale ondersteuning kunnen in alle richtingen worden gecreëerd. Het 3D-rugkussen is bijzonder geschikt voor kyfose en asymmetrische houdingen.



### Rugverlenging

Voeg 6 cm rughoogte toe met de rugverlenging incl. een extra singelband. Bij gebruik van de rugverlenging op de 3A rugleuning is de grootste rughoogte 68 cm.



### Rugverbredingsset

Voor rolstoelgebruikers met brede schouders die extra stabiliteit en comfort nodig hebben. Het 3D kussen volgt moeiteloos de nieuwe vorm van de rugleuning.



### Zijkussen

Zijdelingse ondersteuning die kan worden gecombineerd met alle rugkussens. Draai de rugleuning om, om te kiezen tussen twee verschillende vormen. Ondersteund door de armsteun of kledingbeschermer.



### Drukverdeler

De drukverdeler heeft een flexibel maar stevig inzetstuk dat kan worden gebruikt in drukgevoelige gebieden.



### Gasveer-clips

Met de clips kan zowel de maximale kantelhoek als de rughoek worden beperkt. Ideaal voor gebruikers met amputaties of bij actieve rolstoelbalans t.b.v. licht rijden.



### Wigkussens

Met zachte wigkussens en celrubber wigkussens met klittenbandbevestiging in verschillende maten kun je snel en eenvoudig vorm en ondersteuning creëren.



### Polstering kledingbeschermer

De bekleding biedt extra comfort en reduceert de zitbreedte tussen de armsteunen met 1,5 cm per kant.

*Kijk voor meer informatie en accessoires op [etac.nl](http://etac.nl)*

Zitbreedte	Zitdiepte	Totale breedte	Transport breedte	Gewicht
40 cm	39-51 cm	59 cm	56 cm	33.0 kg
45 cm	39-51 cm	64 cm	61 cm	33.3 kg
50 cm	39-51 cm	69 cm	66 cm	33.6 kg
55 cm	39-51 cm	74 cm	71 cm	33.9 kg

De opgegeven gewichten en afmetingen zijn voor een stoel met 24" achterwielen met QR-assen, massieve banden, roestvrijstalen hoepels, rugspanstang, beensteunen, voetsteunen, hielbanden, remmen, armsteunbevestiging, 6½" zwenkwielen met medium vorken. De opgegeven afmetingen kunnen ± 2% afwijken.

<b>Hoogte rugleuning</b> 46 - 62 cm  52 - 68 cm incl rugverlenging (6 cm)	<b>Balansposities</b> De Etac Prio met 20", 22" en 24" achterwielen heeft drie alternatieve balansposities voor elke zithoogte.	<b>Zithoogte</b> 20", 22" en 24" achterwielen: 38 - 52,5 cm. Let op! ook met 16" achterwielen: 40 - 45 cm. Zitdieptebereik 39-51 cm.
<b>Kantelhoek</b> -3° tot +20°	<b>Totaal gewicht</b> Gemeten met armsteunen, comfort beensteunen, kuitsteunen, achterwielen en anti-kiep.	<b>Transportgewicht</b> 22.9-23.8 kg zonder armsteunen, comfort beensteunen, kuitsteunen en achterwielen.
<b>Rughoek</b> 0 tot +30°		<b>Maximaal gebruikersgewicht</b> 135 kg



## Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

**Kijk ook op** [www.etac.nl](http://www.etac.nl)

Etac B.V.  
Tinweg 8  
8445 PD Heerenveen  
T: 0513 681 686  
E: [contact.nl@etac.com](mailto:contact.nl@etac.com)  
W: [Etac.nl](http://Etac.nl)

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities