

The logo for etac, featuring a stylized circular icon followed by the word "etac" in a bold, sans-serif font.

Creating Possibilities



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Moderne dusj- og toalettstol med mange tilpasningsmuligheter

Hjelper barnet med pottetreningen

Flamingo Curo er en fleksibel dusj- og toalettstol. Med fem monteringsalternativer – inkludert tre ulike understell, plassering over toalett eller i badekar – er den enkel å tilpasse til ulike behov innen hygiene.

Gjennomtenkte funksjoner sørger for komfort for barnet og brukervennlighet for omsorgspersonen.



Pottetrening og barnets utvikling

Å starte med pottetrening er et viktig steg i barnets utvikling, og krever at man tar hensyn til barnets bevegelse og evne til å sitte selvstendig.

For barn med normal utvikling er det avgjørende at de kan komme seg til potte eller toalett og sitte uten støtte før prosessen begynner.

Alderen varierer for når barn starter og oppnår kontroll over urin og avføring. Det avhenger blant annet av når barnet viser tegn på at det er klart, når foreldrene velger å starte, samt kjønn og kulturelle normer. I noen land starter man allerede ved seks måneders alder, mens andre begynner mellom 18 og 36 måneder.

Barn med funksjonsnedsettelse trenger ofte hjelpemidler og støtte for å kunne sitte trygt når pottetreningen starter.

For å etablere daglige rutiner som kan føre til kontroll både på dag- og natteid, er samarbeid

viktig – med fagpersoner som støtter både barnet og omsorgspersonene.

Barn som trenger støtte for å sitte under toalettbesøk har ofte behov for ekstra støtte også i andre situasjoner. For barn som opplever forstoppelse eller har vansker med avføring, kan en huksittende stilling være til hjelp.

Flamingo Curo tilbyr løsninger som gjør det lettere å få tømt tarmen samtidig som stolen gir postural støtte.

Stolens ryggvinkel kan tiltes til -20° for en fremoverlent stilling, høyderegulerbar benstøtte for optimal vinkel i knærne, og et komfortabelt PU-bord som gir støtte til overkroppen. I tillegg har den åpning bak som gir omsorgspersonen enkel tilgang etter toalettbesøk.

Sittestilling på toalettet

Pottetrening kan være et viktig steg i barnets utvikling, og det kreves nøye vurdering av barnets mobilitet. Barn med funksjonsnedsettelse som skal starte pottetrening er ofte avhengige av hjelpemidler.



Uavhengighet og livskvalitet

Deltakelse i daglige toaletterrutiner og utvikling av ferdigheter innen personlig hygiene styrker barnets evne til egenomsorg, gir en følelse av verdighet og bidrar til økt livskvalitet. Det er viktig å fremme selvstendighet og trygghet, samtidig som barnets verdighet ivaretas og omsorgen gjøres så enkel som mulig.



Fordeler med pottetrening

Dusj- og toalettstoler kan ha positiv innvirkning på barnets deltakelse i eget liv, ved å gi mulighet til aktivt å ta del i daglige rutiner. Dette fremmer selvstendighet, selvtilit og generell trivsel.



Riktig sittestilling

En huksittende stilling kan hjelpe ved forstoppelse, for det hjelper ved tømming av tarmen. Fremoverlent stilling, hevede knær og støttet overkropp er grunnleggende for bedre komfort og effektivitet ved avføring.

Toalettunderstell

Toalettunderstellet Potty Frame passer til Flamingo Curo-setet i størrelse 1. Understellet bidrar til barnas selvstendighet, og lar dem å ta en aktiv rolle i toalettbesøket.

Pottetrening er et viktig utviklingstrinn som krever oppmerksomhet rundt barnets bevegelighet, sittestilling og modenhet.

Barn med normal utvikling kan starte treningen etter alt fra seks måneder til tre års alder, avhengig av kultur, foreldrenes tilnærming og barnets egen utvikling. Barn med fysiske eller kognitive utfordringer trenger ofte hjelpemidler for å kunne delta i denne prosessen.

Flamingo Curo med toalettunderstell gir et trygt, stabilt og justerbart sete som gjør det enklere for barnet å aktivt delta i toalettbesøket – med mer komfort og selvstendighet.

Understellet brukes sammen med Flamingo Curo-setet, som leveres med støttende former og et bredt utvalg av tilbehør. Dette gjør det mulig å tilpasse sittestillingen etter barnets behov – noe som er avgjørende for både trygghet og mestring under pottetreningen.



Les mer om våre
juniorprodukter på
etac.no



Mål

Flamingo Curo

Størrelse 1

	Effektiv rygg høyde	375-445 mm
	Effektiv setedybde	235-295 mm
	Setebredde (med lår-/hoftestøtte)	185-265 mm
	Maks brukervekt	35 kg

Flamingo Curo Potty Frame

Størrelse 1

	Effektiv avstand fra sete til fotplate	220-285 mm
	Setehøyde i front av setet	290/310/330 mm



Se video av Flamingo Curo
brukt i badekar



Badetid

Badetid for barn med spesielle behov kan være både beroligende og utfordrende – og krever en tilnærming som tar hensyn til barnets sanse- og bevegelsesbehov.

Det er avgjørende med et trygt og komfortabelt miljø, særlig for barn som er følsomme for temperatur, teksturer eller lyder. Enkle hjelpemidler som hånddusj eller favorittleker kan gjøre opplevelsen mindre overveldende og mer engasjerende.

For barn med nedsatt bevegelse kan tilpasset utstyr som badestol eller personløfter gi økt trygghet og tilgjengelighet.

Med tålmodighet og forståelse – og løsninger som er tilpasset barnets behov – kan badetiden bli et rolig og omsorgsfullt øyeblikk med nærhet og mestring.

Hjelpemidler som badestoler spiller en viktig rolle i å

skape trygghet og komfort under badetid for barn med bevegelsesutfordringer.

Flamingo Curo er utviklet for å gi stabil støtte, redusere belastning for omsorgspersonen og fremme barnets selvstendighet. Stolen kan tilpasses med funksjoner som tiltbart sete, regulerbar rygg og støtte, og tilt-in-space – alt for å møte ulike behov og gi god stabilitet.

Ved å integrere slike hjelpemidler i barnets daglige hygienerutiner, kan omsorgspersoner fokusere mer på å skape trygghet og ro – og gjøre badetiden til en positiv opplevelse for alle involverte. I tillegg bidrar tilpasset utstyr til å styrke barnets følelse av verdighet og oppmuntre til aktiv deltakelse i egen hygiene.

Førstevalget for daglig hygiene

Flamingo Curo er en fleksibel dusj- og toalettstol. Med fem monteringsalternativer, inkludert tre ulike understell, plassering over toalett eller i badekar, er den enkel å tilpasse for ulike behov innen hygiene.



Klar for hverdagen

Flamingo Curo kan brukes til toalettbesøk, dusjing og bading. Med fem monteringsalternativer kan den skreddersys til å dekke barnets ulike behov i alle situasjoner på badet.



Vokser med barnet

Flamingo Curo har regulerbar ryggghøyde, setedybde og setebredde. I tillegg finnes det et bredt utvalg av tilbehør som sørger for at stolen hele tiden kan tilpasses et barn som vokser.



Komfortabel støtte

Dusj- og badestolen leveres med nøye utformede PU-innlegg med lett kurvet form, som gir barnet komfortabel og stabil støtte.



Brukervennlig for pleier

Flamingo Curo er designet med lett tilgjengelig énhåndsbetjent ryggvinkel og tilt. Slik kan omsorgspersonen samhandle med barnet samtidig som stolen betjenes.



Se Flamingo Curos
bruksområder





Én stol – mange muligheter

Flamingo Compact Frame-understell



Flamingo High-low Frame-understell



Potty Frame toalettunderstell



Kan brukes i badekar



Plassert over toalett



Frittstående med bekken



Pottetrening med Andreas



Andreas er en glad, energisk og nysgjerrig gutt som har diagnosene cerebral parese og lissencefali.

Lissencefali er en sjelden tilstand der hjernen mangler normale folder, noe som ofte fører til utviklingsforsinkelser og motoriske utfordringer.

Funksjonelt kan Andreas sitte selvstendig med god kontroll over kroppen. Han har god styrke og motorikk i høyre arm, men begrenset kontroll på venstre side. Andreas bruker aktivt høyre hånd, spesielt når han leker med lekebilene sine. Han kan ikke stå eller gå uten støtte, men beveger seg rundt ved å skyve seg frem på baken. Han kommuniserer med enstavelsesord.

En av Andreas' favorittaktiviteter er å bade sammen med storebroren – et gledelig øyeblikk fylt med latter og plasking.

I dag bruker Andreas en badestol montert i badekaret, men denne løsningen dekker ikke lenger familiens behov. Moren hans, Ditte, ønsker at Andreas fortsatt skal kunne nyte badetiden med broren, samtidig som han får mulighet til å trene på mer selvstendighet ved dusjing og toalettbesøk.

Andreas går på en skole for barn med spesielle behov, der han bruker R82 Meerkat for ståtrening. Hjemme liker han å høre på musikk, leke med bilene sine og være med på tur i familiens lastesykkel.



En løsning med fokus på selvstendighet, stabilitet og deltakelse

I samtale med Ditte kom det tydelig frem at familiens fokus alltid er å styrke Andreas' livskvalitet og legge til rette for utvikling, selvstendighet og deltakelse.

Hjelpemidler er en naturlig del av hverdagen, og neste steg er å støtte Andreas i trening knyttet til dusj og toalett. Derfor er Flamingo Curo et godt valg.

I starten var Andreas litt skeptisk til den nye situasjonen. Ditte brukte kommunikasjonskort for å snakke med ham om Flamingo Curo og de aktivitetene han skulle begynne å øve på.

Da det omsluttende PU-bordet ble montert, og Andreas kunne se favorittprogrammet sitt på iPad, ble han mer avslappet. Ditte kunne også berolige ham mens hun flyttet stolen eller regulerte tilt og ryggvinkel – og Andreas begynte å føle seg trygg. Da han var klar, startet pottetreningen.

Takket være god kroppskontroll kan Andreas sitte både med og uten støtte. Når han blir sliten under trening, viser han ofte redusert stabilitet i venstre side av overkroppen. Her gir de svingbare sidestøttene nødvendig støtte, slik at han kan konsentrere seg om aktiviteten – og ikke om å holde balansen.

Se Andreas og moren
jobbe med pottetrening



Funksjoner

Flamingo Curo er en dusj- og toalettstol designet for å dekke et bredt spekter av behov. Med muligheten for å kunne bruke ulike understell, kombinert med et stort tilbehørsprogram, er dette det beste valget for ditt barn.

Hodestøtte

Stolen har et stort utvalg av hodestøtter med multijusterbare fester, inkludert en med en komfortabel, buet pute. Alle gir støtte til ulike situasjoner.

Faste eller utsvingbare sidestøtter

Gir god støtte til barn med nedsatt bolstabilitet, og bidrar til riktig posisjonering. Den utsvingbare varianten (tilbehør) gjør forflytning raskere og enklere.

Armlener

Gir barnet bedre stabilitet gjennom ekstra støtte. Klikksystemet lar deg enkelt ta av armlenene, som igjen forenkler sideveis forflytning.

Lår-/hoftestøtte

Bredderegulerbar lår-/hoftestøtte gir støtte ved å holde hofte og lår i riktig stilling.

Ulike understell

Flamingo Curo har ulike understell slik at stolen kan passe til flere forskjellige hygieneoppgaver.

Hoftebelte

Neopren hoftebelte som er utstyrt med to fikseringspunkter opprettholder den sittende stillingen.

Hjul

Understellene finnes med to ulike størrelser av lettrillende hjul: 100 mm og 75 mm. Avbildet er 75 mm.

Fotplate

Fotplaten kan reguleres i høyde og vinkel for å optimalisere sittestillingen ved toalettbesøk. Kan raskt fjernes med hurtigkoblingen eller vippes opp, for enklere stående forflytning.

Les mer om
Flamingo Curo





Mål

Flamingo Curo		Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
	Ryggvinkel	$(-20^{\circ}) - (30^{\circ})$	$(-20^{\circ}) - (30^{\circ})$	$(-20^{\circ}) - (30^{\circ})$
	Effektiv rygg høyde	375 - 445 mm	405 - 485 mm	450 - 550 mm
	Effektiv rygg bredde (med sidestøtter)	140 - 240 mm	175 - 275 mm	220 - 320 mm
	Effektiv rygg bredde (uten sidestøtter)	300 mm	335 mm	390 mm
	Effektiv setedybde	235 - 295 mm	295 - 355 mm	335 - 415 mm
	Effektiv setebredde (uten lår-/hoftestøtte)	265 mm	300 mm	355 mm
	Effektiv setebredde (med lår-/hoftestøtte)	185 - 265 mm	220 - 300 mm	275 - 355 mm
	Effektiv avstand fra sete til fotplate	250 - 285 mm	260 - 345 mm	300 - 400 mm
	Maks brukervekt	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo Compact Frame-understell		Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
	Setehøyde i front av setet	480 - 580 mm	480 - 580 mm	480 - 580 mm
	Setevinkel (tilt)	$(-10^{\circ}) - (30^{\circ})$	$(-10^{\circ}) - (30^{\circ})$	$(-10^{\circ}) - (30^{\circ})$

Flamingo Curo High-low Frame-understell		Størrelse 1	Størrelse 2	Størrelse 3
	Setehøyde i front av setet	530 - 740 mm	530 - 740 mm	530 - 740 mm
	Setevinkel (tilt)	$(-5^{\circ}) - (20^{\circ})$	$(-5^{\circ}) - (20^{\circ})$	$(-5^{\circ}) - (20^{\circ})$

Tilbehør



Flamingo Compact Frame

Beskrivelse | Art.nr | HMS

Str 1, 75 mm hjul | 31882011 | 331143
 Str 2, 75 mm hjul | 31882012 | 331144
 Str 3, 75 mm hjul | 31882013 | 331145
 Str 1, 100 mm hjul | 31882021 | 331146
 Str 2, 100 mm hjul | 31882022 | 331147
 Str 3, 100 mm hjul | 31882023 | 331148



Flamingo High-low Frame

Beskrivelse | Art.nr | HMS

Str 1, 75 mm hjul | 31882031 | 331149
 Str 2, 75 mm hjul | 31882032 | 331150
 Str 3, 75 mm hjul | 31882033 | 331151
 Str 1, 100 mm hjul | 31882041 | 331152
 Str 2, 100 mm hjul | 31882042 | 331153
 Str 3, 100 mm hjul | 31882043 | 331154



Potty Frame

Beskrivelse | Art.nr | HMS

Størrelse 1 | 31882050 | 331155



Hodestøtter

Se tilbehørsoversikten på vår nettside.



Ryggpolster

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882075	331162
Str 2	31882076	331163
Str 3	31882077	331164



Skulderstøtte med PU

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882081	331165
Str 2	31882082	331166
Str 3	31882083	331167



Setepolster

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882071	331159
Str 2	31882072	331160
Str 3	31882073	331161



Faste sidestøtter

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Liten	31882090	331169
Medium	31882091	331170
Stor	31882092	331171



Utsvingbare sidestøtter

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Liten	31882095	331172
Medium	31882096	331173
Stor	31882097	331174



Armlener

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Liten	31882113	331177
Stor	31882114	331178



Lår-/hoftestøtte

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Liten	31882111	331175
Stor	31882112	331176



Lokk til seteåpning

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882121	331180
Str 2	31882122	331181
Str 3	31882123	331182



Urinskjerm/abduksjonskloss

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Liten	31882145	331192
Stor	31882147	331193



Leggstøtte

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882135	331186
Str 2	31882136	331187
Str 3	31882137	331188



Fotplate

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882151	331194
Str 2	31882152	331195
Str 3	31882153	331196



Bord

Beskrivelse	Art.nr	HMS
Str 1	31882141	331189
Str 2	31882142	331190
Str 3	31882143	331191

Se flere tilbehør på vår nettside



Flamingo Curo_brochure_02_N001 | Feil og mangler kan forekomme.
© R82 A/S All rettigheter forbeholdt.

Etac er en verdensledende utvikler av innovative hjelpemidler og utstyr for pasienthåndtering. Siden 1973 har vi jobbet for å forbedre livskvaliteten for den enkelte, familiemedlemmer og omsorgspersoner.

For informasjon om produktene og siste oppdateringer, besøk www.etac.no

Etac



+47 815 69 469



hovedkontor.norge@etac.no



www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities