



R82[®]

R82 Flamingo Curo

Modern och anpassningsbar dusch- och toalettstol



Stödjer toaletträning

Flamingo Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol som är utformad för att tillgodose en mängd olika behov, vilket gör den lämplig för toalettbesök, dusch och bad.

Flamingo Curo erbjuder fem monteringsalternativ – på tre olika underreden, direkt på toaletten eller i ett badkar. Stolen anpassar sig smidigt till olika hygienmoment och ger stor flexibilitet för både användare och vårdgivare.



Redo för vardagen

Flamingo Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol som kan användas vid toalettbesök, dusch och bad. Med fem monteringsalternativ anpassas den efter användarens behov vid alla typer av hygienrutiner.

Växer med användaren

Flamingo Curo har justerbar ryghöjd, sitsdjup och sitsbredd. Ett brett urval av tillbehör gör det möjligt att anpassa stolen efter barnets utveckling och förändrade behov.



Bekvämt stöd

Dusch- och toalettstolen är utrustad med noggrant utformade PU-inlägg med mjuk kurvatur som ger ett bekvämt och stabilt stöd under användarens hygienrutiner.


Användarvänlig för vårdgivaren

Flamingo Curo är designad med fokus på tillgänglighet och enhandsmanövrering för att göra det enkelt att utföra nödvändiga moment – samtidigt som vårdgivaren kan interagera med användaren.

En sits – Flera möjligheter



Underrede

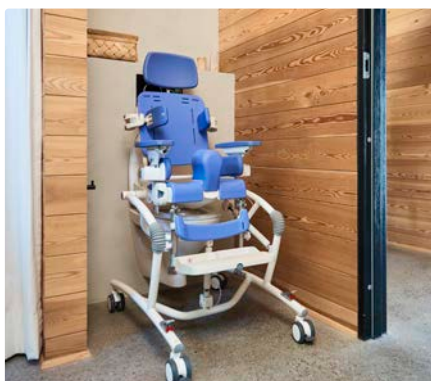

Underrede High-low



Potty frame



I badkaret



På toaletten



Fristående med potta



Produktegenskaper

Flamingo Curo är en mångsidig dusch- och toalettstol som är utformad för att tillgodose en mängd olika behov. Den kan monteras på olika varianter av underreden eller andra monteringsalternativ och kan kompletteras med tillbehör för specifika behov av stöd.

Huvudstöd

Ett brett urval av huvudstöd med formad dyna och olika val av stag, för stöd i olika situationer.

Fasta eller sidosvängbara bålstöd

Ger posturalt stöd för användare med begränsad kontroll över bålen. Bålstöden hjälper till att upprätthålla positionen och ökar komforten. De sidosvängbara bålstöden underlättar förflyttning.

Armstöd

Ger extra posturalt stöd. Armstöden kan enkelt tas bort med hjälp av klicksystemet för att underlätta vid sidoförflyttning.

Lårstöd

Ger posturalt stöd genom att hjälpa till att hålla både höft och lår i rätt position.

Monteringsalternativ

Flamingo Curo har en rad olika monteringsalternativ som gör den lätt att anpassa till olika hygienrutiner.

Stänkskydd


Ger stöd och hjälper till att placera benen i rätt läge samt bidrar till en hygienisk toalettupplevelse.

Vadstöd

Ger stöd för underbenen och förhindrar att fötterna glider bakåt när stolen tiltas.

Fotstöd

Fotstödet kan både höjjusteras och vinklas för fötter och knän, vilket underlättar för en hukande position vid toalettbesök. Det är också enkelt att ta bort med hjälp av snabbkopplingsfunktionen och att fälla upp, vilket underlättar förflyttning i stående.

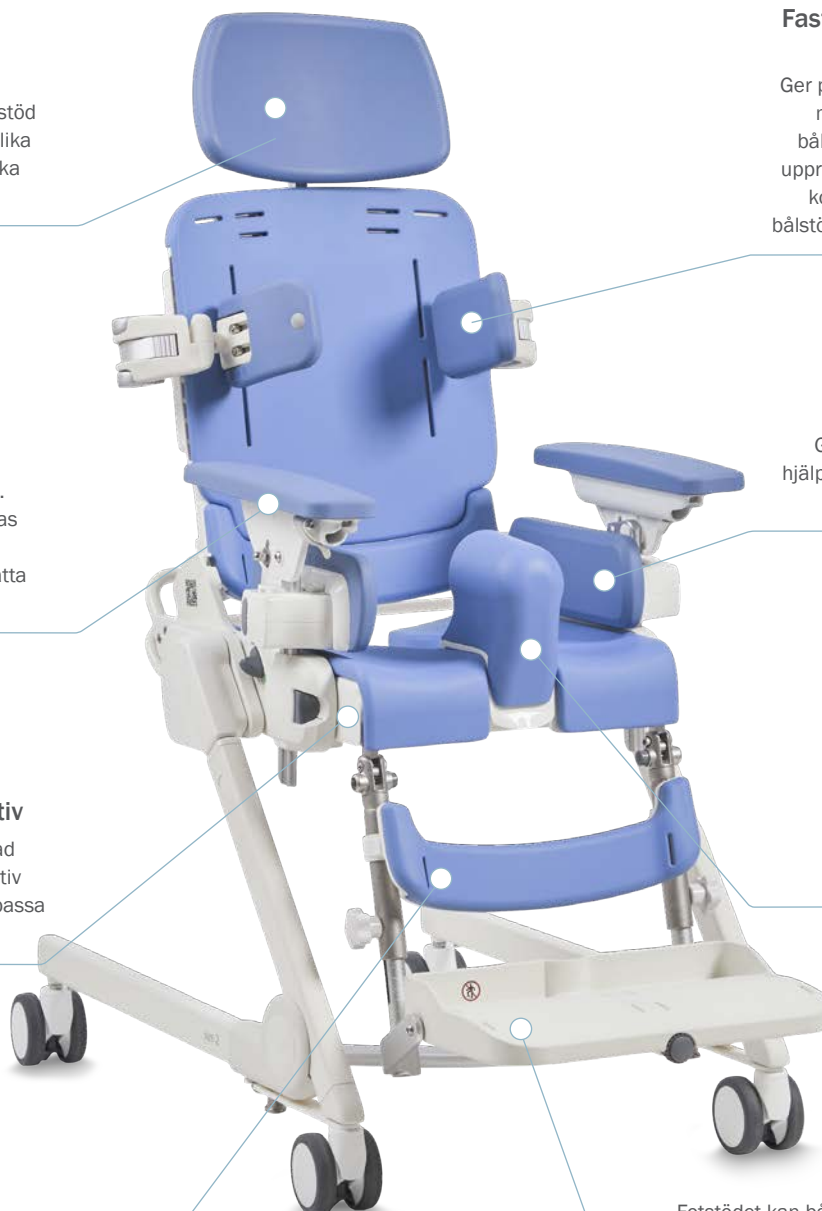

Mått och vikt

Flamingo Curo		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
	Ryggstödsvinkel	-(20°) - (30°)	-(20°) - (30°)	-(20°) - (30°)
	Effektiv ryggstöds höjd från sittdynan	375 - 445 mm	405 - 485 mm	450 - 550 mm
	Effektiv ryggstödsbredd (med bålstöd)	145 - 245 mm	190 - 295 mm	260 - 370 mm
	Effektiv ryggstödsbredd (utan bålstöd)	300 mm	335 mm	390 mm
	Effektivt sitsdjup (med sittdyna)	240 - 300 mm	285 - 345 mm	335 - 425 mm
	Effektiv sitsbredd (utan lårstöd)	265 mm	300 mm	355 mm
	Effektiv sitsbredd (med lårstöd)	185 - 265 mm	220 - 300 mm	275 - 355 mm
	Effektiv sitshöjd från fotstöd	220 - 285 mm	260 - 345 mm	300 - 400 mm
	Max brukarvikt	35 kg	55 kg	70 kg

Flamingo Curo underrede		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
	Sitshöjd över golvet*	480 - 580 mm	480 - 580 mm	480 - 580 mm
	Vinkel sits (tilt)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)	(-10°) - (30°)

* Inkl dyna och med 75 mm hjul

Flamingo Curo underrede High-low		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
	Sitshöjd över golvet*	530 - 740 mm	530 - 740 mm	530 - 740 mm
	Vinkel sits (tilt)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)	(-5°) - (20°)

* Inkl dyna och med 75 mm hjul

Tillbehör



Underrede



Underrede High-low



Mjukdyna rygg



Mjukdyna sits



Huvudstöd



Sidodelar rygg



Bålstöd sidosvängara/fasta



Armstöd



Lårstöd



Stänkskydd



Fotstöd



Bord

För fler tillbehör, se vår hemsida

Stöd för sittande position vid toalettbesök

Toaletterning kan vara en viktig milstolpe i ett barns utveckling och kräver noggrant övervägande av barnets rörlighet. Barn med funktionsnedsättningar är ofta beroende av hjälpmedel och posturalt stöd när de börjar med toaletterning.



Självständighet och livskvalitet

Att delta i dagliga hygienrutiner och utveckla sin personliga hygienförmåga förbättrar självständigheten, självkänslan och livskvaliteten i stort. Det är viktigt att främja självständighet och komfort, se till att barnets värdighet respekteras och att omvårdnaden är så enkel som möjligt.



Förberedelse för toaletterning

Dusch- och toalettstolar kan ha en positiv inverkan på barns delaktighet i egenvård, vilket ger dem möjlighet att aktivt delta i sin dagliga hygienrutin vilket främjar självständighet, självkänsla och allmänt välbefinnande.



Hukande sittställning

Att sitta i hukande position kan underlätta vid förstoppning och tarmtömning. En framåtlutad hållning, upphöjda knän och stöd för överkroppen är viktigt för att förbättra komforten och effektiviteten vid toalettbesök.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities