



R82[®]

R82 Heron

Multifunktionell dusch- och toalettstol

R82 Heron

Heron är multifunktionell dusch- och toalettstol. Den rena och enkla designen har flera funktioner som förbättrar upplevelsen för både användaren och vårdgivaren.

Heron sätter nya standarder för användare med särskilda behov av positionering. Sitsen är ergonomiskt utformad, vilket innebär att den kan tiltas och ryggstödet vinklas utan att det medför några nackdelar för användaren.

Den smarta konstruktionen gör att den anatomiska vridpunkten vid höftens axel bibehålls när ryggstödet vinklas.



Flera funktioner

Heron finns i en storlek och levereras med ett smalt ryggstöd för ökad rörelsefrihet. För ytterligare stöd och komfort kan den utrustas med sidosvängbara bålstöd eller sidodelar med mjukdyna som stödjer axlarna. Vi rekommenderar att alltid använda mjukdyna för rygg och sits för extra komfort.

Heron kan levereras med uppfällbara armstöd förmonterade. Använd armstöden vid dusch- eller

toalettbesök och fäll enkelt undan dem när de inte längre behövs.

Heron finns både som hydraulisk och elektrisk version. Båda har samma funktioner för höjdjustering, tilt-in-space och ryggvinkling. För extra enkelhet och komfort – både för användare och vårdgivare – rekommenderar vi den elektriska versionen.



[1] Heron med hydraulik. [2] Handtag för sitstilt. [3] Handtag för ryggvinkling. [4] Fotpedal för hydraulisk höjdjustering. [5] Heron med hydraulik. [6] + [7] Armstöd, swing-away.

Optimal positionering

Heron är anpassad för tonåringar. Genom att justera rygghöjden och komplettera med tillbehör för sitsbredd och sitdjup kan stolen enkelt anpassas efter användarens behov.

Rygghöjden kan anpassas efter användaren. Den kan justeras upp till 7 cm genom att helt enkelt lossa fyra skruvar, flytta ryggen och sedan återmontera skruvarna. Heron har en total sitsbredd på 55 cm.



Genom att montera höftstöd är det möjligt att ge extra stöd i intervallet 35 till 49 cm, vilket säkerställer en bekväm passform runt användarens höfter och lår.

Det ordinarie sitdjupet på 45 cm kan för vissa användare upplevas som något långt. I dessa fall kan adapter för sitsdjupsreducering användas. Två block placeras bakom ryggen, vilket för den framåt och minskar sitdjupet med 5 cm.



Optimala arbetsförhållanden

En av Herons främsta egenskaper är den hydrauliska eller elektriska höjdstyrningen och tilt-in-space, som gör det möjligt att enkelt ställa in stolen i bästa möjliga position och minska tiden användaren tillbringar i en vriden eller obekväm ställning.


I hem där det är svårt att installera en taklyft eller få plats med en mobil lyft i badrummet, kan användaren enkelt placeras i stolen, köras till badrummet och höjas till en bekväm höjd för dusch. Därefter kan processen göras om

när användaren behöver komma till handfat eller toalett. Detta gör att behovet av förflyttningar i badrummet – eller installation av en lyft – kan undvikas.

Med Heron kan alla dagliga hygien- och toalettaktiviteter utföras i samma hjälpmedel, vilket minimerar antalet förflyttningar.

För förflyttningar i och ur Heron rekommenderar vi Molift-produkter.

Tryckmätning användes vid utformningen av Heron för att minimera trycket och förbättra komforten för användarna, även när sitsen används under längre perioder. Mjukdyna kan monteras för ökad sittkomfort.

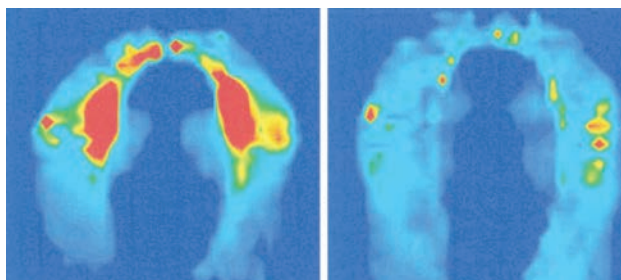

Enkla dagliga justeringar

Höjdjustering



Heron med hydraulik: Sitshöjden över golvet kan justeras från 51 till 78 cm.
Heron med el: Sitshöjden över golvet kan justeras från 56 till 78 cm

Sitstilt – Tilt-in-space



Sitstilt från -5° till 25°

Ryggvinkling



Ryggvinkling från 90° till 120°

Tillbehör

För att öka komfort och funktionalitet finns ett brett sortiment av tillbehör till Heron som uppfyller både användarens och vårdgivarens behov. Genom att ge rätt stöd för överkropp, huvud och armar sitter användaren extra bekvämt i stolen. Alla tillbehör levereras alltid komplett med monteringsanvisningar för enkel installation.

Uppgradera Heron med smarta tillbehör som ger praktiska funktioner och ökad användarvänlighet.



Huvudstöd



Bålstöd sidosvängbara



Bålstöd fasta



Mjukdynor sits/rygg



Sidodelar rygg



Mjukdyna sidodelar rygg



Höftstöd / Distanskit höftstöd




Armstöd / Bord



Stänkskydd



Potta

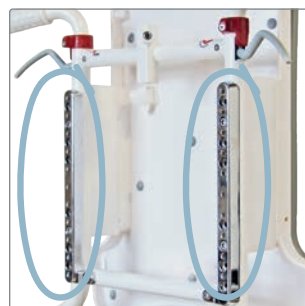

Adapter rygg för
sitsdjupsreducering



Vadband

Tillbehör




Benstöd snäv vinkel



Benstöd vid vinkel



Hälband

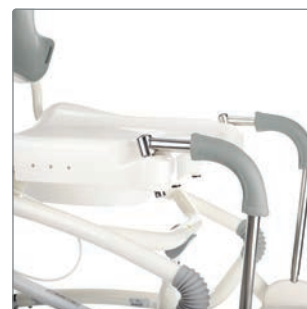


Polstring benstöd

För fler tillbehör – se vår hemsida

Mått och vikt

Heron finns i en storlek och är lämplig för tonåringar. Genom att justera rygghöjden och lägga till tillbehör för sitsbredd och sitsdjup kan stolen enkelt anpassas efter användarens behov.

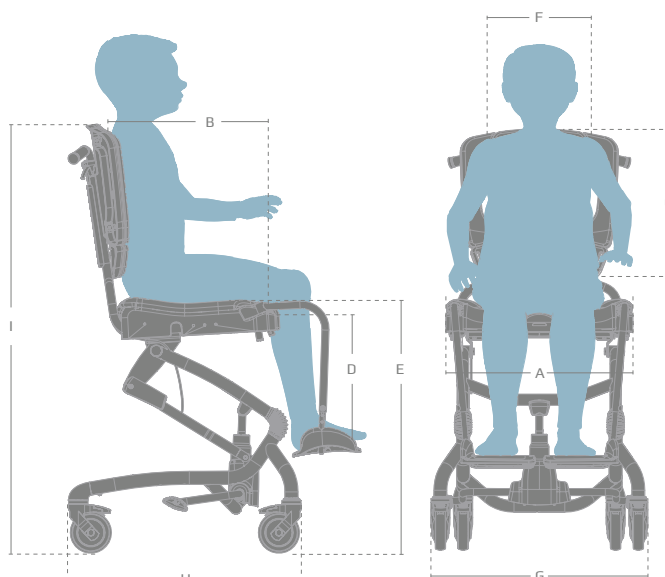

	Heron med hydraulik	Heron med el
Effektiv sitsbredd (A)	550 mm	550 mm
Sitsbredd mellan höftstöd (tillbehör)	350 - 490 mm	350 - 490 mm
Effektivt sitsdjup (B)	450 mm	450 mm
Sitsdjup med adapter rygg för sitsdjupreducering (tillbehör)	400 mm	400 mm
Ryggstödshöjd (C)	555 - 625 mm	555 - 625 mm
Längd underben (D)	400 - 560 mm	400 - 560 mm
Sitshöjd över golvet (E)	510 - 780 mm	560 - 780 mm
Ryggbredd, övre del av ryggstödet (F)	290 mm	290 mm
Totalbredd (G)	670 mm	670 mm
Längd (H)	710 mm	710 mm
Totalhöjd (I)	1080 - 1350 mm	1130 - 1350 mm
Plan sitsvinkel	-5° -> 25°	-5° -> 25°
Ryggstödsvinkel	90° -> 120°	90° -> 120°
Vikt	28 kg	31 kg
Max brukarvikt	100 kg	130 kg



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se

 **etac**®
Creating Possibilities