



R82 Heron

Stilren og topp moderne dusj- og
toalettstol

 **etac**[®]

R82 Heron

Vinner, i NAV-avtale Hygienehjelpemidler, DK 5.

Heron er en topp moderne bade- og toalettstol for barn, unge og voksne. Den enkle designen og det rene utseendet har flere funksjoner som forbedrer både brukerens og omsorgspersonens opplevelse.


Setet er ergonomisk korrekt, som gir god trykkfordeling og sittekomfort. Setet kan tiltes og ryggen kan lenes tilbake på en trygg og behagelig måte for brukeren.

Heron med elektrisk høydejustering er eneste vinner i DK 5.




R82 Heron som standard

- Understell med elektrisk høydejustering
- Polster, sete og rygg
- Hodestøtte nr 2 med turtlestang lang, rustfri
- Skulderstøtte
- Polstring til skulderstøtte
- Brystbelte
- Hoftebelte neopren, str. 3
- Urinskjerm, høy (kan enkelt fjernes)
- Fotbrett åpen knevinkel, høyde 36-53 cm
- Hælkappe

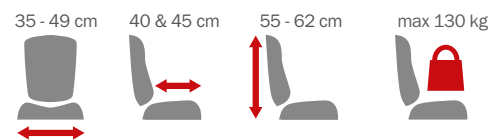

Mål og artikkelnummer

Heron er tilgjengelig i én størrelse og passer for både barn, unge og voksne. For å gjøre stolen større kan ryggghøyden endres, og tilbehør legges til. Da øker både setebredde og setedybde, og Heron kan benyttes enda lenger.

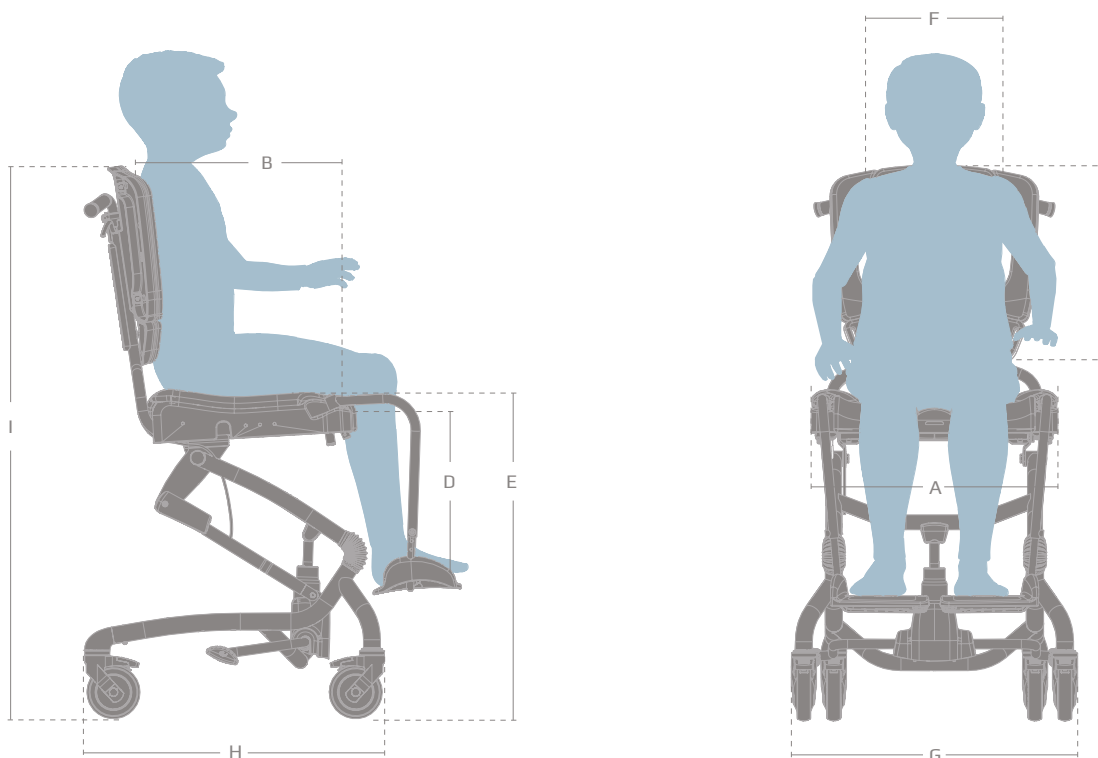


Heron elektrisk	
Artikkelnummer	32880505-11ELK
HMS nummer	297340
Effektiv setebredde (A)	550 mm
Setebredde mellom hoftestøtter	350 - 490 mm
Effektiv setedybde (B)	450 mm
Setedybde med reduksjonskit	400 mm
Ryggghøyde (C)	555 - 625 mm
Legghøyde (D)	400 - 560 mm
Setehøyde, front (E)	560 - 780 mm
Ryggghøyde, topp av ryggstøtte (F)	290 mm
Total bredde (G)	670 mm
Lengde (H)	710 mm
Total høyde (I)	1130 - 1350 mm
Setevinkel	-5° -> 25°
Ryggvinkel	90° -> 120°
Produktvekt	31 kg
Maks brukervekt	130 kg


Passer Heron til meg?

Ta disse målene for å sjekke om Heron passer ditt behov


Bruk disse enkle måleparameterne for å finne ut om Heron er riktig dusj- og toalettstol for brukeren. For å måle nøyaktig, sørg for at brukeren sitter eller ligger på en flat overflate med hofter, knær og ankler i en vinkel på 90°.

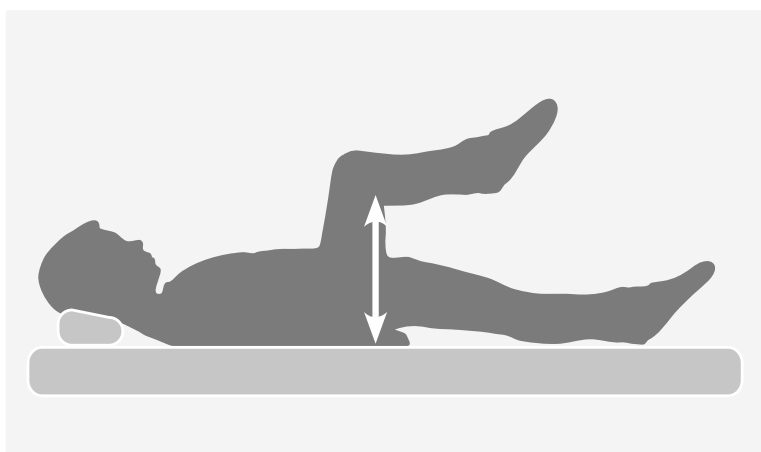

Setedybde

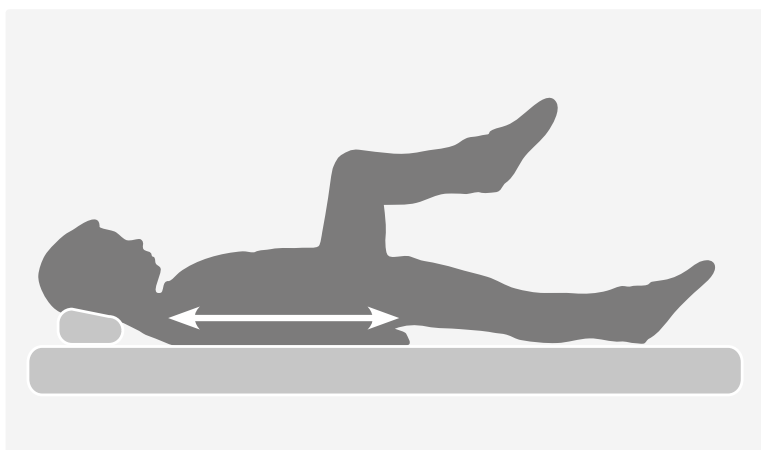

Rygghøyde

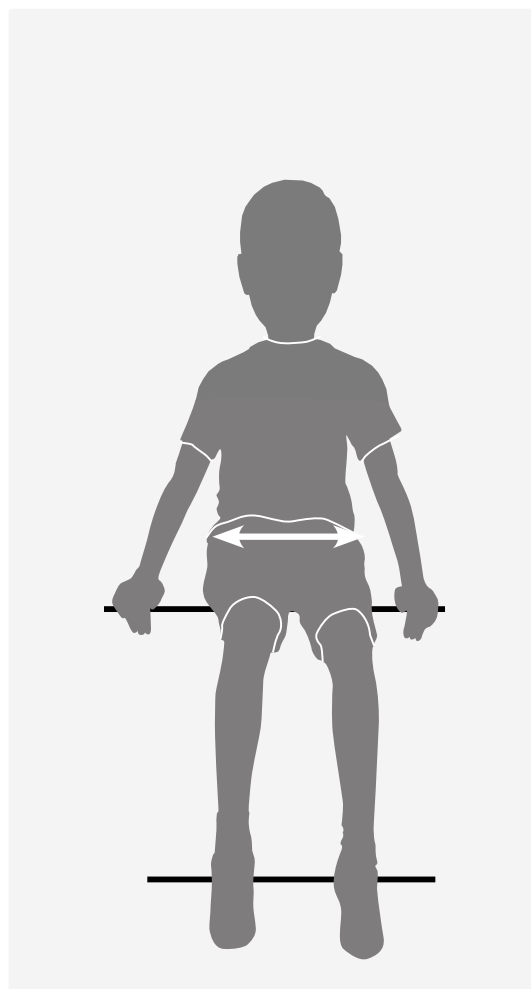

Hoftebredde

Heron elektrisk - detaljer



[1] Lader, vegghegt [2] Håndtak for justering av rygg [3] Fjernkontroll for justering av høyde og seteinkel [4] Heron med swing-away armlen, elektrisk versjon [5] Kablene har praktisk nummermerking [6] Heron, elektrisk versjon [7] Batteri montert på understell

Justeringsmuligheter

Høydejustering



Setehøyden kan justeres fra 56 til 78 cm

Tilt-in-space



Setet kan tiltes fra -5° to 25°

Ryggtilt



Ryggen kan tiltes fra 90° to 120°

Tilbehør - utvalg



Hodestøtter



Sidestøtter, swing-away



Sidestøtter, faste



PU innlegg/ skulderstøtte



Hoftestøtter




Armstøtter/ bord



Urinskjerm



Bekken / lokk til bekken

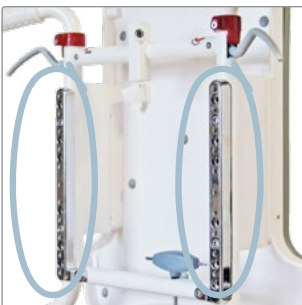

Reduksjonskit setedybde



Leggstøtte




Fotstøtte



Fotstøtte, åpen knevinkel



Hælstoppere

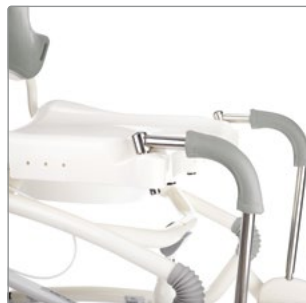

Padding fotstøtter


Gode arbeidsforhold

En av de flotte egenskapene til Heron er høydejusteringen og tilt-in-space-funksjonen som tillater justering av uten å havne i en fysisk utfordrende posisjon.

I hus hvor det er vanskelig å montere en takskinne eller seil på badet, kan brukeren plasseres i stolen, flyttes til baderomsområdet og bringe den opp til en passende høyde for dusj og bad. Med Heron gjøres alle daglige baderomsaktiviteter med samme utstyr, noe som minimerer mengden forflytninger som trengs.


For å forflytte brukere inn og ut av Heron anbefaler vi Molift-produkter.

Les mer om Molift takheis og seil på våre nettsider.

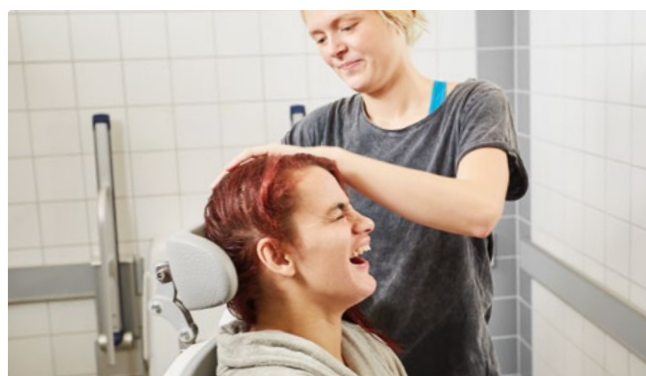

Vask og rengjøring

Kontrollboksen, batteriet og fjernkontrollen er vanntette og kan brukes i alle bade- og dusjsituasjoner. Fjern alt tilbehør, trekk ut alle kabler og sørg for å demontere kontrollboksen, batteriet og fjernkontrollen før maskinvask.

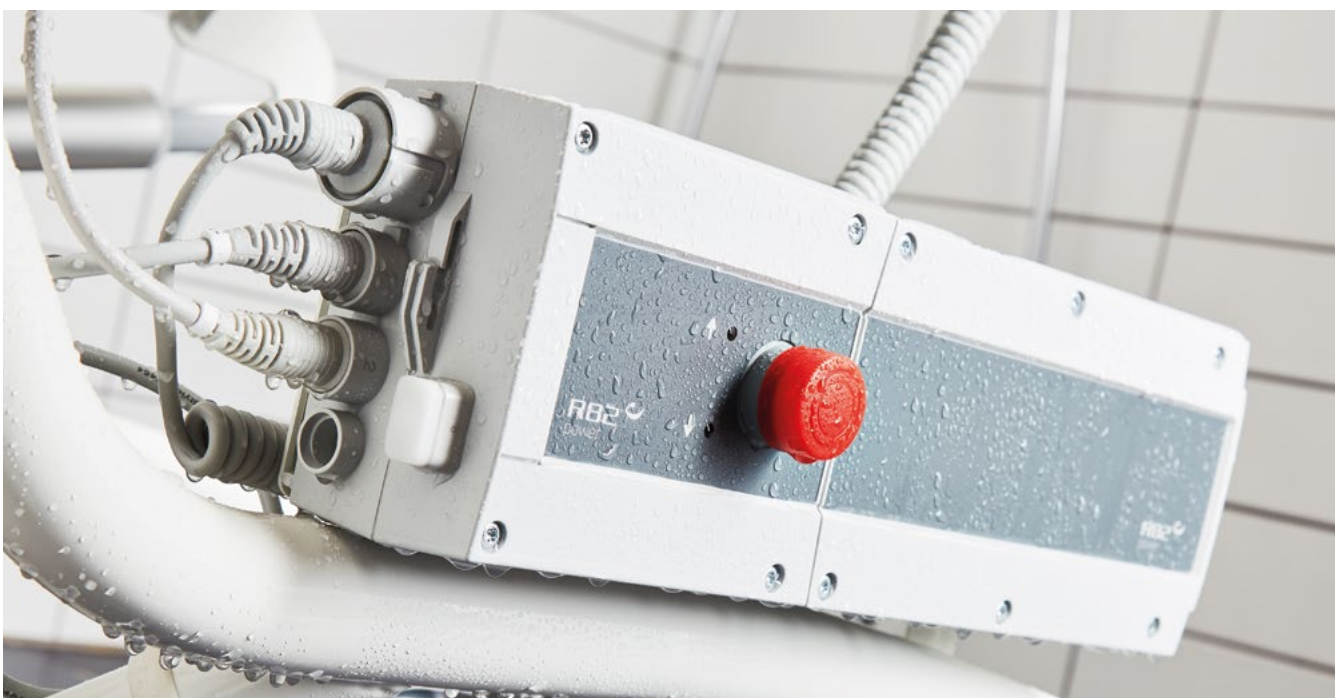

Kan vaskes på 85 °C i
vaskemaskiner beregnet
til medisinsk utstyr*



*Kontrollboks, batteri og fjernkontroll må tas bort før maskinvask.



Med forbehold om trykfeil. Oppdatert 06.2022. © R&A/S All rights reserved. S.

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no