



immedia

Immedia LeanOnMe

Avlastande och stödjande positioneringskilar, trianglar och kuddar

Immedia LeanOnMe



LeanOnMe är en familj av mjuka, formbara kuddar samt fasta och stabila kilar och trianglar. LeanOnMe kan användas individuellt eller i kombination. De ger personen stöd i sittande eller liggande ställning och kan även underlätta vårdpersonalens arbete under vårdrutinerna.

Två olika fyllningsmaterial

Bön/skum-mix



Kudde

LeanOnMe-kuddarna är fyllda med en välbalanserad blandning av granulerat viskoelastiskt polyuretanskum från madrassstillverkning och EPP-bönor (expanderad polypropylen). EPP-bönorna är fasta, tysta, vattenresistenta och 100 % återvinningsbara.

Fyllningen gör att kroppsdelarna sjunker ner i det mjuka materialet och kan formas efter individuella behov. Materialets elasticitet och repeterbarhet bidrar till en jämn tryckfördelning och bärighet, även under hög belastning. Båda materialen återgår till sin ursprungliga form, vilket är idealiskt för mjuk positionering.

Alla material är utformade för att minimera buller, vilket gör positioneringskuddarna optimala för användare med känslig hörsel.

Skum



Wedge, Triangles

PU-skummet i LeanOnMe Wedges och Triangles är ett flexibelt material med öppna celler som är utformat för maximal komfort, stöd och hållbarhet.

Dess utmärkta luftflöde bidrar till att hålla patienten sval och bekväm, samtidigt som dess förmåga att fördela vikten effektivt bidrar till att minska trycket. Detta gör det till ett idealiskt val för både stöd- och komfortinriktade användningsområden.

Tre olika ytskikt

Soft-Touch



Kudde, Wedge, Triangles

Alla LeanOnMe-produkter har en unik mjuk och hudvänlig yta som är tillverkad av hållbara och naturliga organiska material. Soft-Touch-textilen är ett quiltat tyg som gör ytan mycket behaglig och mjuk, vilket gör att kroppsdelarna sjunker ner i den.

Soft-Touch-överdraget på LeanOnMe Wedges och LeanOnMe Triangles har ett halkfritt polyuretanmaterial på undersidan som hjälper till att hålla dem på plats oberoende av underlagsmaterial.

Hygien



Kudde

LeanOnMe- kuddarna har en unikt mjuk och hudvänlig yta som är vattentät och kan torkas av. Den är mycket behaglig och mjuk, vilket gör att extremiteterna sjunker ner i den.

Non-Slip



Wedge, Triangles

Den halkfria ytan är ett unikt halkfritt ekomaterial med en hudliknande yta och ett överdrag som hjälper till att hålla LeanOnMe Wedges och Triangles på plats, oberoende av underlagsmaterial.

Ytterligare fördelar inkluderar:

- Luftcirkulation
- Temperaturregulering
- Barriär mot dammkvalster, bakterier, svamp och vägglöss
- Tyst material som ger ett minimum av ljudstimuli

Ytterligare fördelar inkluderar:

- Antibakteriell

Ytterligare fördelar är bland annat:

- STANDARD 100 by OEKO-TEX® certifierad
- Vattentät och med bra andningsförmåga
- Mjuk och bi-elastisk, även efter många tvättar

LeanOnMe-produkterna produceras miljövänligt med hänsyn till dess miljöpåverkan och med fokus på att minska avfall och dess effekter på miljön. Detta uppnås genom att använda miljövänliga material som är tillverkade av organiska material och restmaterial från tidigare produktion, samt både återvunna och återvinningsbara förpackningar.



Material

LeanOnMe positioneringskuddar

Innerkudde: 95% Polyester 5% Elastan

Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP-böror (Expanded Polypropylene).

Soft-Touch-och Hygien överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). Fyllning av 100 % polyester och membran av polyuretan

LeanOnMe Wedges och Triangles

Fyllning: PU-komfortskum

Antihalk material: 100% polyester med 100% polyuretan

Soft-touch-överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™).

Fyllning av 100 % polyester och membran av polyuretan

Tvättanvisningar



Maskintvätt – max. temperatur 80 °C. Torktumling – låg temperatur; max. 60 °C. Använd ej blekmedel. Använd ej sköljmedel. Stryk inte. Ta bort överdraget från innerkudden före tvätt.

Immedia LeanOnMe Wedge

Kilarna ger ett bekvämt stöd för vila och personlig hygien. De ger ett fast och stabilt stöd och levereras med två olika överdrag: ett med hög friktion för att hålla dem på plats och ett med en mjuk, hudvänlig yta tillverkad av hållbara material, vilket gör LeanOnMe Wedges skonsamma för användare med känslig hud.

Kilarna är idealiska för personer som behöver stöd vid positionering. Positionering med LeanOnMe Wedges avlastar känsliga kroppsdelar, t.ex. de som riskerar att få trycksår. För användare med nedsatt rörlighet eller åldrande hud kan kilarna öka komforten och minska trycket, vilket ger viktig stabilitet under positionering eller hygienrutiner.

LeanOnMe Wedges kan också hjälpa till att skapa en bekväm och trygg vårdmiljö, vilket ökar komforten under vila och vådrutiner.



Positioneringsalternativ



LeanOnMe Wedges kan användas i kombination med två eller flera kilor för att ge stöd där det behövs eller som hjälpmedel för att resa sig upp från sängen till stående ställning.



LeanOnMe Wedges erbjuder många olika alternativ för att stödja patienten i olika viloställningar. Förutom att stödja ryggen kan kilarna också användas för att stödja benen i rygggläge.



LeanOnMe Wedges har två vinklar och kan ge en stabil position när patientens rygg lutar mot kilen eller vid personlig hygien, eller i kombination med en LeanOnMe Triangle.

Produktnamn	Storlek	Art.nr
LeanOnMe Wedge XS + Soft-Touch Cover	B300 x L265 x H200 mm	IM53XSST
LeanOnMe Wedge XS + Non-Slip Cover	B300 x L265 x H200 mm	IM53XSNS
LeanOnMe Wedge S + Soft-Touch Cover	B300 x L530 x H200 mm	IM53SST
LeanOnMe Wedge S + Non-Slip Cover	B300 x L530 x H200 mm	IM53SNS
LeanOnMe Wedge L + Soft-Touch Cover	B300 x L800 x H200 mm	IM5380LST
LeanOnMe Wedge L + Non-Slip Cover	B300 x L800 x H200 mm	IM5380LNS
Non-Slip Cover till IM5380LNS	B300 x L800 x H200 mm	IM530080LNS
Non-Slip Cover till IM53SNS	B300 x L530 x H200 mm	IM5300SNS
Non-Slip Cover till IM53XSNS	B300 x L265 x H200 mm	IM5300XSNS
Soft-Touch Cover till IM5380LST	B300 x L800 x H200 mm	IM530080LST
Soft-Touch Cover till IM53SST	B300 x L530 x H200 mm	IM5300SST
Soft-Touch Cover till IM53XSST	B300 x L265 x H200 mm	IM5300XSST

Immedia LeanOnMe Triangle

Trianglarna är mångsidiga positioneringshjälpmedel som är utformade för att fylla hålrum mellan kroppen och madrassen, vilket ger riktat stöd som främjar avslappning och stabilitet. Trianglarna är idealiska för att fylla hålrum under magen, höfterna eller under en kudde för extra huvudstöd. På så sätt bidrar de till att förbättra anpassningen och stödet, vilket kan öka komforten och lugnet i hela kroppen.

Trianglarna hjälper till att skapa en lugnande, stödjande miljö som kan främja vilsam sömn, lindra tryck på utsatta områden och främja komfort och lugn under vila och vårdaktiviteter. Detta gör LeanOnMe Triangles till ett viktigt hjälpmedel för både patienter och vårdgivare.

LeanOnMe Triangle XS är ett professionellt alternativ till traditionella stöd och kan fylla olika hålrum. LeanOnMe Triangle S är perfekt för stöd i sidoläge, vilket gör personlig vård mer tillgänglig och bekväm. Den kan också ge ett stabilt stöd under knäna eller fötterna.



Positioneringsalternativ



Ett multifunktionellt stöd LeanOnMe Triangle XS som placeras där det uppstår mindre hålrum mellan kropp och madrass när en person är positionerad; vanligtvis vid magen, höfterna eller under kudden.



LeanOnMe Triangles är idealiska för att ge ett bekvämt och stabilt sidoläge, vilket underlättar för vårdgivaren vid t.ex. vårdrutiner, påklädning i sängen och sårvård runt länderggen eller bäckenet.



Att positionera patienten med ett bra stöd kan bidra till avslappning och sömn.

Produktnamn	Storlek	Art.nr
LeanOnMe Triangle XS + Soft-Touch Cover	B200 x L250 x H100 mm	IM54XSST
LeanOnMe Triangle XS + Non-Slip Cover	B200 x L250 x H100 mm	IM54XSNS
LeanOnMe Triangle S + Soft-Touch Cover	B250 x L400 x H150 mm	IM54SST
LeanOnMe Triangle S + Non-Slip Cover	B250 x L400 x H150 mm	IM54SNS
Soft-Touch Cover till IM54XSST	B200 x L250 x H100 mm	IM5400XSST
Non-Slip Cover till IM54XSNS	B200 x L250 x H100 mm	IM5400XSNS
Soft-Touch Cover till IM54SST	B250 x L400 x H150 mm	IM5400SST
Non-Slip Cover till IM54SNS	B250 x L400 x H150 mm	IM5400SNS

Immedia LeanOnMe Roll

Rullen kan böjas, formas och skakas så att den blir fylligare på vissa ställen och tunnare på andra. Detta gör att den kan anpassas efter patientens specifika behov.

När patienten ligger i sidoläge kan LeanOnMe Roll med fördel formas så att den ger stöd åt både huvud, rygg och ben. Den kan vara väl lämpad för patienter som har nytta av taktil stimulering.



Positioneringsalternativ



När LeanOnMe Roll används som ett "näste" kan den ha en tryck- och smärtlindrande effekt på axlarna och lyfta armar och händer. Detta kan bidra till en lättare andning.



När LeanOnMe Roll kramas i sidoläge kan den ge en lugnande effekt och stödja patienten i en bekväm position.



När LeanOnMe Roll hålls in mot magen kan den fungera lugnande och stabiliserande samt avlasta armar och axlar.

Produktnamn

Storlek

Art.nr

LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover

B330 x L1000 mm

IM15112

LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover

B330 x L2300 mm

IM15113

LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover

B330 x L1000 mm

IM16112

LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover

B330 x L2300 mm

IM16113

Soft-Touch Cover till IM15112

B330 x L1000 mm

IM10512

Soft-Touch Cover till IM15113

B330 x L2300 mm

IM10513

Hygienic Cover till IM16112

B330 x L1000 mm

IM10612

Hygienic Cover till IM16113

B330 x L2300 mm

IM10613

Immedia LeanOnMe Channel

Den kanalsydd kudden är en flexibel kudde som ger stöd och avlastning. Kudden kan rullas och formas efter behov.

LeanOnMe Channel kudde kan placeras under benet/benen, mellan benen, under vaderna för att minimera trycket på hälsarna, eller under en arm för att avlasta skulderblad och/eller armbågar. I sidoläge kan kudden placeras under patientens rygg eller mellan patientens ben för att hjälpa till att fördela tryck och avlasta utsatta områden. Vid sittande kan kudden placeras i ryggen som stöd.



Positioneringsalternativ



När en LeanOnMe Channel placeras under båda benen kan den avlasta benen. Den kan också fungera smärt- och trycklindrande.



LeanOnMe Channel kan användas för att höja benen eller för tryckavlastning på fotleden och/eller hälen.



I sidoläge kan en LeanOnMe Channel-kudde placeras mellan benen för att avlasta utsatta områden, t.ex. insidan av knän och vrist, från tryck.

Produktnamn

LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover

LeanOnMe Channel + Hygienic Cover

Soft-Touch Cover till IM15108

Hygienic Cover till IM16108

Storlek

B750 x L750 mm

B750 x L750 mm

B750 x L750 mm

B750 x L750 mm

Art.nr

IM15108

IM16108

IM10508

IM10608

Immedia LeanOnMe Wing

Ryggstödsudden med vinge används i sidoläge. Patienten ligger på vingen så att patientens vikt håller kudden på plats. Då får patienten ett bekvämt stöd för ryggen i ett stabilt läge

LeanOnMe Wing kudden kan också användas för rygggläge. Kudden kan placeras så att den hjälper till att minimera trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrindarna.



Positioneringsalternativ



När kudden placeras i ryggen i sidoläge med vingen under patienten, hålls den på plats och förhindrar att patienten tippar bakåt.



LeanOnMe Wing-kudden kan förhindra att utsatta kroppsdelar utsätts för tryck från sänggrindar.



Placerad under en arm i rygggläge kan LeanOnMe Wing fungera tryck-, lyft- och smärtlindrande.

Produktnamn

LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover
LeanOnMe Wing + Hygienic Cover
Soft-Touch Cover till IM15107
Hygienic Cover till IM16107

Storlek

B450 x L800 mm + wing 200 mm
B450 x L800 mm + wing 200 mm
B450 x L800 mm + wing 200 mm
B450 x L800 mm + wing 200 mm

Art.nr

IM15107
IM16107
IM10507
IM10607

Immedia LeanOnMe Mini

En liten, mångsidig stödkudde som placeras där det uppstår mindre hålrum mellan kropp och madrass när en patient positioneras, t.ex. under nedre delen av ryggen, vid fotleden och knät.

Att applicera en LeanOnMe Mini kan ha en avslappnande effekt på den aktuella kroppsdel. Den kan också användas för att öppna en hand som drabbats av spasticitet.



Positioneringsalternativ



En LeanOnMe Mini placeras under nedre delen av ryggen för att avlasta bäckenet.



Använd en LeanOnMe Mini för att höja upp och öppna handen.



LeanOnMe Mini kan placeras där det finns mindre hålrum.

Produktnamn

LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover
LeanOnMe Mini + Hygienic Cover
Soft-Touch Cover till IM15100
Hygienic Cover till IM16100

Storlek

B150 x L300 mm
B150 x L300 mm
B150 x L300 mm
B150 x L300 mm

Art.nr

IM15100
IM16100
IM10500
IM10600

Immedia LeanOnMe Basic

Traditionella positioneringskuddar i sex former och storlekar. Kuddarna kan användas vid positionering för att stödja rygg, armar, ben, knän och vrister.

LeanOnMe Basic positioneringskuddar kan också användas för att minska trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrindar.



Positioneringsalternativ



LeanOnMe Basic- kuddar kan användas i rygggläge för att stödja kroppen eller extremiteterna.



En LeanOnMe Basic-kudde kan hållas mot magen för en smärtlindrande och/eller lugnande effekt.



Höjning av arm och hand för att minimera risken för kontrakturer, ödem och tryck.

Produktnamn	Storlek	Art.nr
LeanOnMe Basic XS +Soft-Touch Cover	B300 x L400 mm	IM15101
LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover	B400 x L600 mm	IM15102
LeanOnMe Basic M + Soft-Touch Cover	B500 x L700 mm	IM15103
LeanOnMe Basic L + Soft-Touch Cover	B250 x L800 mm	IM15104
LeanOnMe Basic LW + Soft-Touch Cover	B450 x L800 mm	IM15105
LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover	B550 x L900 mm	IM15106
LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover	B300 x L400 mm	IM16101
LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover	B400 x L600 mm	IM16102
LeanOnMe Basic M + Hygienic Cover	B500 x L700 mm	IM16103
LeanOnMe Basic L + Hygienic Cover	B250 x L800 mm	IM16104
LeanOnMe Basic LW + Hygienic Cover	B450 x L800 mm	IM16105
LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover	B550 x L900 mm	IM16106
Soft-Touch Cover till IM15101	B300 x L400 mm	IM10501
Soft-Touch Cover till IM15102	B400 x L600 mm	IM10502
Soft-Touch Cover till IM15103	B500 x L700 mm	IM10503
Soft-Touch Cover till IM15104	B250 x L800 mm	IM10504
Soft-Touch Cover till IM15105	B450 x L800 mm	IM10505
Soft-Touch Cover till IM15106	B550 x L900 mm	IM10506
Hygienic Cover till IM16101	B300 x L400 mm	IM10601
Hygienic Cover till IM16102	B400 x L600 mm	IM10602
Hygienic Cover till IM16103	B500 x L700 mm	IM10603
Hygienic Cover till IM16104	B250 x L800 mm	IM10604
Hygienic Cover till IM16105	B450 x L800 mm	IM10605
Hygienic Cover till IM16106	B550 x L900 mm	IM10606

Immedia LeanOnMe Ring

Ringkudden används för att ge ett stabilt och avlastande stöd när en vanlig kudde inte anses lämplig.

Den lämpar sig väl för patienter som riskerar att utveckla trycksår på bakhuvudet. Den kan också användas vid halvsittande i säng eller fåtölj för att ge bra huvudstöd åt patienter med dålig huvudkontroll.

LeanOnMe Ring kan enkelt tas med på resor för att lindra ömma nackmuskler och ryggkotor.



Positioneringsalternativ



För tryckavlastning av öronen och/eller smärtlindring av nackmuskler när du ligger i sidoläge.



För tryckavlastning på baksidan av huvudet och/eller för huvudkontroll i liggande position.



Använd LeanOnMe Ring för att stödja huvudet i en sittande position.

Produktnamn

Storlek

Art.nr

LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover

Ø400 mm

IM15110

LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover

Ø500 mm

IM15111

LeanOnMe Ring S+ Hygienic Cover

Ø400 mm

IM16110

LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover

Ø500 mm

IM16111

Soft-Touch Cover till IM15110

Ø400 mm

IM10510

Soft-Touch Cover till IM15111

Ø500 mm

IM10511

Hygienic Cover till IM16110

Ø400 mm

IM10610

Hygienic Cover till IM16111

Ø500 mm

IM10611



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB



0371-58 73 00



info@etac.se



www.etac.se


Creating Possibilities