



immedia

Immedia LeanOnMe

Avlastande och stödjande positioneringskilar, trianglar och kuddar

Immedia LeanOnMe



LeanOnMe är en familj av mjuka, formbara kuddar samt fasta och stabila kilar och trianglar. LeanOnMe kan användas individuellt eller i kombination. De ger personen stöd i sittande eller liggande ställning och kan även underlätta vårdpersonalens arbete under vårdrutinerna.

Två olika fyllningsmaterial

Bön/skum-mix

Fyllning för kuddar



LeanOnMe-kuddarna är fyllda med en välbalanserad blandning av granulerat viskoelastiskt polyuretanskum från madrassstillverkning och EPP-böns (expanderad polypropylen). Fyllningen gör att kroppsdelarna sjunker ner i det mjuka materialet och kan formas efter individuella behov. Materialets elasticitet och repeterbarhet bidrar till en jämn tryckfördelning och bärighet, även under hög belastning. Båda materialen återgår till sin ursprungliga form, vilket är idealiskt för mjuk positionering. EPP-bönsorna är fasta, tysta, vattenresistenta och 100 % återvinningsbara.

Egenskaper:

- Mjukt och formbart stöd för individuell positionering
- Elasticitet som ger jämn tryckfördelning
- Tysta material för användare med känslig hörsel
- Hållbar och långvarig prestanda

Skum

Fyllning för Wedge och Triangle



PU-skummet i LeanOnMe Wedge och Triangle är ett flexibelt material med öppna celler som är utformat för maximal komfort, stöd och hållbarhet. Dess utmärkta luftflöde bidrar till att hålla användaren sval och bekväm, samtidigt som dess förmåga att fördela vikten effektivt bidrar till att minska trycket. Detta gör det till ett idealiskt val för både stöd- och komfortinriktade användningsområden.

Egenskaper:


- Fast och stabilt stöd vid positionering
- Luftflöde för temperaturreglering
- Effektiv tryckfördelning för avlastning
- Hållbart material för långvarig användning

Överdrag

LeanOnMe-överdragen finns i tre varianter – Soft-Touch, Hygien och Non-Slip, som är utformade för att ge komfort, hygien och stabilitet. Alla är STANDARD 100 by OEKO-TEX®-certifierade, vattentäta med bra andningsförmåga, och de behåller sin mjukhet och bi-elasticitet även efter upprepade tvättar.

Soft-Touch

Kudde, Wedge och Triangle

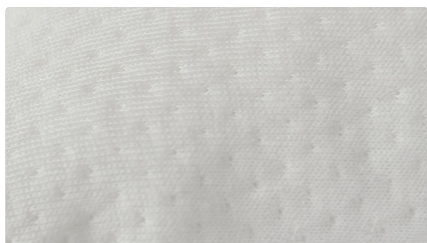

Soft-Touch har en quiltad, hudvänlig yta som känns behaglig och mjuk, vilket gör att armar och ben kan sjunka ned på ett komfortabelt sätt. Kilar och Trianglar har även en halkfri undersida i polyuretan som hjälper till att hålla dem på plats.

Egenskaper:

- Luftcirkulation
- Temperaturreglering
- Barriär mot dammkvalster, bakterier, svamp och vägglöss
- Tyst material som ger ett minimum av ljudstimuli

Hygien

Kudde




Hygienöverdraget har en mjuk och hudvänlig yta som är vattentät och kan torkas av. Den är behaglig och mjuk, vilket gör att extremiteterna sjunker ner i den på ett komfortabelt sätt.

Egenskaper:

- Luftcirkulation
- Temperaturreglering
- Barriär mot dammkvalster, bakterier, svamp och vägglöss
- Tyst material som ger ett minimum av ljudstimuli

Non-Slip

Wedge och Triangle

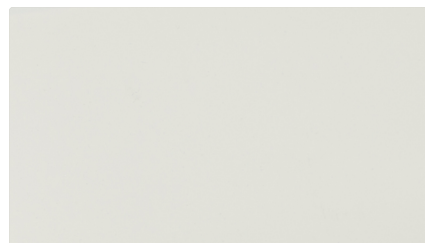

Den halkfria ytan är ett unikt halkfritt ekomaterial med en hudliknande yta och ett överdrag som hjälper till att hålla LeanOnMe Wedge och Triangle på plats, oberoende av underlagsmaterial.

Egenskaper:

- Antibakteriell

Material

LeanOnMe-produkterna tillverkas av högkvalitativa material, däribland lyocell (Tencel™) och Modal i kombination med polyuretanmembran för ökad hållbarhet och hygien. Förpackningarna består av återvunnet och återvinningsbart material.

LeanOnMe kuddar

Innekudde: 95% polyester, 5% elastan

Fyllning: granulerat överblivet polyuretanskum, EPP (Expanded Polypropylene) bönor.

Soft-Touch/Hygien-överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™). Fyllning av 100 % polyester och membran av polyuretan

LeanOnMe Wedge and Triangle

Fyllning: PU-komfortskum

Non-Slip material: 100% polyester med 100% polyuretan

Soft-Touch-överdrag: 75% Lyocell (Tencel™ + Smartcel™ sensitive), 25% Modal (Tencel™).

Fyllning av 100 % polyester och membran av polyuretan

Tvättanvisningar



Maskintvätt – max. temperatur 80 °C. Torktumling – låg temperatur; max. 60 °C. Kan torkas av med ett rengöringsmedel med pH-nivå mellan 5-9 eller med en 70 % desinfektionslösning, samt med kommersiella och/eller hushållsbaserade rengöringsmedel. Ta bort överdraget från innerkudden/skummet före tvätt.

Immedia LeanOnMe Wedge

Kilarna ger ett bekvämt stöd för vila och personlig hygien. De ger ett fast och stabilt stöd och levereras med två olika överdrag: ett med hög friktion för att hålla dem på plats och ett med en mjuk, hudvänlig yta tillverkad av hållbara material, vilket gör LeanOnMe Wedge skonsam för användare med känslig hud.

Kilarna är idealiska för personer som behöver stöd vid positionering. Positionering med LeanOnMe Wedge avlastar känsliga kroppsdelar, t.ex. de som riskerar att få trycksår. För användare med nedsatt rörlighet, kan kilarna öka komforten och minska trycket, vilket ger viktig stabilitet under positionering eller hygienrutiner.

LeanOnMe Wedge kan också hjälpa till att skapa en bekväm och trygg vårdmiljö, vilket ökar komforten under vila och vådrutiner.



Positioneringsalternativ



LeanOnMe Wedge kan användas i kombination med två eller flera kilar för att ge stöd där det behövs eller som hjälpmedel för att resa sig upp från sängen till stående ställning.



LeanOnMe Wedges erbjuder många olika alternativ för att stödja användaren i olika viloställningar. Förutom att stödja ryggen kan kilarna också användas för att stödja benen i ryggsläge.



LeanOnMe Wedge har två vinklar och kan ge en stabil position när användarens rygg lutar mot kilen eller vid personlig hygien, eller i kombination med en LeanOnMe Triangle.

Produktnamn	Storlek	Art. nr.
LeanOnMe Wedge XS + Soft-Touch Cover	W300xL265xH200 mm	IM53XSST
LeanOnMe Wedge XS + Non-Slip Cover	W300xL265xH200 mm	IM53XSNS
LeanOnMe Wedge S + Soft-Touch Cover	W300xL530xH200 mm	IM53SST
LeanOnMe Wedge S + Non-Slip Cover	W300xL530xH200 mm	IM53SNS
LeanOnMe Wedge L + Soft-Touch Cover	W300xL800xH200 mm	IM5380LST
LeanOnMe Wedge L + Non-Slip Cover	W300xL800xH200 mm	IM5380LNS
Non-Slip Cover till IM5380LNS	W300xL800xH200 mm	IM530080LNS
Non-Slip Cover till IM53SNS	W300xL530xH200 mm	IM5300SNS
Non-Slip Cover till IM53XSNS	W300xL265xH200 mm	IM5300XSNS
Soft-Touch Cover till IM5380LST	W300xL800xH200 mm	IM530080LST
Soft-Touch Cover till IM53SST	W300xL530xH200 mm	IM5300SST
Soft-Touch Cover till IM53XSST	W300xL265xH200 mm	IM5300XSST

Immedia LeanOnMe Triangle

Triangle är ett mångsidigt positioneringshjälpmedel som är utformat för att fylla hålrum mellan kroppen och madrassen, vilket ger riktat stöd som främjar avslappning och stabilitet. Triangle är idealisk för att fylla hålrum under magen, höfterna eller under en kudde för extra huvudstöd. På så sätt bidrar de till att förbättra anpassningen och stödet, vilket kan öka komforten och lugnet i hela kroppen.

Triangle hjälper till att skapa en lugnande, stödjande miljö som kan främja vilsam sömn, lindra tryck på utsatta områden och främja komfort och lugn under vila och vårdaktiviteter. Detta gör LeanOnMe Triangle till ett viktigt hjälpmedel för både användare och vårdgivare.

LeanOnMe Triangle XS är ett professionellt alternativ till traditionella stöd och kan fylla olika hålrum. LeanOnMe Triangle S är perfekt för stöd i sidoläge, vilket gör personlig vård mer tillgänglig och bekväm. Den kan också ge ett stabilt stöd under knäna eller fötterna.



Positioneringsalternativ



Ett multifunktionellt stöd LeanOnMe Triangle XS som placeras där det uppstår mindre hålrum mellan kropp och madrass när en person är positionerad; vanligtvis vid magen, höfterna eller under kudden.



Att positionera användare med ett bra stöd kan bidra till avslappning och sömn.



LeanOnMe Triangle är idealiska för att ge ett bekvämt och stabilt sidoläge, vilket underlättar för vårdgivaren vid t.ex. vårdrutiner, påklädning i sängen och sårsvård runt ländergen eller bäckenet.

Produktnamn	Storlek	Art. nr.
LeanOnMe Triangle XS + Soft-Touch Cover	W200xL250xH100 mm	IM54XSST
LeanOnMe Triangle XS + Non-Slip Cover	W200xL250xH100 mm	IM54XSNS
LeanOnMe Triangle S + Soft-Touch Cover	W250xL400xH150 mm	IM54SST
LeanOnMe Triangle S + Non-Slip Cover	W250xL400xH150 mm	IM54SNS
Soft-Touch Cover till IM54XSST	W200xL250xH100 mm	IM5400XSST
Non-Slip Cover till IM54XSNS	W200xL250xH100 mm	IM5400XSNS
Soft-Touch Cover till IM54SST	W250xL400xH150 mm	IM5400SST
Non-Slip Cover till IM54SNS	W250xL400xH150 mm	IM5400SNS

Immedia LeanOnMe Roll

Rullen kan böjas, formas och skakas så att den blir fylligare på vissa ställen och tunnare på andra. Detta gör att den kan anpassas efter användarens specifika behov.

När användaren ligger i sidoläge kan LeanOnMe Roll med fördel formas så att den ger stöd åt både huvud, rygg och ben. Den kan vara väl lämpad för användare som har nytta av taktil stimulering.



Positioneringsalternativ



När LeanOnMe Roll används som ett "näste" kan den ha en tryck- och smärtlindrande effekt på axlarna och lyfta armar och händer. Detta kan bidra till en lättare andning.



När LeanOnMe Roll kramas i sidoläge kan den ge en lugnande effekt och stödja användaren i en bekväm position.



När LeanOnMe Roll hålls in mot magen kan den fungera lugnande och stabiliserande samt avlasta armar och axlar.

Produktnamn	Storlek	Art. nr.
LeanOnMe Roll S + Soft-Touch Cover	W330xL1000 mm	IM15112
LeanOnMe Roll L + Soft-Touch Cover	W330xL2300 mm	IM15113
LeanOnMe Roll S + Hygienic Cover	W330xL1000 mm	IM16112
LeanOnMe Roll L + Hygienic Cover	W330xL2300 mm	IM16113
Soft-Touch Cover till IM15112	W330xL1000 mm	IM10512
Soft-Touch Cover till IM15113	W330xL2300 mm	IM10513
Hygienic Cover till IM16112	W330xL1000 mm	IM10612
Hygienic Cover till IM16113	W330xL2300 mm	IM10613

Immedia LeanOnMe Channel

Den kanalsydd kudden är en flexibel kudde som ger stöd och avlastning. Kudden kan rullas och formas efter behov.

LeanOnMe Channel kudde kan placeras under benet/benen, mellan benen, under vaderna för att minimera trycket på hälsarna, eller under en arm för att avlasta skulderblad och/eller armbågar. I sidoläge kan kudden placeras under användarens rygg eller mellan användarens ben för att hjälpa till att fördela tryck och avlasta utsatta områden. Vid sittande kan kudden placeras i ryggen som stöd.



Positioneringsalternativ



När en LeanOnMe Channel placeras under båda benen kan den avlasta benen. Den kan också fungera smärt- och trycklindrande.



LeanOnMe Channel kan användas för att höja benen eller för tryckavlastning på fotleden och/eller hälen.



I sidoläge kan en LeanOnMe Channel-kudde placeras mellan benen för att avlasta utsatta områden, t.ex. insidan av knän och vrist, från tryck.

Produktnamn

LeanOnMe Channel + Soft-Touch Cover
LeanOnMe Channel + Hygienic Cover
Soft-Touch Cover till IM15108
Hygienic Cover till IM16108

Storlek

W750xL750 mm
W750xL750 mm
W750xL750 mm
W750xL750 mm

Art. nr.

IM15108
IM16108
IM10508
IM10608

Immedia LeanOnMe Wing

Ryggstödsudden med vinge används i sidoläge. Användaren ligger på vingen så att den egna vikten håller kudden på plats. Då får användaren ett bekvämt stöd för ryggen i ett stabilt läge

LeanOnMe Wing kan också användas för rygggläge. Kudden kan placeras så att den hjälper till att minimera trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrindarna.



Positioneringsalternativ



När kudden placeras i ryggen i sidoläge med vingen under användaren, hålls den på plats och förhindrar att användaren tippas bakåt.



LeanOnMe Wing-kudden kan förhindra att utsatta kroppsdelar utsätts för tryck från sänggrindar.



Placerad under en arm i rygggläge kan LeanOnMe Wing fungera tryck-, lyft- och smärtlindrande.

Produktnamn

LeanOnMe Wing + Soft-Touch Cover

LeanOnMe Wing + Hygienic Cover

Soft-Touch Cover till IM15107

Hygienic Cover till IM16107

Storlek

W450xL800 mm + wing 200 mm

W450xL800 mm + wing 200 mm

W450xL800 mm + wing 200 mm

W450xL800 mm + wing 200 mm

Art. nr.

IM15107

IM16107

IM10507

IM10607

Immedia LeanOnMe Mini

En liten, mångsidig stödkudde som placeras där det uppstår mindre hålrum mellan kropp och madrass när en användare positioneras, t.ex. under nedre delen av ryggen, vid fotleden och knät.

Att applicera en LeanOnMe Mini kan ha en avslappnande effekt på den aktuella kroppsdel. Den kan också användas för att öppna en hand som drabbats av spasticitet.



Positioneringsalternativ



En LeanOnMe Mini placeras under nedre delen av ryggen för att avlasta bäckenet.



Använd en LeanOnMe Mini för att höja upp och öppna handen.



LeanOnMe Mini kan placeras där det finns mindre hålrum.

Produktnamn

LeanOnMe Mini + Soft-Touch Cover
LeanOnMe Mini + Hygienic Cover
Soft-Touch Cover till IM15100
Hygienic Cover till IM16100

Storlek

W150xL300 mm
W150xL300 mm
W150xL300 mm
W150xL300 mm

Art. nr.

IM15100
IM16100
IM10500
IM10600

Immedia LeanOnMe Basic

Traditionella positioneringskuddar i sex former och storlekar. Kuddarna kan användas vid positionering för att stödja rygg, armar, ben, knän och vrister.

LeanOnMe Basic positioneringskuddar kan också användas för att minska trycket på utsatta kroppsdelar från sänggrindar.



Positioneringsalternativ



LeanOnMe Basic- kuddar kan användas i rygggläge för att stödja kroppen eller extremiteterna



En LeanOnMe Basic-kudde kan hållas mot magen för en smärtlindrande och/eller lugnande effekt.



Höjning av arm och hand för att minimera risken för kontrakturer, ödem och tryck.

Produktnamn	Storlek	Art. nr.
LeanOnMe Basic XS +Soft-Touch Cover	W300xL400 mm	IM15101
LeanOnMe Basic S + Soft-Touch Cover	W400xL600 mm	IM15102
LeanOnMe Basic M + Soft-Touch Cover	W500xL700 mm	IM15103
LeanOnMe Basic L + Soft-Touch Cover	W250xL800 mm	IM15104
LeanOnMe Basic LW + Soft-Touch Cover	W450xL800 mm	IM15105
LeanOnMe Basic XL + Soft-Touch Cover	W550xL900 mm	IM15106
LeanOnMe Basic XS + Hygienic Cover	W300xL400 mm	IM16101
LeanOnMe Basic S + Hygienic Cover	W400xL600 mm	IM16102
LeanOnMe Basic M + Hygienic Cover	W500xL700 mm	IM16103
LeanOnMe Basic L + Hygienic Cover	W250xL800 mm	IM16104
LeanOnMe Basic LW + Hygienic Cover	W450xL800 mm	IM16105
LeanOnMe Basic XL + Hygienic Cover	W550xL900 mm	IM16106
Soft-Touch Cover till IM15101	W300xL400 mm	IM10501
Soft-Touch Cover till IM15102	W400xL600 mm	IM10502
Soft-Touch Cover till IM15103	W500xL700 mm	IM10503
Soft-Touch Cover till IM15104	W250xL800 mm	IM10504
Soft-Touch Cover till IM15105	W450xL800 mm	IM10505
Soft-Touch Cover till IM15106	W550xL900 mm	IM10506
Hygienic Cover till IM16101	W300xL400 mm	IM10601
Hygienic Cover till IM16102	W400xL600 mm	IM10602
Hygienic Cover till IM16103	W500xL700 mm	IM10603
Hygienic Cover till IM16104	W250xL800 mm	IM10604
Hygienic Cover till IM16105	W450xL800 mm	IM10605
Hygienic Cover till IM16106	W550xL900 mm	IM10606

Immedia LeanOnMe Ring

Ringkudden används för att ge ett stabilt och avlastande stöd när en vanlig kudde inte anses lämplig.

Den lämpar sig väl för användare som riskerar att utveckla trycksår på bakhuvudet. Den kan också användas vid halvsittande i säng eller fåtölj för att ge bra huvudstöd åt användare med dålig huvudkontroll.

LeanOnMe Ring kan enkelt tas med på resor för att lindra ömma nackmuskler och ryggkotor.



Positioneringsalternativ



För tryckavlastning av öronen och/eller smärtlindring av nackmuskler när du ligger i sidoläge.



För tryckavlastning på baksidan av huvudet och/eller för huvudkontroll i liggande position.



Använd LeanOnMe Ring för att stödja huvudet i en sittande position.

Produktnamn

Storlek

Art. nr.

LeanOnMe Ring S + Soft-Touch Cover

Ø400 mm

IM15110

LeanOnMe Ring M + Soft-Touch Cover

Ø500 mm

IM15111

LeanOnMe Ring S+ Hygienic Cover

Ø400 mm

IM16110

LeanOnMe Ring M + Hygienic Cover

Ø500 mm

IM16111

Soft-Touch Cover till IM15110

Ø400 mm

IM10510

Soft-Touch Cover till IM15111

Ø500 mm

IM10511

Hygienic Cover till IM16110

Ø400 mm

IM10610

Hygienic Cover till IM16111

Ø500 mm

IM10611



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371 – 58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities