



etac®

Etac Lille Viking

En smidig och flexibel hjälpmotor för manuella rullstolar

Etac Lille Viking Low och Flat


En smidig hjälpmotor som hjälper ledsagaren att dra rullstolen i uppförsbacke och att hålla emot i nedförsbacke. När man inte behöver hjälp av motorn är det lätt att lyfta motorn/hjulen med ett handtag. Rullstolen kan då köras som vanligt, utan att hjälpmotorn behöver tas bort.

Lille Viking hanteras enkelt av ledsagaren med hjälp av manöverreglaget som monteras på rullstolens körhandtag. På Lille Viking modellen finns även en batteriindikator på hjälpmotorn som visar aktuell strömtillgång.

Fyra fasta beslag monteras och anpassas till rullstolen, vilket innebär att monteringen och demonteringen av hjälpmotorn blir mycket enkel.



Lille Viking Low inkl batterier, laddare och manöverbox, Art.nr 28617.

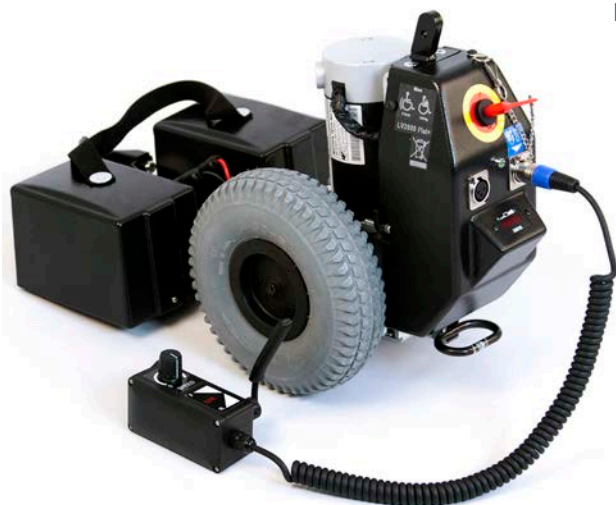

Lille Viking Flat inkl batterier, laddare och manöverbox, Art.nr 28619

Lille Viking i alternativa utföranden

Lille Viking finns att beställa i alternativa utföranden. Vid beställning av Lille Viking Low och Flat, med artikelnummer 28616 och 28618 ingår batterier, laddare, manöverbox, fäste manöverbox för vårdarbromshandtag, monterad utlösarspak och monteringsats för säkring vid tranport.

Vid beställning av Lille Viking Low och Flat, med artikelnummer 28617 och 28619 ingår batterier, laddare och manöverbox.

Lille Viking i färdtjänstbuss

Lille Viking är krocktestad och godkänd enligt ISO 7176-19. I färdtjänstbuss kan Lille Viking förbli monterad på rullstolar som är godkända som säte i fordon, enligt ISO 7176-19.

Benämning

Art.nr.

Lille Viking Low bow kpl inkl utlösarspak mont/fäste manöverdosa	28616
Lille Viking Low bow kpl	28617
Lille Viking Flat bow kpl inkl utlösarspak mont/fäste manöverdosa	28618
Lille Viking Flat bow kpl	28619

Mått och vikt

Teknisk data

Etac Lille Viking Low

Etac Lille Viking Flat

Höjd	330 mm	360 mm
Bredd inkl. batterier	310 mm	310 mm
Längd	550 mm	580 mm
Totalvikt	19 kg	19 kg
Vikt motorenhet	10 kg	10 kg
Batteridel	9 kg	9 kg
Underhållsfria GEL batterier	12 Ah	12 Ah
Max körsträcka vid fulladdade batterier	20 km	20 km
Maxhastighet framåt	6 km/h	6 km/h
Stigningskapacitet	8°	8°
Max hindertagning	50 mm	50 mm
Kapslingsklass	IP44	IP44
Klassificering	Klass B, inomhus- och utomhusbruk	
Max brukarvikt	Det som anges för rullstolen, dock max 150 kg brukarvikt.	

Tillbehör




Fäste manöverbox VB-handtag

För att kunna använda Lille Vikings manöverbox på rullstol med vårdarbroms. Ingår som standard i art.nr 28616 och 28618.

Art.nr

27333

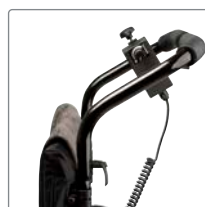

Förlängd körbygel

Körbygeln är förlängd med 5 cm vilket gör att vårdaren kommer lite längre ifrån motorn och får på så vis bättre gångutrymme.

Rullstolsbredd

Art.nr

37.5 cm	26294-01
40.0 cm	26295-01
42.5 cm	26296-01
45.0 cm	26297-01
47.5 cm	26298-01
50.0 cm	26299-01
52.5 cm	26300-01
55.0 cm	26301-01
57.5 cm	26302-01
60.0 cm	26303-01



Monteringssats säkring transport

För säkring av Lille Vikings batterilåda vid transport. Ingår som standard i art.nr 28616 och 28618.

Art.nr

82622



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities