



R82[®]

R82 Meerkat

Aktiv genom rörelse

R82 Meerkat

Meerkat är ett enkel ståstöd där modulära tillbehör gör det enkelt att anpassa ståstödet efter användarens förändliga och individuella behov.

Egenskaper

Meerkat består av en basplatta och en mittpelare där tillbehören monteras. Det är ett enkelt, modulärt ståstöd som kan användas både i rygg- och magstående position.

I sitt grundutförande används Meerkat med fotsandaler, knä- och höftstöd – en lösning som passar användare med god segmentell kontroll i bålen.

Höftstöd

Höftstödet ger ett stabilt och bekvämt stöd runt bäckenet och är utrustat med ett spärrsystem som möjliggör snabb och säker finjustering. Det underlättar särskilt vid förflyttningar då bäckenet snabbt kan säkras i rätt position.

Knästöd

Knästöden ger ett bekvämt stöd både framtill och baktill. De är utrustade med ett spärrsystem som möjliggör snabb och säker finjustering i små steg. Knästöden kan vinklas och justeras framåt, bakåt och i sidled – även medan användaren står i ståstödet.

Justeringar


De modulära komponenterna kan snabbt och enkelt klickas av och på mittpelaren för att anpassas efter användarens förändliga och individuella behov.

Basplatta

Basplattan utgör grunden för mittpelaren och gör det enkelt att montera alla stöd med hjälp av ett smidigt monteringsystem.

Fotsandal

Fotsandalens position och rotation kan enkelt justeras för att säkerställa rätt fotplacering för användaren. Tack vare den justerbara bredden passar sandalerna för olika fotstorlekar, skor och ortoser.

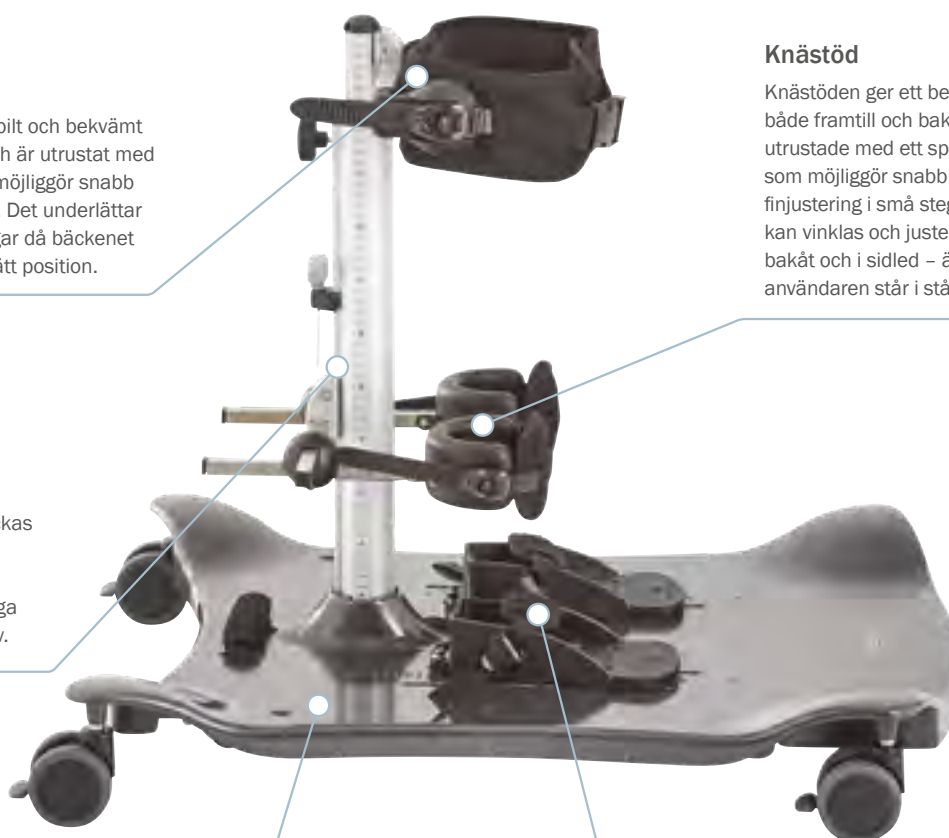

Tillbehör ger stöd och rörelse

Med hjälp av tillbehör kan man ge stöd för överkroppen, lägga till ett bord för funktionellt stöd eller montera en gunga som utmanar användarens bålstabilitet genom rörelse.



Magstående med komplett uppsättning av tillbehör



Ryggstående med tillbehör och gunga

Många möjligheter med tillbehör

Bröststöd

Bröststödet ger ett stabilt och bekvämt stöd och är utrustat med ett spärrsystem som möjliggör snabb och säker finjustering i små steg. Det underlättar särskilt vid förflyttningar då bröstet snabbt kan säkras i rätt position. Spärrsystemet hjälper till att hålla bröstet så symmetriskt som möjligt – utan behov av extra hjälp.

Bröststödet är utformat så att stödnivån kan minskas i takt med att användarens bålstabilitet förbättras.

Gunga

När gungan monteras under basplattan utmanas användarens kontroll över de delar av bålen som inte stöds av ståstödet.

Gungan ger nya och unika möjligheter att skapa och reagera på rörelse, vilket bidrar till att förbättra bålstabiliteten och minska stillastående tid.

Bord

Bordet skapar möjligheter för lek, interaktion och dagliga aktiviteter. Det kan användas både för funktionella aktiviteter och som stöd för överkroppen.

Varför är stående viktigt?

Runt nio till tolv månaders ålder börjar barn med normal utveckling utmana sig själva att ställa sig upp – en naturlig utveckling från liggande och sittande position som en del av den grovmotoriska utvecklingen.

Att kunna stå ger nya perspektiv på omgivningen och belastar skelett, leder och muskler på ett varierat sätt, vilket skapar förutsättningar att utveckla nya färdigheter.

Barn med försenad utveckling eller olika typer av funktionsnedsättningar behöver stöd för att kunna inta stående position och därigenom få samma möjligheter till utveckling.



Vad vet man om stående och användning av ståstöd?

- En tvärsnittsstudie av 562 barn med cerebral pares visade att 65 % stod självständigt, 31 % använde stöd eller hjälpmedel och 4 % kunde inte stå (Rodby-Bousquet et al. 2010). Detta visar på behovet av ståstöd för att ge alla barn lika möjligheter att uppnå stående position och utvecklas.
- En systematisk översikt av dosering inom pediatrika ståprogram har tagit fram evidensbaserade rekommendationer för att påverka bentäthet, spasticitet samt rörlighet i höft-, knä- och fotleder. Rekommendationen är att använda ståprogram 30–90 minuter per dag, fem dagar i veckan (Paleg et al. 2013).

När Meerkat är rätt val

De många möjligheterna att placera stöden på mittpelaren gör Meerkat lämplig för alla användare med försenad utveckling eller olika typer av funktionsnedsättningar som behöver stöd för att kunna stå. För användare med cerebral pares passar Meerkat för nivå II–IV enligt GMFCS.

Möjligheter

Meerkat är idealisk för användare som står med stöd av en person eller ett hjälpmedel. Användaren kan ha begränsad statisk, dynamisk eller reaktiv kontroll över en eller flera delar av bålen och är ofta beroende av hjälpmedel även för att sitta och gå. Meerkat används ofta tillsammans med exempelvis sittsystemen x:panda eller Wombat Living samt gånghjälpmedel som Mustang eller Crocodile.

Tack vare sin användarvänlighet kan Meerkat användas i hemmet, i vårdmiljöer och i skolan. Den minimalistiska designen gör den lätt att flytta mellan olika platser och kan bidra till ökad acceptans i vardagsmiljön.

Att tänka på

Meerkat är utformad för att stödja användaren i stående och uppfyller kraven enligt det medicintekniska direktivet (93/42/EEG) och standarden EN 12182. Gungfunktionen gör ståstödet dynamiskt och utmanar användarens reaktiva bålkontroll. Vid användning av Meerkat för att träna bålstabilitet bör den vuxne som övervakar vara uppmärksam på oförutsedda rörelser. Detta gäller särskilt vid terapiesessioner där användaren uppmuntras att röra de delar av kroppen som inte stöds av ståstödet. Om utmaningen blir för svår för användaren att behålla upprätt bålkontroll, eller om tyngdpunkten flyttas utanför basplattans stödytor, kan produkten bli instabil.



Meerkat i detalj

Meerkat är ett enkelt, modulärt ståndstöd som kan användas både i rygg- och magstående position. Den rena designen, den innovativa gungan och det minimala stödet uppmuntrar användarens frihet till rörelse.



Stabilt och säkert stöd

Bröst- och höftstöden ger ett stabilt och bekvämt stöd och är utrustade med ett spärrsystem som möjliggör snabb och säker finjustering i små steg. Den roterande funktionen bidrar till att hålla överkroppen så symmetrisk som möjligt – utan behov av extra stöd.

Enkla justeringar

De modulära komponenterna kan snabbt och enkelt klickas av och på för att anpassas efter användarens föränderliga och individuella behov.

[Klicka här för
komplett måttguide](#)



Mått och vikt

Meerkat mått		1	2	3
	Bredd	445 mm (17½")	670 mm (26½")	670 mm (26½")
	Längd	595 mm (23½")	800 mm (31½")	800 mm (31½")
	Totalhöjd	375 - 750 mm (14¾ - 29½")	500 - 1000 mm (19¾ - 39½")	650 - 1300 mm (25½ - 51¼")
	Vikt	9 kg (19.8 lb)	15,25 kg (33.6 lb)	15,75 kg (34.7 lb)
	Max brukarvikt	20 kg (44 lb)	65 kg (143.3 lb)	90 kg (198.4 lb)
	Statisk stabilitet	10° i sidled	10° uppför	10° nedför

Utförande

Meerkat levereras med basplatta, pelare och verktyg i sitt standardutförande.




Basplatta, pelare och verktyg




Pelare monterad på basplatta



Stl 1 - blå

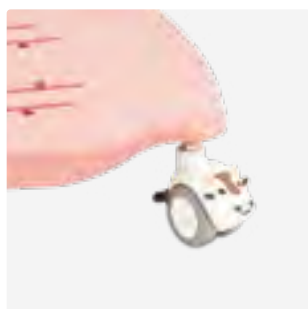

Stl 1 - rosa

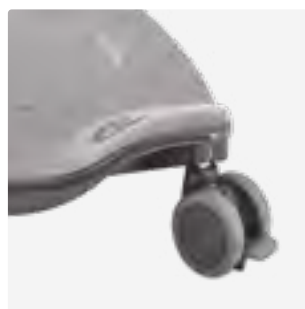

Stl 2+3 - grå

Val av tillbehör

För bästa stöd och komfort rekommenderas användning av sandaler samt stöd för knän, bäcken och bröst. Produkten bör som minst användas med ett stöd som placeras vid övre delen av bäckenet eller högre upp.



Bröststöd



Höftstöd



Knästöd



Fotsandaler



Gunga



Bord



Justeringsfäste bröst- /höftstöd



Justeringskit knästöd



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities