



molift[®]

Molift Air 200

En kompakt, kraftfull taklyft optimerad för långtidsvård

Molift Air 200

Molift Air 200 är en prisvärd, väl designad och mycket funktionell taklyft för patienter upp till 205 kg. I kombination med Molift Rail System och Molift lyftselar löser denna taklyft de flesta dagliga lyftsituationer inom sjukvården och andra vårdmiljöer.

Komfort och kvalitet

Molift Air 200 kombinerar behovet av maximal komfort med effektiva och säkra lyftsituationer. Designen och användarvänligheten ger en exceptionell frihet som gör det möjligt för en enda vårdare att utföra dagliga lyftsituationer, vilket ger mer tid för vård av den enskilda patienten. För vårdgivaren blir arbetsmiljön bättre utan behov av manuella lyft. Patienten får en mer värdig, säker och bekväm överflyttning..

En flexibel lyft

Molift Air 200 är lämplig för sittande och liggande överflyttningar samt för stå- eller gåträning.

Molift Air 200 används tillsammans med fasta takskenor men kan också användas för portabla fristående system. Motorn är enkel att hantera vid installation och service tack vare sin mycket låga vikt och den smarta snabbkopplingsfunktionen.

Molift Air 200 erbjuder flexibla lösningar som IRC (In-Rail Charging), framdrivning och möjligheter till förflyttning från rum till rum. Utöver detta har den säkerhetsfunktioner, ett stort lyftintervall och ett brett utbud av lyftbyglar och lyftselar. Motorn är en komplett lösning för alla vårdmiljöer.



Produktmodell

Molift Air 200 SLA-batteri	Motor, handkontroll, laddare	M26200
Molift Air 200 Litiumbatteri	Motor, handkontroll, laddare	M26201
Molift Air 200 IRC*		M26356
Molift Air 200 IRC* Motordriven åkvagn		M26358
Molift Air 200 motordriven åkvagn		M26359

*IRC = In Rail Charge (laddning i skena)

Specifikationer

Max brukarvikt (SWL)	205 kg
Totalvikt	8,6 kg
Längd	360 mm
Bredd	190 mm
Höjd	195 mm
SLA-batteri	12 V SLA 2,9 Ah
Litiumbatteri	25,6 V LiFePO4 2,4 Ah
Batteriladdare	100-240 V AC, 40-60 Hz
Laddningstid för batteri	6 timmar
Motor	24 V DC
Lyftintervall	3 000 mm
Lyfthastighet 75 kg	60 mm/sekund
Förväntad livslängd:	30 000 lyft (SWL)/10 år

Specifikationer

Molift Service Tool (mjukvara)	Ingår
Nödsänkning	Mekanisk och elektrisk
Nödstopp	Kan nås från golvet med snöre. Återställning möjligt från golvet
Skyddsklass; handkontroll och lyftmotor	IP24



Rengör / desinficera produkten med ett vanligt rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH på mellan 5 och 9 eller med en 70% desinfektionslösning.



Egenskaper



Quick release-enhet för åkvagn

Molift Air 200 är enkel att hantera vid installation och service tack vare den väldigt låga vikten och den smarta quick release-funktionen.

Med ett enkelt handgrepp kopplas motorn till eller från åkvagnen.



Tyst och mjuk drift

Molift Air 200 är mycket tystgående och har mjuka start och stopp. Detta gör att patienten känner sig trygg och säker vid en överflyttning.



Intuitiv handkontroll

Kan fästas på lyftbygel eller placeras i en väggmonterad laddstation. Enkel att hantera och alltid till hands när den behövs.



Liten motor med stor lyftkapacitet

Molift Air 200 är en mycket kompakt motor som endast väger 8,6 kg. Den har trots det en lyftkapacitet (SWL) på 205 kg. Storleken och vikten gör att den är mycket lätt att hantera och förflytta vid olika vårdssituationer.

Tillbehör:



4-punkts lyftbygel:

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

4-punkts lyftbygel 350 (S)	2530210
4-punkts lyftbygel 450 (M)	2530211
4-punkts lyftbygel 550 (L)	2530212
4-punkts lyftbygel 650 (XL)	2530213



2-punkts lyftbygel:

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

2-punkts lyftbygel 350 (S)	2530115
2-punkts lyftbygel 450 (M)	2530120
2-punkts lyftbygel 550 (L)	2530125



2-punkts Pigtail-lyftbygel

Lättviktsaluminium, SWL 350 kg

2-punkts Pigtail-lyftbygel 350 (S)	1830033
2-punkts Pigtail-lyftbygel 450 (M) ...	1830032
2-punkts Pigtail-lyftbygel 550 (L)	1830031



8-punkts lyftbygel:

För förflyttningssituationer med Fabric Stretcher.
Stål, SWL 300 kg

8-punkts lyftbygel	2140003
--------------------------	---------



Molift Air våg

Vågen räknar ut BMI (Body Mass Index) med en enkel knapptryckning. Godkänd klass III.

Våg SWL 300 kg.....	1840000
---------------------	---------



Övriga tillbehör

Enhet för förflyttning från rum till rum	2510295
--	---------



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities