

molift®
a part of Etac



Molift EvoSling seil

Komfort, funksjon og sikkerhet

etac®

Molift EvoSling seil

Molift, som har produsert løftere og seil av høy kvalitet i generasjoner, er i dag en del av Etac. Kvalitet, komfort og sikkerhet er rettesnorer i produktutviklingen, og vi tilbyr et bredt utvalg av forskjellige seil og størrelser.

Hvilke behov har brukeren?

For den som trenger hjelp med å forflytte seg er det viktig at seilet er både behagelig og sikkert.

Seilet skal forenkle forflyttingen og møte brukerens behov.

Seilet skal føles trygt og godt, ha gode funksjoner og være sikkert.

Komfort, funksjon og sikkerhet

Våre seil er utviklet i samarbeid med pleiere og brukere, for å møte kravene som stilles til funksjon, komfort og sikkerhet. Seilene skal forenkle forflytninger, noe som innebærer at de skal være både trygge og gode, samtidig som de skal være enkle å arbeide med.

Våre basismodeller tåler de vanligste typer forflytninger og passer de fleste brukere. De finnes i tre forskjellige ryghøyder: HighBack, MediumBack og LowBack. Vi vet at brukerne kan ha mange forskjellige behov, og har derfor tatt frem ytterligere modeller med spesifikke egenskaper. EvoSling Hygiene og EvoSling Ampu er tilpasset spesielle behov.

Våre seil er konstruert slik at de fordeler vekten og trykket jevnt, for maksimal sikkerhet og komfort.

Individuell utprøving

Vi anbefaler individuell utprøving, og tilbyr et bredt sortiment av forskjellige modeller og størrelser. Som støtte ved utprøvingen anbefaler vi bruk av en utprøvningsprotokoll.



Fargemerking

Fargemerking på løfteløkkene gjør det enkelt å finne riktig innstilling.

Polstring

Polstring i rygg- og benstøtter fordeler tyngden over en større flate og skaper dermed bedre komfort for brukeren.

Belte

EvoSling Hygiene har et belte for ekstra høy sikkerhet og har dessuten sklisikring på innsiden.

Bånd

Båndet gjør posisjonen enkel ved løfting.

Fleksibilitet

Avstanden til løftebøylen og brukerens sittevinkel kan justeres, takket være at det finnes flere løfteløkker på både hode- og benstøtter.

Tre ulike rygghøyder

HighBack, MediumBack og LowBack.

Etikett

Tydelig og praktisk informasjon på den synlige etiketten. Vaskeanvisning og teknisk informasjon ligger beskyttet bak.

Ryggglomme

Lommen nederst på ryggen og på benstøtten letter påføring av seilet.

EvoSling MediumBack
Polstret

Informativ och tydelig merking

På den store etiketten har vi plassert den informasjon som er viktig ved daglig bruk. Vaskeanvisning, serienummer og annen teknisk informasjon finnes bak etiketten i en lomme som beskytter mot mekanisk slitasje under vask.


Periodisk inspeksjon

Seilet har en egen etikett der man kan notere når periodisk inspeksjon er utført, den er plassert i etikettlommen. Ved å notere tidspunktet for første gangs bruk på etiketten, kan man planlegge når første inspeksjonen skal utføres.


Materiale

Seilene av polyester er slitesterke og bestandige. Materialet er føyeelig og lettstelt med en smussavvisende overflate.

Seilene i polyesternetett er slitesterke, bestandige og føyeelige. Materialet gir god ventilasjon.

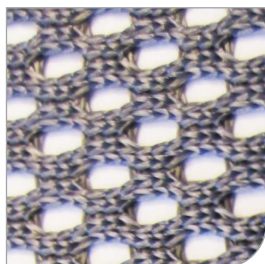

Polyesternetett

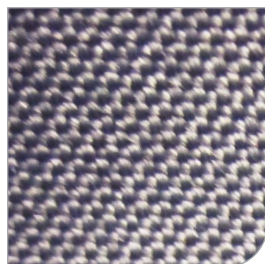

Polyester

Periodic inspection performed

MONTH	YEAR											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021				
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												

User name / Navn

.....

.....

.....

Beskrivelse EvoSling seil

Anbefalt brukervekt

XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg

Materiale

Polyester
PE-skum (polstrede modeller)

Vaskeanvisning



Ved vask i høye temperaturer blir materialet raskere slitt.

Fargekode



INNHold

molift[®]
a part of Etac

Molift EvoSling seil	2
Molift EvoSling HighBack	7
Molift EvoSling MediumBack	8
Molift EvoSling LowBack	9
Molift EvoSling Hygiene	10
Molift EvoSling Amput MediumBack	11
Molift EvoSling Comfort MediumBack	12
Nova StandUp	13
Tillbehør till Molift EvoSling	14

www.etac.no



Molift EvoSling HighBack

EN BASISMODELL FOR BRUKERE SOM TRENGER MYE STØTTE

Behagelig støtte

EvoSling HighBack gir støtte til hele ryggen og har en behagelig hodestøtte. Seilet passer de fleste brukere, også brukere med liten kropps- og hodestabilitet.

EvoSling HighBack passer ved løft til og fra liggende posisjon og ved løft fra gulv. Seilet gir en behagelig tilbakeleent sittestilling.

Lommen på ryggen og på benstøttene letter påføringen av seilet.

To varianter

Molift EvoSling HighBack finnes i to varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter, og i et mykt polyesternet med polstrede benstøtter og polstret hodestøtte.




Letter plassering

Seilet i polyesternet har en rød søm midt bak, for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.

EvoSling HighBack
Nett Polstret



Molift EvoSling HighBack

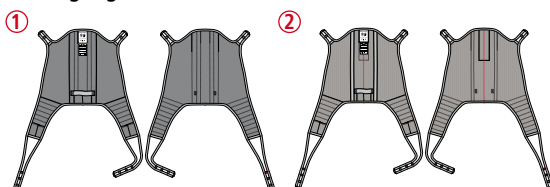

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

① Polstret

art.nr:

1722810
1722820
1722830
1722840
1722850
1722860

② Nett Polstret

art. nr:

1722710
1722720
1722730
1722740
1722750
1722760

Størrelse


XS
S
M
L
XL
XXL

Ⓐ Rygghøyde

70 cm
80 cm
93 cm
100 cm
105 cm
110 cm

Ⓑ Bredde

30 cm
35 cm
40 cm
47 cm
54 cm
60 cm

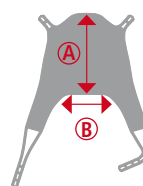

Molift EvoSling MediumBack

EN BASISMODELL FOR BRUKERE SOM HAR HODEKONTROLL MEN SOM TRENGER STØTTE FOR HELE RYGGEN

Støtte for hele ryggen

EvoSling MediumBack er en god basismodell som passer i de vanligste løftesituasjoner. Seilet gir en komfortabel oppreist sittestilling, med støtte for hele ryggen.

Brukeren plasserer armene på innsiden av seilet.


En lomme på ryggen og på benstøttene letter påføringen av seilet. Seilet i polyesternet har en rød søm midt bak for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.

To varianter

Molift EvoSling MediumBack finnes i to varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter og et i mykt polyesternet med polstrede benstøtter.



Molift EvoSling MediumBack

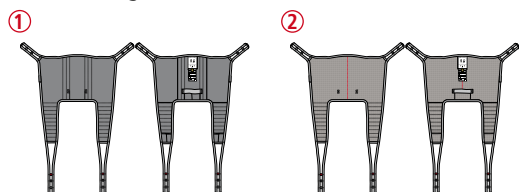

Størrelser

XS
S
M
L
XL
XXL

① Polstret

art.nr:

1723010
1723020
1723030
1723040
1723050
1723060

② Nett Polstret

art.nr:

1723110
1723120
1723130
1723140
1723150
1723160

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Ⓐ


Rygghøyde

54 cm
56 cm
60 cm
67 cm
70 cm
73 cm

Ⓑ

Bredde

30 cm
37 cm
49 cm
57 cm
72 cm
81 cm

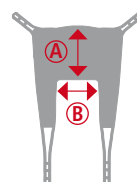

Molift EvoSling LowBack

EN BASISMODELL FOR AKTIVE BRUKERE MED GOD KROPPSSTABILITET



Støtte opp til skuldrene

EvoSling LowBack er en god basismodell som gir støtte opp til skuldrene. Seilet gir en god sittestilling, og brukeren kan plassere armene på innsiden eller utsiden.


Seilet er enkelt å plassere, takket være en lomme på ryggen og på benstøttene. Seilet i polyesternet har en rød søm midt bak for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.

Tre varianter

Molift EvoSling LowBack finnes i tre varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter, samt i mykt polyesternet med eller uten polstrede benstøtter.

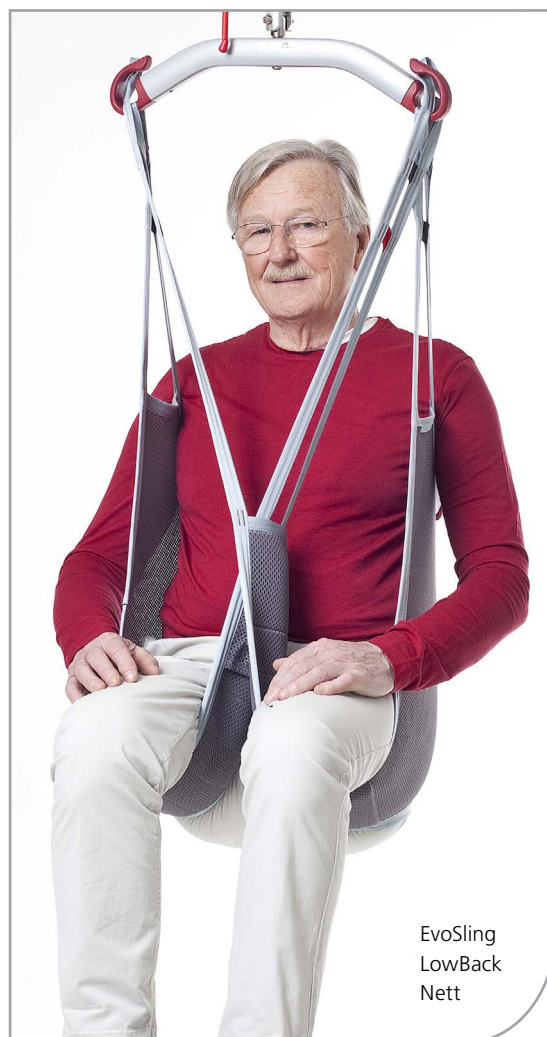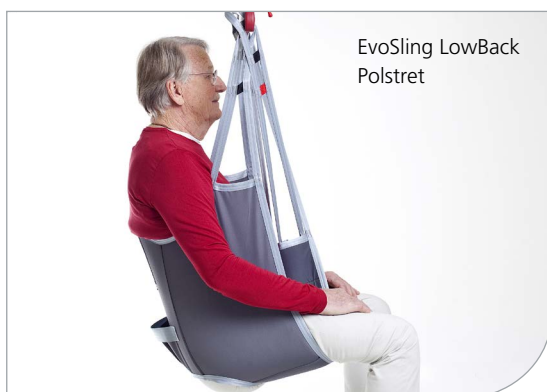

Molift EvoSling LowBack

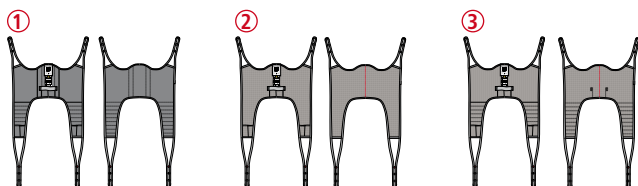

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XX
L

① Polstret

art.nr:
1722310
1722320
1722330
1722340
1722350
1722360

② Nett

art.nr:
1722410
1722420
1722430
1722440
1722450
1722460

③ Nett

Polstret
art.nr:
1722510
1722520
1722530
1722540
1722550
1722560

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

A


Rygg høyde

41 cm
43 cm
44 cm
47 cm
51 cm
55 cm

B

Bredde

40 cm
43 cm
48 cm
55 cm
62 cm
70 cm

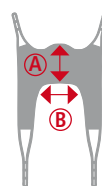

Molift EvoSling Hygiene

FOR BRUKERE MED GOD KROPPSSSTABILITET OG MUSKELTONUS

Enkel å plassere

EvoSling Hygiene har lav rygg og stor benstøtteåpning for å gjøre det lettere å kle av og på seg, og ved toalettbesøk.

Lommer



Molift EvoSling Hygiene er produsert i polyester og har polstring i rygg og benstøtter. Lommene på benstøttene gjør det enkelt å plassere benstøttene

Ekstra trygghet

EvoSling Hygiene har et belte for økt trygghet i forbindelse med løftet.



Molift EvoSling Hygiene

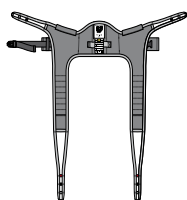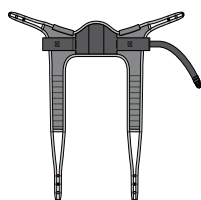

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Polstret art.nr:

1722210
1722220
1722230
1722240
1722250
1722260

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Ⓐ


Ryggghøyde

29 cm
33 cm
33 cm
33 cm
34 cm
35 cm

Ⓑ

Beltets bredde

35 cm
46 cm
52 cm
70 cm
73 cm
76 cm

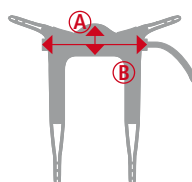

Molift EvoSling Ampu MediumBack

FOR BRUKERE MED BENAMPUTASJON ELLER SOM HAR LAV MUSKELTONUS


Trygg og behagelig

EvoSling Ampu MediumBack har smal benstøtteåpning og skulderhøy rygg. Seilets benstøtter koples slik at de overlappes under bena. Benstøttebåndet tres igjennom båndstyringsløkken for å holde benstøttene sammen. Liten benstøtteåpning minsker risikoen for at brukeren glir ut av seilet.



En lomme på ryggen og på benstøttene gjør det lettere å påføre seilet. Seilet har en rød søm midt bak som gjør det lettere å påføre seilet symmetrisk

Sklisikring for økt trygghet

EvoSling Ampu er produsert av polyesternet og har et sklissikkert stoff på innsiden i sitteflaten (baken), for å gi økt trygghet i forbindelse med løftet. Brukeren får en god tilbaketrent sittestilling. Benstøtten er polstret for å gi beste komfort.

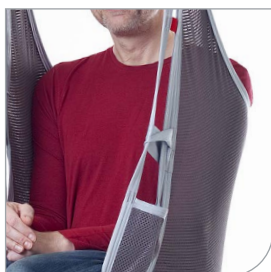

Molift EvoSling Ampu MediumBack

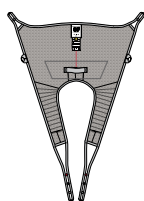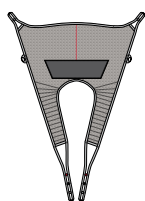

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Nett Polstret art.nr:

1723210
1723220
1723230
1723240
1723250
1723260

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Ⓐ


Rygghøyde

47 cm
52 cm
63 cm
77 cm
90 cm
100 cm

Ⓑ

Bredde

21 cm
26 cm
32 cm
42 cm
48 cm
54 cm

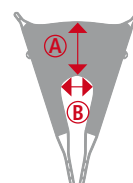

Molift EvoSling Comfort MediumBack

ET HELSEIL FOR BRUKERE MED SPESIELLE BEHOV FOR STØTTE

Støtte under hele sitteflaten

EvoSling Comfort MediumBack Nett er et helseil uten delte benstøtter og med skulderhøy rygg. Seilet gir brukeren støtte under hele sitteflaten (baken) og er godt egnet hvis brukeren har leddproblemer eller er følsom for smerte.

Seilet plasseres under brukeren i liggende stilling. Det er produsert av polyesternet som gir god ventilasjon, og kan etterlates i rullestolen under brukeren.

Justerbar sittevinkel


Sittevinkelen kan justeres, takket være at det finnes flere løfteløkker på både hode- og benstøtten.

Seilet har en rød søm midt bak for lettere å kunne plassere seilet symmetrisk.




Styreband

Styrebandet er integrert i kantbandet for at seilet skal føles behagelig.

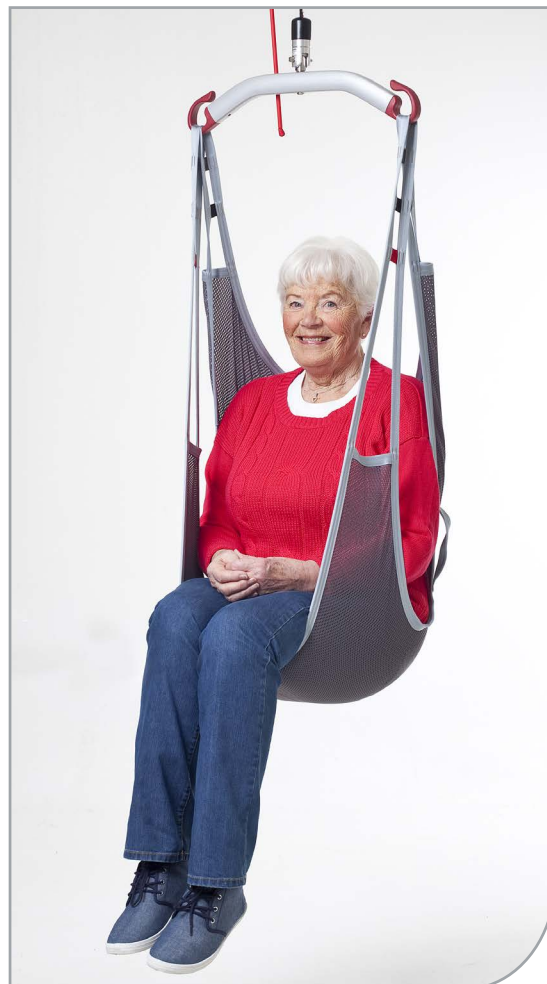

Molift EvoSling Comfort MediumBack

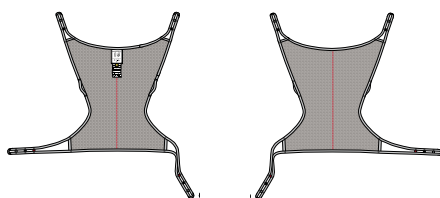

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Nett art.nr:

1722610
1722620
1722630
1722640
1722650
1722660

Størrelse

XS
S
M
L
XL
XXL

Ⓐ


Rygghøyde

77 cm
90 cm
102 cm
115 cm
118 cm
120 cm

Ⓑ

Bredde

85 cm
86 cm
94 cm
113 cm
120 cm
126 cm

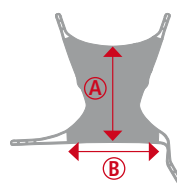

Nova StandUp sele


SELE FOR AKTIV PERSONLØFTER NOVA 500NG

Stabil og komfortabel

Nova StandUp sele er enkel å påføre og trenger minimalt med justeringer. Nova StandUp sele fordeler vekten over hele ryggen og gir komfortabel støtte for brukeren gjennom hele forflytningen. Selen har sklisikring på innsiden for å unngå at den glir ved oppreisning. Selen er produsert i myk polyester.



Tilbehør

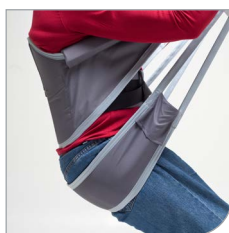

Fleksistropp

Gir ekstra støtte under den innledende delen av oppreisningen

Art. nr.

1723310



Mykt polster

Ekstra mykt polster, spesielt for brukere som er sensitive for trykk.

Str. XS-M, 2 stk
Str. L-XXL, 2 stk

Art. nr.
1722100
1722110

Størrelse

Nova StandUp XS	1722010
Nova StandUp S	1722020
Nova StandUp M	1722030
Nova StandUp L	1722040
Nova StandUp XL	1722050
Nova StandUp XXL	1722060

Art. nr.

Tillbehør till Molift EvoSling

Molift EvoSling Head Support

Tilbehør til seil uten hode støtte



odestøtten festes i seilet, og lengden kan justeres trinnløst, takket være plastspennen. Den gir brukeren en behagelig støtte for hodet, og kan være et godt supplement når brukeren får økt behov for støtte.


Produkt
Molift EvoSling HeadSupport

Artikkelnummer
1723400



Molift EvoSling Soft Padding

For trykksfølsomme brukere

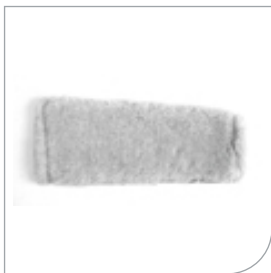

EvoSling Soft Padding er trykkavlastende polstringshylser som tres på bendelerne på seil med delte benstøtter.

Produkt	Artikkelnummer
Molift EvoSling Soft Padding XS-M	1723710
Molift EvoSling Soft Padding L-XXL	1723740
Molift EvoSling Hygiene Soft Padding XS-XXL	1723810


Molift EvoSling Extension Loop

Bånd for enklere tilpasning




Brukes for å forlenge løftebåndet, eller for å holde sammen benstøttene på seil med delte benstøtter. Bestill **en** stk for et komplett par.

Produkt	Artikkelnummer
Molift EvoSling Extension loop 16 (+9) cm	1723510
Molift EvoSling Extension loop 25 (+18) cm	1723520

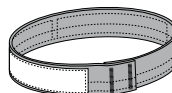

Molift Strap Marker

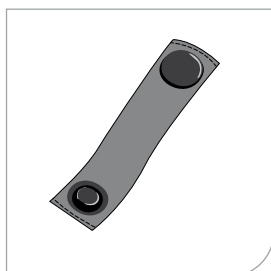

Markeringsstropp av valgt løfteløkke på løftebånd til hode støtte eller benstøtte. Marker de løfteløkker som ble valgt ved den individuelle utprøvingen av seilet.

Produkt
Etac Molift Strap Marker

Artikkelnummer
1723600

Molift EvoSling FlexiStrap

Unngå tunge løft



Molift EvoSling FlexiStrap brukes for enkelt og lett å løfte et ben eller en arm ved sykepleie eller behandling. Løftebåndet er produsert i polstret polyester, og finnes i to bredder. Det er en lomme på den ene siden av båndet som letter plasseringen.

Produkt

Molift EvoSling FlexiStrap, standard
15 x 95 cm
Molift EvoSling FlexiStrap, bred
25 x 95 cm

Artikkelnummer

1723310

1723330



Immedia SlingOn

Når brukeren ikke kan legges på siden



vis man kombinerer en "Immedia SlingOn" med et seil, kan man plassere seilet direkte under brukeren, dvs uten først å legge brukeren over på siden.

Produkt


Immedia SlingOn, small
80 x 100 cm
Immedia SlingOn, medium
80 x 170 cm
Immedia SlingOn, large
120 x 150 cm

Artikkelnummer

IM437/S

IM438

IM437

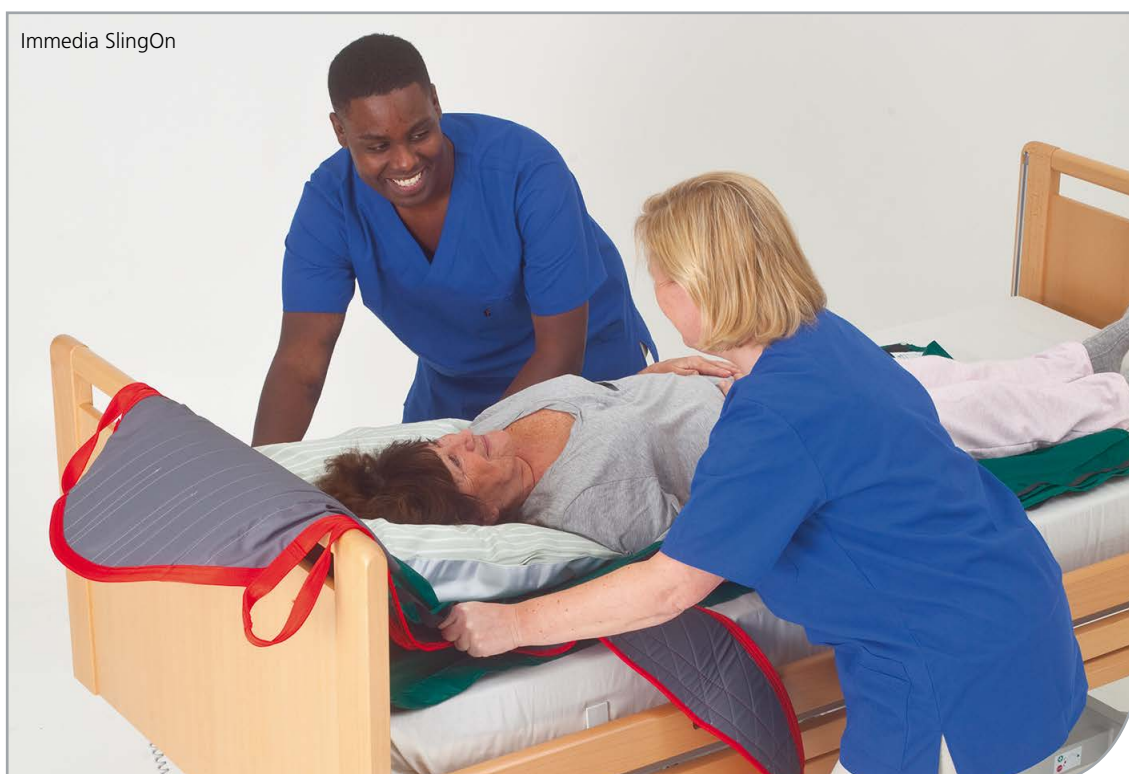



“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og fullføre sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter.”

Du finner også nyheter og mer informasjon på www.etac.no