

**molift**<sup>®</sup>  
a part of Etac



## Molift EvoSling seil

Komfort, funksjon  
og sikkerhet

**etac**<sup>®</sup>

# Molift EvoSling seil



Molift, som har produsert løftere og seil av høy kvalitet i generasjoner, er i dag en del av Etac. Kvalitet, komfort og sikkerhet er rettesnorer i produktutviklingen, og vi tilbyr et bredt utvalg av forskjellige seil og størrelser.

## Vilke behov har brukeren?

For den som trenger hjelp med å forflytte seg er det viktig at seilet er både behagelig og sikkert. Seilet skal forenkle forflytningen og møte brukerens behov.

Seilet skal føles trygt og godt, ha gode funksjoner og være sikkert.

## Komfort, funksjon og sikkerhet

Våre seil er utviklet i samarbeid med pleiere og brukere, for å møte kravene som stilles til funksjon, komfort og sikkerhet. Seilene skal forenkle forflytninger, noe som innebærer at de skal være både trygge og gode, samtidig som de skal være enkle å arbeide med.

Våre basismodeller tåler de vanligste typer forflytninger og passer de fleste brukere. De finnes i tre forskjellige ryghøyder: HighBack, MediumBack og LowBack. Vi vet at brukerne kan ha mange forskjellige behov, og har derfor tatt frem ytterligere modeller med spesifikke egenskaper. EvoSling Hygiene og EvoSling Ampu er tilpasset spesielle behov.

Våre seil er konstruert slik at de fordeler vekten og trykket jevnt, for maksimal sikkerhet og komfort.

## Individuell utprøving

Vi anbefaler individuell utprøving, og tilbyr et bredt sortiment av forskjellige modeller og størrelser. Som støtte ved utprøvingen anbefaler vi bruk av en utprøvningsprotokoll.

### Fargemerking

Fargemerking på løfteløkkene gjør det enkelt å finne riktig innstilling.

### Polstring

Polstring i rygg- og benstøtter fordeler tyngden over en større flate og skaper dermed bedre komfort for brukeren.

### Belte

EvoSling Hygiene har et belte for ekstra høy sikkerhet og har dessuten sklisikring på innsiden.

### Bånd

Båndet gjør posisjonen enkel ved løfting.

EvoSling MediumBack  
Polstret



### Fleksibilitet

Avstanden til løftebøylen og brukers sittvinkel kan justeres, takket være at det finnes flere løfteløkker på både hode- og benstøtter.

### Tre ulike rygghøyder

HighBack,  
MediumBack  
og LowBack.

### Etikett

Tydlig og praktisk informasjon på den synlige etiketten. Vaskeanvisning og teknisk informasjon ligger beskyttet bak.

### Ryggglomme

Lommen nederst på ryggen og på benstøtten letter påføring av seilet.

## Informativ och tydelig merking

På den store etiketten har vi plassert den informasjon som er viktig ved daglig bruk. Vaskeanvisning, serienummer og annen teknisk informasjon finnes bak etiketten i en lomme som beskytter mot mekanisk slitasje under vask.


## Periodisk inspeksjon

Seilet har en egen etikett der man kan notere når periodisk inspeksjon er utført, den er plassert i etikettlommen. Ved å notere tidspunktet for første gangs bruk på etiketten, kan man planlegge når første inspeksjonen skal utføres.


## Materiale

Seilene av polyester er slitesterke og bestandige. Materialet er føyelig og lettstelt med en smussavvisende overflate.

Seilene i polyesternettet er slitesterke, bestandige og føyelige. Materialet gir god ventilasjon.

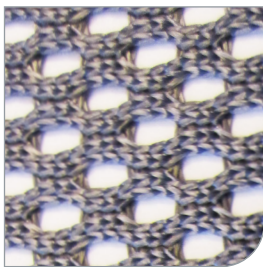

Polyesternettet

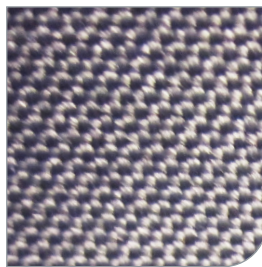

Polyester

Periodic inspection performed

YEAR

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								

MONTH

User name / Navn

.....

.....

.....

## Beskrivelse EvoSling seil

### Anbefalt brukervekt

XS	17–25 kg
S	25–50 kg
M	45–95 kg
L	90–160 kg
XL	160–240 kg
XXL	230–300 kg

### Materiale

Polyester  
PE-skum (polstrede modeller)

### Vaskeanvisning



Ved vask i høye temperaturer blir materialet raskere slitt.

### Fargekode



# INNEHÅLL

**molift**<sup>®</sup>  
a part of Etac

Molift EvoSling seil	2
Nova StandUp	6
Molift EvoSling HighBack	7
Molift EvoSling MediumBack	8
Molift EvoSling LowBack	9
Molift EvoSling Hygiene	10
Molift EvoSling Ampu MediumBack	11
Molift EvoSling Comfort MediumBack	12
Molift EvoSling Shadow HighBack	13
Tilbehør till Molift EvoSling	14

---

[www.etac.no](http://www.etac.no)

# Nova StandUp sele


SELE FOR AKTIV PERSONLØFTER NOVA 500NG

## Stabil og komfortabel

Nova StandUp sele er enkel å påføre og trenger minimalt med justeringer. Nova StandUp sele fordeler vekten over hele ryggen og gir komfortabel støtte for brukeren gjennom hele forflytningen. Selen har sklisikring på innsiden for å unngå at den glir ved oppreisning. Selen er produsert i myk polyester.



## Tilbehør

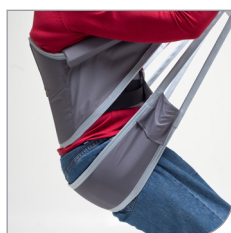

### Fleksistropp

Gir ekstra støtte under den innledende delen av oppreisningen

Art. nr. 1723310



### Mykt polster

Ekstra mykt polster, spesielt for brukere som er sensitive for trykk.

Art. nr.  
Str. XS-M, 2 stk 1722100  
Str. L-XXL, 2 stk 1722110

### Størrelse

Nova StandUp XS	1722010
Nova StandUp S	1722020
Nova StandUp M	1722030
Nova StandUp L	1722040
Nova StandUp XL	1722050
Nova StandUp XXL	1722060

### Art. nr.

# Molift EvoSling HighBack

EN BASISMODELL FOR BRUKERE SOM TRENGER MYE STØTTE

## Behagelig støtte

EvoSling HighBack gir støtte til hele ryggen og har en behagelig hodestøtte. Seilet passer de fleste brukere, også brukere med liten kropps- og hodestabilitet.

EvoSling HighBack passer ved løft til og fra liggende posisjon og ved løft fra gulv. Seilet gir en behagelig tilbakeleant sittestilling.

Lommen på ryggen og på benstøttene letter påføringen av seilet.

## To varianter

Molift EvoSling HighBack finnes i to varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter, og i et mykt polyesternet med polstrede benstøtter og polstret hodestøtte.




### Letter plassering

Seilet i polyesternet har en rød søm midt bak, for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.



EvoSling HighBack  
Nett Polstret

### Molift EvoSling HighBack

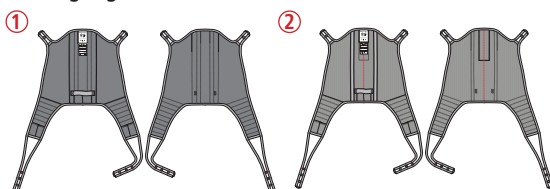

#### Størrelse

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### ① Polstret

art.nr:  
1722810  
1722820  
1722830  
1722840  
1722850  
1722860

#### ② Nett Polstret

art. nr:  
1722710  
1722720  
1722730  
1722740  
1722750  
1722760

#### Størrelse


XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### Ⓐ Rygghøyde

70 cm  
80 cm  
93 cm  
100 cm  
105 cm  
110 cm

#### Ⓑ Bredde

30 cm  
35 cm  
40 cm  
47 cm  
54 cm  
60 cm

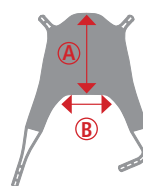

# Molift EvoSling MediumBack

EN BASISMODELL FOR BRUKERE SOM HAR HODEKONTROLL MEN SOM TRENGER STØTTE FOR HELE RYGGEN

## Støtte for hele ryggen

EvoSling MediumBack er en god basismodell som passer i de vanligste løftesituasjoner. Seilet gir en komfortabel oppreist sittestilling, med støtte for hele ryggen.

Brukeren plasserer armene på innsiden av seilet.


En lomme på ryggen og på benstøttene letter påføringen av seilet. Seilet i polyesternet har en rød søm midt bak for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.

## To varianter

Molift EvoSling MediumBack finnes i to varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter og et i mykt polyesternet med polstrede benstøtter.



### Molift EvoSling MediumBack

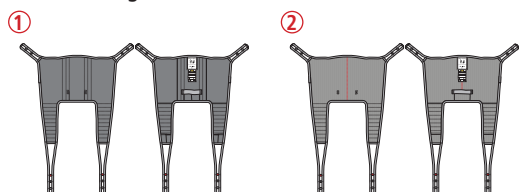

#### Størrelser

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### ① Polstret art.nr:

1723010  
1723020  
1723030  
1723040  
1723050  
1723060

#### ② Nett Polstret art.nr:

1723110  
1723120  
1723130  
1723140  
1723150  
1723160

#### Størrelse


XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### A Rygghøyde

54 cm  
56 cm  
60 cm  
67 cm  
70 cm  
73 cm

#### B Bredde

30 cm  
37 cm  
49 cm  
57 cm  
72 cm  
81 cm

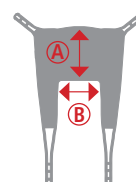



# Molift EvoSling LowBack

EN BASISMODELL FOR AKTIVE BRUKERE MED GOD KROPPSSTABILITET


## Støtte opp til skuldrene

EvoSling LowBack er en god basismodell som gir støtte opp til skuldrene. Seilet gir en god sittestilling, og brukeren kan plassere armene på innsiden eller utsiden.


Seilet er enkelt å plassere, takket være en lomme på ryggen og på benstøttene. Seilet i polyesternet med en rød søm midt bak for å gjøre det lettere å plassere seilet symmetrisk.

## Tre varianter

Molift EvoSling LowBack finnes i tre varianter. Polyester med polstring i rygg og benstøtter, samt i mykt polyesternet med eller uten polstrede benstøtter.

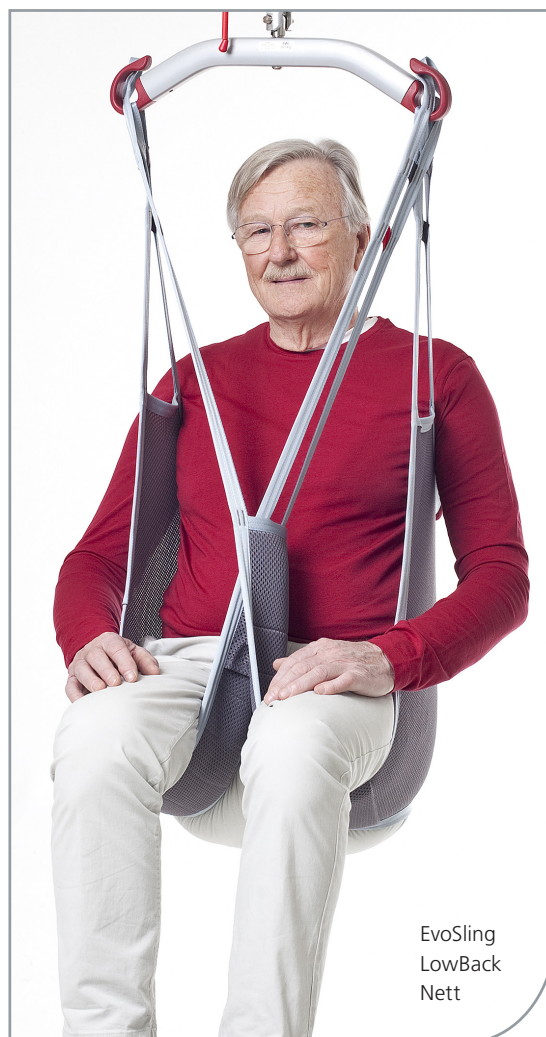

### Molift EvoSling LowBack

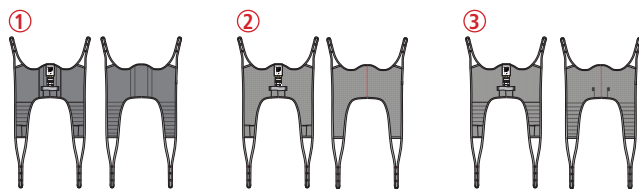

#### Størrelse

XS  
S  
M  
L  
XL  
XX  
L

#### ① Polstret

##### art.nr:

1722310  
1722320  
1722330  
1722340  
1722350  
1722360

#### ② Nett

##### art.nr:

1722410  
1722420  
1722430  
1722440  
1722450  
1722460

#### ③ Nett

##### Polstret

art.nr:  
1722510  
1722520  
1722530  
1722540  
1722550  
1722560

#### Størrelse

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### A


#### Rygg høyde

41 cm  
43 cm  
44 cm  
47 cm  
51 cm  
55 cm

#### B

#### Bredde

40 cm  
43 cm  
48 cm  
55 cm  
62 cm  
70 cm

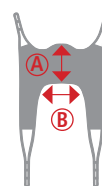

# Molift EvoSling Hygiene

FOR BRUKERE MED GOD KROPPSSTABILITET OG MUSKELTONUS

## Enkel å plassere

EvoSling Hygiene har lav rygg og stor benstøtteåpning for å gjøre det lettere å kle av og på seg, og ved toalettbesøk.

## Lommer



Molift EvoSling Hygiene er produsert i polyester og har polstring i rygg og benstøtter. Lommene på benstøttene gjør det enkelt å plassere benstøttene

## Ekstra trygghet

EvoSling Hygiene har et belte for økt trygghet i forbindelse med løftet.



### Molift EvoSling Hygiene

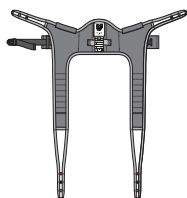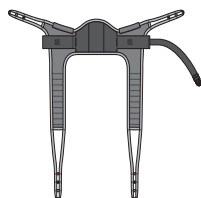

**Størrelse**

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

**Polstret art.nr:**

1722210  
1722220  
1722230  
1722240  
1722250  
1722260

**HMS nr**

214199

**Størrelse**

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

**A**


**Ryggghøyde**

29 cm  
33 cm  
33 cm  
33 cm  
34 cm  
35 cm

**B**

**Beltets bredde**

35 cm  
46 cm  
52 cm  
70 cm  
73 cm  
76 cm

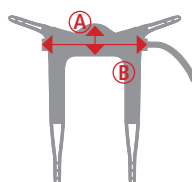

# Molift EvoSling Ampu MediumBack

FOR BRUKERE MED BENAMPUTASJON ELLER SOM HAR LAV MUSKELTONUS


## Trygg og behagelig

EvoSling Ampu MediumBack har smal benstøtteåpning og skulderhøy rygg. Seilets benstøtter koples slik at de overlappes under bena. Benstøttebåndet tres igjennom båndstyringsløkken for å holde benstøttene sammen. Liten benstøtteåpning minsker risikoen for at brukeren glir ut av seilet.



En lomme på ryggen og på benstøttene gjør det lettere å påføre seilet. Seilet har en rød søm midt bak som gjør det lettere å påføre seilet symmetrisk

## Sklisikring for økt trygghet

EvoSling Ampu er produsert av polyesternettt og har et sklisikkert stoff på innsiden i sitteflaten (baken), for å gi økt trygghet i forbindelse med løftet. Brukeren får en god tilbakeleent sittestilling. Benstøtten er polstret for å gi beste komfort.

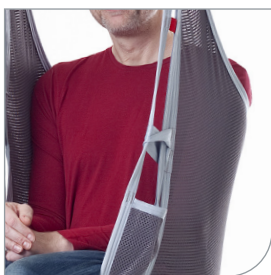

### Molift EvoSling Ampu MediumBack

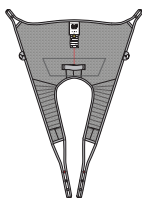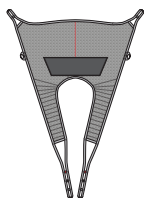


#### Størrelse

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### Nett Polstret art.nr:

1723210  
1723220  
1723230  
1723240  
1723250  
1723260

Størrelse	<b>A</b> Rygghøyde	<b>B</b> Bredde
XS	47 cm	21 cm
S	52 cm	26 cm
M	63 cm	32 cm
L	77 cm	42 cm
XL	90 cm	48 cm
XXL	100 cm	54 cm

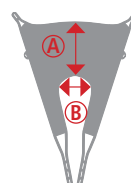

# Molift EvoSling Comfort MediumBack

ET HELSEIL FOR BRUKERE MED SPESIELLE BEHOV FOR STØTTE

## Støtte under hele sitteflaten

EvoSling Comfort MediumBack Nett er et helseil uten delte benstøtter og med skulderhøy rygg. Seilet gir brukeren støtte under hele sitteflaten (baken) og er godt egnet hvis brukeren har leddproblemer eller er følsom for smerte.

Seilet plasseres under brukeren i liggende stilling. Det er produsert av polyesternet som gir god ventilasjon, og kan etterlates i rullestolen under brukeren.

## Justerbar sittevinkel

Sittevinkelen kan justeres, takket være at det finnes flere løfteløkker på både hode- og benstøtten.


Seilet har en rød søm midt bak for lettere å kunne plassere seilet symmetrisk.



### Styrebånd

Styrebåndet er integrert i kantbåndet for at seilet skal føles behagelig.

### Molift EvoSling Comfort MediumBack

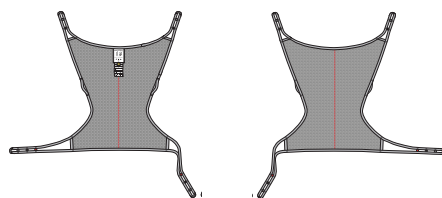


#### Størrelse

XS  
S  
M  
L  
XL  
XXL

#### Nett art.nr:

1722610  
1722620  
1722630  
1722640  
1722650  
1722660

Størrelse	<b>A</b> Rygg høyde	<b>B</b> Bredde
XS	77 cm	85 cm
S	90 cm	86 cm
M	102 cm	94 cm
L	115 cm	113 cm
XL	118 cm	120 cm
XXL	120 cm	126 cm

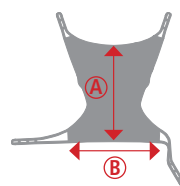

# Molift EvoSling Shadow HighBack

ET SMIDIG SEIL SOM FORMER SEG ETTER KROPPEN

## Kan ligge igjen i rullestol og sitteskall

EvoSling Shadow HighBack er et høyt seil med delte benstøtter som er komfortabel og fleksibelt. Modellen passer brukere med ekstra behov for støtte ettersom den tilpasser seg til kroppen.

EvoSling Shadow passer mange løftesituasjoner, og da spesielt ved forflytning til rullestol/ rullestol med formstøpt sete der seilet må ligge igjen under brukeren.



EvoSling Shadow har seks opphengsbånd med flere løfteløkker for god fleksibilitet. Sittevinkelen og hodestøtten kan justeres for den individuelle bruker og armene kan plasseres innenfor eller utenfor seil.

## Former seg etter kroppen

EvoSling Shadow HighBack er produsert i fleksibel polyesternet som gir god ventilasjon. Seilet har ikke ngen plasseringslommer eller polstring. Kantbåndet er ekstra tykt. EvoSling Shadow kan etterlates i rullestol eller sitteskall under bruker etter forflytning. Hodestøtten er justerbar i tre ulike leier. De største størrelsene, M-XL, har skålformet hodestøtte.



### Molift EvoSling Shadow HighBack

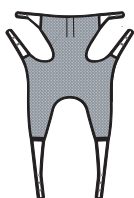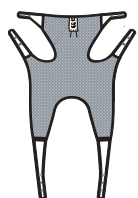


Størrelse	Nett Art nr:
XXS	1723900
XS	1723910
S	1723920
M	1723930
L	1723940
XL	1723950

#### Rengjøring:

Seilet kan vaskes i temperaturer fra 60 til 85°C.

- Tøretrommel maks 60 °C.
- Må ikke strykes
- Må ikke renses
- Ikke bruk blekemiddel

Størrelse	A Rygghøyde	B Bredde
XXS	65 cm	28 cm
XS	71 cm	30 cm
S	78 cm	31 cm
M	90 cm	33 cm
L	98 cm	40 cm
XL	102 cm	51 cm

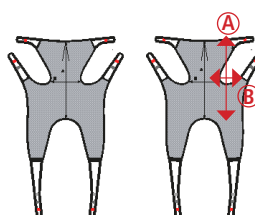

# Tilbehør till Molift EvoSling

## Molift EvoSling Head Support

### Tilbehør til seil uten hodestøtte



odestøtten festes i seilet, og lengden kan justeres trinnløst, takket være plastspennen. Den gir brukeren en behagelig støtte for hodet, og kan være et godt supplement når brukeren får økt behov for støtte.


**Produkt**  
Molift EvoSling HeadSupport

**Artikkelnummer**  
1723400



## Molift EvoSling Soft Padding

### For trykkfølsomme brukere

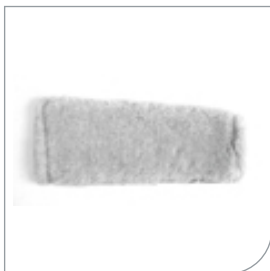

EvoSling Soft Padding er trykkavlastende polstringshylser som tres på bendelerne på seil med delte benstøtter.

Produkt	Artikkelnummer
Molift EvoSling Soft Padding XS-M	1723710
Molift EvoSling Soft Padding L-XXL	1723740
Molift EvoSling Hygiene Soft Padding XS-XXL	1723810


## Molift EvoSling Extension Loop

### Bånd for enklere tilpasning




Brukes for å forlenge løftebåndet, eller for å holde sammen benstøttene på seil med delte benstøtter. Bestill **en** stk for et komplett par.

Produkt	Artikkelnummer
Molift EvoSling Extension loop 16 (+9) cm	1723510
Molift EvoSling Extension loop 25 (+18) cm	1723520

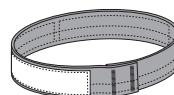

## Molift Strap Marker

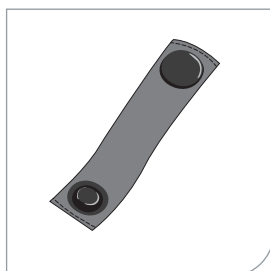

Markeringsstropp av valgt løfteløkke på løftebånd til hodestøtte eller benstøtte. Marker de løfteløkker som ble valgt ved den individuelle utprøvingen av seilet.

**Produkt**  
Etac Molift Strap Marker

**Artikkelnummer**  
1723600

## Molift EvoSling FlexiStrap

### Unngå tunge løft



olift EvoSling FlexiStrap brukes for enkelt og lett å løfte et ben eller en arm ved sykepleie eller behandling. Løftebåndet er produsert i polstret polyester, og finnes i to bredder. Det er en lomme på den ene siden av båndet som letter plasseringen.

#### Produkt

Molift EvoSling FlexiStrap, standard  
15 x 95 cm  
Molift EvoSling FlexiStrap, bred  
25 x 95 cm

#### Artikkelnummer

1723310

1723330



## Immedia SlingOn

### Når brukeren ikke kan legges på siden



vis man kombinerer en "Immedia SlingOn" med et seil, kan man plassere seilet direkte under brukeren, dvs uten først å legge brukeren over på siden.

#### Produkt

Immedia SlingOn, small  
80 x 100 cm  
Immedia SlingOn, medium  
80 x 170 cm  
Immedia SlingOn, large  
120 x 150 cm

#### Artikkelnummer

IM437/S

IM438

IM437





“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og fullføre sine drømmer uavhengig av fysiske omstendigheter.”

Du finner også nyheter og mer informasjon på [www.etac.no](http://www.etac.no)