



Molift Mover 180

En lätt och kompakt personlyft som passar både i hem, vårdhem och på sjukhus

Lätt att manövrera

Molift Mover 180 har en lätt aluminiumkonstruktion som gör den enkel att manövrera. Det stora lyftintervallet på 36-173 cm gör det möjligt att lyfta från högre höjd likväl som lyft från golv. Både 2- och 4-punkts lyftbyglar finns tillgängliga och kan enkelt bytas utan verktyg tack vare snabbkopplingen.

Utrustad med 75 mm hjul som ger lyften en låg frigång möjliggör att köra in lyften under de flesta sängar på marknaden. 100 mm hjul finns som tillval för ännu lättare manövrering.



Handkontroll

Robust och avtorkningsbar, Indikatorer för batteri, överbelastning och service. Utbytbar kabel.



Unikt körhandtag

Körhandtaget ger ett ergonomiskt och naturligt grepp med flera olika alternativ.



Alternativ för lyftbygel

2-punkts och 4-punkts lyftbyglar finns i flera storlekar.



Litiumbatteri

Batteriet är utvecklat för lång hållbarhet.

Funktioner

Ergonomisk hantering

Molift Mover 180 är utrustad med Molifts unika körhandtag som ger flera och flexibla greppmöjligheter för förbättrad ergonomi för vårdpersonalen.

Batteriet

Batteriet har avancerad Li-Ion-teknik och en säker förseglad design som gör det avtorkningsbart (IPX6). Det väger endast 0,9 kg och kan bytas ut med endast en hand.

Batteriet kan laddas direkt på lyften och det finns även en extern laddare. Laddningstiden är endast 3,5 timmar. Fullt uppladdat klarar den 160 lyft med 75 kg per lyft och är kompatibel med alla Molifts mobila lyftar.

Batteriet är konstruerat för att hålla länge och har en förväntad livslängd på 1.700 laddningscykler.

Speed boost

Speed boost-funktionen möjliggör ökad hastighet när lyften är obelastad.



Handkontroll

Handkontrollen är robust och väl utprovad. Den har en batterinivåindikator, överbelastningsindikator och serviceindikator för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Kabeln är utformad för att hålla länge och kan enkelt bytas ut om den skadas, och handkontrollen är avtorkningsbar (IPX6).

Molift Service Tool

Molift Mover 180, liksom alla Molifts lyftar, är utrustad med ett unikt serviceaviseringsystem som meddelar när service krävs. Den integrerade serviceprogramvaran kan också visa data om hur lyften är använd och kan hjälpa serviceteknikerna med felsökning.

Dessutom är lyften utrustad med Bluetooth-anslutning, vilket möjliggör trådlös anslutning till Molift Service Tool.

Förväntad livslängd

Lyftanordningen har en förväntad livslängd på 30.000 cykler eller 15 år, beroende på vad som inträffar först.

Beskrivning

Molift Mover 180 integrerad laddare exkl.lyftbygel

Art.nr

M1801

Material

Aluminium, stål, plast

Vikt

Max brukarvikt (SWL)
Enhetens vikt (inkl batteri)

180 kg
31,9 kg

Mått

Höjd
Längd
Benhöjd
Hjulstorlek
Lyftintervall
Lyft min-max med 2-punkts lyftbygel
Lyft min-max med 4-punkts lyftbygel

1940 mm
1260 mm
105 mm
75/100 mm
1365 mm
360 - 1730 mm
265 - 1630 mm

Mått

Utvändigt mått med stängda ben 670 mm
Utvändigt mått med öppna ben 1145 mm
Invändigt mått med stängda ben 555 mm
Invändigt mått med öppna ben 1025 mm

Teknisk information

Batteri Li-Ion 25.2V, 2.85Ah
Batteriets laddningstid 3,5 timmar
Lyfthastighet 46 mm/sek
Kapacitet 160 lyft/75 kg

Rengöring



Använd pH-neutralt rengöringsmedel. Om desinfektion krävs, använd isopropylalkohol. Använd inte slipande eller frätande ämnen för rengöring.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

0371-58 73 00
info@etac.se
www.etac.se

etac®
Creating Possibilities