



Molift Quick Raiser 205

Oppreisningsløfter
med høy løftekapasitet

 **etac**[®]



Molift QuickRaiser 205

Oppreisningsløfter med høy løftekapasitet

Molift Quick Raiser 205 er en innovativ oppreisningsløfter med elektrisk justerbare ben og høy løftekapasitet. Oppreisningsløfteren er komfortabel, stabil og har eksepsjonelt enkel manøvrering.

Stabil og kompakt

QuickRaiser 205 er kompakt, stabil og meget enkel å manøvrere. Den unike plasseringen av hjulene, vinklet løftebøyle og meget god vektfordeling i understellet gir liten svingradius og enkel manøvrering selv i små rom. Ved å velge de minste hjulene (50mm) er det kun 7,5cm høyde fra gulvet og får plass under de fleste senger og stoler samtidig som de elektrisk justerbare bena gir tilgang nesten hvor som helst.

Naturlig bevegelsesmønster

Den aktive løftearmen (fire punkt) og RgoSling Active seil gir ekstra støtte ved forflytning og oppreisning fra stå-til-stå. Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster og fullfører oppreisningsbehovet til brukere som har noe egen løftekapasitet. Den aktive løftearmen kombinert med seilet gir en komfortabel, stabil og trygg forflytningssituasjon.




Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.	Løftehastighet	Svingradius
Molift QuickRaiser 205			Løftehastighet 75 kg	1150 mm
- hjul 75/100mm	242660	29100-00	Oppreisningshastighet 205 kg	
- Active, hjul 75/100mm		29100		
- StandUp, hjul 50/75mm		29001		
- Active, hjul 50/75mm		29000		
- StandUp, hjul 75/100mm		29101		
			Løftevidde	60 cm
			Bredde understell	
			Utvendig	620 mm
			Innvendig	200 mm
			Hjul	Høyde understell
			Ø 75/50mm	76 mm
			Ø 100/75mm	101 mm
			Hjul	Rom under løfteren
			Ø 75/50mm	27 mm
			Ø 100/75mm	52 mm
			Hjul	Høyde på fotplate
			Ø 75/50mm	65 mm
			Ø 100/75mm	90 mm
Vekt				
Maks brukervekt (SWL)		205 kg		
Totalvekt		44 kg		
Understell		17 kg		
Løftearm		4,5 kg		
Knestøtter		3,5 kg		
Søyle (tyngste del)		19 kg		
Batteri SLA 24V		2,9 Ah		
Ladetid		6 timer		
Antall løft (75 kg) med fulladet batteri		>100		
				Rengjøring
				Rengjør produktet med pH-nøytrale rengjøringsmidler (pH 5-9), eller med en 70% desinfiserende løsning. Kan dekontamineres på maks 85°C.

Egenskaper



Ergonomisk design

Den skrå søylen gir et naturlig bevegelsesmønster ved oppreising.

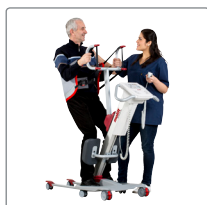

Komfort, trygghet og stabilitet

Den aktive løftearmen (fire punkt) og RgoSling Active seil gir ekstra støtte ved oppreising.



Automatisk varsling

Automatisk varsling for (årlig) periodisk ettersyn og service.



Enkel å manøvrere

Enkel å manøvrere ved forflytnings- og oppreisingssituasjoner, toalett, sitte-til-stå og oppreisingstrening.



Active løftearm og RgoSling Active seil.


Tilbehør



StandUp løftearm

Ideell ved bruk av RgoSling StandUp seil.

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
StandUp Løftearm	242643	2910061

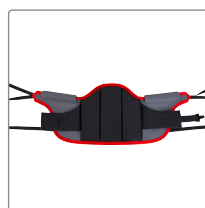

RgoSling Active seil

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Str. XS	242618	1720910
Str. S	242619	1720920
Str. M	242620	1720930
Str. L	242621	1720940
Str. XL	242622	1720950



Fotbrett

Forhøyningssett fotbrett, byggehøyde 10cm.

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Fotbrett	242644	2910065



Komplett sett m/braketter og puter

Alternative leggstøtter med små eller store puter, og leggstropper.

Beskrivelse	Art. nr.
Sett m/stropper og puter str. S	2910059
Sett m/stropper og puter str. L	2910056



Innlegg til fotplate

Innlegg med antisklimate materiale for å øke friksjon.

Beskrivelse	HMS nr.	Art. nr.
Sett m/innlegg til fotplate	242646	290151



Puter, sett

Kun puter, ingen leggstropper

Beskrivelse	Art. nr.
Sett puter, str. S	2910076
Sett puter, str. L	2910077



“Alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine sine drømmer
uavhengig av fysiske omstendigheter”

For siste nytt og oppdatert informasjon - se www.etac.com

Etac AS
Pb 249, 1501 Moss
Tel 815 69 469
hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac[®]
Skaper muligheter