

etac[®]

Creating Possibilities



molift[®]

Molift Raiser Pro

Den ergonomiska överflyttningplattformen för aktiv förflyttning

Molift Raiser Pro

Överflyttningssplattformen Molift Raiser Pro är utformad för att ge en aktiv och säker förflyttning av patienten och bästa möjliga förutsättningar för ett ergonomiskt arbetssätt för vårdaren.

Naturligt rörelsemönster

Molift Raiser Pro ger patienten möjlighet att använda sin egen muskelfunktion och förmåga vid uppresning och förflyttning. Det naturliga rörelsemönstret stimuleras och ger patienten en trygghet genom hela förflyttningen. Molift Raiser Pro är enkel att förstå och att använda.

Förflyttning i trånga utrymmen

Molift Raiser Pro är stabil och har en snäv svängradie, vilket gör den mycket enkel att manövrera. Den är väl lämpad i trånga utrymmen som till exempel toaletter.

Fungerar i alla vårdmiljöer

Molift Raiser Pro ger möjlighet till träning och rehabilitering i alla vårdmiljöer vid varje förflyttning. Mobilisering kan börja så snart patientens tillstånd tillåter, vilket innebär att patienten tidigt kan förbättra sin balans i sittande och stående. Molift Raiser Pro ger alltid ett tryggt stöd.



Beskrivning	Art.nr.	Material
Molift Raiser Pro	16090204	Pulverlackerad aluminium, plast, stål
Vikt		Tvättinstruktioner
Total vikt	10,7 kg	
Bottenplatta	5,4 kg	
Handtagsbåge	5,3 kg	
Max brukarvikt (SWL)	170 kg	
Mått		Rengör/desinficera produkten med vanliga rengöringsmedel utan slipmedel med ett pH-värde mellan 5 och 9 eller med 70 % desinfektionssprit. Produkten tål rengöring i kabinetttdiskdesinfektor i 70 °C i 10 minuter.
Höjd	1200 mm	
Djup	630 mm	
Bredd	540 mm	

Kliniska fördelar:

- Minskar arbetsrelaterade skador/belastning för vårdgivaren.
- Främjar tidig rehabilitering.
- Förbättrar patientens välbefinnande.
- Möjliggör vård med en hand.

Funktioner



Ergonomiskt handtag

Handtaget är utformat för att ge ett optimalt grepp med en mjuk, varm känsla och många greppmöjligheter för både patient och vårdare.



Enkel höjdjustering av underbensstödet

Underbensstödet är enkelt att justera med en hand. Stödet är mjukt, ger stöd åt sidorna och har delade dynor som bekvämt följer rörelsen från sittande till stående.



Centralbroms

Genom att aktivera bromsen på den ena sidan bromsas båda hjulen vilket ger en snabb och säker användning. När bromsen aktiveras hörs ett tydligt klickljud.



Låg instegshöjd

Den vinklade kanten och den låga instegshöjden på 35 mm gör det enkelt att få upp fötterna på fotplattan. Tydliga markeringar underlättar placeringen av fötterna, ståytan har en antihalkyta.

Molift Raiser Pro passar i de allra flesta miljöer. Den fungerar utmärkt i hemmet, på vårdboendet eller på sjukhusets alla avdelningar.





Trygghetsband Molift Assist Strap

Molift Assist Strap ger extra säkerhet och stöd runt ryggen eller höfterna. Den kan användas för att ge patienten stöd under förflyttningen.
Finns i två storlekar, S/M och L/XL.




Trygghetsband med glidhylsa Molift Assist Sleeve

Trygghetsband med glidfunktion. När patienten behöver hjälp att resa sig kan en eller två vårdare assistera med hjälp av Molift Assist Strap. Placeras i höjd med stussen.
Finns i två storlekar, S/M och L/XL



Trygghetsband med glidhylsa Molift Assist Sleeve Wide

En kombination av Trygghetsband Molift Assist Strap och Glidhylsa Molift Assist Sleeve Wide.
En storlek.

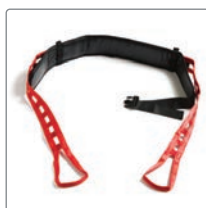

Trygghetsband med bälte Molift Assist Belt

Med Molift Assist Belt kan vårdaren assistera patienten att resa sig. Kan användas av en eller två vårdare. Molift Assist Belt kan placeras i höjd med stussen eller runt midjan.
Finns i två storlekar, S/M och L/XL.



Ståplatta Molift Raiser Pro

Raiser Pro ståplatta är ett tillbehör som kan användas när patienten behöver ett högre fotläge vid användning av Raiser Pro. Det ökar höjden med 9 cm och behöver ingen form av fixering, den passar in direkt på bottenplattan.



Uppresningshandtag Molift Soft Handles

Om det är svårt för patienten att nå handtaget kan Soft Handles användas som hjälp.
Levereras i 2-pack.



Molift glidhylsa

Glidhylsa till trygghetsband Molift Assist Sleeve.



Molift glidhylsa bred

Bred glidhylsa till trygghetsband Molift Assist Strap.



Molift bälte

För Trygghetsband Molift Assist Belt.



Hälband Molift Raiser Pro

Hälbandet är ett tillbehör som används när en patient behöver stöd för att hålla fötterna i rätt läge. Produkten monteras på Molift Raiser Pros vred och kan justeras i 3 olika längder. Hälbandet ska ge stöd för patientens hälar vid stående på bottenplattan.

Tillbehör

Tillbehör	Specifikation	Art.nr.
Trygghetsband Molift Assist Strap	S/M	82508
Trygghetsband Molift Assist Strap	L/XL	82509
Uppresningshandtag Molift Soft Handles	2 pack	82511
Glidhylsa Molift Assist Strap	För 82528 och 82529	82537
Trygghetsband Molift Assist Sleeve med glidhylsa	S/M	82528 (82508 + 82537)
Trygghetsband Molift Assist Sleeve med glidhylsa	L/XL	82529 (82509 + 82537)
Molift bälte	För 82964 och 82965	82963
Trygghetsband Molift Assist Belt	S/M	82964 (82508 + 82963)
Trygghetsband Molift Assist Belt	L/XL	82965 (82509 + 82963)
Glidhylsa Molift Assist Sleeve Wide	För 90301	90300
Trygghetsband Molift Assist Strap Wide	en storlek	90301 (82509 + 90300)
Ståplatta Molift Raiser Pro	9 cm	28612
Hälband Molift Raiser Pro	en storlek	83211

Tvättning

Band och bälte:
Maskintvätt 80 °C. Torktumling i låg temperatur, max. 50 °C.
Ståplatta och Hälband:
Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit.



Ytterligare fördelar

Varje liten detalj på Molift Raiser Pro har en genomtänkt ergonomisk utformning som innebär fördelar för både patienten och vårdaren.

Optimalt ergonomiskt grepp

Handtaget har en mjuk, varm känsla och är utformat för att ge flera greppmöjligheter.

Dubbla fästpunkter

Det är enklare för vårdaren att fästa tillbehören när fästpunkterna är placerade på sidan av handtaget.

Anpassningsbart benstöd

Det kan enkelt justeras med ett lätt grepp med en hand, och benstödet kan svängas för att följa skenbenet för bättre stöd.

Auditiv feedback

Den centrala låsmekanismen ger auditiv feedback när underbenstödet hamnar i låsläge efter höjjustering.

Lätt att manövrera

En liten vändradie gör den idealisk för små/trånga utrymmen.

Broms med auditiv feedback

Den integrerade centralbromsfunktionen på hjulen avger en ljudsignal när den aktiveras.

Svängd form för enklare åtkomst


Bottenplattan har en svängd kant för att passa mot en toalettstol. Det gör det enklare för patienten att komma närmare toalettstolen.

Total bredd – endast 54 cm

Den totala bredden är endast 54 cm, vilket gör det enkelt att passera genom trånga dörröppningar.

Låg instegshöjd

Den vinklade kanten och den låga instegshöjden på endast 35 mm underlättar placeringen av fötterna för patienten.

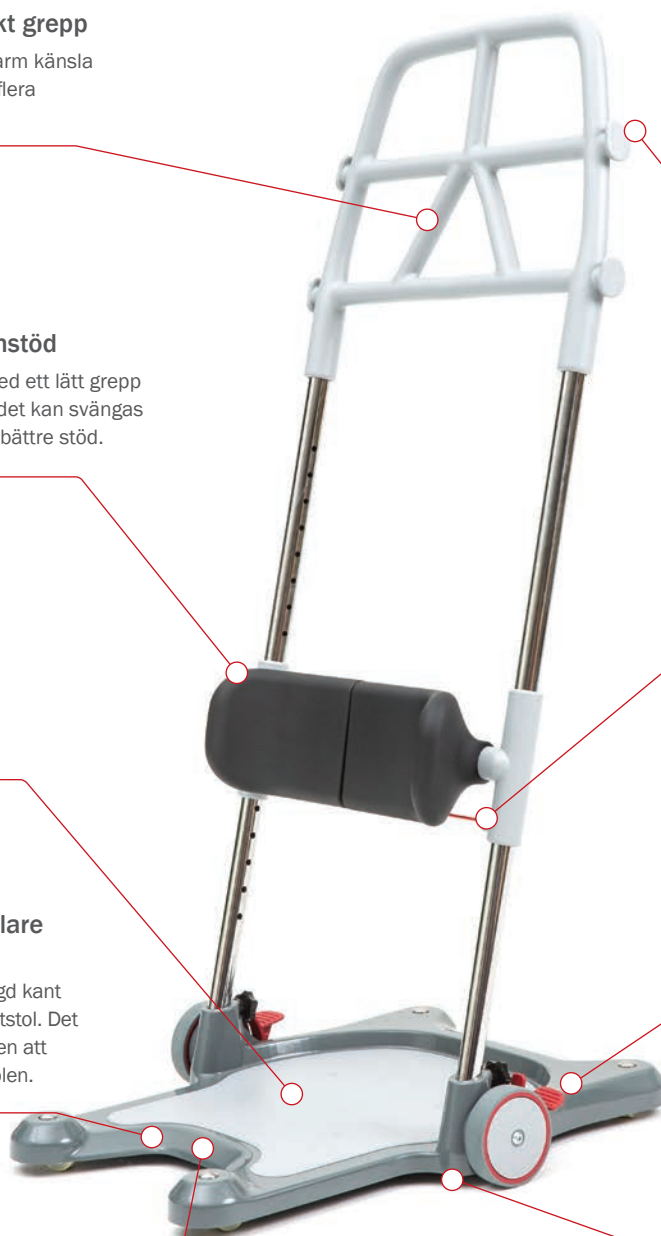

Den ergonomiska överflyttningsplattformen

Molift strävar efter komfort och säkerhet, och den aktiva överflyttningsplattformen Molift Raiser Pro är utformad utifrån ett ergonomiskt perspektiv och utvecklad för att möta vardagliga vårdbehov. Den hjälper vårdgivare att utföra överflyttningar med minimal risk för skador.

Definition av ergonomi

"Ergonomi handlar om att utforma saker så att de passar väl in i hur människor använder dem, vilket gör arbetet enklare och bekvämare."

Anette R. Raun – International Product Manager, Etac Patient Handling


Förbättra ergonomin

En lyckad ergonomisk produktdesign bidrar till färre skador och mindre fysisk trötthet. Feedback från patienter och vårdpersonal är viktig kunskap vid utvecklingen av en produkt som Molift Raiser Pro.

Mänskliga faktorer som fysisk, psykologisk och taktill upplevelse är andra aspekter som beaktas i designen.

Fästpunkter för tillbehör

Fästpunkterna är placerade på vardera sidan av handtaget. Fästpunkternas placering och utformning gör det enklare för vårdgivaren att fästa tillbehöret.

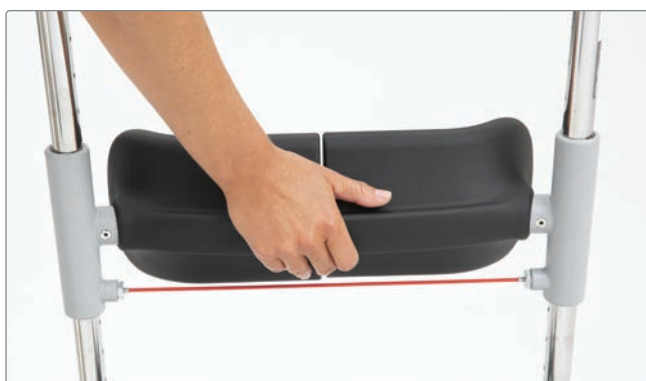

Ergonomi för vårdaren

Höjden är enkel att justera från alla positioner. Handflatan vilar mot dynan och höjden justeras med fingrarna, minimal kraft krävs.



Ergonomi för patienten

Underbenstödet är mjukt, bekvämt och följer rörelsen från sittande till stående. Dessutom ger det sidostöd för benen.



En win-win-lösning

Molift Raiser Pro är utformad i syfte att skapa en win-win-situation. Patienten medverkar och får träna sin funktion vid varje förflyttning.

Vårdaren kan stå i en bra arbetsställning och därmed minskar risken att utsättas för arbetsrelaterade skador.

-En vinst för både patienten och vårdaren.

Tidig mobilisering

Patienten kan mobiliseras tidigt, då Molift Raiser Pro kan användas för att stimulera patienten att återfå sina funktioner. Från balansträning vid sittande på sängkanten till uppresning och balans i stående.

Det ger patienten möjlighet till daglig träning för att på så sätt förbättra sin förmåga och styrka.

Den genomtänkta ergonomiska utformningen gör denna produkt till det perfekta valet för korta, aktiva förflyttningar i alla vårdmiljöer.



Lätt att hantera och lätt att bära

Bottenplattan har ett handtag som är utformat för bekväm transport. Genom att lossa två knoppar kan du enkelt koppla bort bottenplattan från den övre delen och bära den utan ansträngning.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 info@etac.se

 www.etac.se

**etac**[®]
Creating Possibilities