

**etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities



R82<sup>®</sup>

# R82 Mustang

Ett gånghjälpmedel med helt nya möjligheter i fyra storlekar.



# R82 Mustang

Mustang är ett gånghjälpmedel med en användbarhet och flexibilitet som stimulerar barnets utveckling på ett sätt som inga andra hjälpmedel. Mustang kan användas som ett framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel och är utvecklad för barn med nedsatt balans och motorik.

## Passar både stora och små

Mustang finns i fyra storlekar och passar barn från 1 års ålder till ungdomar upp till en längd på 170 cm. Underrede och bålstöd beställs separat, vilket gör det enkelt att välja storlek på bålstöd individuellt.

## Funktionell och genomtänkt

Mustang erbjuder ett mjukt och stabilt, höj- och sänkbart stöd för överkroppen som är gjort så att barnet lätt kan komma i och ur. Stödet för barnets bäcken kan varieras med vinkelställbar sadelsits, hängsits eller användas helt utan sits. Mustang kan därigenom anpassas just så mycket som är nödvändigt för varje barn.

Den upprätta och samtidigt lätt framåtlutade hållningen stimulerar barnets gångmönster och uppmuntrar barnet att delta i dagliga aktiviteter.



## Mustang Underrede

Gåstöd Mustang	Art.nr
Stl 1 gul 100 mm hjul	31869011
Stl 1 gul 200 mm hjul	31869015
Stl 2 vit 200 mm hjul	31869024
Stl 2 vit 100 mm hjul	31869025-4
Stl 3 röd 200 mm hjul	31869033
Stl 4 grå 200 mm hjul	31869042



## Bålstöd

Gåstöd Mustang skall kombineras med bålstöd. Bålstöd ingår ej som standard utan beställs separat.

Beskrivning	Art.nr
Small, inre omkrets 47 - 64 cm	31869810
Medium, inre omkrets 67 - 78 cm	31869820
Large, inre omkrets 87 - 114 cm	31869830

## Detaljer



### Central placering

Barnet är alltid centralt placerad i Mustang, vilket gör att den lätt kan svänga runt. Barnet kan då fokusera på att gå istället för att balansera.



### Lättillgänglig

Lätt tillgänglighet har varit en av de viktigaste grundfunktionerna när man utvecklat Mustang. Man öppnar bålstödet och kommer lätt in i sitt gästöd.



### Naturligt gångmönster

Mustang ger ett effektivt stöd och stimulerar ett naturligt gångmönster med möjlighet till lätt framåtlutad position



### Enkel att fälla ihop

Mustang tar liten plats och är därigenom lätt att bära med sig.



## Färger



Storlek 1 - gul



Storlek 2 = vit



Storlek 3 = röd



Storlek 4 = grå

# Gå med Mustang

Mustang kan användas både som ett framåtvänt eller bakåtvänt gånghjälpmedel och anpassas med stöd efter behov. Framåtvänd position passar bäst för barn i ett tidigt skede i gångutvecklingen, där motoriken är nedsatt, inte kan ta full belastningen på benen eller där stöd behövs runt bål och bäcken. Bakåtvänd position är mest lämplig för barn med mer bålstabilitet vars gångförmåga har utvecklats.

## Framåtvänd position



## Bakåtvänd position



## Hjulens funktioner

Hjulen har många praktiska funktioner:



Hjulbroms på alla 4 hjulen



Riktningsspärr



Släpbroms

Mustang har en unik backspärrsfunktion som enkelt kan låsas respektive öppnas:



Låst




Öppen



## Mått och vikt

Beskrivning	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Bredd, underrede (G)	520 mm	580 mm	650 mm	700 mm
Bredd, invändig (G1)	380 mm	450 mm	500 mm	560 mm
Längd med 100 mm hjul (H)	750 mm	830 mm	-	-
Längd med 200 mm hjul (H)	820 mm	900 mm	1000 mm	1100 mm
Höjd med 100 mm hjul (I)	400-650 mm	600-850 mm	-	-
Höjd med 200 mm hjul (I)	510-650 mm	600-850 mm	700-1050 mm	1100 mm
Sitshöjd över golvet (med sits = tillbehör) 100 mm	170-350 mm	240-410 mm	-	-
Sitshöjd över golvet (med komfortsits = tillbehör) 100 mm	170-430 mm	240-490 mm	-	-
Sitshöjd över golvet (med sits = tillbehör) 200 mm	260-440 mm	330-500 mm	450-680 mm	620-840 mm
Sitshöjd över golvet (med komfortsits = tillbehör) 200 mm	260-520 mm	330-580 mm	450-760 mm	620-920 mm
Bredd mellan handtag (handtag = tillbehör)	165-320 mm	165-320 mm	140-400 mm	140-400 mm
Höjd golv till ryggstöd	430-570 mm	520-660 mm	620-760 mm	950-1170 mm
Vinkling av centerstag (a1)	30°	30°	0-25°	0-25°
Svingradie	920 mm	1100 mm	1200 mm	1300 mm
Barnets längd fot - axel	400-650 mm	600-850 mm	700-1050 mm	870-1300 mm
Vikt utan tillbehör, 100 mm hjul	10 kg	11 kg	-	-
Vikt utan tillbehör, 200 mm hjul	13 kg	14 kg	18 kg	19 kg
Max brukar-/ lastvikt	30 kg	40 kg	60 kg	80 kg
Statisk stabilitet framåt	7°	7°	7°	7°
Statisk stabilitet bakåt	15°	15°	15°	15°
Statisk stabilitet sidled	4.5°	4.5°	4.5°	4.5°

OBS! Måtten för Mustang är angivna utifrån standardutförande och med inställningar i neutralläge. Med olika tillbehör kan måtten komma att förändras..

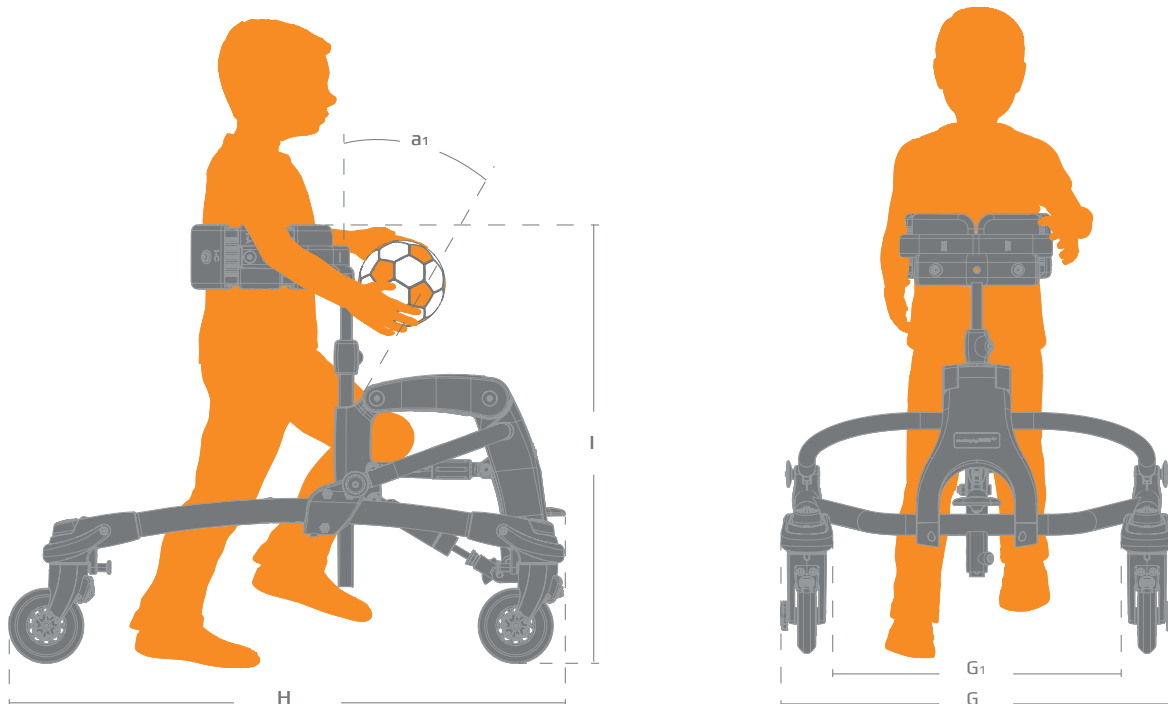



## Tillbehör



### Bålstöd

Gåstol Mustang skall kombineras med bålstöd. Bålstöd ingår ej som standard utan beställs separat. Mått för inre omkrets.

Small: 47–64 cm	31869810
Medium: 67–78 cm	31869820
Large: 87–114 cm	31869830



### Ländryggstöd

Ger ytterligare stöd för bäckenet. Måtten mäts från sisten.


Small: H 18 cm, D13–21 cm	
Large: H 20,5 cm, D 16,5–24,5 cm	
Small	31869250
Large	31869255



### Överdrag bålstöd

Överdrag till bålstöd för att ge ytterligare komfort.

Small: 8,5 x 25 cm (H x B)	
Medium: 12 x 38 cm (H x B)	
Large: 15 x 49 cm (H x B)	
Small	31869810-160
Medium	31869810-260
Large	31869810-360

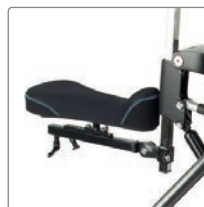

### Komfortsits

För bekväm avlastning i viloposition.

Stl 1–2, 22 cm	31869115
Stl 3–4, 30 cm	31869125



### Breddningsdel för bålstöd

För att förhindra att det blir ett mellanrum vid breddning av bålstödet. 11 x 5,5 cm (H x B)  
One size 31869225



### Höftstöd

För att ge extra stöd runt höften. Finns med eller utan stag för huvudstöd. (Utan sits)

Small för Mustang stl 1–2	31869220
Small för Mustang stl 1–2 med fäste för stag till huvudstöd	31869221
Large för Mustang stl 3–4	31869230
Large för Mustang stl 3–4 med fäste för stag till huvudstöd	31869231

För fler tillbehör – besök [etac.se](http://etac.se)







Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

 0371-58 73 00

 [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

 [www.etac.se](http://www.etac.se)

 **etac**<sup>®</sup>  
Creating Possibilities