



Positioneringspuder

Positionering 24/7



Positionering 24/7

I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte kropsfunktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer som f.eks. kontrakturer, fejlstillinger og sår. Hvis en person sidder i sin kørestol 7-10 timer om dagen, og ligger i sengen resten af tiden, er det klart, at der også må vurderes på den liggende stilling.

Etac tilbyder et bredt sortiment af positioneringspuder, med forskellige former og fyld. Ved brug af puderne kan man opnå:

- Forebyggelse (kontrakturer, fejlstillinger, tryksår)
- Behandling (f.eks. Bobath)
- Aflastning (komfort, bedre søvn, smertelindring).

Produktinformation

Puder



Bomuldsbetræk



Hygiejnebetræk



Det er indholdet det kommer an på!

Indholdet i positionerende puder kan bestå af mange forskellige materialer. Rhombo-Medical produkter består af det bløde positionerende Rhombo-fill®: små, bløde og elastiske skumstykker, eller af det mere fast positionerende Rhombo-med®: en kombination af Rhombo-fill skumstykker og polypropylen kugler. Enkelt sagt giver Rhombo-fill® mindre støtte med høj komfort, mens Rhombo-Med® giver meget støtte med høj komfort. Alle puderne har dobbelt bolster, hvilket gør dem meget slidstærke. Puderne kan vaskes igen og igen.

Rhombo-fill®



Blød og elastisk
Små luftige rhombeformede skumstykker

- Trykfordelende
- Støttende
- Ventilerende
- Beholder sin elasticitet over tid
- Varmefordelende
- Fugtfordelende
- Slidstærk
- Allergineutral
- Lang holdbarhed
- Vaskes ved op til 95°



Rhombo-fill er specielt udviklet til trykfordelende, komfortabel positionering. Rhombo-fill skumstykkerne består af 97% luft og 3% superelastiske og slidstærke PUR membraner.

Rhombo-med®



Formbar og støttende
Små luftige rhombeformede skumstykker med polypropylen kugler

- Stabiliserende
- Formbart, som tørt sand
- Ventilerende
- Varmefordelende
- Fugtfordelende
- Slidstærk
- Allergineutral
- Lang holdbarhed
- Vaskes ved op til 95°





Rhombo-med er udviklet til stabiliserende og trykfordelende positionering. Rhombo-med består af Rhombo-fill skumstykker kombineret med polypropylen-kugler. Ubelastet opfører Rhombo-med sig som tørt sand; det tilpasser sig kropsformen fuldstændigt. Belastet, giver Rhombo-med en fantastisk og præcis stabilitet og støtte.

Rhombo-med®

Lejringsrulle

Lejringsrullen kan bøjes, formes og tilpasses præcis efter brugerens leje. Den kan også rystes, så den bliver mere fyldig på nogle partier og tyndere på andre. I sideleje kan den formes, så den støtter hoved, ryg og ben. Er meget velegnet til brugere, der er hjerneskadede eller demente samt hemiplegi patienter, da den giver en god taktil stimulation.

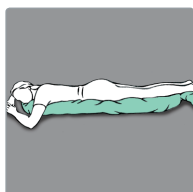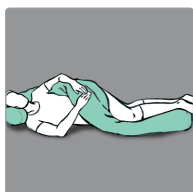

Puder			Bomuldsbetræk	Hygiejnebetræk	
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.	
Ø 20 x L 220	3546200	42985	3551201	3552201*	
Ø 20 x L 100	3546100	61852	3551101	3559101	
Ø 12 x L 140	3546500	62378	3551501	3559501	* Flamme hæmmende materiale

Rhombo-med®

Rygstøttepude med fane

Rygstøttepuden bruges i sideleje. Brugeren ligger på fanen, således at brugerens egen vægt holder puden på plads, så ryggen støttes præcist og stabilt. Puden kan også anvendes rygliggende for at beskytte udsatte kropsdele mod tryk fra sengeheste.



Puder			
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	
H 65 x B 90	3541937	17931	



Rhombo-med®

Rhombi Støttepude

Rhombi er en funktionel lille støttepude, som placeres der hvor der opstår mindre hulrum mellem krop og madras, når en person lejr. Typisk ved ankel og knæ. Anvendelse af Rhombi virker afspændende på kropsdelen, hvilket forplanter sig til resten af kroppen. Rhombi er den professionelle erstatning for dynesnippen - men den falder ikke sammen eller flader ud.



Puder			Bomuldsbetræk	Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
H 15 x B 30	3546900	51491	3551901	3559901

Rhombo-med®

Lejringspude med sidestykke

Lejringspuden med sidestykke anvendes til at give stabil støtte i forskellige sidelejer. Den faste fyldning former sig efter kroppen og giver et jævnt tryk. Puden kan anvendes for at støtte ryg, ben eller mave.




Puder			Bomuldsbetræk	Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
H 55 x B 90	3542876	17930	3551076	3552076*

* Flamme hæmmende materiale

Rhombo-med®

Kanalsyet pude

Den kanalsyede pude er en fleksibel pude, som beskytter, støtter og aflaster. Puden kan rulles og formes alt efter anvendelse. Puden kan formes og placeres under læggene for at aflaste hælene. I sideleje kan puden placeres mellem benene for at beskytte udsatte områder. I siddende stilling placeres puden i ryggen som støtte ved f.eks. spising. Husk at observere brugerens hud regelmæssigt. Såfremt der opstår rødme, byttes om til en Rhombo-fill Universalpude.

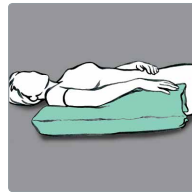


Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
H 75 x B 75	3543077	42987	3551077	3559077

Kilepude

Kilepuden anvendes under bækkenet, brystkassen eller skulderåget. Puden kan hjælpe til at skabe symmetri over midterlinien og dermed mindske fejlstillinger og kontrakturer. Herudover giver kilepuden en god taktil stimulation.





Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
25 x 20 x 10	3546400	62367	3551401	3559401

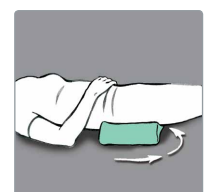

Rhombo-med®

Lejringspude

Lejringspuder kan blandt andet anvendes i rygliggende lege for at lette vejrtrækningen. Lejringspuderne løfter brystkassen mere end den mere bløde Rhomb-fill Universalpude. Lejringspuderne kan også anvendes som beskyttelse mod endegavle og sengeheste eller under knæ og ankler.

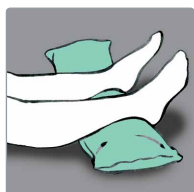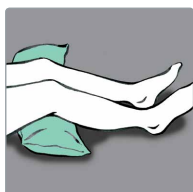

Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk	
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.	
H 20 x B 30	3540202	62379	3551002	-	
H 25 x B 80	3540205	28149	3551005	3552005*	
H 30 x B 40	3540206	17863	3551006	3559006	* Flammehæmmende materiale

Rhombo-med®

Venepude

Venepuden støtter og positionerer benene ved venøse problemstillinger og bruges også til aflastning af lænderyggen. Materialet former sig helt efter brugerens lægform og gør den venøse blodcirkulationen bedre. Puden anvendes til ødemer i ben, lægmuskelkramper, åreknuder, trætte ben, hævede ankler og frilejring af hæle.






Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk	
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.	
70 x 55 x 17	3544150	17680	3551040	3559050	

Rhombo-fill®

Universalpude

Universalpuden kan anvendes til positionering, trykaflasting og som beskyttelse mod endegavle eller sengeheste. Den findes i 2 størrelser. Den store pude giver blød støtte til ryggen i sideleje. Rhombo-fill Universalpude er blød og formbestandig.

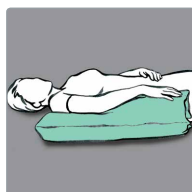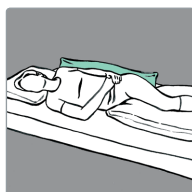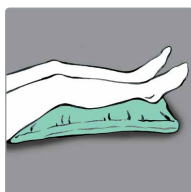


Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
H 25 x B 80	3532805	28148	3551105	3559105
H 45 x B 80	3532823	15128	3551023	3559023

Rhombo-fill®

Nakkepude

Nakkepuden anvendes til at give et stabilt og aflastende leje, når en hovedpude ikke anses for hensigtsmæssig. For brugere med dårlig hovedkontrol kan den også anvendes i halv-siddende leje i seng eller hvilestol. Giver god nakkestøtte. Nakkepuden kan nemt tages med på rejser for at aflaste ømme nakkemusklere og -hvirvler.

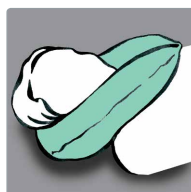

Puder		Bomuldsbetræk		Hygiejnebetræk
Størrelse i cm.	Varenr.	HMI-nr.	Varenr.	Varenr.
Ø 40	3532586	12324	3551086	3559086



Version 1 - 2018 · Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

“Alle mennesker bør have muligheden for at leve et frit og uafhængigt liv,
at kunne forfølge deres drømme, uanset fysiske forudsætninger.”

For seneste nyheder og løbende produktopdateringer - besøg www.etac.dk

Etac A/S
Egeskovvej 12, 8700 Horsens
Tlf 79 68 58 33
info@etac.dk - www.etac.dk

Etac showroom, Øst
Handicaporganisationernes Hus
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

etac[®]
Skaber muligheder