



# Etac Prio aktiv

Den aktive komfortrullstolen

 **etac**<sup>®</sup>

# Aktivitet basert på individuelle evner

Når personer ikke lenger kan sitte i en standard rullestol, brukes ofte en komfortrullestol for å gi ekstra støtte og å forbedre komforten og sittetoleransen. Dette kan imidlertid også resultere i en unødvendig økning i avhengigheten av andre.

I motsetning til andre komfortstoler, er Prio aktiv designet for å optimere aktivitet basert på individuelle evner og gi støtten og komforten som trengs hvert trinn på veien.

Å flytte fra en middels aktiv rullestol til en Prio aktiv, gir en trinnvis økning i støtten. Med en velbalansert tyngdepunkt, en middels høy ryggstøtte og begrenset tilt, er mulighetene der for en potensiell uavhengig aktivitet.

Skulle personen ha behov for mer støtte, kan dette gjøres med en mindre aktiv tyngdepunktinnstilling, høyere ryggstøtte og større tilt og vippefunksjon. For personer i bedring kan Prio aktiv også konverteres fra en komfortstol til en mer aktiv stol. Prio aktiv gir konfigurert støtte og komfort.

## Ability Based Seating™

Hos Etac tror vi på en evnebasert tilnærming for å styrke brukerens evner.

Ved å gi justerbar støtte i henhold til individuell kroppsfasong, maksimeres potensialet for aktivitet og mobilitet. Dette kan igjen styrke balansen og forbedre aktivitetsnivået.

Dette kaller vi Ability Based Seating™.



Etac Cross 6

Flytt til en middels aktiv rullestol når evnen har økt, for å muliggjøre større aktivitet.

Ved overgang fra en standard stol til Prio aktiv, kan en dra nytte av tilt og tilbake-  
lening, samtidig som den opprettholder aktivitet/mobilitet.



Etac Prio aktiv

Trinn for trinn kan Prio aktiv justeres for å oppnå mobiliseringsmålene.

For mer komfort og støtte, bytt til Prio komfortmodell.



Etac Prio 3A (komfort)

Prio aktiv satt opp for full komfort og støtte.

## Prio aktiv som standard

Ramme	Metall og aluminium
Chassisfarge	Sort
Ryggstøtte 3A	Høydejusterbar, justerbar lumbalvinkel
Lumbalvinkel	Justerbar, -12 - +10 °
Rygghøyde	46-68 cm (inkl. 6 cm ryggforlenger)
Hodestøtte	Høyde-, dybde- og vinkelregulerbar. Inkludert feste.
Kjørehåndtak	Høyderegulerbar og avtagbare
Velcroygg	45-60 cm
Ryggtrekk	Velour. Avtagbart og vaskbart på 60°
Brukerstyrt setetilt	-3° - +20
Setedybde foran	Justerbar 7 cm
Setedybde bak	39-51 cm
Setehøyde	38-52,5 cm
Armstøtter	Høyderegulerbare med langt polster, 38 cm, inkl. klesbeskytter
Benstøtter	Åpen vinkel, sort
Fotplater	Delte, oppfellbare, vinkel- og dybderegulerbare
Hælbånd	
Brems	Vinklet, rødt håndtak
Drivhjul	24", Quick release
Dekk	Massive
Drivringer	Aluminium
Camber	0°
Drivjulsinfesting	D2
Svinghjul	6,5", massive
Gaffel	Medium, med stålaksling
Gaffelhusfeste	Standard, høydejusterbart
Tippesikring	Oppfellbare, teleskop, 2 stk



# Prio aktiv

Alt du trenger er et breddemål




Alt du trenger å vite er hoftebredden for å velge riktig rullestolstørrelse. Resten kan justeres for å passe den enkelte brukers behov.

Prio aktiv gir flere muligheter til å skape form og støtte for brukeren til å sitte aktivt/oppreist og for komfort og avlastning under hvile. Arbeid med justeringer og enkelt tilbehør for å forme rullestolen helt etter brukerens behov nå og i fremtiden.

Legg til rette for evner, og gi ikke opp - for med Prio aktiv kan du nå dine posisjonering og aktivitetsmål.

## Egenskaper

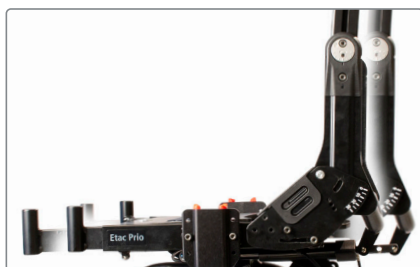

### Setedybde

Justerbar fra 39 - 51 cm. Bruk av både bak- og frontjustering gjør det lettere å finne et optimalisert balansepunkt. Justering foran: 7 cm. Justering bak: 5 cm.



### Tilt

Tilt (-3°(0°) - +20°). Brukerstyrt tilt leveres som standard konfigurasjon. Tilbakelening (0 - +30°) og elektrisk tilt er tilgjengelig som alternativ.



### Optimal balanse

Optimaliser hjulposisjonen i forhold til valgt setedybde for å finne den optimale balanseposisjonen.

## Oppdag mulighetene

Sittekomfort handler ikke bare om holdning, trykkpleie og komfort. Selv små justeringer kan utgjøre en stor forskjell for en persons evner.

For en person kan meningsfull aktivitet være så enkelt som å strekke seg etter en kopp, holde hodet oppe for å få øyekontakt, eller å drive en rullestol nok til å snu den for å møte noen.

Dette er forenklet til Ability Based Seating.

Skap form!

- Juster 3A-ryggen
- Bruk den dynamiske bekkenstøtten
- Juster velcrostroppene
- Legg til posturale støtter



## 3A-ryggen

Å opprettholde en dårlig holdning krever mye energi. For slike personer krever aktivitet en konfigurert ryggstøtte. Prio aktiv har den smarte 3A-ryggstøtten – enkle justeringer og tilbehør skaper rullestolen tilpasset brukerens behov. 3A-ryggen kan rekonfigureres etter hvert som behovene endres.



### Justerbar ryggghøyde

Høydejusterbar mellom 46 - 62 cm

Inkl. ryggforlengelse: 52 - 68 cm



### Justerbar ryggvinkel

Justerbar fra -12° til +10°



### Justerbar vinkel rygg og sete (tilt)

Justerbar mellom -3° - +20°  
(med tilbehør 0° - +20°)



### Dynamisk bakre bekkenstøtte

Tilpasser seg både aktivitet og hvile. Når tilbakelent frigjøres spenningen automatisk for å la bekkenet slappe av til en svak bakover helling. *Kun aktivert i tilbakelent, ikke tilt. Kan ikke brukes ved elektrisk tilt. Finnes som tilbehør.*

# Prio aktiv funksjoner og detaljer



\*Ikke i kombinasjon med Prio Eliit  
I tillegg til innstillingene ovenfor, kan setehøyden og kjørehjulposisjonen justeres.

Setebredde	Artikkelnr.	HMS nr.	Setedybde	Totalbredde	Totalbredde LB	Transportbredde	Vekt	Transportvekt
40 cm	13421405	295569	39-51 cm	59 cm	64 cm	56 cm	27,7 kg	22.9 kg
45 cm	13421409	295570	39-51 cm	64 cm	69 cm	61 cm	28 kg	23.2 kg
50 cm	13421413	295571	39-51 cm	69 cm	74 cm	66 cm	28,3 kg	23.5 kg
55 cm	13421417	295572	39-51 cm	74 cm	79 cm	71 cm	28,6 kg	23.8 kg

<p><b>Høyde rygg</b> Standard: 46-68 cm (inkl. 6 cm ryggforlenger 3D: 45-60 cm</p>	<p><b>Vekt</b> Vekt oppgitt i standardkonfig. setebredde 40 cm.</p>	<p><b>Totalbredde</b> M100 hjul +19 cm / Cross 5 hjul +21 cm / 24" LB +24 cm / 16" hjul +19,5 cm</p>
<p><b>Setetilt</b> -3° - +20°</p>	<p><b>Setehøyde</b> 20°, 22° og 24" drivhjul: 38 - 52.5 cm 16" drivhjul: 40-45 cm. Mål uten setepute.</p>	<p><b>Transportvekt</b> Gjelder stol uten armsøtte, vinkelregulerbare benstøtter, fotplater, leggstøtte, drivhjul og tippesikringer.</p>
<p><b>Ryggstøtte 3A</b> Høydejusterbar, justerbar lumbalvinkel</p>	<p><b>Setedybde</b> 39-51 cm</p>	
<p><b>Drivhjul, balansepunkt</b> Prio aktiv med 20°, 22° og 24" drivhjul har tre alternative balansepunkt per setehøyde</p>	<p><b>Maks brukervekt</b> 135 kg</p>	



## Tilbehør




### Hodestøtte, tradisjonell (std)

Regulerbar i høyde, dybde og vinkel. Kan justeres ned foran ryggstøtten. Trekk: Velour (std) eller grå hygiene.



### Hodestøtte med sidestøtte

Regulerbart i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Trekk: Grå hygiene. Avtagbart og vaskbart. Kombineres med hodestøttefeste, kjøpes separat.

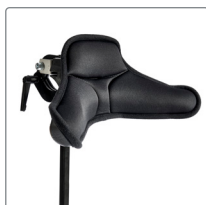

### Hodestøtte R82

Regulerbar i høyde, dybde, vinkel og sideveis. Gir en god støtte for hode og nakke. Finnes i størrelse medium og large.



### Minnefunksjon hodestøtte

Sikrer at hodestøtten blir satt tilbake i samme høyde.



### Ryggpute

Myk og fleksibel ryggpute. Festes med glidelås. Trekk: Mørk grå velour eller grå hygiene.




### Prio 3D-ryggpute

Unikt ryggpute som gir støtte og rom for en kyfotisk rygg eller asymmetrier.



### Ryggtrekk

Mykt ryggtrekk. Kommer i pustende AirMesh (std) eller i velour.

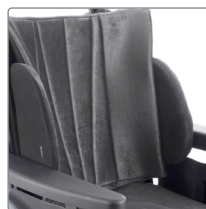

### Sidepute

Monteres med borrelås mellom ryggtrekk og ryggoverdrag. Kombineres med rett sidestopp for utvendig støtte. Sideputen gir økt sidestabilitet.



### Låsesplint Quick Release rygg

For nedfelling av rygg. Kan ikke kombineres med elektrisk tilt.



### Setepute basic

Setepute Basic har en konturert sittegrop og er akkurat som setepute komfort produsert i kaldtskum.



### Setepute komfort


Komfortpute med avtakbart innlegg i mykt, viskoelastisk skum. Trekk: Velour, grønt eller grått hygienetrekk.



### Kjørehåndtak (std)

Høyderegulerbare og avtakbare med glidestopp på håndtaket.

\*Bildet avviker fra standardkonfig. (ledsagerbrems følger ikke med).

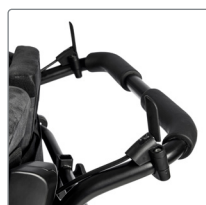

### Kjørebøyle

Høyderegulerbar og avtakbar. Kan brukes i kombinasjon med ledsagerbrems.




### Kjørebøyle, vinkelregulerbar

Høyde- og vinkelregulerbar. Avtakbar. Kan brukes i kombinasjon med ledsagerbrems. Passer Prio med setebredde 40 cm, 45 cm og 50 cm.

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på [etac.no](http://etac.no)



## Tilbehør

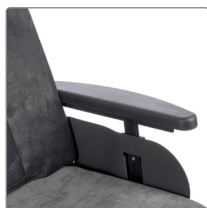

### Armlen

Høyde- og dybdejusterbar. Finns i to høyder:  
Standard 24–33 cm  
Lav 20–25 cm




### Armlen, smalt (std)

Et smalt armlene som gir enklere tilgang til drivringene.  
Lengde: 38 cm, bredde: 5 cm, høyde: 21–30 cm



### Armlenepute, polstret

Finnes i to varianter:  
Polstret – for ekstra komfort  
Bredt polstret – skålformet for ekstra komfort, monteres på standard armstøtte.

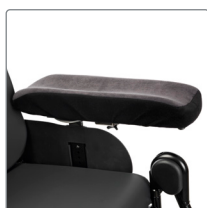

### Hemiarmen

Vinkelstillbart med ny, lett tilgjengelig justering i forkant.



### Klips vinkelbegrensning rygg/ tilt

Hver klips som settes på minsker tilt og/eller ryggvinkel uten bruk av verktøy.



### Komfortlås

Sikrer innstilt tiltposisjon. Fire alternative innstillinger (0°, 4°, 8° alt. 12°). Det kan være den aktive posisjonen eller det perfekte hvileleiet som da blir enklere å stille inn.



### Elektrisk tilt

For brukere som vil justere rygg- og sete vinkel selv. Eltilt kan velges som tilvalg ved bestilling eller bestilles som tilbehør for ettermontering. Ved ettermontering på Prio med 16" hjul skal klebeskyttelse monteres. Eltilten kan ikke kombineres med bekkenstøtte, komfortlås, QR-sprint eller kurv.



### Låsbart grep

Forhindrer aktivering av ryggvinkel eller tilt. Hvis posisjonen skal justeres, trekkes låsen opp og så ned igjen, for å låse grepet.



### Brems m/ vinklet håndtak

For 20", 22" og 24" drivhjul. Gir større gripeflate. Kommer i sort (std) eller rødt.



### Brems m/ forlenget håndtak

Bremsespaken kan vinkles fremover for å forenkle forflytning.



### Ledsagerbrems

Med glidestopp på håndtaket. 10 cm mellom håndtaket og bremsespaken.



### Sideputer

Reduserer setebredden med 2,5 cm. Festes på klesbeskytteren.



### Breddeøkningssats

Øker bredden mellom armlenene med 2 cm.




### Enhåndsdrift

Passer både høyre og venstre side. Kan ikke kombineres med ledsagerbrems.


For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på [etac.no](http://etac.no)

## Tilbehør

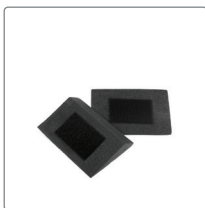

### Komfortkile modell 1 (small)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan monteres direkte under ryggoverdraget. L: 13 cm, B: 9.5 cm, H: 2 cm

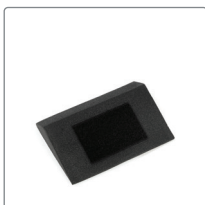

### Komfortkile modell 2 (medium)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 19 cm, B: 12 cm, H: 2 cm



### Komfortkile modell 3 (stor)

Par. Komfortkilen kan kombineres med flere kiler og tilpasses ønsket passform. Primært til bruk for økt bolstabilitet. Komfortkilen kan legges direkte under ryggoverdraget. L: 20 cm, B: 17 cm, H: 2.5 cm



### Sidestøtter, svingbare

Justerbare i høyde, dybde og bredde. Optimalt for sideforflytning. Armlenet kan tas av når sidestøtten er utsvingt. Pute: Polyuretan



### Sidestøtter, regulerbare

Justerbare i høyde, dybde og bredde. Tas enkelt av og på uten verktøy. Pute: Polyuretan




### Benstøtte, modell Cross (std)

Sort. Avtagbar og sidesvingbar. Finnes også med lås. Legglengde 35-52 cm med standard fotplate. NB! Fotplate bestilles separat



### Benstøtte Cross, spiss vinkel

Med spiss vinkel kommer fotstøttene ca. 6 cm nærmere setet. NB! Fotstøtte bestilles separat. Stk.

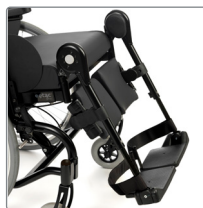

### Vinkelstillbare benstøtter

Utsvingbare og avtakbare. Med oppfellbare leggstøtter, justerbare i høyde og dybde. Trekk leggstøtte: Hygiene



### Fotplater, Cross (std)

Oppfellbare, regulerbare i høyde og justerbare i vinkel. Dybde: 15 cm. Hælbånd: se eget bilde.



### Polstring, delt fotplate

For ekstra komfort. Velour



### Leggbånd

Lengderegulerbart og avtakbart.



### Polstring til leggbånd

Avtakbart. Kommer i 20, 30, og 40 cm lengde.



### Leggbånd, komfort

For ekstra komfort. Justerbart med borrelås. Velour. Monteres på faste eller vinkelstillbare benstøtter.

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på [etac.no](http://etac.no)

## Tilbehør



### Forlengede fotplater

Passer til Cross fotplate. Dybde 21 cm.



### Svinghjul

6" eller 8".



### Hel fotplate

Fotplaten gir gulvfølelse og stimulerer til bevegelse. Inkl. faste benstøtter.



### Adapter for setehøyde til 16" drivhjul

Muliggjør ytterligere to setehøyder for Prio med 16" transporthjul: 40 cm og 42.5 cm



### Hel fotplate, Cross

Oppfellbar og innstillbar i høyde, dybde og vinkel. Monteres på faste eller vinkelstillebare benstøtter.




### Drivhjul

20", 22" eller 24". Massive dekk. Alu drivring. Hurtigkoblingsnav. 16" transporthjul.



### Polstring, hel fotplate Cross

For ekstra komfort. Velour

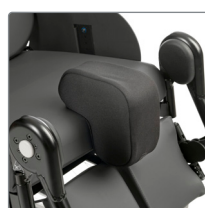


### Abduksjonskloss

Avtagbar, justerbar i dybden..



### Infusjonsstativ

For to flasker

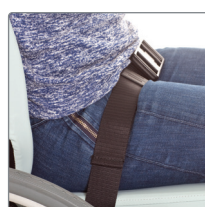

### Hoftebelte

Flere mulige festepunkter på rammen.



### Holder for ventilator

Kurv for medisinsk utstyr



### Feste for brystsele

Kombineres med tradisjonell hodestøtte.



### Bord

Transparant, monteres på armlenene



### Eikebeskytter

Fås med grått trykk

For artikkelnummer/ HMS nr. på tilbehør og reservedeler, se egne lister under Dokumenter på [etac.no](http://etac.no)



“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk [www.etac.no](http://www.etac.no)