



immedia

Immedia SatinSheet

Ett komplett system av glidlakan och draglakan

Immedia SatinSheet System

Komplett system av glidlakan och draglakan för vändning och positionering i säng

Immedia SatinSheet System är utformat för att lättare förflytta en patient i sängen, oavsett patientens behov av assistans. Förflyttningssystemet bidrar till att minska belastningen på vårdarens rygg och förebygger därmed arbetsskador. Det gör också förflyttningen mindre tidskrävande och kan innebära att färre vårdare behövs.

- Minimerar risken för att patienten utsätts för skjuvsår, eftersom SatinSheet-lakanen minskar risken för friktion och därmed också risken för skjuv. Uppfyller behoven alltifrån helt självständiga patienter till patienter som behöver full assistans.
- Eftersom lakanen alltid ligger på plats i sängen blir det mer bekvämt för patienten och också enklare att ändra läge, flytta eller vända på patienten.
- SatinSheets kan placeras ovanpå en tryckavlastande madrass utan någon påverkan av madrassens tryckavlastande förmåga.



Användningsområden

- Förflyttningssystem för självständiga patienter eller patienter med behov av assistans
- Vändning i säng
- Positionering i säng
- Förflyttning högre upp i säng
- Kan användas i kombination med lyft

Rekommenderad användning



1. Med 4Direction kan du varsamt förflytta patienten högre upp i sängen med minimal ansträngning. Förflyttningssystemet är enkelt att använda då det alltid ligger på plats i sängen.



2. Patienten vänds enkelt på sidan med hjälp av draglakan.

Tips!

För att undvika rotation av ryggen vid positionering i säng, placera samma fot och hand (t.ex. höger fot och höger hand) i främre läget.




Titta på våra filmer online!

Ta reda på mer om hur SatinSheet-systemet används.


Vad består SatinSheet System av?

Systemet har två huvuddelar: glidlakan och draglakan. Ränderna på glid och draglakan indikerar lakanens glidriktning.

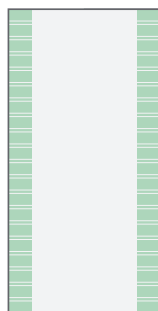


2Direction glidlakan

Börja med att placera ett 2Direction glidlakan direkt på madrassen. Glidlakanet har en glidyta (satin) med låg friktion i mitten, vilket möjliggör självständig förflyttning i sidled. Sidorna är av polyester/bomull som ger högre friktion, vilket minimerar risken för att patienten glider ur sängen.

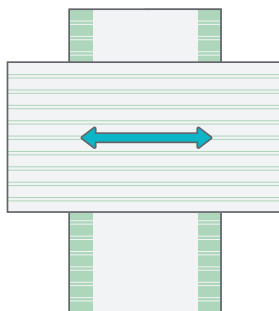

2Direction draglakan

2Direction draglakan används för patienter som är i behov av assistans vid sidledes förflyttningar och vändning i säng. Draglakanen är utformade för att användas ovanpå glidlakanet.

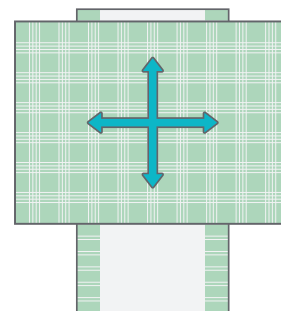


4Direction draglakan

4Direction draglakan används för patienter som är i stort behov av assistans och behöver hjälp med förflyttning i alla riktningar. Dessa draglakan är utformade för att användas ovanpå 2Direction glidlakan.


Storlekar på glidlakanet

För användning i en enkelsäng av standardtyp

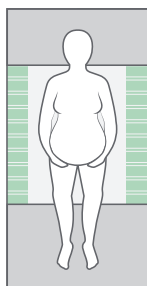


Mini

Glidyten sträcker sig från axlarna till knäna eller från höfterna till vaderna. Denna storlek är avsedd för självständiga eller delvis självständiga patienter. Används till patienter med nedsatt rörlighet i vissa delar av kroppen. Om patienten behöver hjälp med att flytta eller vända sig bör glidlakanet användas i kombination med draglakan 2Direction.

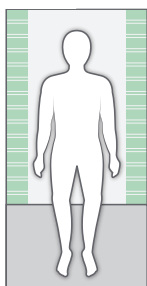

Midi


Glidyten sträcker sig från huvudet till knäna eller från höfterna till fötterna. Denna storlek är avsedd för patienter med nedsatt rörlighet som delvis är i behov av assistans. Om patienten behöver hjälp med att flytta eller vända på sig ska glidlakanet användas i kombination med ett draglakan 2Direction eller 4Direction.

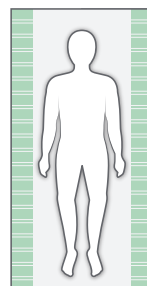

Maxi


Glidyten sträcker sig över hela sängens längd. Används då patienten även behöver hjälp med att flytta ben/fötter. Kan kombineras med draglakanet 2Direction eller 4Direction

För användning i en bredare säng eller dubbelsäng

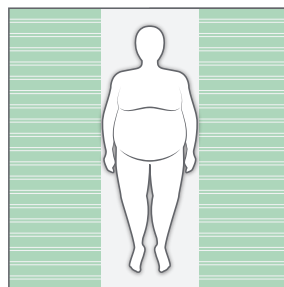


Maxi - Extra bred

För bredare sängar eller dubbelsäng. Lämpligt för patienter som ligger i mitten av en bredare säng eller för bariatriska patienter. Kan kombineras med draglakanet 2Direction eller 4Direction. Finns i längderna Mini, Midi och Maxi.

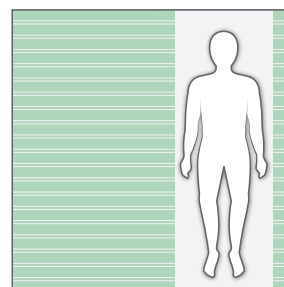

Double

För dubbel- och kingsize-sängar. Glidområdet är placerat på ena sidan av lakanet. Kan kombineras med draglakan 2Direction eller 4Direction.

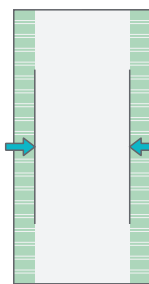

Storlekar på glidyten i satin

Glidyta i satin: satinets bredd väljs utifrån patienten och/eller sängens bredd.

- Smal: 60/65 cm satin
- Standard: 70 cm satin
- Bred: 85 cm satin
- Extra bred: 90/96 cm satin

Varianter av 2Direction Glidlakan




2Direction Baslakan

Ett baslakan som kan bäddas in runt madrassen. Patienten ligger direkt på glidytan vilket minskar friktionen, och gör det enklare för patienten att röra och vända på sig.



2Direction Corner

Lakan med resårband i hörnen som fästs runt madrassens hörn. Lakanet är enkelt att fästa för en ensam vårdare och fungerar bra på tjockare madrasser eller när en tryckavlastande madrass används.

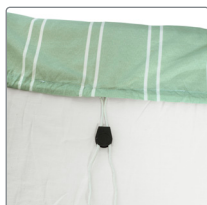

2Direction Fit

Dra-på-lakan med dragsko. Lakanet är försett med ett glidområde som täcker hela sängens bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare för benen att glida i och ur sängen.



2Direction Elastic Fit

Dra-på-lakan med resårband. Denna modell har öppning i alla fyra hörnen så att en slang kopplad till t ex en växeltrycksmadrass kan träs igenom utan besvär. Lakanet är försett med ett glidområde som täcker hela sängens bredd vid ben och fötter. Det gör det enklare för benen att glida i och ur sängen.

Varianter av Draglakan



Draglakan – 2Direction

Detta draglakan används för förflyttning i sidled eller vändning i säng. Förhindrar att patienten glider uppåt eller nedåt i sängen. Placeras ovanpå ett glidlakan.



Draglakan – 4Direction med inkontinensskydd

Ett draglakan med ovansida av inkontinensskydd och en undersida av satin. Placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. Finns i två storlekar.



Draglakan – 2Direction med inkontinensskydd

För delvis vårdbehövande patienter med behov av ett absorberande material. Används för förflyttning i sidled eller vändning i säng. Förhindrar att patienten glider uppåt eller nedåt i sängen. Placeras ovanpå ett glidlakan.



Draglakan - 4Direction med inkontinensskydd och handtag

Lämpligt att använda tillsammans med lyft för vändning i säng. Ett draglakan med ovansida av inkontinensskydd och en undersida av satin. Placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled. Finns i två storlekar.



Draglakan – 4Direction

Ett draglakan med en undersida av satin som placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.



Örngott

Örngottets mönster visar glidriktningen. Vid placering med ränderna i sidled underlättar kudden vid sidförflyttning. Placerat med ränderna i längriktningen erhålls 4-vägs-glid vilket underlättar vid förflyttning högre upp i säng.



Draglakan – 4Direction med handtag

Lämpligt att använda tillsammans med lyft för vändning i säng. Ett draglakan med en undersida av satin som placeras ovanpå glidlakanet och möjliggör förflyttning uppåt och nedåt samt i sidled.



Beskrivning

Immedia SatinSheet glidlakan 2Direction (glidyta i satin)

Beskrivning	B x L (cm)	Art.nr
Mini 2D (glidyta 60 x 105 cm - liten)	195 x 105	IM4133S
Mini 2D (glidyta 70 x 105 cm - standard)	195 x 105	IM4108S
Mini 2D (glidyta 85 x 105 cm - bred)	230 x 105	IM4175S
Mini 2D (glidyta 96 x 105 cm - dubbel)	230 x 105	IM4178S
Midi 2D (glidyta 60 x 140 cm - liten)	200 x 140	IM4119S
Midi 2D (glidyta 70 x 140 cm - standard)	200 x 140	IM4113S
Midi 2D (glidyta 85 x 140 cm - bred)	230 x 140	IM4176S
Midi 2D (glidyta 96 x 140 cm - dubbel)	230 x 140	IM4179S
Maxi 2D (glidyta 60 x 200 cm - liten)	200 x 200	IM4181S
Maxi 2D (glidyta 70 x 200 cm - standard)	200 x 200	IM4114S
Maxi 2D (glidyta 85 x 200 cm - bred)	230 x 200	IM4177S
Maxi 2D (glidyta 96 x 200 cm - dubbel)	230 x 200	IM4180S
Double 2D (glidyta 60 x 200 cm på en sängsida)	280 x 200	IM4122S
Maxi 2D Fit (glidyta 70/90 x 200 cm)	90 x 200	IM4112S
Maxi 2D Elastic Fit (glidyta 70/90 x 200 cm)	90 x 200	IM4142S
Mini 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 105 cm)	85 x 200	IM4126S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 140 cm)	85 x 200	IM4157S
Midi 2D Small Corner resår i hörn (glidyta 67 x 173 cm)	90 x 173	IM4167S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 80 x 140 cm)	105 x 200	IM4158S
Midi 2D Corner resår i hörn (glidyta 90 x 140 cm)	120 x 200	IM4187S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 65 x 200 cm)	85 x 200	IM4107S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 80 x 200 cm)	105 x 200	IM4147S
Maxi 2D Corner resår i hörn (glidyta 90 x 200 cm)	120 x 200	IM4137S

Immedia SatinSheet Draglakan 2Direction

Draglakan Mini	+	200 x 100	IM4116S
Draglakan Midi	++	200 x 140	IM4118S
Inkontinensdraglakan SatinSheet 2D inco Midi	+++	200 x 140	IM4193S

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction

Midi 4D (glidyta 147 x 140 cm)	+++	200 x 140	IM4115S
Midi 4D med handtag (glidyta 147 x 140 cm)	+++	200 x 140	IM4115SH
Maxi 4D (glidyta 147 x 200 cm)	++	200 x 200	IM4121S
Maxi 4D med handtag (glidyta 147 x 200 cm)	++	200 x 200	IM4121SH
Maxi 4D Wide med handtag (glidyta 200 x 200 cm)	+	300 x 200	IM4131SH

Beskrivning

Immedia SatinSheet draglakan 4Direction med inkontinensskydd

Mini med vingar (glidyta 85x90 cm)	+	185 x 90	IM4110S
Mini med vingar + handtag (glidyta 85x90 cm)	+	185 x 90	IM4110SH
Midi med vingar (glidyta 120x140 cm)	++	220 x 140	IM4140S
Midi med vingar + handtag (glidyta 120x140 cm)	++	220 x 140	IM4140SH

Immedia SatinSheet 2Direction Örngott

Örngott	+++	70 x 60	IM4117S
---------	-----	---------	---------

Immedia SatinSheet Set

Mini 2D 70 cm + draglakan 2D 100 cm	IM4108S + IM4116S	IM4201S
Midi 2D 60 cm + draglakan 2D 140 cm	IM4119S + IM4118S	IM4205S
Midi 2D 60 cm + draglakan 4D handtag 140 cm	IM4119S+IM4115SH	IM4232S
Midi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm	IM4113S + IM4118S	IM4200S
Midi 2D 70 cm + draglakan 4D 140 cm	IM4113S + IM4115S	IM4204S
Maxi 2D 70 cm + draglakan 2D 140 cm	IM4114S + IM4118S	IM4202S
Maxi FIT 2D + draglakan 4D 140 cm	IM4112S + IM4115S	IM4203S
Corner 2 D + draglakan 4D 140 cm	IM4107S + IM4115S	IM4211S

Matcha efter färg

Följ färgkodningen för att hitta draglakan som bäst matchar motsvarande glidlakan.

Mini storlek = ●. Midistorlek = ●. Maxistorlek = ●.

De produkter som har ett plustecken, kan ej användas separat, utan kombineras med ett 2Direction glidlakan.

Specifikationer

Tyg: 55% bomull/45% polyester

Satin: Polyester

Max. brukarvikt: 200 kg



Tvätttråd

Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur.

Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Använd inte sköljmedel eller klorin.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ info@etac.se

🌐 www.etac.se

etac®
Creating Possibilities