



Standard Air

Klassisk vertikal enkammar luftcellsdyna

Star Standard Air

En enkammardyna med utmärkta tryckfördelningsegenskaper.

Effektiv nedsjunkning och överlägsen omslutning

En enkammardyna har de bästa förutsättningarna för att omfördela trycket. Med höga luftceller blir nedsjunkningen och omslutningen som bäst, vilket också medför minsta möjliga deformation av vävnaden.


Standard Air finns i två olika höjder, 5 och 10 cm. Ju högre celler, desto bättre tryckfördelande egenskaper.



Star Standard Air sittdynor levereras kompletta med ett mjukt och elastiskt överdrag, handpump, manual och reparationssats.




Egenskaper

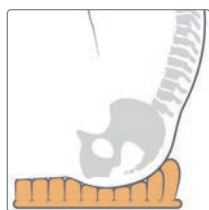


Enkammardyna med dynamisk stabilitet

Cellerna anpassar sig till kroppsformen och minsta rörelse vilket stimulerar blodcirkulationen i vävnaden. Perfekt för användare med låg aktivitetsnivå.

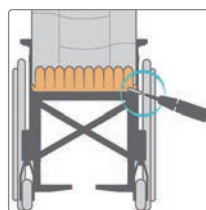


Enkel hantering och justerbarhet

Enkammardyna medför endast lufttrycksjustering med en ventil. Standard Air är en genial kombination av enkel hantering och dynamisk stabilitet, vilket kan öka sittoleransen. Luftnivån kan justeras och återställas om och om igen för att uppnå optimal mängd nedsjunkning för individen.

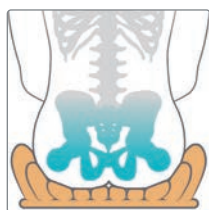


Nedsjunkning och omslutning

Star luftceller låter användaren sjunka ned i dynan och få perfekt omslutning. Ju högre celler desto bättre omslutning.

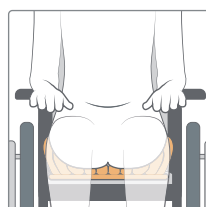

Luftceller

En luftcellsdyna möjliggör en god omslutning och nedsjunkning, vilket ger en ökad tryckfördelning.

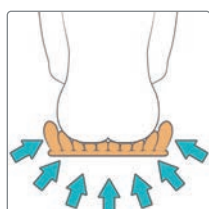

Tryckfördelande

Standard Air har excellenta tryckfördelande egenskaper. Luftcellerna anpassar sig till kroppsformen och minimerar risken för vävnadsdeformation. Perfekt för prevention och behandling av trycksår.

Standard Air - en kammare	5 cm	10 cm	Standard Air - en kammare	5 cm	10 cm
26 x 26 cm	ESSCS0909-1	ESSC0909-1	39 x 49 cm	ESSCS1519-1	ESSC1519-1
26 x 30 cm	ESSCS0911-1	ESSC0911-1	39 x 53 cm	ESSCS1521-1	ESSC1521-1
26 x 34 cm	ESSCS0913-1	ESSC0913-1	44 x 34 cm	ESSCS1713-1	ESSC1713-1
30 x 26 cm	ESSCS1109-1	ESSC1109-1	44 x 39 cm	ESSCS1715-1	ESSC1715-1
30 x 30 cm	ESSCS1111-1	ESSC1111-1	44 x 44 cm	ESSCS1717-1	ESSC1717-1
30 x 34 cm	ESSCS1113-1	ESSC1113-1	44 x 49 cm	ESSCS1719-1	ESSC1719-1
30 x 39 cm	ESSCS1115-1	ESSC1115-1	44 x 53 cm	ESSCS1721-1	ESSC1721-1
34 x 26 cm	ESSCS1309-1	ESSC1309-1	49 x 39 cm	ESSCS1915-1	ESSC1915-1
34 x 30 cm	ESSCS1311-1	ESSC1311-1	49 x 44 cm	ESSCS1917-1	ESSC1917-1
34 x 34 cm	ESSCS1313-1	ESSC1313-1	49 x 49 cm	ESSCS1919-1	ESSC1919-1
34 x 39 cm	ESSCS1315-1	ESSC1315-1	49 x 53 cm	ESSCS1921-1	ESSC1921-1
34 x 44 cm	ESSCS1317-1	ESSC1317-1	53 x 39 cm	ESSCS2115-1	ESSC2115-1
39 x 30 cm	ESSCS1511-1	ESSC1511-1	53 x 44 cm	ESSCS2117-1	ESSC2117-1
39 x 34 cm	ESSCS1513-1	ESSC1513-1	53 x 49 cm	ESSCS2119-1	ESSC2119-1
39 x 39 cm	ESSCS1515-1	ESSC1515-1	53 x 53 cm	ESSCS2121-1	ESSC2121-1
39 x 44 cm	ESSCS1517-1	ESSC1517-1			

Brukarvikt

Ingen maxvikt men dynans storlek måste anpassas till användarens storlek.

Dynmaterial

Latexfri guldfärgad neopren av hög kvalitet. Följsam och brandsäker.

Överdrag

Ovandel: 92% polyester, 8% spandex.

Sidor: 100% polyester.

Bottendel: 100% polyester med halkskyddat och flamsäkert PU.

Hygienöverdrag

Ovandel och sidor: 100% polyamid täckt med polyuretanfilm.

Bottendel: 100% polyamid med halkskyddat och flamsäkert PU.

Rengöring

Rengöring av dyna:

- Handtvätt med tvål, bikarbonat eller ättika.

- Maskintvätt max 60° i 10 min.

- För desinfektion använd 70% desinfektionslösning.



Rengöring av standardöverdraget:
Maskintvätt 60°C, inget blekmedel.



Rengöring av hygienöverdraget:
Maskintvätt 80°C, inget blekmedel.



Tillbehör



Hygienöverdrag

Överdrag i luftgenomsläpplig och flamsäker nylon med fyrvägsstretch och förseglad dragkedja.




Precisionstillverkning

Stardynorna är tillverkade i Anderstorp med banbrytande robotstillverkning för att säkerställa precision och kontinuitet.

Så här justeras lufttrycket



- Pumpa upp sittdynan.
- Placera användaren på sittdynan.
- Släpp ut luft.

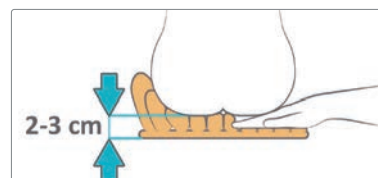

- Kontrollera med handen att det finns ett avstånd på 2–3 cm mellan dynans botten och användarens sittbensknöl.
- Vid snedställt bäcken, kontrollera den lägsta sidan först.
- Vid behov kan dynan enkelt fyllas med mer luft medan användaren sitter på dynan.
- Högre luftceller ger djupare nedsjunkning och omslutning av sätet, vilket ger ännu bättre tryckfördelande egenskaper.



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB



0371-58 73 00



info@etac.se



www.etac.se

 **etac**®

Creating Possibilities