



Seta pro juniorseng

Ny kvalitetsseng som oppfyller alle krav i ny EU-standard

 **etac**[®]

Stieglmeyer Seta pro

Seta pro er en moderne og pålitelig sykehusseng. Den nye juniorversjonen kombinerer styrkene til seniorsengen med en madrassbase i redusert størrelse. Sengen gir brukerne en rekke praktiske elektriske justeringsmuligheter. Det er også mange smarte detaljer for å implementere kravene i den nye EU-standarden for barnesenger.

Ny EU-standard for barnesenger - Seta pro oppfyller alle krav

I 2020 trådte en enhetlig Ny EU-standard for barnesenger i kraft for første gang. De nye forskriftene setter betydelig høyere sikkerhetskrav for barn og ungdomssenger enn tidligere. Ved utvikling av den nye Seta pro junior ungdomssengen, gjorde Stieglmeyers designere alt for å sikre at sengen er enkel i bruk, men likevel oppfyller alle krav.

Seta Pro har unik komfort, robusthet og gjennomgående gode hygieneegenskaper. Det er implementert løsninger som gir en optimal kombinasjon av beskyttelse for unge pasienter og et godt arbeidsverktøy for pleiere.



Viktig innhold i den nye EN 50637-standarden

- Betydelig redusert avstand mellom sidegrindskinner, mellom sidegrind og madrassbase samt mellom sidegrind og hodegavl/ fotgavl, for å forhindre kvelning
- Avstand mellom sidegrind og madrass må være dimensjonert for å forhindre at lemmer kommer i klem
- Ingen utsparinger eller hull som gjør at fingre kan sette seg fast
- Hjørner må ikke utgjøre en risiko for skade, og skarpe kanter skal unngås
- Kabler må legges på en måte slik at risikoen for kvelning forhindres
- Det skal være en funksjon for å holde alle elektriske kontrollenheter fastlåst på sengen.



Ti gode argumenter for bedre sikkerhet

1. Avstanden mellom skinnene på sidegrind har blitt halvert og er på mindre enn 60 mm. Selv ved høyt press 125N på sidegrind, skal en testkjegle ikke presses gjennom skinnene på sidegrind. Barn som har liten diameter rundt hodet er nå beskyttet mot å bli sette seg fast eller bli kvalt.

2. Håndtaket til pasientens løftebøyle er utstyrt med tverrstykker som gjør det umulig for barn å tre triangelen over hodet.

3. Holder for skinne til sidegrind er direkte festet i hode- og fotgavl, slik at det ikke er åpning for at et barn kan sette seg fast.

4. Den 4-delte madrassbasen på Seta pro junior sørger for komfort og fleksibilitet. Avstanden mellom madrassbasedelene er smalere enn 60mm for å forhindre tilgang, selv for små pasienter.

5. En egen perfekt tilpasset ikke-glidende madrass sørger for at pasienter kan ikke få hodet mellom madrassen og sidegrind eller hode-/fotgavl. Avstanden rundt madrassen er mye mindre enn på voksensenger.

6. Madrassbasen er sikret for tilgang til mulige fareområder på de bevegelige delene av liggeflaten.

7. Alle tilgjengelige åpninger som har diameter mellom 7 og 25 mm og en dybde på 10 mm eller mer er fjernet, slik at barn ikke kan sette fast fingre eller tær.

8. Når håndkontrollen ikke er i bruk, kan den plasseres trygt i en boks som er tilgjengelig på hver side av sengen. Boksen er sikret med magnetlås. Dette forhindrer barnet for å justere sengen ved en feiltagelse eller kunne bli kvalt av håndkontrollkabelen.

9. Den ekstra pleierkontrollen i fotenden av sengen er utstyrt med magnetlås for å hindre uønsket bruk. Barn som leker på gulvet blir ikke klemt under sengen når håndkontroll og pleierkontroll er sikret.

10. Seta pro junior er testet for å sikre at den oppnår den lange levetiden som forventes av Stieglmeyer-produkter. Justeringene på madrassbasen er testet flere tusen ganger med den nominelle belastningen på 175 kg og det ble ikke funnet sikkerhetsrelevant slitasje eller deformasjon.





Utgave: 04. 21. Forbehold om trykkfeil og ev. endringer

“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no

Etac AS - P.boks 249 - 1501 Moss
Telefon: 815 69 469
E-post: hovedkontor.norge@etac.com
www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities