



etac®

Etac Swift Commode

En tre-i-én-løsning

Swift Commode

Swift Commode er et allsidig produkt som kan brukes som en toalettstol, dusjstol eller toalettforhøyer. Den er egnet for personer som trenger tilgang til toalett nær sengen, da den kombinerer funksjonalitet med et diskret design som passer godt inn på soverommet. Toalettstolen er like godt egnet på badet, ettersom den tåler fuktige omgivelser og kan brukes både i dusjen og over toalettet.

Tre produkter i ett

På soverommet fungerer Swift Commode som et toalett nær sengen. Den er utformet som en lenestol, og de myke putene på sete og ryggstøtte er avtakbare og skjuler en beholder med selvlåsende lokk. Toalettstolen er like godt egnet på badet, hvor den kan brukes som dusjstol med eller uten putene. Når den plasseres over toalettet, fungerer den som en frittstående toalettforhøyer. Stolen kan enkelt reguleres til ønsket høyde, og armlenene gir stabil støtte ved oppreising og sitting.

Designet for å være fleksibel

Swift Commode har lav vekt og er enkel å flytte mellom soverom og bad. Samtidig har den høy kapaistet med en maksimal brukervekt på 160 kg. Den er høyderegulerbar mellom 42–57 cm, og kan også stilles inn med en lett fremovertilt for å gjøre det enda enklere å reise seg fra stolen.

Enkel montering og rengjøring

Stolen monteres enkelt uten bruk av verktøy. Armlen og ryggstøtte kan lett fjernes ved behov, noe som også gjør rengjøring enklere. Stolen har glatte, rustfrie overflater. Myksete, mykrygg og bekken er inkludert som standard.


Swift Commode har fem års garanti, og forventet levetid på ti år.



Swift Commode	HMS	Art.nr	Vekt
Swift Commode	097778	81702030	5,4 kg
Swift Commode, uten polstring		81702060	
Mål			Maks brukervekt
Bredde: 56 cm			160 kg
Setebredde: 54 cm			
Setehøyde: 42–57 cm			
Bredde mellom armlener: 45 cm			
Materiale			Vedlikehold
Sete, rygg og armlene: polypropylen			Rengjør / desinfiser produktet med et vanlig, ikke-slipende rengjøringsmiddel med en pH-verdi mellom 5 og 9, eller med en 70 % desinfeksjonsløsning. Produktet kan trygt rengjøres i en vaskedekontaminator ved maks 85 °C i tre minutter.
Ben: aluminum og polyamid			
Doppsko: TPE (termoplastisk gummi)			
Myksete og mykrygg: Polyetylen med nylonstoff			



Egenskaper

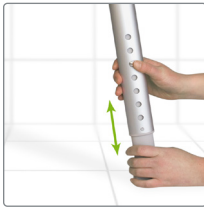

Smart høyderegulering

Teleskopbena kan raskt reguleres til ønsket høyde takket være en selvlåsende knapp som klikker på plass. Den ovale formen forhindrer at bena roterer under reguleringen. Det finnes ingen løse deler som kan forsvinne.



Stådige doppsko

Stolen har stor nok omkrets til å være så stabil at den tåler 160 kg. Føttenes myke doppsko tilpasser seg underlaget, og er skliskre på våte og ujevne underlag.



Enkel håndtering

Swift Commode leveres flatpakket i en praktisk eske med bærehåndtak. Siden stolen er enkel å montere/demontere, kan esken brukes til frakt hvis stolen skal brukes på flere steder.



Integrert bekkenlokk

Bekkenet har et tett lokk og det flukter med setet. Det finnes et håndtak bak, og et bærehåndtak som låser lokket når bekkenet bæres.



Swift Commode uten bekken



Swift Commode med bekken



Swift Commode med polstringer

Tilbehør



Holder til toalettpapir

80301629
Holderen til toalettpapir festes til armlenet. Den kan plasseres både på venstre og høyre armlen, med åpningen vendt enten fremover eller bakover.
Materiale: Polyamid, rustfritt stål.



Myksete

84005064
Det skliskre myksetet gir en umiddelbar følelse av varme, og gjør det mer komfortabelt å sitte. Enkelt å tørke av.
Inkludert som standard
Materiale: Polyetylen



Såpekoppholder

80209266
Festes på siden av setet. Et perfekt sted for dusjsåpe, sjampo eller bekkenlokket. Den er også utstyrt med en innebygd holder for dusjhode.
Materiale: Polypropylen



Mykrygg

84005065
Festes på ryggstøtten for ekstra komfort. Gir en varm følelse. Den er skliskker, enkel å feste og lett å rengjøre.
Inkludert som standard.
Materiale: Polyetylen



Urinskjerm

80209430
Urinskjermen forhindrer søl. Den festes enkelt på forsiden av setet, og kan like enkelt fjernes for rengjøring.
Materiale: Polyuretan



Etac er en verdensledende utvikler av innovative hjelpemidler og utstyr for pasienthåndtering. Siden 1973 har vi jobbet for å forbedre livskvaliteten for den enkelte, familiemedlemmer og omsorgspersoner.

For informasjon om produktene og siste oppdateringer, besøk www.etac.no

Etac



+47 815 69 469



hovedkontor.norge@etac.no



www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities