


Etac Torkel toalettpapperstång


Lätt och hygienisk

Torkel toalettpapperstång är ett utmärkt alternativ när räckvidd och handfunktion är begränsade. Den är enkel att rengöra, liten och smidig vilket gör den enkel att ta med sig på resor, restaurangbesök eller på besök hos vänner.


Så här använder du Torkel toalettpapperstång:

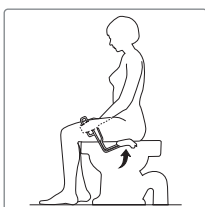


1. Riv av en bit toalettpapper (ca 40 cm). Öppna tången genom att knipa ihop handtaget och trä i papperet mellan skänklarna.

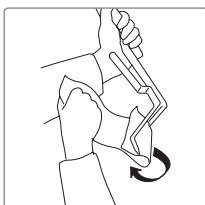

2. Rulla pappret löst runt skänklarna, så att det täcker tångens spets.

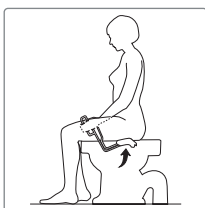

3. Placera tången mellan benen och torka.

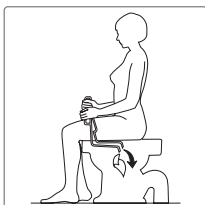

4. Öppna tången och skaka av det använda toalettpapperet i toaletten. Skölj av tången.



Beskrivning

Torkel toalettpappersstång

Art. nr.

80304001

Mått Längd: 33 cm

Material: Polyamid

Vikt 100 g

Skötsel: Kan kokas

Design: Designkonsulterna

Rengöring



Rengör produkten med rengöringsmedel utan lösningsmedel och med pH-värde 5-9 eller med 70% desinfektionssprit. Kan vid behov dekontamineras i max 85°C..