



Immedia TwinSheet4Glide

Bäddsystem med inkontinensskydd lämplig för vändning och förflyttning

TwinSheet4Glide System


Immedia TwinSheet4Glide är en glidmadrass som lämpar sig för vändning och positionering av inkontinenta patienter med stort omvårdnadsbehov. Immedia TwinSheet4Glide finns i två versioner – fullängdsversion och tvådelad där nederdelen kan tas bort vilket underlättar vid vård av trycksår, hygienrutiner, påklädning eller byte av sängkläder.

Användningsområden

- Vändning och positionering
- Stöd vid sidoläge
- Personlig hygien, sårvård och påklädning
- Förflyttning högre upp i säng
- Liggande förflyttning
- Kan användas i kombination med en lyft


Vad består TwinSheet4Glide av?

Systemet består av två delar: ett nylonlakan och en absorberande glidmadrass.

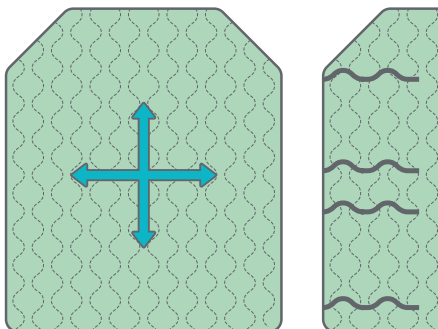

Nylonlakan


Börja med att placera ett 4WayGlide nylonlakan direkt på madrassen. Nylonlakanet är försett med en glidyta med låg friktion vilket gör det enkelt att placera glidmadrassen på plats.

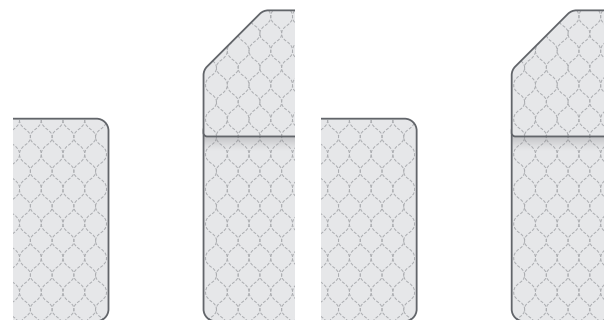

Absorberande glidmadrass


Glidmadrassen används för att underlätta förflyttning i alla riktningar. Glidmadrassen har handtag på undersidan vilket ger bra grepp vid förflyttning.

Varianter av TwinSheet4Glide

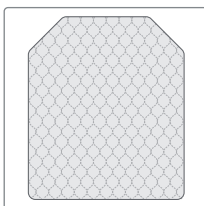


Lång

Immedia TwinSheet4Glide med en ovsida av mikrofiber och ett absorberande mellanlager passar perfekt för patienter med inkontinens. Den långa versionen är i fulllängd. Handtagen på undersidan ger bra grepp och gör det möjligt att använda madrassen tillsammans med lyft. Skall alltid kombineras med ett nylonlakan.

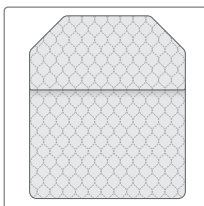

Tvådelad

Immedia TwinSheet4Glide finns även i en tvådelad version. Patienten kan vändas på sidan för sårsvård eller personlig hygien. Nederdelen kan enkelt tas bort och bytas ut om den blir smutsig. Kan användas tillsammans med lyft. Skall alltid kombineras med ett nylonlakan.

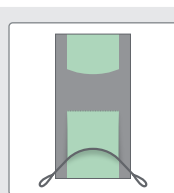

Rekommenderad kombination

Immedia 4WayGlide nylonlakan

Läs mer på sidan 14

Tillbehör



Tvättskydd för kardborrefäste

Fästes på handelen av kardborrefästet till TwinSheet4Glide vid tvätt eller torktumling för att undvika att damm eller ludd fastnar.

Beskrivning

Immedia TwinSheet4Glide – glidmadrass

		B x L (cm)	Art.nr
Lång	Absorberande glidmadrass	150 x 200	IM150/200N
Överdel	Absorberande glidmadrass. För komplett tvådelad beställ set.	150 x 75	IM150/75N
Nederdel	Absorberande glidmadrass. För komplett tvådelad beställ set.	150 x 140	IM150/140N

Immedia 4WayGlide – Nylonlakan

		B x L (cm)	Art.nr
LPL	Utan antihalkkanter	85 x 205	IM85/200
	Med antihalkkanter	85 x 205	IM85/200NS
	Med antihalkkanter	90 x 205	IM90/200NS
	Med 1 lås och utan antihalkkanter	85 x 205	IM85/200LPL
	Med antihalkkanter med 1 lås	85 x 205	IM85/200LPLNS
	Utan antihalkkanter med 2 lås	85 x 200	IM85/2002LPL
	Utan antihalkkanter med 3 lås	85 x 200	IM85/2003LPL
LPL Maxi	Antihalkkanter med 1 lås	110 x 200	IM110/200LPLNS
LPL Maxi	Antihalkkanter med 3 lås	120 x 200	IM120/2003LPL

Set – Immedia TwinSheet4Glide

		Art.nr
Tvådelad glidmadrass	Inkl. IM150/75N + IM150/140N	IM4315
Tvådelad glidmadrass + 1 lås	Inkl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/200LPL	IM4312
Tvådelad glidmadrass + 3 lås	Inkl. IM150/75N + IM150/140N + IM85/2003LPL	IM4314
Lång + 3 lås	Inkl. IM150/200N + IM85/2003LPL	IM4316
Lång + 1 lås	Inkl. IM150/200N + IM85/200LPLNS	IM4317

Specifikationer

Absorberande glidmadrass

Ovsida: mikrofiber (polyester)

Polstring: 80 % polyester/20 % viskos

Skyddsbarriär: polyuretan

Överdrag: polyuretan

Undersida: nylon

Handtag: polyester

Absorbering: 2 000 ml/m²

Nylonlakan

Material: nylon

Lås: nylon

Max. brukarvikt: 200 kg

Tillbehör (cm) Art.nr

Tvättskydd för kardborrefäste, handel, 2 st	5 x 50	IMLWS50
---	--------	---------



Tvättråd

Maskintvätt 80°C. Torktumling låg temperatur. Strykning låg temperatur. Tål ej kemtvätt. Ingen klorblekning. Torkning. Använd inte sköljmedel eller klorin.

För senaste nyheterna och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök: www.etac.se