



R82[®]

R82 Underreden

Stabila underreden med möjligheter till flexibla möjligheter.

Underreden från R82

Våra ute- och inneunderreden från R82 ger dig möjlighet till flexibla lösningar och erbjuds i flera olika varianter.

Ett uteunderrede förenklar vardagen för både föräldrar och vårdgivare och är idealiskt för shoppingturer och utflykter. Alla våra uteunderreden är testade och godkända för transport enligt standard ISO 7176-19

Våra inneunderreden är designade för att smälta in i miljön, både i hemmet och i skolan. Alla inneunderreden har smidiga hjul som gör underredena lättmanövrerade.

Innehåll

R82 Underreden

R82 High-low:xo	3-5
R82 Strong Base	6-7
R82 Multi Frame	8-10
R82 Multi Frame:x.....	12-13
R82 Combi Frame:x	14-16
R82 Stingray Frame	18-19



R82 High-low:xo[®]

High-low:xo är ett inomhus- och utomhusunderrede med användarvänlig höjdinställning från golv till bordshöjd.




Detaljer



Höjjusterbar

Höjden kan justeras från golv till bordshöjd. med hjälp av gas, el eller hydraulik.

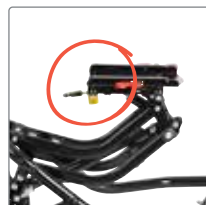

Vinkeljusterbar

Sitsplattan kan justeras från -10° till 30°. Tiltning kan underlätta för att upprätthålla en upprätt position för huvud och bål.



Fast montering eller adapter

Adaptorn erbjuder enkel och säker montering av sits på underredet och infästningen gör det enkelt att byta till en annan sits. Större sitsar kan monteras direkt på High-low:xo.



Säker transport

High-low:xo uteunderrede har testats och godkänts enligt ISO 7176-19 och kan användas med sitsar testade och godkända enligt ISO 16840-4.

Standard

Inneunderrede:

Svart underrede i pulverlackat stål, höj- och vinkeljusterbart inkl. adapter, centralbroms, hjul 100 mm.

Uteunderrede:

Svart underrede i pulverlackat stål, höj- och vinkeljusterbart inkl. adapter, centralbroms, länkhjul 7" x 1¾", bakhjul 12½" x 2¼", körbygel vinkelreglerbar.

Mått och vikt

High-low: xo inneunderrede		Storlek 1 Gas	Storlek 2 Gas	Storlek 1 EI	Storlek 2 EI	Storlek 3 EI	Storlek 2 Hydraulik	Storlek 3 Hydraulik
	Sitshöjd över golvet *	170-590 mm**	215-590 mm**	170-580 mm**	210-580 mm**	270-530 mm**	240-600 mm***	300-540 mm***
	Max belastning	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg	95 kg	75 kg	100 kg
	Plan sitsvinkel (adapter tilt)	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-10°) - 30°	(-5°) - 25°
	Längd	655 mm	795 mm	660 mm	795 mm	795 mm	795 mm	795 mm
	Totalbredd	560 mm	620 mm	560 mm	620 mm	620 mm	620 mm	620 mm
	Vikt	13 kg	13 kg	16 kg	17 kg	18 kg	19 kg	19 kg

*Till adapterplatta. **Mått med 75 mm hjul. ***Mått med 100 mm hjul. Se fler mått på vår hemsida.

High-low: xo uteunderrede		Storlek 1 Gas	Storlek 2 Gas	Storlek 1 EI	Storlek 2 EI
	Sitshöjd över golvet *	300-720 mm	345-720 mm	300-720 mm	345-720 mm
	Max belastning	70 kg	75 kg	70 kg	75 kg
	Max belastning vid transport	57 kg	57 kg	57 kg	57 kg
	Plan sitsvinkel (adapter tilt)	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°	-10° - 30°
	Längd**	795 mm	800 mm	795 mm	800 mm
	Totalbredd	660 mm	700 mm	660 mm	700 mm
	Vikt	22,0 kg	22,0 kg	25,0 kg	26,0 kg

*Till adapterplatta. **Mått med standard massiva hjul. Se fler mått på vår hemsida.


Accessories




Tippskydd inneunderrede



Tippskydd uteunderrede

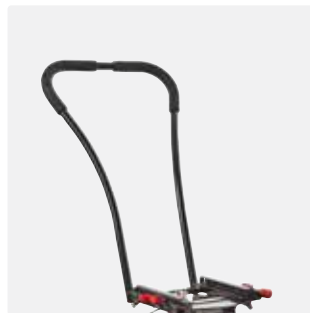

Körbygel till inneunderrede

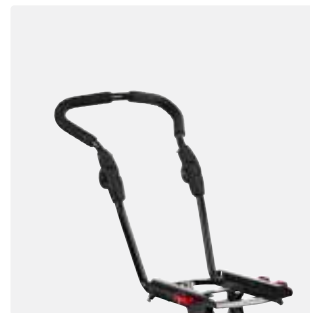

Körbygel, vinkeljusterbar till inneunderrede



Fotplatta Wombat, hel




Polstring fotplatta




Multijusterbara delade fotstöd



Delade fotplattor

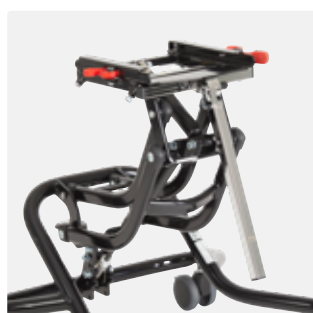

Stag till hel fotplatta

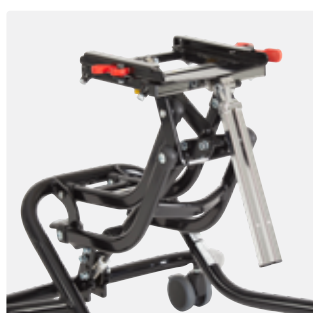

Stag till delade fotplattor



Transportäste till uteunderrede



Trampkloss

För fler tillbehör – se vår hemsida

R82 Strong Base[®]

Strong Base är ett stabilt och starkt underrede för större sitsar som x:panda storlek 4 och x:panda shape. Sitsen kan monteras direkt på ramen eller med en adapter.



Totalbredd
600 mm




Max belastning
120 kg




Användning
Endast inomhus

Detaljer

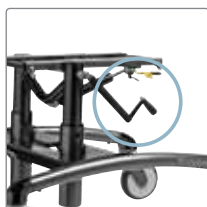

Höjdjustering

Strong Base finns med manuell höjdjustering från 30 till 55 cm alternativt steglös höjdjustering från 30 till 51 cm.

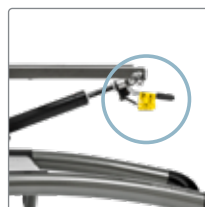

Tiltfunktion

Tiltfunktionen gör det möjligt att variera sittpositionerna. Vinkla helt enkelt hela enheten till önskad position. Sitsen kan tiltas från -10 till +25°.



Sitsar

Sitsen kan monteras direkt på ramen eller med en adapter.



Lätt att manövrera

Alla fyra hjul har broms och riktningsspärr vilket gör produkten lätt att manövrera för både användare och hjälpare.

Standard


1 storlek i två versioner, manuell alt. steglös höjdjustering, tiltfunktion, 125 mm hjul med broms och riktningsspärr, lås på alla 4 hjul och sitsplatta.

Mått och vikt

		1	2
	Sitshöjd över golvet *	420-670 mm	420-630 mm
	Max belastning	120 kg	120 kg
	Plan sitsvinkel	-10° - 25°	-10° - 25°
	Längd	700 mm	700 mm
	Totalbredd	600 mm	600 mm
	Totalhöjd	300-550 mm	300-510 mm
	Vikt	14 kg	15,5 kg

*Mått med x:panda storlek 4 från sits till golv. Se fler mått på vår hemsida.

Tillbehör

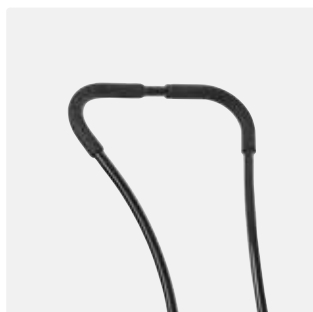


Körbygel



Körbygel vinkeljusterbar



Adapter för sits

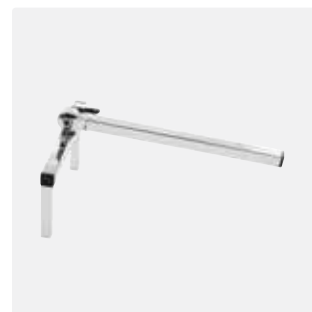


Stag till hel fotplatta




Stag till delade fotplattor



Fotplatta Wombat, hel

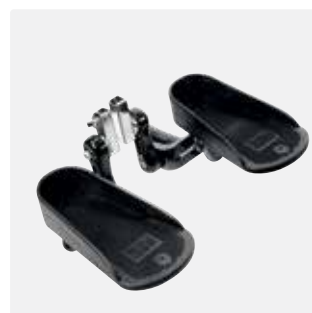

Delade fotplattor, individuellt justerbara

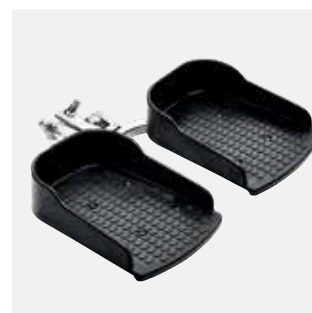

Delade fotplattor

För fler tillbehör – se vår hemsida

R82 Multi Frame[®]

Multi Frame är ett innovativt underrede med låg vikt och goda köregenskaper. Multi Frame kan monteras med olika sittsystem som x:panda, x:panda shape och Panda Futura eller en formgjuten sits. Multi Frame kan också användas som underrede till sittsystem från andra leverantörer.




Detaljer



Tiltfunktion

Tiltfunktionen är smart utformad och enkel att använda.

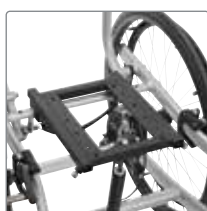

Adapter

Multi Frame kan monteras med sitsar från andra leverantörer.



Sitsar och sittsystem

Multi Frame kan användas tillsammans med sittsystem Panda Futura, x:panda eller x:panda shape.



Säker transport

Multi Frame är testad och godkänd för transport enligt standard ISO 7176-19. Multi Frame kan användas med sitsar testade och godkända enligt ISO 16840-4.

Standard

Underrede i silvermetall, sitstilt 0° to 30°, vårdarbroms, drivhjul 12.5"/22" massiva, länkhjul 7" massiva, körbygel vinkeljusterbar, tippskydd.

Mått och vikt

		1	2	3
	Sitshöjd över golvet*	395, 425, 455 mm	395, 425, 455 mm	395, 425, 455 mm
	Max belastning	100 kg	100 kg	100 kg
	Max belastning vid transport	100 kg	100 kg	100 kg
	Plan sitsvinkel	0-30°, 35°, 40°	0-30°, 35°, 40°	0-30°, 35°, 40°
	Inre bredd	340 mm	390 mm	440 mm
	Längd med 12½" hjul	640 mm	640 mm	690 mm
	Längd med 22"	750 mm	750 mm	800 mm
	Totalbredd**	590 mm	640 mm	690 mm
	Totalhöjd***	915 mm	915 mm	915 mm
	Längd, ihopfälld med 12½" hjul	730 mm	730 mm	730 mm
	Bredd, ihopfälld med 12½" hjul	640 mm	640 mm	690 mm
	Höjd, ihopfälld med 12½" hjul	470 mm	470 mm	470 mm
	Längd, ihopfälld med 22" hjul	850 mm	850 mm	850 mm
	Bredd, ihopfälld med 22" hjul	590 mm	640 mm	690 mm
	Höjd, ihopfälld med 22" hjul	560 mm	560 mm	560 mm
	Vikt med 12 ½" hjul	13 kg	13 kg	13 kg
	Vikt med 22" hjul	14 kg	14 kg	14 kg

*Mått till sitsplattan. ***Mått med 22" hjul. ***Mått med körbygel 15°. Se fler mått på vår hemsida.

Tillbehör



Adapter



Transportfäste



Ekerskydd



Stag till hel fotplatta




Fotstöd multijusterbara, delade



Fotplatta Wombat, hel



Syrgashållare

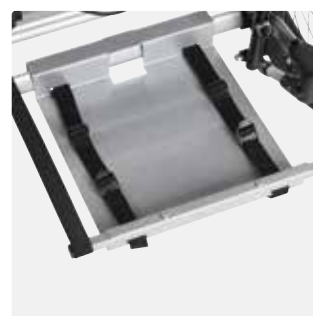

Bricka för ventilator


För fler tillbehör – se vår hemsida





R82 Multi Frame:x[®]

Multi Frame:x är ett stabilt och lättmanövrerat rullstolsunderrede, utformad för att ge stabilitet och säkerhet utöver det vanliga. Det är det perfekta valet av rullstolsunderrede för sittsystem x:panda shape storlek 3 och x:panda storlek 4.

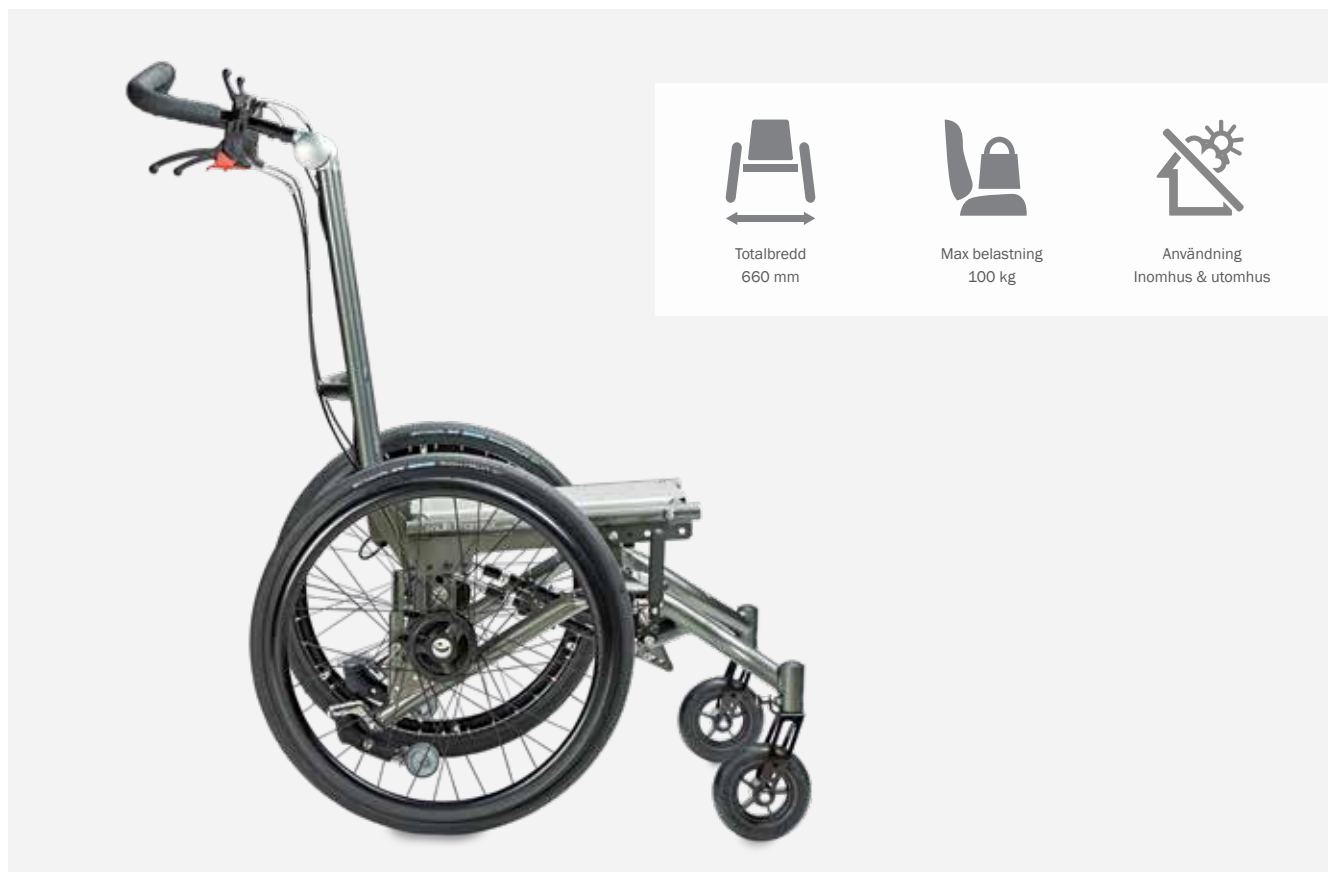

Detaljer



Sitsar för Multi Frame:x

Multi Frame:x är det perfekta valet av underrede för tyngre sitsar som x:panda shape storlek 3 och x:panda storlek 4.



Justering av sitshöjd

Positionera användaren så nära golvet som möjligt för att säkerställa en enkel förflyttning.



Användarvänlig justerbarhet

Sitsilt och ryggstödvinkel justeras med körbygeln för att säkerställa optimala arbetsförhållanden. Steglös justering av körbygeln gör det enkelt att anpassa höjden efter olika vårdare.



Säker transport

Multi Frame:x är testad och godkänd för transport enligt standard ISO 7176-19. Multi Frame:x kan användas med sitsar testade och godkända enligt ISO 16840-4.

Standard

Ryggvinkling, sitsilt, tippskydd, drivhjul 22" massiva, vårdarbroms, länkhjul 7" massiva.

Mått och vikt

		3
	Sitshöjd över golvet	410, 435, 460 mm
	Max belastning	100 kg
	Max belastning vid transport	100 kg
	Plan sitsvinkel	-5° - 30°
	Bredd mellan hjulen	535 mm
	Längd	840 mm
	Totalbredd	660 mm
	Totalhöjd	980 mm
	Vikt	20 kg

Multi Frame:x är godkänd för transport av användare i motorfordon. Spänn fast användaren med ett godkänt 3-punktsbälte enligt ISO 10542-1 och använd ett godkänt 4-punktsbältesystem enligt ISO 10542-2 för att spänna fast rullstolen i framåtvänt läge i fordonet. Alla avtagbara tillbehör måste demonteras och säkras separat i fordonet.

Tillbehör



Adapter



Stänkskärmar




Transportfäste



Hållare ventilator




Fäste för stag fotplatta

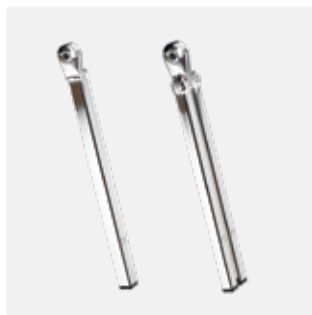

Stag till delade eller hel fotplatta



Fotpatta Wombat, hel

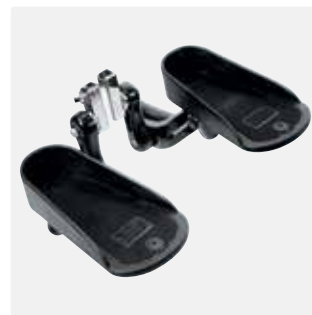

Delade fotplattor, individuellt justerbara


För fler tillbehör – se vår hemsida

R82 Combi Frame:x[®]

Combi Frame:x är ett unikt rullstolunderrede för individuella sittsystem. Combi Frame:x är idealisk för både inomhus och utomhusbruk och kan användas till olika varianter av sitt- och ryggsystem. Combi Frame:x är lämplig för användare i behov av ett individuellt sittsystem och underrede.



Detaljer

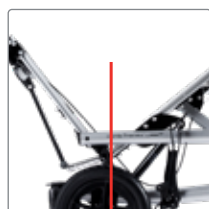

Tiltfunktion

Combi Frame:x har en självcentrerande tilt. Sittenheten kan tiltas 0–40°.



Fast montering eller adapter

Flera olika sitsar kan monteras direkt på Combi Frame:x, alternativt i kombination med adapter. Underredet används till sittsystem som x:panda, x:panda shape och Panda Futura.



Sitsar och sittsystem

Combi Frame:x kan användas tillsammans med olika sitt- och ryggsystem.



Säker transport

Combi Frame:x är testad och godkänd för transport enligt standard ISO 7176-19. Combi Frame:x kan användas med sittsystem som är testade och godkända enligt standard ISO 16840-4.

Standard


4 storlekar, underrede i silvermetall, vårdarbroms, brukarbroms, drivhjul 12.5"/22" massiva, länkhjul 7" massiva, körbygel vinkelreglerbar, tippskydd, sitstilt 0-40°.

Measurements


		1	2	3	4
	Sitshöjd över golvet	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm	430, 460, 490 mm
	Max belastning	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	Max belastning vid transport	100 kg	100 kg	100 kg	100 kg
	Plan sitsvinkel	0-40°	0-40°	0-40°	0-40°
	Bredd mellan hjulen	440 mm	490 mm	540 mm	610 mm
	Totallängd	830 mm	830 mm	830 mm	830 mm
	Totalbredd	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm
	Totalhöjd	900 mm	940 mm	1040 mm	1140 mm
	Längd ihopfälld	800 mm	800 mm	840 mm	940 mm
	Bredd ihopfälld	580 mm	630 mm	680 mm	730 mm
	Höjd ihopfälld	550 mm	550 mm	550 mm	550 mm
	Vikt	22 kg	23 kg	24 kg	27 kg

Se fler mått på vår hemsida.

Tillbehör

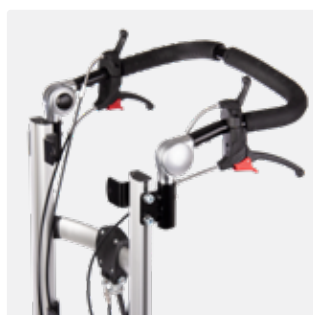

Körbygel
Standard

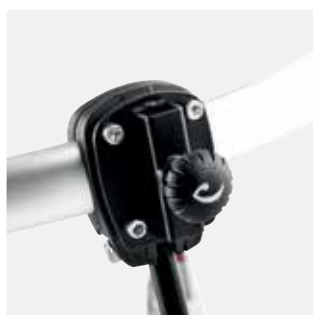

Fäste huvudstöd




Huvudstöd



Armstöd för formgjuten sits

Tillbehör

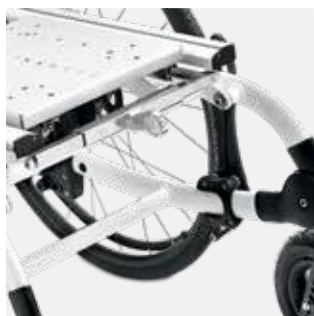

Fäste för stag hel/delad fotplatta




Stag till hel fotplatta




Stag till delade fotplattor




Fotplatta Wombat, hel

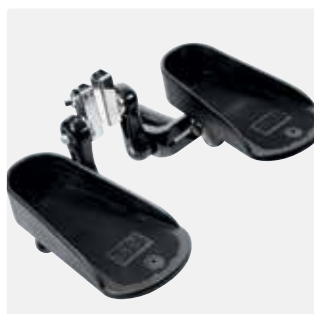

Delade fotplattor, individuellt justerbara

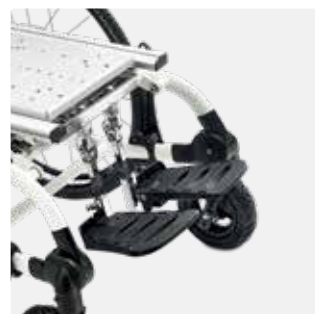


Fotstöd multijusterbara, delade

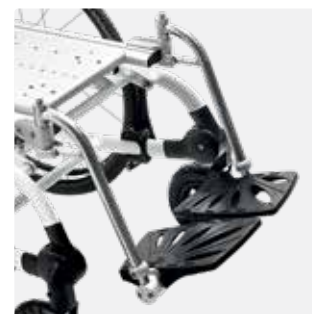


Fotstöd delade, fasta



Fotstöd delade, gaskolv

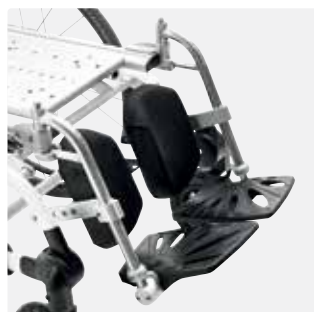

Vadstöd, delat inkl. överdrag

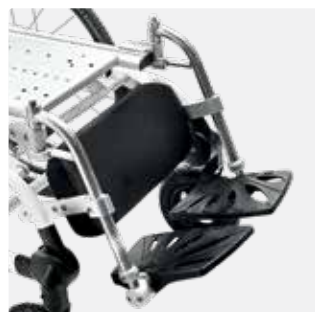

Vadstöd, helt




Hållare för ventilator



Fixlock



Stänkskärmar

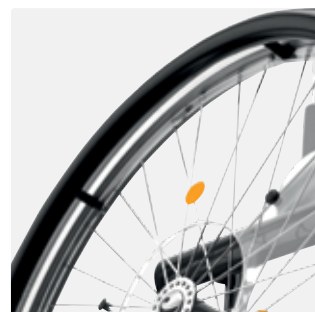

Ekerskydd



Transportfäste




Adapter

För fler tillbehör – se vår hemsida



R82 Stingray Frame[®]

Design, justeringsmöjligheter, komfort och användarvänlighet är några av nyckelorden för denna sulky. Det är bland annat möjligt att ändra från framåtvänd till bakåtvänd sits i 180 gr med barnet sittande i sulkyn.

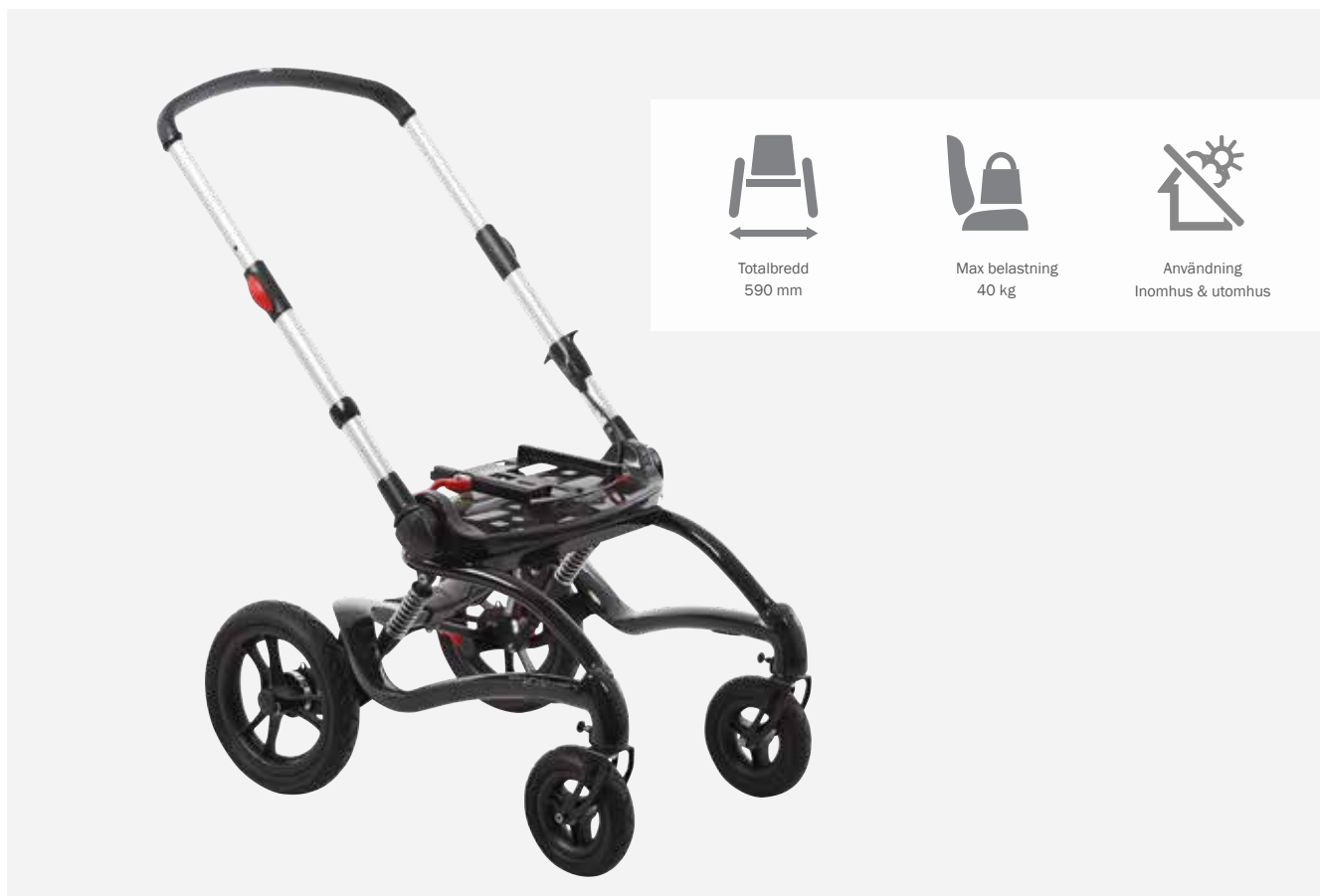

Detaljer



180° vändbar sits

180° vändbar sits som ger barnet möjlighet att följa omgivningen i färdriktningen eller se och kommunicera med en vuxen.



Fällbar

Stingray är hopfällbar för förvaring och transport.



Sitstilt och ryggvinkel

Funktionen "tilt in space" är mycket användbar när användaren behöver vila. Vinkla helt enkelt hela enheten till önskad position.



Säker transport

Stingray är testad och godkänd för transport enligt standard ISO 7176-19. Stingray kan användas med sittsystem som är testade och godkända enligt standard ISO 16840-4.

Standard

180° vändbar sits, sits- och ryggtilt, bakhjul 12" massiva, framhjul 7" svängbara/12" massiva, centralbroms, körbygel höjdreglerbar, fotstöd höjd- och vinkelreglerbart, fotstödsstag vinkelreglerbart stl.1: 21 cm, stl 2: 28 cm

Mått och vikt

1		
	Sitshöjd över golvet*	520 mm
	Max belastning	40 kg
	Max belastning vid transport	40 kg
	Plan sitsvinkel	45°
	Längd**	740 mm
	Totalbredd	590 mm
	Totalhöjd	1000, 1030, 1060 mm
	Längd ihopfälld	900 mm
	Bredd ihopfälld	590 mm
	Höjd ihopfälld	490 mm
	Vikt	13,5 kg

*Mätt med adapter. **Mätt med svängbara framhjul. Se fler mått på vår hemsida.

Tillbehör




Varukorg



Transportfäste



Hållare för ventilator

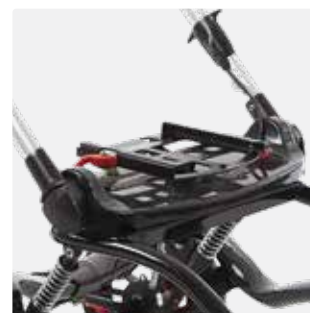

Adapter till x:panda, x:panda shape och Panda Futura

För fler tillbehör – se vår hemsida



Etac är en världsledande utvecklare av hjälpmedel för människor med funktionsvariationer och produkter för patientförflyttningar. Syftet med vår verksamhet är att erbjuda lösningar som förbättrar livskvaliteten för användare, deras familjer och vårdgivare.

För produktens avsedda ändamål, nyheter och kontinuerligt uppdaterad produktinformation – besök www.etac.se

Etac Sverige AB



0371-58 73 00



info@etac.se



www.etac.se

etac[®]
Creating Possibilities