



R82 x:panda

Multijusterbar sittemodul for barn og unge

 **etac**[®]

R82 x:panda

Vinner i NAV-avtale Moduloppbygde sittesystemer, delkontrakt 1 (str. 1-3) og 2 (str. 4).

x:panda er et tilpasningsdyktig modulært sittesystem som kan tilpasses og konfigureres på en rekke måter. Den møter derfor behovene til de fleste kroppstyper og -funksjoner, og vokser med barnet.

Forenkling av hverdagen

Enkeltpersoner, familier og spesialister over hele verden har gleden av de mange konfigurasjonene til x:panda og dens variasjon av funksjoner og tilbehør. x:panda gir en ideell sittestilling for barn og unge som lever med bevegelseshemninger, og hjelper dem å leke og delta i aktiviteter.

Setet har armlener, faste kiler, visuelle markeringer, puter og trekk. Også funksjoner som dynamisk rygg, ryggstøtte, multijusterbarhet og tilbehør bidrar til et bredt utvalg av posisjoneringsmuligheter. Når et barn liker sittekomfort og ideell posisjonering, er dette ikke bare til fordel for barnet klinisk, men det oppmuntrer også til ferdighetsutvikling og meningsfylt engasjement med jevnaldrende.

Understell

x:panda kan leveres med flere ulike understell. Se kort presentasjon på s. 8. Mer info finner du på etac.no og Hjelpemiddeldatabasen.no



x:panda str. 1-3

Detaljer



Ikke bare et armlen

Armlenene til x:panda har nå enda bedre stabilitet, memory-funksjon og hurtigkoblingssystem for ta av og på. I tillegg har de myke og komfortable trekk.



Faste kiler

De faste kilene skaper et stabilt sete som forhindrer blant annet adduksjon og abduksjon. Kilene sitter fast om putene tas av, og kommer i åtte ulike størrelser.



Sete med visuell størrelsesmarkering

De tydelige markeringene gjør det mulig å identifisere størrelsen på sete og rygg, og hvor man skal montere fikseringsmateriell som f. eks sidestøtter.



Sett farge på hverdagen

x:panda kan leveres i flere ulike farger. Sort er prisforhandlet farge.

R82 x:panda som standard

Standard prisforhandlet utførelse str. 1

- Sittemodul str. 1, setebredde* 16, 20, 24 cm
- Dynamisk rygg (50N)
- Setepute, sort
- Ryggpute, sort
- Hoftebelte, polstret, Y-modell, str. xs
- Armlen str. 1
- Setekiler 6 cm
- Anatomisk hodestøtte medium (nr. 4), sort
- Sidestøtte nr. 1, faste

Standard prisforhandlet utførelse str. 3

- Sittemodul str. 3, setebredde* 26, 31, 36 cm
- Dynamisk rygg (150N)
- Setepute, sort
- Ryggpute, sort
- Hoftebelte, polstret, Y-modell, str. M
- Armlen str. 3
- Setekiler 12 cm
- Anatomisk hodestøtte medium (nr. 4), sort
- Sidestøtter nr. 3, faste

* Oppgi ønsket setebredde ved bestilling

Standard prisforhandlet utførelse str. 2

- Sittemodul str. 2, setebredde* 20, 24, 28 cm
- Dynamisk rygg (100N)
- Setepute, sort
- Ryggpute, sort
- Hoftebelte, polstret, Y-modell, str. S
- Armlen str. 2
- Setekiler 10 cm
- Anatomisk hodestøtte medium (nr. 4), sort
- Sidestøtter nr. 2, faste

Standard prisforhandlet utførelse str. 4

- Sittemodul str. 4, setebredde* 34, 40, 46 cm
- Dynamisk rygg (350N)
- Setepute, sort
- Ryggpute, sort
- Hoftebelte, polstret, Y-modell, str. L
- Armlen str. 4, singel
- Setekiler 13 cm
- Anatomisk hodestøtte Large (nr. 5), sort
- Sidestøtter nr. 5, faste



x:panda str. 4

Fordeler

For de fleste barn og unge kan en god sittestilling ha en positiv innvirkning på muskeltonus og lette barnets evne til å utføre bevegelser med overekstremiteter og hode. En rekke ulike funksjoner er utviklet for å skape best mulig tilpasningsdyktig sittestilling tilpasset den enkelte brukers sittebehov.

Hodestøtte

Et bredt utvalg av hodestøtter og beslag gir mange muligheter for individuell støtte når du hviler eller er aktiv.

Vester og belter

16 fix-locks på baksiden og på setet gjør det mulig å montere vester og belter.

Faste eller utsvingbare sidestøtter

De svingbare eller faste sidestøttene velges basert på barnets kroppskontroll og evne til å utføre armbevegelser. Sidestøttene kan festes med hurtiglås for daglig justering av avstanden mellom sidestøttene.

Armlen

Det enkle koblingssystemet gjør det lett å sette på og fjerne armlenene. Markeringene bidrar til å sikre at armlenene flyttes i samme høyde etter at de er fjernet.

Trekk

Slitesterke og komfortable trekk for sidestøtter og abduksjonsklosser er tilgjengelig.

Puter

Putene er laget av en komfortabel sete- og ryggputeløsning i ett stykke uten sømmer i midten. De har et ekstra lag med skum for forbedret trykkavlastning.

Abduksjon og adduksjon

Knestøttene tillater en posisjon mellom 0 og 15 graders abduksjon i hofteleddene.

Understell

x:panda passer på en rekke understell for innendørs eller utendørs bruk. Se egen brosjyre for mer info.

Fotplater


Det finnes en rekke forskjellige fotstøtter som kan monteres på understellene til x:panda.



[Se video om x:panda](#)

Flere lag av komfort

Putene består av to lag skum: skum i selve puten, og et ekstra lag skum sydd på trekket. Dette bidrar til å forbedre trykkfordelingen og forbedrer komforten for brukeren. Trykkartlegging ble brukt ved utforming av tolagsløsningen. Les mer om våre resultater nedenfor.

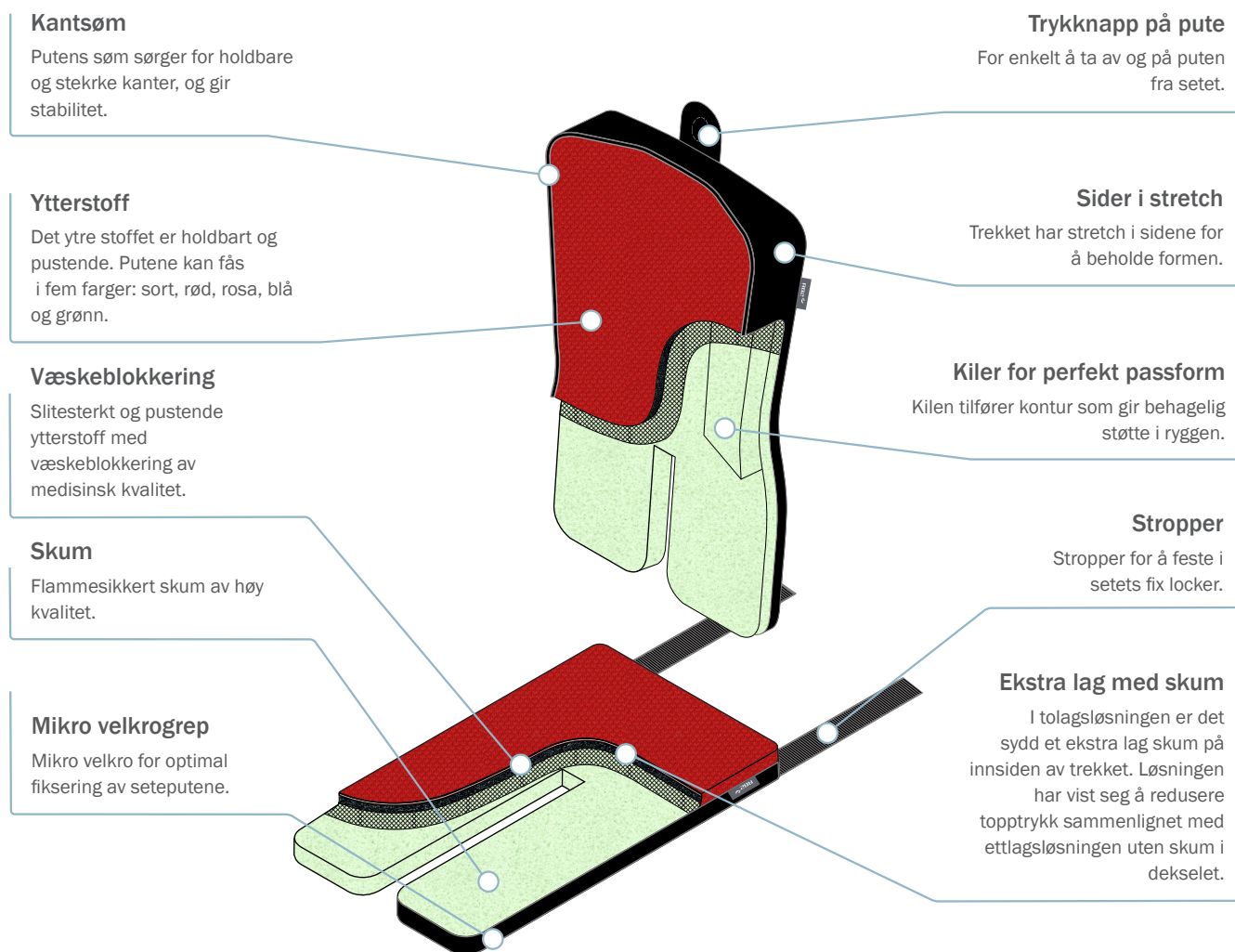
















Tolagsløsningen reduserer topptrykket

Vi målte topptrykk på x:panda str. 4 med og uten det ekstra skumlaget og med syv forskjellige vektbelastninger på 2-minutters økter. Resultatene våre viser en statistisk signifikant reduksjon av topptrykk med en gjennomsnittlig forbedring på 14 % ved bruk av det ekstra skumlaget.

En reduksjon i topptrykk kan forbedre komforten og redusere sannsynligheten for å utvikle trykksårskader. En klinisk vurdering av sittestillingen bør inkludere vurdering av risikofaktorene til det enkelte barn.

Mål & artikkelnummer

| | | Str. 1 | Str. 2 | Str. 3 | Str. 4 |
|---|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 2 3 | Art. nr | 3289211 | 3289212 | 3289213 | 3289214 |
| 1 2 3 | HMS nr. | 294635 | 294636 | 294637 | 294638 |
|  | Setebredde | 160, 200, 240 | 200, 240, 280 | 260, 310, 360 | 340, 400, 460 |
|  | Maks lårbredde | 70, 90, 110 | 100, 120, 140 | 120, 145, 170 | 130, 190, 250 |
|  | Setedybde | 160 - 260 | 220 - 330 | 260 - 390 | 390 - 530 |
|  | Rygg høyde | 270 - 370 | 320 - 420 | 350 - 470 | 500 - 710 |
|  | Ryggbredden topp av rygg | 230 | 280 | 330 | 350 +50 |
|  | Totalbredde, bein i full abduksjon | 310, 350, 390 | 380, 420, 460 | 470, 520, 570 | 590, 650, 710 |
|  | Avstand armlen til sete | 100-165 | 100-165 | 100-165 | 100-165 |
|  | Lengde armlen | 140 | 140 | 180 | 350 |
|  | Ryggvinkel | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° | -5° - +30° |
|  | Vinkel pr. bein, (str. 1 i minste posisjon) | 0° - 15° 0° - 8° | 0° - 15° | 0° - 15° | 0° - 15° |
|  | Vekt | 6,5 kg | 8,5 kg | 11 kg | 13 kg |
|  | Maks brukervekt | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 80 kg |
|  | Maks brukervekt ved transport | 30 kg | 30 kg | 60 kg | 75 kg |
|  | Min. brukerhøyde | 650 | 850 | 1000 | 1390 |
|  | Maks brukerhøyde | 1050 | 1280 | 1430 | 1800 |

Tilbehør


For komplett oversikt over tilbehør, artikkelnummer og HMS-nummer, besøk vår nettside.



Ryggløser



Hodestøtte

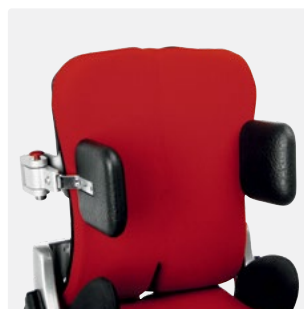


Swing-away sidestøtter




Faste sidestøtter



Overarmsstøtte, justerbare

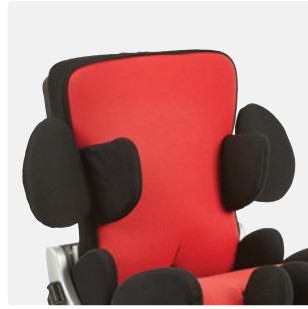

Overarmsstøtte, faste

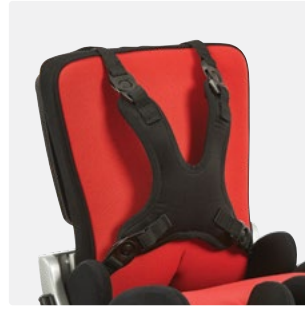

Vester og belter



Gassfjærsett



Fiksert rygg



Fix locks



Breddesett, rygg
Til x:panda str. 4



Mellomplate
Til x:panda str. 4



Polstring til ryggstøtte



Korsryggstøtte




Hoftestøtter
Til x:panda str. 4



Armlen/ Trekk til armlen/
Justeringshjul



Ekstra polstring

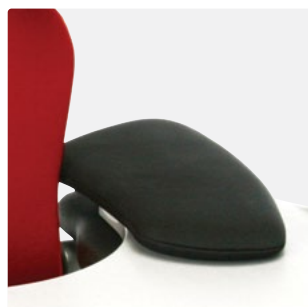

Armstøtte til bord



Gripebøyle til bord



Bord og lekebøyle

Understell til R82 x:panda

x:panda kan monteres på flere ulike understell. Komplette oversikt og mer informasjon om alle understellene finner du på etac.no og Hjelpemiddeldatabasen.no.

Nyhet! High-Low:xo

High-Low:xo er et helt nytt understell som kan benyttes både inne og ute.

Understellet kan tiltes fra -10 til 30° og har en brukervennlig høydejustering fra gulv til bordhøyde som betjenes enten manuelt eller elektrisk. Det er mulighet for flere ulike fotbrett-/ fotplateløsninger.



High-low:xo inne



High-low:xo ute

Artikkelnummer High-low:xo x:panda understell, inne

| | Str. 1, el. ● | Str. 1, man. ● | Str. 1, el. ● | Str. 2, el. | Str. 3, el. |
|---------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|
| Art. nr | 3289621E | 3289621 | 3289622E | 3289623E | 3289624E |
| HMS nr. | 294658 | 294663 | 294659 | 294665 | 294666 |

Artikkelnummer High-low:xo x:panda understell, ute

| | Str. 1, el, ● ledsagerbrems | Str. 1, el, ● kun sentralbrems | Str. 1, man, ● ledsagerbrems | Str. 1, man, ● kun sentralbrems | Str. 1, man, ● ledsagerbrems |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Art. nr | 3289821E | 3289721E | 3289401 | 3289721 | 3289402 |
| HMS nr. | 294673 | 294674 | 294675 | 294676 | 294679 |

| | Str. 1, el, ● ledsagerbrems | Str. 1, el, ● kun sentralbrems | Str. 1, man, ● kun sentralbrems | Str. 2, el, ledsagerbrems | Str. 2, el, kun sentralbrems |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Art. nr | 3289822E | 3289722E | 3289722 | 3289823E | 3289723E |
| HMS nr. | 294677 | 294678 | 294680 | 294681 | 294682 |

● Liten fotplate (fotplatestr. 1): lav innfestning

● Stor fotplate (fotplatestr. 2): høy innfestning

På str. 1 kan man velge mellom stor og liten fotplate. På str. 2: fotplatestr. 2, høy innfestning.
Str. 3: fotplatestr. 3, høy innfestning.



Andre understell til R82 x:panda



Stingray

Stingray har en base som kan snus 180° uten at barnet må forlate setet. Understellet har tilt-in-space, er lett å manøvrere og er sammenleggbart. Passer til de minste x:panda-setene.



Combi Frame:x

Combi Frame:x er ideelt for både inne og utendørs bruk. Det har tilt-in-space og kommer med enten 12½ eller 22" bakhjul.



Strong Base

Strong Base er et enkelt, stabilt og robust understell for større seteenheter og passer til x:panda str. 4. Understellet kan høydejusteres og har tilt-in-space.



MultiFrame:x

MultiFrame:x er stabilt og sikkert, og passer til større seteenheter som x:panda str. 4. Velg mellom 12½ eller 22" bakhjul.



MultiFrame

MultiFrame:x er et innovativt og lett understell som passer til x:panda str. 1-3. Tilt-in-space og lett å manøvrere. Velg mellom 12½ eller 22" bakhjul.

For mer informasjon, artikkelnummer og standard konfigurasjon av disse understellene, besøk etac.no.

Kombinasjon av sittemoduler og understell

| PRODUKT | x:panda str. 1 S | x:panda str. 1 M | x:panda str. 1 L | x:panda str. 2 S | x:panda str. 2 M | x:panda str. 2 L | x:panda str. 3 S | x:panda str. 3 M | x:panda str. 3 L | x:panda str. 4 S | x:panda str. 4 M | x:panda str. 4 L | Stingray sete str. 1 | Stingray sete str. 2 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| UNDERSTELL | | | | | | | | | | | | | | |
| High-Low: xo Inne, manuell str. 1 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | |
| High-Low: xo Inne, elektrisk str. 1 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | X | |
| High-Low: xo Inne, manuell str. 2 | | | | | | | X | X | X | | | | | X |
| High-Low: xo Inne, elektrisk str. 2 | | | | | | | X | X | X | | | | | X |
| High-Low: xo Inne, elektrisk str. 3 | | | | | | | | | | X | X | X | | |
| High-Low: xo Ute, manuell str. 1 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| High-Low: xo Ute, elektrisk str. 1 | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| High-Low: xo Ute, manuell str. 2 | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| High-Low: xo Ute, elektrisk str. 2 | | | | | | | X | X | X | | | | | |
| Combi Frame: x Str. 1 12 1/2" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Combi Frame: x Str. 1 22" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Combi Frame: x Str. 2 12 1/2" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Combi Frame: x Str. 2 22" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Combi Frame: x Str. 3 12 1/2" hjul | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| Combi Frame: x Str. 3 22" hjul | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| Combi Frame: x Str. 4 22" hjul | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| Multi Frame Str. 1 - 12 1/2" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Multi Frame Str. 1 - 22" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Multi Frame Str. 2 - 12 1/2" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Multi Frame Str. 2 - 22" hjul | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Multi Frame Str. 3 - 12 1/2" hjul | | | | | | | X | X | X | X | X | X | | |
| Multi Frame Str. 3 - 22" hjul | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | |
| Multi Frame: x str. 3 - 12 1/2" hjul | | | | | | | | | | | | | X | |
| Multi Frame: x str. 3 - 22" hjul | | | | | | | | | | | | | X | |
| Stingray | X | X | X | X | X | X | | | | | | | | |
| Strong Base | | | | | | | | | | | | | | X |

Hodestøtter

x:panda kommer standard med en anatomisk hodestøtte. Str. 1-3 har hodestøtte størrelse nr. 4 medium, og str. 4 har hodestøtte nr. 5 large.

Komplett oversikt over alle hodestøtter finner du på etac.no:



Anatomisk hodestøtte nr. 4



Anatomisk hodestøtte nr. 5

Vester og belter

Det finnes flere vester og belter som kan monteres på x:panda. Se hele utvalget på etac.no:



Neopren-/ Torsovest



Kryssvest



Sternumsele









“Vi i Etac ønsker at alle skal kunne leve et fritt og uavhengig liv og følge sine drømmer, uavhengig av fysiske omstendigheter. ”

For nyheter og løpende produktoppdateringer - besøk www.etac.no