



R82®

x:panda shape

Designet til at passe til dit barns individuelle behov

Designet til at passe til individuelle behov

x:panda shape er blevet skabt, så vi kan tilbyde den bedste stol, hvorfra dit barn kan leve livet fuldt ud. Den er designet til at ændre form, så den kan følge dit barns udvikling, og kan justeres i sædebredde og -dybde samt rygbredde og -højde for at sikre en skræddersyet pasform med et højt komfortniveau. På den måde skabes der altid et stabilt sæde, hvorfra dit barn kan interagere og deltage i livet så uafhængigt som muligt.



Unik dynamisk ryg

x:panda shape er udstyret med den unikke dynamiske ryg. Modstandskraften forbliver konstant, når ryggen er tilbagelænet. Med den justerbare dynamiske ryg er det muligt at ændre modstanden dagligt eller efterhånden som barnet vokser, afhængigt af de individuelle behov.


x:panda shape er udviklet med et specielt fokus på ryggenes leddeling i forhold til sædet. Målet var at skabe et sædesystem, der bevæger sig i harmoni med kroppen. Den dynamiske ryg giver barnet mulighed for at strække sig og skubbe sig bagud med minimal modstand og derefter vende tilbage til den oprindelige siddestilling.



Bygget til at vokse med barnet

Sædesystemets multijusterbarhed og vækstfunktioner gør det muligt, at justere benstøtten, ryghøjden, sædebredden og -dybden individuelt, for at imødekomme barnets vækst.

x:panda shape er konfigurerbar og giver skræddersyet støtte, der passer til de individuelle behov. Sædet kan imødekomme meget komplekse siddestillinger; det kan fungere som et simpelt aktivitetssæde, og det kan fungere som alt andet derimellem.

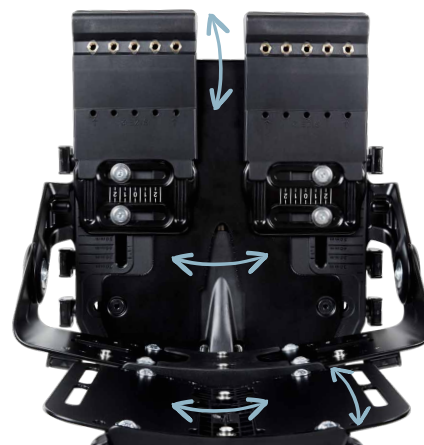

Infant eller Advanced sædesystem

x:panda shape er udviklet for at skabe den bedst mulige siddestilling og findes i 2 basisudførelser; Infant og Advanced. Begge er designet til at kunne ændre form og vokse med barnet.



Kiler

Sædekiler skaber en blid kontur i sædet og forbedrer funktion og trykfordeling ved at aflaste sædeknuderne. Kilerne øger kontaktfladen mellem brugeren og puden, hvilket giver bækkenstabilitet og kontrol gennem optimal positionering, og forhindrer bækkenet i at kippe bagud.

Kilerne kan justeres i længden for at imødekomme behovene hos et voksende barn. Kun tilgængelige til advanced seating.



Tidlig støtte

Infant sædet giver støtte til spædbørn, der således får mulighed for tidligt at deltage i social interaktion med forældre, plejere og miljøet.

Dette sædesystem er designet til at give en behagelig, sikker og tæt pasform til selv de mindste børn.


Sædesystemet og det tilgængelige tilbehør kan justeres og understøtter den ønskede position.

x:panda shape kan bruges til at støtte og give barnet mulighed for at udfordre og udvikle sin kognitive, sociale, følelsesmæssige, tale- og sproglige samt fin- og grovmotoriske udvikling.



Komfort i flere lag

Hynderne består af to lag skum: skum i selve hynden, såvel som et ekstra lag skum syet på betrækket. Dette hjælper med at forbedre trykaflastningen og forbedrer komforten for barnet.

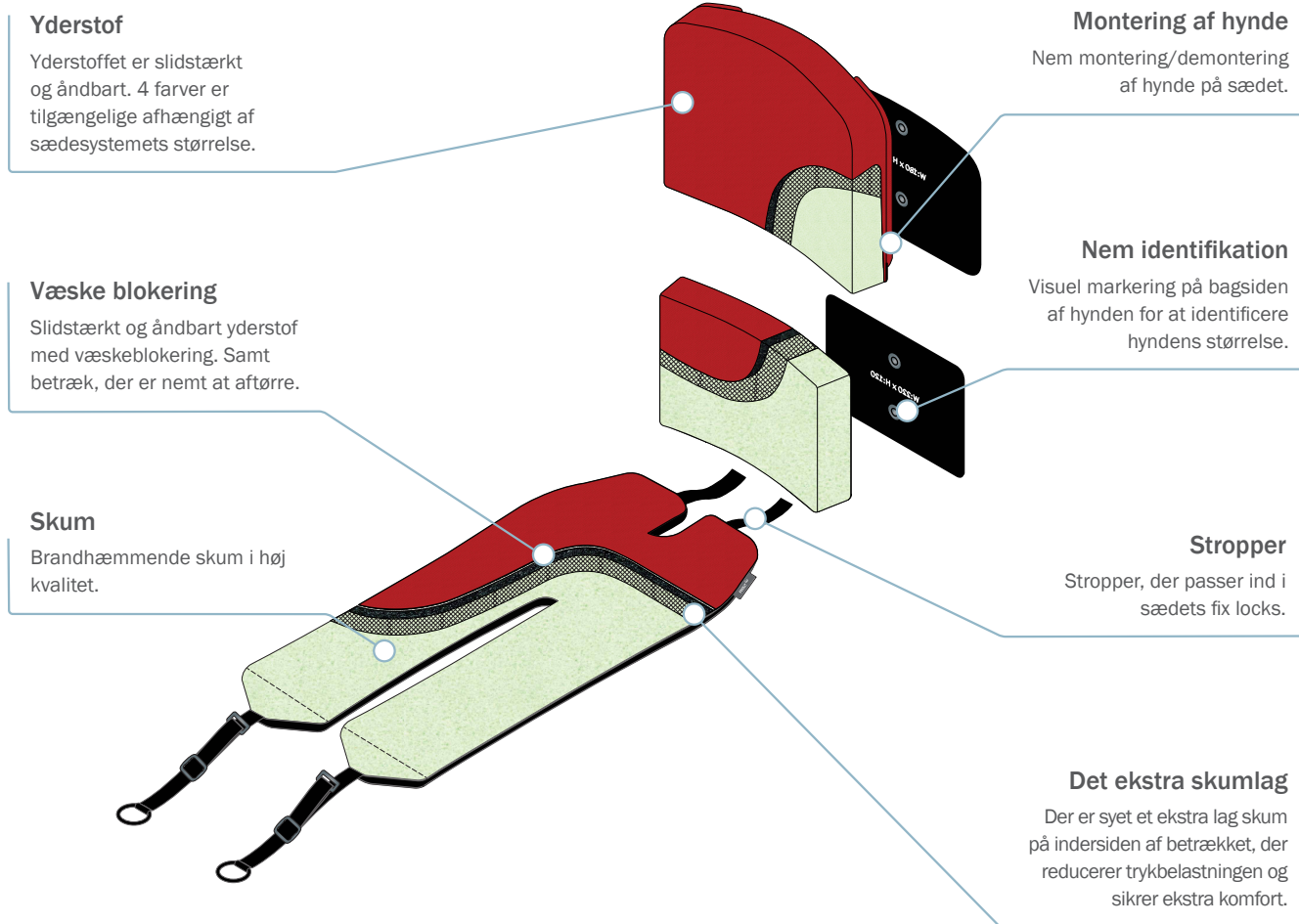

Farvevalg


Infant

- Lyseblå og Lyserød er standard
- Sort, kan aftørres (længere leveringstid bør påregnes)

Advanced

- Grå er standard
- Sort, kan aftørres (længere leveringstid bør påregnes)

Farve ryghynde og sædehynde

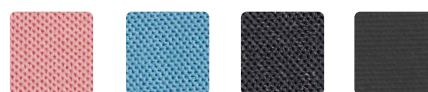

Lyserød*

Lyseblå*

Grå

Sort, kan aftørres

*Kun tilgængelig for sæderne til spædbørn (Infant seating)

Egenskaber

For de fleste børn og unge har en korrekt positionering og behagelig siddestilling en positiv indflydelse på muskeltonus, der dermed fremmer evnen til at udføre aktiviteter og opnå kontrollerede bevægelser af øvre ekstremiteter og hoved. En række forskellige funktioner i sædet er udviklet for at skabe den bedst mulige siddestilling i forhold til den enkelte brugers behov for positionering.

Hovedstøtte

Et bredt udvalg af hovedstøtter, inkl. et nyt 3D beslag (giver flere muligheder for indstilling af vinkel) og behagelig buet pude, giver mange muligheder for individuel støtte, i hvile eller aktivitet.

Faste eller svingbare sidestøtter

De svingbare eller faste sidestøtter vælges afhængigt af barnets kropskontrol, barnets siddende balance og deres evne til at bevæge armene.

Hynder og betræk

Komfortable hynder med slidstærkt betræk til sæde- og ryghynder, sidestøtter, hoftestøtter og knæstøtter.

Justerbare sædekiler

Kilerne øger kontaktfladen mellem barnet og hynden, hvilket giver bækkenstabilitet og kontrol gennem optimal positionering og forhindrer bækkenet i at kipe bagud.

Stel

x:panda shape passer til en lang række stel til indendørs eller udendørs brug.

Veste & seler

De mange Fix-locks på ryggen og sædet på x:panda shape gør det muligt at montere veste og seler.

Armlæn

Snaplåssystemet gør det nemt at fastgøre og fjerne armlænene. Markeringerne hjælper med at sikre, at armlænene placeres i samme højde som før, når de har været fjernet. Betræk kan påsættes armlænene.

Hofte- og bækkenstøtter

Skaber en understøttende overflade, der forhindrer sidelæns bevægelse i sædet og reducerer bækkenets tendens til at vippe sidelæns. Både hofte- og bækkenstøtte kan justeres, når barnet er placeret i sædet.

Indvendige og udvendige knæstøtter

Giver stabilitet til underkøben og forhindrer hofteadduktion ved at støtte den nederste del af låret, indersiden af knæet og den øverste del af underbenet.

Fodstøtter

Der findes flere forskellige fodstøtter, som kan monteres på stellerne, der anvendes med x:panda shape.



Visuelle markeringer

x:panda shape kan imødekomme komplekse krav og give barnet en pålidelig og optimal positionering. For brugervenlig håndtering og tilpasning af sædet, har x:panda shape visuelle markeringer på ryglænets udvendige og indvendige overflade, såvel som på sædets overflade.




Ryg - udvendig overflade

Disse visuelle markeringer kan anvendes til at identificere, hvor ryglænet, ryghøjden og højden på hovedstøtten kan justeres.



Ryg - indvendig overflade

Disse visuelle markeringer hjælper med at identificere ryglænets størrelse, og hvor den nederste del og den øverste del af ryggen kan justeres.

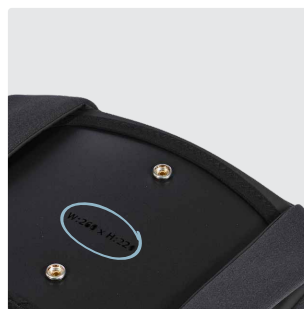

Størrelsesangivelse på hynde

Visuel markering på bagsiden af hynden for at identificere størrelsen på den hynde, der passer til størrelsen på bagsiden af siddesystemet.




Transportlås

Nem identifikation af låsen på den dynamiske ryg, hvilket er nødvendigt, hvis sædet bruges til transport i motorkøretøjer.



Sæde

Nem identifikation af sædebredde og indstilling af sædedybde.

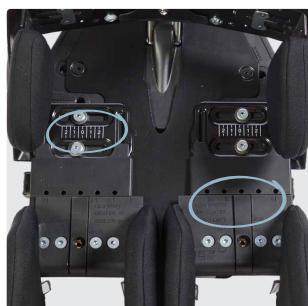

Avancerede sædeplader

Visuelle markeringer af placeringen af de avancerede sædeplader og placeringen af de indvendige og udvendige knæstøtter.



Rygvinkling

Nem identifikation af vinklen på ryggen.



Styrken på den dynamiske ryg

Justerbar dynamisk ryg gør det muligt at justere modstanden i ryggen.

Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligehold af x:panda shapes hynder og betræk er nemt og enkelt. Betrækkene kan fjernes og vaskes.



Se vores rengøringsguide til x:panda shape på Etac.dk

Mål

		Infant	1	2	3
	Effektiv sædebredde	220 mm	220/260/300 mm	280/320/360/400 mm	380/420/460/500 mm
	Effektiv sædedybde	120–160 mm	160–320 mm	240–420 mm	350–550 mm
	Ryghøjde	270–360 mm	280–370/320–420/ 360–470 mm	340–440/380–490/ 430–560 mm	420–530/470–600/ 540–690 mm
	Max. brugervægt	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Max. brugervægt ved transport	35 kg	35 kg	65 kg	90 kg
	Ryg vinkel	–10° – 30°	–10° – 30°	–10° – 30°	–10° – 30°
	Rygbredde, top	190 mm	180/220/260 /300/340 mm	180/220/260 /300/340/380 mm	220/260/300 /340/380/420 mm
	Total bredde	240 mm	300/400/500 mm	350/460/560/660 mm	600/700/740/780 mm
	Total vægt, sæde	6 kg	6,5 kg	11 kg	14 kg

Mål foretaget med begge ben i max. abduktion. Mål vedr. størrelse 1-3 er baseret på Advanced seating. For yderligere mål se vores hjemmeside.


	Varenr.	HMI-nr.
x:panda shape Infant seat	319101000003001	136863
x:panda shape Advanced seat. str. 1, SB: 260 mm*	319214000011100	136862
x:panda shape Advanced seat str. 2 SB: 320 mm*	319417000011100	136864
x:panda shape Advanced seat str. 3 SB: 380 mm*	319620000011100	136866
x:panda shape Advanced seat str. 3 SB: 420 mm*	319621000011100	136869

* Inkl. nedre rygdal med Quick Release og justerbar dynamisk lås, uden hoftestøtte. Sædets øvre ryg tilvælges ud fra mål, der yder bedst støtte til bruger (se tilbehør).

Et sortiment af stabile stel til de individuelle behov

x:panda shape skaber en stabil base for bækken, lår og fødder. Sædet kan imødekomme komplekse krav og giver barnet en pålidelig og optimal positionering. Desuden er justeringerne intuitive og nemme at udføre.

Afhængigt af størrelse kan det monteres på en lang række stel, såsom High-low:xo inde- og udestel, Combi Frame:x, Multi Frame og Strong Base.

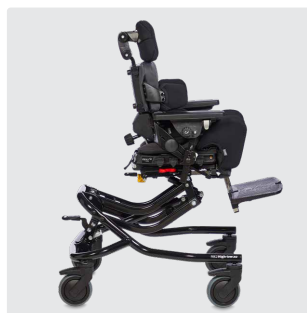


High-low:xo inde- og udestel



Combi Frame:x



Multi Frame

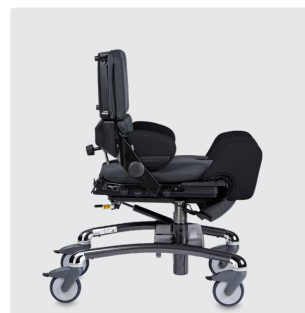

Strong Base

Tilbehør og reservedele



Øvre ryg

Puder bestilles separat.

Øvre ryg (H:140):

På str. 1: total ryghøjde 270-360 mm.

Benyt denne til Infant seating

180-220 x 140 (BxH).....31905072

Øvre ryg (H:180):

På str. 1: total ryghøjde: 310-410 mm.

På str. 2: total ryghøjde: 340-440 mm

180-260 x 180 (BxH).....31905073

Øvre ryg (H:220):

På str. 1: total ryghøjde: 350-470 mm.

På str. 2: total ryghøjde: 380-500 mm.

På str. 3: total ryghøjde: 410-530 mm

220-340 x 220 mm (BxH).....31905074

Øvre ryg (H:270):

På str. 2: total ryghøjde: 430-550 mm.

På str. 3: total ryghøjde: 460-580 mm

260-380 x 270 mm (BxH).....31905075

Øvre ryg (H:340):

På str. 3: total ryghøjde: 540-690 mm

300-420 x 340 mm (BxH).....31905076



Afstandsstykker

Når den øvre ryg er indstillet, så der er mere end 60 mm mellem den øvre og den nedre ryg, kan et afstandsstykke monteres. Puderne skal bestilles separat.

Afstandsstykker

Str. 1..... 31903100-1

Str. 2..... 31903100-2

Str. 3..... 31903100-3

Puder til afstandsstykker inkl. betræk

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

180 x 55 mm (BxH)..... 31903011-XX

220 x 55 mm (BxH)..... 31903012-XX

260 x 55 mm (BxH)..... 31903013-XX

300 x 55 mm (BxH)..... 31903014-XX

340 x 55 mm (BxH)..... 31903015-XX

380 x 55 mm (BxH)..... 31903016-XX

420 x 55 mm (BxH).....31903017-XX

Løst betræk

180 x 55 mm (BxH)..... 319031-XX

220 x 55 mm (BxH).....319032-XX

260 x 55 mm (BxH).....319033-XX

300 x 55 mm (BxH).....319034-XX

340 x 55 mm (BxH).....319035-XX

380 x 55 mm (BxH).....319036-XX

420 x 55 mm (BxH)..... 319037-XX



Øvre ryg med bredningssæt

gør det muligt at montere veste og seler længere væk fra nakken.


H:140..... 31905072-W

H:180..... 31905073-W

H:220.....31905074-W

H:270..... 31905075-W

H:370..... 31905076-W

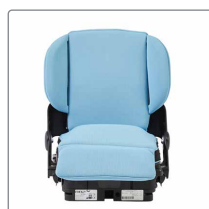

Hynde - Infant seat

Pink hynde: XX=10

Lyseblå hynde: XX=20

Sort, aftørbar hynde: XX=70

Hynde inkl. betræk, one size..... 31905032-XX



Tilbehør og reservedele



Øvre rygghinde

Grå hynde: XX=60
Sort, aftørbar hynde: XX=70

Hynde inkl. betræk

180 x 140 mm (BxH)	31902101-XX
220 x 140 mm (BxH)	31902102-XX
180 x 180 mm (BxH)	31902103-XX
220 x 180 mm (BxH)	31902104-XX
260 x 180 mm (BxH)	31902105-XX
220 x 220 mm (BxH)	31902106-XX
260 x 220 mm (BxH)	31902107-XX
300 x 220 mm (BxH)	31902108-XX
340 x 220 mm (BxH)	31902109-XX
260 x 270 mm (BxH)	31902110-XX
300 x 270 mm (BxH)	31902111-XX
340 x 270 mm (BxH)	31902112-XX
380 x 270 mm (BxH)	31902113-XX
300 x 340 mm (BxH)	31902114-XX
340 x 340 mm (BxH)	31902115-XX
380 x 340 mm (BxH)	31902116-XX
420 x 340 mm (BxH)	31902117-XX

Løst betræk

180 x 140 mm (BxH)	31902301-XX
220 x 140 mm (BxH)	31902302-XX
180 x 180 mm (BxH)	31902303-XX
220 x 180 mm (BxH)	31902304-XX
260 x 180 mm (BxH)	31902305-XX
220 x 220 mm (BxH)	31902306-XX
260 x 220 mm (BxH)	31902307-XX
300 x 220 mm (BxH)	31902308-XX
340 x 220 mm (BxH)	31902309-XX
260 x 270 mm (BxH)	31902310-XX
300 x 270 mm (BxH)	31902311-XX
340 x 270 mm (BxH)	31902312-XX
380 x 270 mm (BxH)	31902313-XX
300 x 340 mm (BxH)	31902314-XX
340 x 340 mm (BxH)	31902315-XX
380 x 340 mm (BxH)	31902316-XX
420 x 340 mm (BxH)	31902317-XX



Nedre rygghinde

Breddemålene er ikke reelle mål, men angiver mål for indstilling af ryg (se ryggens bagside).

Er sædet konfigureret uden hofte- og bækkenstøtte, kan en hynde der er en størrelse større anvendes.

Grå hynde: XX=60
Sort, aftørbar hynde: XX=70

Hynde inkl. betræk

Til str. 1: 220 x 120 mm (BxH) ..	31902120-XX
Til str. 1: 260 x 120 mm (BxH) ..	31902121-XX
Til str. 1: 300 x 120 mm (BxH) ..	31902122-XX
Til str. 2: 280 x 140 mm (BxH) ..	31902123-XX
Til str. 2: 320 x 140 mm (BxH) ..	31902124-XX
Til str. 2: 360 x 140 mm (BxH) ..	31902125-XX
Til str. 2: 400 x 140 mm (BxH) ..	31902126-XX
Til str. 3: 380 x 170 mm (BxH)...	31902127-XX
Til str. 3: 420 x 170 mm (BxH)...	31902128-XX
Til str. 3: 460 x 170 mm (BxH)...	31902129-XX
Til str. 3: 500 x 170 mm (BxH)...	31902130-XX

Løst betræk

Til str. 1: 220 x 120 mm (BxH) ..	31902320-XX
Til str. 1: 260 x 120 mm (BxH) ..	31902321-XX
Til str. 1: 300 x 120 mm (BxH) ..	31902322-XX
Til str. 2: 280 x 140 mm (BxH) ..	31902323-XX
Til str. 2: 320 x 140 mm (BxH) ..	31902324-XX
Til str. 2: 360 x 140 mm (BxH) ..	31902325-XX
Til str. 2: 400 x 140 mm (BxH) ..	31902326-XX
Til str. 3: 380 x 170 mm (BxH)...	31902327-XX
Til str. 3: 420 x 170 mm (BxH)...	31902328-XX
Til str. 3: 460 x 170 mm (BxH)...	31902329-XX
Til str. 3: 500 x 170 mm (BxH)...	31902330-XX



Sædehynde

Grå hynde: XX=60
Sort, aftørbar hynde: XX=70

Hynde inkl. betræk

Til str. 1: 220 x 500 mm (BxL) ..	31901113-XX
Til str. 1: 260 x 500 mm (BxL) ..	31901114-XX
Til str. 1: 300 x 500 mm (BxL) ..	31901115-XX
Til str. 2: 280 x 650 mm (BxL) ..	31901116-XX
Til str. 2: 320 x 650 mm (BxL) ..	31901117-XX
Til str. 2: 360 x 650 mm (BxL) ..	31901118-XX
Til str. 2: 400 x 650 mm (BxL) ..	31901119-XX
Til str. 3: 380 x 800 mm (BxL) ..	31901120-XX
Til str. 3: 420 x 800 mm (BxL) ..	31901121-XX
Til str. 3: 460 x 800 mm (BxL) ..	31901122-XX
Til str. 3: 500 x 800 mm (BxL) ..	31901123-XX

Løst betræk

Til str. 1: 220 x 500 mm (BxL) ..	31901313-XX
Til str. 1: 260 x 500 mm (BxL) ..	31901314-XX
Til str. 1: 300 x 500 mm (BxL) ..	31901315-XX
Til str. 2: 280 x 650 mm (BxL) ..	31901316-XX
Til str. 2: 320 x 650 mm (BxL) ..	31901317-XX
Til str. 2: 360 x 650 mm (BxL) ..	31901318-XX
Til str. 2: 400 x 650 mm (BxL) ..	31901319-XX
Til str. 3: 380 x 800 mm (BxL) ..	31901320-XX
Til str. 3: 420 x 800 mm (BxL) ..	31901321-XX
Til str. 3: 460 x 800 mm (BxL) ..	31901322-XX
Til str. 3: 500 x 800 mm (BxL) ..	31901323-XX



Montagekit m. rør til den nedre ryg

Skal benyttes i kombination med afstandsstykke. Kan benyttes, når den øvre ryg er afmonteret.

Til 1 afstandsstykke..... 31905059

Tilbehør og reservedele



Abduktionsklods med quick release

Sort, aftørbart betræk: XX=70
Sort betræk: XX=80

Abduktionsklods inkl. betræk

Til str. 1:
60 x 160 x 190 mm (BxLxH) 31905077-XX
Til str. 2:
60 x 160 x 190 mm (BxLxH) 31905082-XX
Til str. 2:
80 x 190 x 230 mm (BxLxH) 31905078-XX
Til str. 3:
80 x 190 x 230 mm (BxLxH) 31905079-XX

Løst betræk, sæt

60 x 160 x 190 mm (BxLxH) 31905177-XX
80 x 190 x 230 mm (BxLxH) 31905178-XX



Udvendige knæstøtter, (Flip)

Sæt.
Sort, aftørbart betræk: XX=70
Sort betræk: XX=80

Knæstøtter inkl. betræk

Til str. 2: 200 x 200 mm (LxH) .. 31905010-XX
Til str. 3: 200 x 200 mm (LxH) .. 31905011-XX

Løst betræk, sæt

200 x 200 mm (LxH) 31905110-XX



Indvendige knæstøtter


Sæt.
Sort, aftørbart betræk: XX=70
Sort betræk: XX=80

Knæstøtter inkl. betræk

Til str. 1+2: 190 x 190 mm (LxH) 31905001-XX
Til str. 2: 240 x 240 mm (LxH) 31905002-XX
Til str. 3: 240 x 240 mm (LxH) 31905003-XX

Løst betræk, sæt

190 x 190 mm (LxH) 31905101-XX
240 x 240 mm (LxH) 31905102-XX

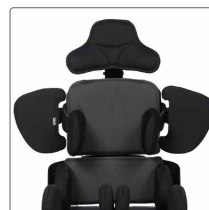

Overarmsstøtte

Monteres enten direkte på den øvre ryg eller på sidestøtterne og kan justeres i højden. De justerbare overarmsstøtter kan endvidere justeres i vinklen.

Sæt.
Sort, aftørbart betræk: XX=70
Sort betræk: XX=80

Overarmsstøtter inkl. betræk

Fast overarmsstøtte str. 1
140 x 180 mm (LxH) 31905017-XX
Fast overarmsstøtte str. 2
190 x 270 mm (LxH) 31905018-XX
Justerbar overarmsstøtte str. 1
140 x 180 mm (LxH) 31905019-XX
Justerbar overarmsstøtte str. 2
190 x 270 mm (LxH) 31905020-XX

Løst betræk, sæt:

Str. 1: 140 x 180 mm (LxH) 31905117-XX
Str. 2: 190 x 270 mm (LxH) 31905118-XX



Udvendige knæstøtter

Sæt.
Sort, aftørbart betræk: XX=70
Sort betræk: XX=80


Knæstøtter inkl. betræk

Til str. 1+2:
190 x 190 mm (LxH) 31905008-XX
Til str. 2+3:
240 x 240 mm (LxH) 31905009-XX

Løst betræk, sæt

190 x 190 mm (LxH) 31905108-XX
240 x 240 mm (LxH) 31905109-XX

Tilbehør og reservedele

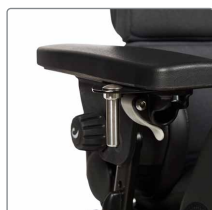

Armlæn

Sæt.

Betræk:

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Uden betræk:

Armlæn str. 1, passer til str. 1

75 x 260 x 90-155 mm

(BxLxH)..... 318910615-1

Armlæn str. 2, passer til str. 2

75 x 260 x 100-165 mm

(BxLxH)..... 318910616-1

Armlæn str. 3, passer til str. 2

75 x 310 x 100-220 mm

(BxLxH)..... 318910617-1

Armlæn str. 4, passer til str. 3

100 x 380 x 130-280 mm

(BxLxH)..... 31905016-00

Med betræk:

Armlæn str. 1, passer til str. 1

75 x 260 x 90-155 mm (BxLxH).. 31905013-XX

Armlæn str. 2, passer til str. 2

75 x 260 x 100-165 mm (BxLxH).. 31905014-XX

Armlæn str. 3, passer til str. 2

75 x 310 x 100-220 mm (BxLxH).. 31905015-XX

Armlæn str. 4, passer til str. 3

100 x 380 x 130-280 mm

(BxLxH)..... 31905016-XX

Løst betræk, sæt:

Til armlæn str. 1+2

75 x 260 (BxL)..... 31905113-XX

Til armlæn str. 3

75 x 310 (BxL)..... 31905115-XX

Til armlæn str. 4

100 x 380 (BxL)..... 31905116-XX



Justerings kit for armlæn

For højde- og vinkeljustering, der skal foretages ofte og uden værktøj. Sæt med to justeringshåndtag.

One size..... 318910615-11



Dynamisk ryg

Findes i en blød og i en hård udgave. Som standard er den dynamiske ryg str. 2 monteret på x:panda shape str. 2, men den kan også monteres på str. 3 for en blødere ryg. På samme måde er dynamisk ryg str. 3 som standard monteret på x:panda str. 3, men kan også monteres på str. 2 for en hårdere ryg.

*Ikke godkendt til transport.

Et produkt, der er godkendt til transport, må ikke ombygges til et produkt, der ikke er godkendt til transport grundet produktmærkningen.

Dynamisk ryg str. 2, blød med dynamisk funktion* 31905151

Dynamisk ryg str. 2, blød med dynamisk funktion m. lås 31905152

Dynamisk ryg str. 2, blød med justerbar dynamisk funktion* 31905153

Dynamisk ryg str. 2, blød med justerbar dynamisk funktion m. lås 31905154

Dynamisk ryg str. 3, hård med dynamisk funktion* 31905155

Dynamisk ryg str. 3, hård med dynamisk funktion m. lås 31905156

Dynamisk ryg str. 3, hård med justerbar dynamisk funktion* 31905157

Dynamisk ryg str. 3, hård med justerbar dynamisk funktion m. lås 31905158



Justerings kit for ryg

For nem højdejustering af ryggen uden brug af værktøj.

One size 31905081

Tilbehør og reservedele



Faste sidestøtter

De faste sidestøtter reducerer rygbredden med 50 mm og kan justeres i højden.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Sidestøtter inkl. betræk, sæt

Rektangulær pude
110 x 80 mm (LxH) 31830101-XX

Rektangulær pude
150 x 90 mm (LxH) 31830102-XX

Rektangulær pude
190 x 90 mm (LxH) 31830103-XX

Kvadratisk pude
110 x 100 mm (LxH) 31830104-XX

Kvadratisk pude
130 x 130 mm (LxH) 31830105-XX

Kvadratisk pude
150 x 160 mm (LxH) 31830106-XX

Kvadratisk pude
170 x 200 mm (LxH) 31830107-XX

Løst betræk, sæt, Rektangulære puder

110 x 80 mm (LxH) 31830001-XX

150 x 90 mm (LxH) 31830002-XX

190 x 90 mm (LxH) 31830003-XX

Løst betræk, sæt, Kvadratiske puder

110 x 100 mm (LxH) 31830004-XX

130 x 130 mm (LxH) 31830005-XX

150 x 160 mm (LxH) 31830006-XX

170 x 200 mm (LxH) 31830007-XX



Breddejusterbare bækkenstøtter

Bækkenstøtterne reducerer den effektive sædebredde med 40 mm. Har 20 mm neopren under betrækket.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Bækkenstøtter inkl. betræk

Til str. 1. Kan også benyttes på str. 2+3
100 x 110 mm (LxH) 31905041-XX

Til str. 2. Kan også benyttes på str. 1 fra 160 mm hoftebredde og str. 3
140 x 130 mm (LxH) 31905042-XX

Til str. 3. Kan også benyttes på str. 2 fra 240 mm hoftebredde
180 x 150 mm (LxH) 31905043-XX

Løst betræk, sæt

Str. 1: 100 x 110 mm (LxH) 31905141-XX

Str. 2: 140 x 130 mm (LxH) 31905142-XX

Str. 3: 180 x 150 mm (LxH) 31905143-XX



Svingbare sidestøtter

De svingbare sidestøtter kan ændre rygbredden +/- 100 mm og kan justeres i højden.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Sidestøtter inkl. betræk, sæt

Rektangulær pude
110 x 80 mm (LxH) 31830201-XX

Rektangulær pude
150 x 90 mm (LxH) 31830202-XX

Rektangulær pude
190 x 90 mm (LxH) 31830203-XX

Kvadratisk pude
110 x 100 mm (LxH) 31830204-XX

Kvadratisk pude
130 x 130 mm (LxH) 31830205-XX

Kvadratisk pude
150 x 160 mm (LxH) 31830206-XX

Kvadratisk pude
170 x 200 mm (LxH) 31830207-XX

Løst betræk, sæt, Rektangulære puder

110 x 80 mm (LxH) 31830001-XX

150 x 90 mm (LxH) 31830002-XX

190 x 90 mm (LxH) 31830003-XX

Løst betræk, sæt, Kvadratiske puder

110 x 100 mm (LxH) 31830004-XX

130 x 130 mm (LxH) 31830005-XX

150 x 160 mm (LxH) 31830006-XX

170 x 200 mm (LxH) 31830007-XX



Breddejusterbare hoftestøtter

Hoftestøtterne reducerer den effektive sædebredde med 40 mm.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Hoftestøtter inkl. betræk

Til str. 1. Kan også benyttes på str. 2+3
100 x 110 mm (LxH) 31905044-XX

Til str. 2. Kan også benyttes på str. 1+3
140 x 130 mm (LxH) 31905045-XX

Til str. 3. Kan også benyttes på str. 2
180 x 150 mm (LxH) 31905046-XX

Løst betræk, sæt

Str. 1: 100 x 110 mm (LxH) 31905144-XX

Str. 2: 140 x 130 mm (LxH) 31905145-XX

Str. 3: 180 x 150 mm (LxH) 31905146-XX

Tilbehør og reservedele



Svingbare og vinkeljusterbare sidestøtter

De svingbare og vinkeljusterbare sidestøtter kan ændre rygbredden +/- 100 mm og kan justeres i højde og vinkel.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Sidestøtter inkl. betræk, sæt

Rektangulær pude
110 x 80 mm (LxH) 31830301-XX

Rektangulær pude
150 x 90 mm (LxH) 31830302-XX

Rektangulær pude
190 x 90 mm (LxH) 31830303-XX

Kvadratisk pude
110 x 100 mm (LxH) 31830304-XX

Kvadratisk pude
130 x 130 mm (LxH) 31830305-XX

Kvadratisk pude
150 x 160 mm (LxH) 31830306-XX

Kvadratisk pude
170 x 200 mm (LxH) 31830307-XX

Løst betræk, sæt, Rektangulære puder

110 x 80 mm (LxH) 31830001-XX

150 x 90 mm (LxH) 31830002-XX

190 x 90 mm (LxH) 31830003-XX

Løst betræk, sæt, Kvadratiske puder

110 x 100 mm (LxH) 31830004-XX

130 x 130 mm (LxH) 31830005-XX

150 x 160 mm (LxH) 31830006-XX

170 x 200 mm (LxH) 31830007-XX



Hofte/armstøtte - Infant seating

Pink betræk: XX=10

Lyseblå betræk: XX=20

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Hofte/armstøtte - infant seat 31905047-xx



Armstøtte kit - Infant seating

Pink betræk: XX=10

Lyseblå betræk: XX=20

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Armstøtte kit - infant seat 31905021-xx



Veste og seler

Til at sikre god støtte og korrekt positionering. For yderligere information henvises til vores hjemmeside, afsnittet om Veste og seler under Barn/junior.



Bælte for sidestøtte - Infant seating

Inkl. betræk.

Sort, aftørbart betræk: XX=70

Sort betræk: XX=80

Bælte one size 31905028-XX

Betræk, sæt 31905029-XX


Tilbehør og reservedele



Infant seating kit

Kit til at ændre Advanced seat str. 1 til Infant seat str. 1. Øvre rygplade H:140 mm skal benyttes. Hynde Infant seating samt sidestøtte skal bestilles separat.

Infant seating kit str. 1..... 31905038

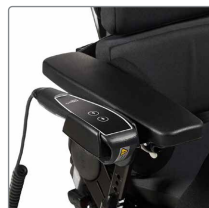

Beslag for håndbetjening, monteret på armlæn

Gør det muligt at montere håndbetjeningen til understellet på armlænet.

Beslag til armlæn str. 1+231905030-1
Beslag til armlæn str. 331905030-2
Beslag til armlæn str. 431905030-3



Advanced seating kit

Kit til at ændre Infant seating til Advanced seating str. 1.

Advanced seating kit

Advanced seating kit, sædeplader til str. 1..... 31905036-1

Sædeplade til Advanced seating
Til str. 1 SB 220, 260, 300 mm
B: 220 mm31905136



Beslag for håndbetjening, monteret på ryggen

Gør det muligt at montere en håndbetjening på x:panda shapes ryg (monteres på den øvre ryg).

Beslag one size 31905030



Sædekiler, sæt

*Kan også benyttes på sædeplader str. 1 til Advanced seating, bredde 300 mm.
**Kan også benyttes på sædeplader str. 2 til Advanced seating, bredde 400 mm.

Korte sædekiler til str. 1
115 x 70-110 x 20 (BxLxH) 31905052

Mellem sædekiler til str. 1
135 x 110-175 x 30 (BxLxH) 31905053


Lange sædekiler til str. 1
135 x 120-200 x 45 (BxLxH) 31905054

Mellem sædekiler til str. 2*
150 x 130-220 x 35 (BxLxH) 31905055

Lange sædekiler til str. 2*
150 x 140-240 x 50 (BxLxH) 31905056

Mellem sædekiler til str. 3**
200 x 150-260 x 40 (BxLxH)31905057

Lange sædekiler til str. 3**
200 x 170-300 x 55 (BxLxH) 31905058

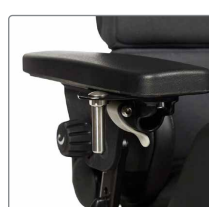

Beslag for kommunikationsudstyr

Gør det muligt at montere en tablet eller kommunikationsudstyr. Monteres på armlænen.

Beslag til armlæn str. 1+231905033-1
Beslag til armlæn str. 331905033-2
Beslag til armlæn str. 431905033-3



Skubbehåndtag

Str. 1 til øvre ryg
H: 140 og H: 180 mm 31905070

Str. 2 til øvre ryg
H: 220, H: 270 og H: 340 mm31905071

Tilbehør og reservedele



Beslag til kaleche

Beslag med skubbehåndtag,
til kaleche str. 131905039-1

Beslag med skubbehåndtag,
til kaleche str. 231905039-2

Beslag uden skubbehåndtag,
one size31905040



Kaleche

Kaleche str. 1, kræver øvre ryghøjde:
140 el. 180 mm318740110

Kaleche str. 2, kræver øvre ryghøjde:
220, 270 el. 340 mm318740120



Forlængerbeslag til Fix-lock

Gør det muligt at montere veste og seler
højere oppe på sædets ryg. Sæt. Inkl. et sæt
Fix-locks. Skal benyttes sammen med beslag
for udvidelse af bredde til Fix-lock: 31905068

One size318910260



Bredningssæt for stropper/vest

Gør det muligt at montere veste og seler
længere væk fra nakken. Skal også benyttes
ved montering af forlængerbeslag til Fix-lock.

One size31905068



Tilbehør og reservedele



Bord type 5, med kant

600 x 520 mm (BxL)

Med en monteringsstang
til str. 1 318910720-1

Med to monteringsstænger
til str. 1 og str. 2 i bredde:
280, 320, 360 mm 318910725-1



Polstret bord - Infant seating

320 x 190 mm (BxL)

One size 31905066-70



Bord type 6, med kant

610 x 560 mm (BxL)

Med en monteringsstang
til str. 2 318910720-2

Med to monteringsstænger
til str. 2 og str. 3 i bredde:
380, 420 mm 318910725-2

Med to monteringsstænger
til str. 3 31905080



Polstring til borde

Polstring komplet
til bord type 5 318910725-10

Polstring under bord
til bord type 5 318910725-10B

Polstring over bord
til bord type 5 318910725-10T

Polstring komplet
til bord type 6 318910725-20

Polstring under bord
til bord type 6 318910725-20B

Polstring over bord
til bord type 6 318910725-20T



Bord type 8, med kant

440 x 340 mm (BxL)

Til str. 1 318976350



Bord type 9, med kant

440 x 340 mm (BxL). Kan benyttes med infant
seat, men skal da bestilles med 31905021-xx
armstøtte kit.

Med to monteringsstænger
til str. 1 31905067-00



Aktivitetsbøjle til bord

Til bord type 5 med kant og type 6 med kant.

One size 318910740


Tilbehør og reservedele



Gribebøjle

Til bord type 5 med kant og type 6 med kant.

One size318910750

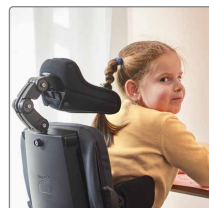

Hovedstøtter

Se udvalget på etac.dk.



Floor Frame

Indestel med korte og lange ben, der kan indstilles i fem forskellige positioner

Floor Frame (HMI-nr. 143066)31821111





Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering.

Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities