



R82 x:panda

Multijusterbart sæde

Videreudvikling af siddeoplevelsen

Enkeltpersoner, familier og specialister i hele verden har glæde af x:pandas mange forskellige konfigurationer, de mange funktioner og det store udvalg af tilbehør. Vi har videreudviklet hele siddeoplevelsen med x:panda. Et livsforbedrende sæde udviklet til at finde den optimale siddestilling til børn og unge, som lever med mobilitetsnedsættelser, og hjælpe dem til at deltage i leg, skole og almindelige daglige aktiviteter, som udvikler deres færdigheder.

Forbedring af hverdagslivet

x:panda er et multijusterbart, modulopbygget sæde-system i fire størrelser, som kan konfigureres til at imødekomme en lang række behov for positionering, og følge barnets vækst.


Når barnet sidder komfortabelt og er korrekt positioneret, hjælper det ikke bare barnet rent klinisk, men det fremmer også udviklingen af barnets færdigheder og et betydningsfuldt samspil med jævnaldrende børn.



Funktioner



Armlæn med snaplås-system

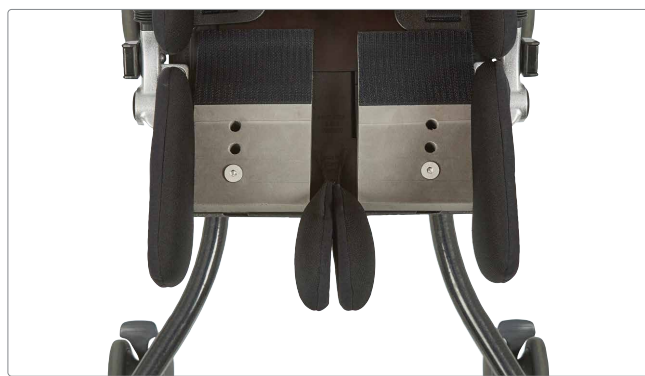

Faste kiler til korrekt positionering



Visuelle markeringer for brugervenlighed



Puder med to lag skum for øget komfort

Ekstra fordele

For alle børn og unge har en korrekt positionering og komfortabel sidestilling en positiv indflydelse på muskeltonus, og dermed fremmes barnets evne til at udføre aktiviteter og opnå kontrollerede bevægelser af ekstremiteter og hoved. En række forskellige funktioner i sædet er udviklet for at skabe den bedst mulige siddestilling i forhold til den enkelte brugers behov for positionering.

Faste eller svingbare sidestøtter

De svingbare eller faste sidestøtter vælges afhængig af barnets kropskontrol og barnets siddende balance. Sidestøtterne kan fastgøres med en snaplås for at muliggøre nem og daglig justering af afstanden mellem sidestøtterne.

Visuelle markeringer

For brugervenlig håndtering og tilpasning af sædet, har x:panda visuelle markeringer på ryglænets udvendige og indvendige overflade, såvel som på sædets overflade.

Betræk

Slidstærke og behagelige betræk til sidestøtter, hoftestøtter samt indvendige og udvendige knæstøtter.

Faste kiler

Faste og stabile kiler skrues fast til sædebunden og anvendes til at danne en sædebrønd. Kilerne fås i otte størrelser og er lette at special-tilpasse, da de kan tilskæres i ønsket form og størrelse.

Stel

X:panda passer på en lang række stel til indendørs eller udendørs brug. Max. brugervægt for sæde, stel og transport i bil kan findes på vores hjemmeside.

Hovedstøtte

Et bredt udvalg af hovedstøtter og beslag giver mange muligheder for individuel støtte i hvile eller aktivitet.

Veste og seler

De 16 fixlocks på ryggen og sædet på x:panda gør det let at montere veste og seler.

Armlæn og betræk

Snaplåssystemet gør det nemt at fastgøre og fjerne armlænene. Markeringerne hjælper med at sikre, at armlænene placeres i samme højde som før, når de har været fjernet. Betræk kan påsættes armlænene.

Hynder

Hynderne er lavet af en hel skumpude og betrækket er uden syning i midten. Der er tilføjet et ekstra lag skum i hynden for øget komfort og trykfordeling/aflastning.

Laterale og mediale knæstøtter

De udvendige og indvendige knæstøtter muliggør en position mellem 0 og 15 graders abduktion i hofteleddene.

Fodstøtter

Der findes flere forskellige fodstøtter, som kan monteres på stellene, der anvendes til x:panda.



Scan koden for at se video om x:panda

Armlæn

Snaplåssystemet og omplacering af armlæne er nemt at bruge for forældre og hjælpere i situationer, hvor det er nødvendigt med nem adgang til barnet. Armlænenes position kan genindstilles ved brug af memory-funktionen. Det sikrer, at armlæne kan positioneres i samme højde igen, når de har været fjernet. Armlænenes konstruktion gør, at de bevarer deres position og yder stabil støtte til bordet, som kan monteres derpå. Det giver barnet mulighed for at håndtere legetøj tæt på sig. Betræk til armlæne fås som tilbehør.




Armlæne har:

- Forbedret stabilitet
- Højde- og vinkeljustering
- Memory-funktion
- Klik-og-fjern snaplåssystem
- Håndtag til daglig justering
- Behagelige og slidstærke betræk til armlæn




Scan koden for at se video med armlæne med Klik-og-fjernsnapsystem

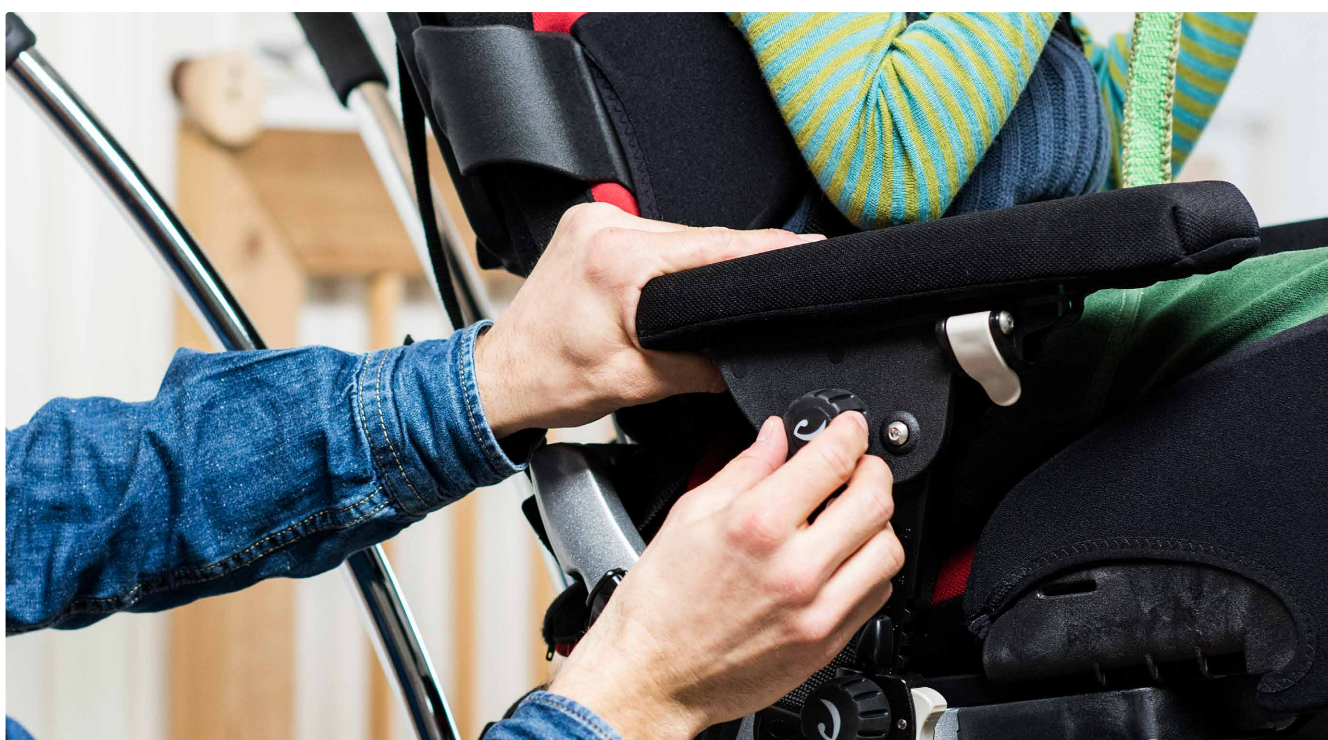

Faste kiler

De faste kiler anvendes til at danne en sædebrønd, der hvor bagdelen placeres. De faste kiler skrues fast til sædebunden. De er stabile og hindrer fejlplacering af kilerne. Kilerne forbliver på plads - også når sædehynden fjernes, og de fås i otte størrelser. De faste kiler er lette at specialtilpasse, da der er angivet markeringer, som gør det nemt at tilskære dem i ønsket form og størrelse.

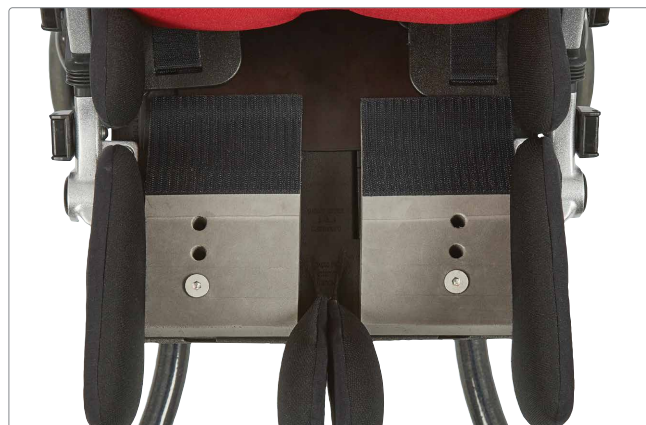

Visuelle markeringer

x:panda kan imødekomme komplekse krav til siddestillinger og give barnet en funktionel positionering. For at gøre det lettere for forældre, hjælpere og specialister at håndtere og gentilpasse sædet, har x:panda visuelle markeringer på ryglænets udvendige og indvendige overflade såvel som på sædets overflade.




Ryg - udvendig overflade

Disse visuelle markeringer kan anvendes til at genskabe ryg-højdeindstillingen.




Ryg - udvendig overflade

Disse visuelle markeringer hjælper med at identificere ryglænets størrelse samt at genkende placeringen for tilbehør såsom sidestøtter eller overarmsstøtter.

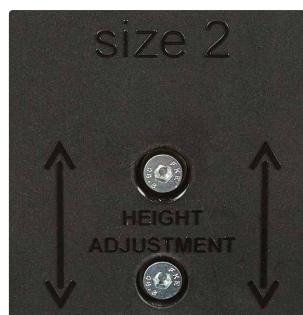

Ryg - indvendig overflade

Disse visuelle markeringer hjælper med at identificere ryglænets størrelse samt hvor rygghøjden justeres til.

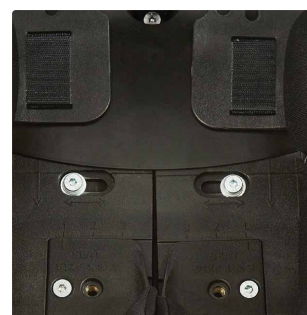

Sædeoverflade


Når der skal justeres i forhold til barnets vækst, er der ligeledes placeret visuelle markeringer på sædets overflade for nem gentilpasning i forbindelse med justering af sædedybde og -bredde.



Scan koden for at se video om sædemontering, sædedybde, montering af kiler og rygghøjde

Komfort i flere lag

Puderne består af to lag skum: skum i selve puden såvel som et ekstra lag skum syet på betrækket. Dette hjælper med at forbedre trykaflastningen og forbedrer komforten for barnet. Der er blevet udført trykmålinger til udviklingen af denne løsning. Læs mere om vores resultater nedenfor.

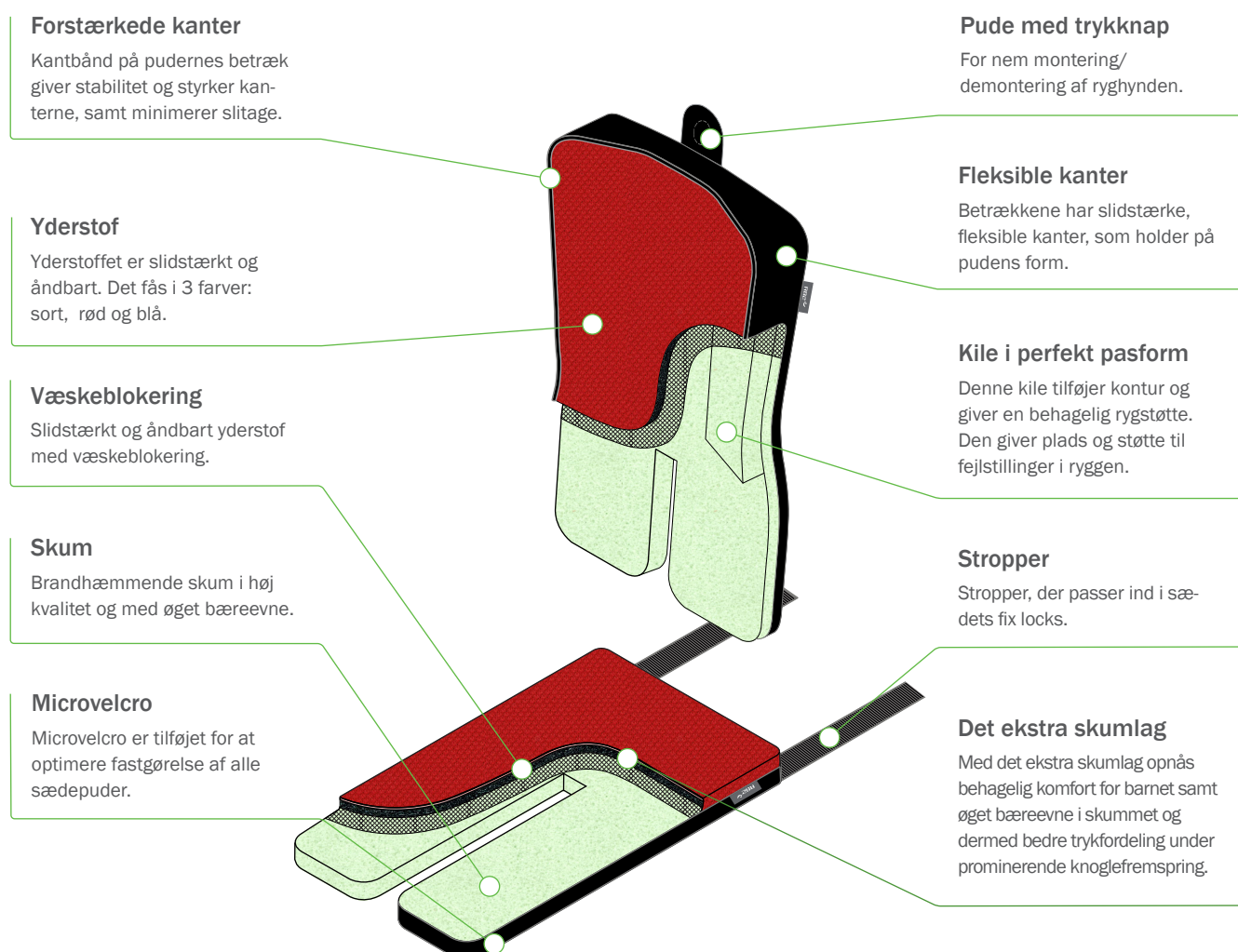

Tolagsløsningen reducerer trykbelastning

Vi målte trykbelastningen på en x:panda-pude str. 4 med og uden det ekstra lag skum og med syv forskellige vægtbelastninger i intervaller på to minutter. Vores resultater viste en statistisk signifikant reduktion af trykbelastningen med en gennemsnitlig forbedring på 14 % med det ekstra skumlag.

Et fald i trykbelastningen kan øge komforten og mindske risikoen for at udvikle tryksår. En klinisk vurdering af siddestillingen bør inkludere risikofaktorerne for det enkelte barn.



Hjælp til hele familien

At tage sig af et barn med en kronisk sygdom har en negativ effekt på helbredet og helbredsrelateret livskvalitet for omsorgspersonens familie (Raina 2005, Raina 2004, Dambi 2014). Hjælpemiddelteknologi såsom sædesystemer kan mindske indsatsniveau og energi for plejgivere i familien (Nicolson 2012).

Rengøring og vedligehold

Rengøring og vedligehold af x:pandas hynder og betræk, er nemt og enkelt og giver derved forældre og hjælpere mere tid til at engagere sig i mere interessante aktiviteter. Puderne og sidestøtterne er fremstillet i et materiale, som er vandafvisende, og som kan aftørres. Betrækkene kan nemt fjernes og vaskes.



Betræk til rygpudef



Betræk til sædepudef

Puder og betræk

- til sidestøtter, hofstøtter, knæstøtter, armlæn
- er fremstillede af slidstærkt og komfortabelt stof
- kan vaskes ved 60°C



Scan koden for at se video om montering af puder



Scan koden for at se video om puder og betræk

Aktivitet, præstation & deltagelse

Forskning har vist, at justerbare sædesystemer kan være med til at forbedre aktivitet og deltagelse i hjemmet hos børn med alvorlig spastisk lammelse (Angusupailsal 2015). x:panda kan bruges til at etablere den ideelle siddestilling til børn og unge med funktionsnedsættelser, så de kan lege og deltage i aktiviteter, og derved udvikle deres færdigheder.

Simon, 6 år gammel

Nyder x:panda



En ny måde for brugerne at være involverede uden at gå på kompromis med komfort

For alle børn og unge har en korrekt positionering og komfortabel sidestilling en positiv indflydelse på muskeltonus, og dermed fremmes barnets evne til at udføre aktiviteter og opnå kontrollerede bevægelser af ekstremiteter og hoved. En række forskellige funktioner i sædet er udviklet for at skabe den bedst mulige siddestilling i forhold til den enkelte brugers behov for positionering.

En stabil og funktionel base

x:panda skaber en stabil base til bækken, lår og fødder, hvorved kroppen, skuldrene og hovedet kommer i balance. Dette muliggør kontrollerede bevægelser af hoved, arme og hænder. x:panda kan imødekomme komplekse krav og yde barnet sikker og funktionel positionering, via de mange justeringsmuligheder. Afhængig af størrelse kan x:panda desuden monteres på flere forskellige understel til både indendørs- og udendørs brug. Se eksempler på stel nedenfor.



High low:xo understel



Stingray understel



Combi Frame:x understel



Strong base


Unik og multijusterbar

Udviklingen af R82 x:panda er stadig baseret på de velkendte funktioner såsom den dynamiske ryg, rygvinkling, multijusterbarhed og fleksibilitet mht. at kunne vokse med barnet. x:panda blev udviklet med et specielt fokus på ryggens leddeling i forhold til sædet. Målet var at skabe et sædesystem, som bevæger sig i harmoni med kroppen. Den dynamiske ryg gør det muligt for barnet at strække sig og skubbe sig bagud med minimal modstand og derefter vende tilbage til den oprindelige siddestilling. Multijusterbarheden af sædet gør det muligt individuelt at tilpasse placering og understøttelse af benene, justere ryghøjde og -vinkling, samt justere sædebredde og -dybde for at imødekomme barnets størrelse og funktionsniveau.



Dynamisk ryg

Konfigurationen med gasfjeder besluttet på baggrund af barnets størrelse og med hvor stor kraft barnet presser tilbage. En ikke-dynamisk gasfjeder fås som tilbehør.

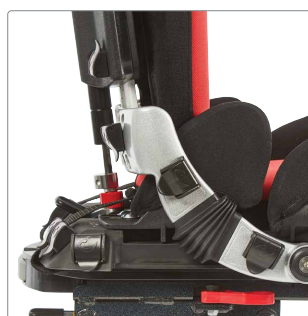

Rygvinkling

Omdrejningspunktet er tæt på akse for hoftelæddenes anatomiske omdrejning. Det betyder, at ryglænet bevarer den korrekte position og minimerer shear.



Størrelser

x:panda fås i 4 størrelser, som hver især kan indstilles i 3 forskellige sædebredder. Med overlap i størrelserne er det altid muligt at få den rette størrelse til det konkrete barn.



Voksemuligheder

Sædet kan vokse med barnet ved individuel tilpasning af bredde, dybde og ryghøjde. Dermed kan sædet, ved gentilpasninger, anvendes af det samme barn i længere tid.



Scan koden for at se video om multijusterbarhed og vækst



Scan koden for at se video om vinkling og dynamisk ryg



Måleskema

x:panda mål	str. 1	str. 2	str. 3	str. 4
Effektiv sædebredde (str. S, M, L)	160, 200, 240 mm	200, 240, 280 mm	260, 310, 360 mm	340, 400, 460 mm
Bredde, lår (str. S, M, L)	70, 90, 110 mm	100, 120, 140 mm	120, 145, 170 mm	130, 190, 250 mm
Effektiv sædedybde	160 - 260 mm	220 - 330 mm	260 - 390 mm	380 - 530 mm
Ryghøjde	270 - 370 mm	320 - 420 mm	350 - 470 mm	500 - 710 mm
Rygbredde, top	230 mm	280 mm	330 mm	35 + 5 mm
Total bredde med begge ben i max. abduktion (str. S, M, L)	310, 350, 390 mm	380, 420, 460 mm	470, 520, 570 mm	590, 650, 710 mm
Armlænsøjde	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm	100-165 mm
Max. længde fra ryglæn til forkant af armlæn	140 mm	140 mm	180 mm	350 mm
Rygvinkel	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°	-5° - +30°
Abduktionsvinkel, hvert ben * str. 1 i den mindste position	0° - 15° 0° - 8°	0° - 15°	0° - 15°	0° - 15°
Total vægt, sæde	6,5 kg	8,5 kg	11 kg	13 kg
Max. brugervægt	30 kg	30 kg	60 kg	80 kg
Max. brugervægt ved transport	30 kg	30 kg	60 kg	75 kg
Ca. minimumshøjde, bruger	650 mm	850 mm	1000 mm	1390 mm
Ca. maximumshøjde, bruger	1050 mm	1280 mm	1430 mm	1800 mm


Konfiguration i forhold til behov

Sæde



Standard

Gasfjeder

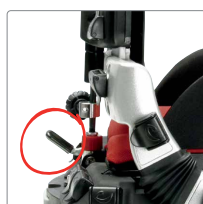

Standard

Fixlocks



Standard

Tilpasning til barnets vækst



Small



Medium



Large



Opnå den mest optimale siddestilling med x:panda

Bestilling



x:panda sædeenhed

Sort

Str. 1 Small	HMI-nr. 111001	318910111-02
Str. 1 Medium	HMI-nr. 111001	318910112-02
Str. 1 Large	HMI-nr. 111001	318910113-02
Str. 2 Small	HMI-nr. 111002	318910121-02
Str. 2 Medium	HMI-nr. 111002	318910122-02
Str. 2 Large	HMI-nr. 111002	318910123-02
Str. 3 Small	HMI-nr. 111003	318910131-02
Str. 3 Medium	HMI-nr. 111003	318910132-02
Str. 3 Large	HMI-nr. 111003	318910133-02
Str. 4 Small	HMI-nr. 111004	318910141-02
Str. 4 Medium	HMI-nr. 111004	318910142-02
Str. 4 Large	HMI-nr. 111004	318910143-02



Ryghynder

Farvekode: xx = 60: sort, 65: rød, 66: blå

Ryghynde, small	str. 1	318912211-xx
Ryghynde, medium	str. 1	318912212-xx
Ryghynde, large	str. 1	318912213-xx
Betræk til ryghynde, small	str. 1	318912411-xx
Betræk til ryghynde, medium	str. 1	318912412-xx
Betræk til ryghynde, large	str. 1	318912413-xx

Ryghynde, small	str. 2	318912221-xx
Ryghynde, medium	str. 2	318912222-xx
Ryghynde, large	str. 2	318912223-xx
Betræk til ryghynde, small	str. 2	318912421-xx
Betræk til ryghynde, medium	str. 2	318912422-xx
Betræk til ryghynde, large	str. 2	318912423-xx

Ryghynde, small	str. 3	318912231-xx
Ryghynde, medium	str. 3	318912232-xx
Ryghynde, large	str. 3	318912233-xx
Betræk til ryghynde, small	str. 3	318912431-xx
Betræk til ryghynde, medium	str. 3	318912432-xx
Betræk til ryghynde, large	str. 3	318912433-xx

Ryghynde, small	str. 4	318912241-xx
Ryghynde, medium	str. 4	318912242-xx
Ryghynde, large	str. 4	318912243-xx
Betræk til ryghynde, small	str. 4	318912441-xx
Betræk til ryghynde, medium	str. 4	318912442-xx
Betræk til ryghynde, large	str. 4	318912443-xx

Sædehynder

Farvekode: xx = 60: sort, 65: rød, 66: blå

Sædehynde, small	str. 1	318911211-xx
Sædehynde, medium	str. 1	318911212-xx
Sædehynde, large	str. 1	318911213-xx
Betræk til sædehynde, small	str. 1	318911411-xx
Betræk til sædehynde, medium	str. 1	318911412-xx
Betræk til sædehynde, large	str. 1	318911413-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 1	318910251-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 1	318910252-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 1	318910253-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 1	318910451-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 1	318910452-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 1	318910453-60

Fortsættes næste side



Sædehynder (fortsat fra forrige side)

Sædehynde, small	str. 2	318911212-xx
Sædehynde, medium	str. 2	318911222-xx
Sædehynde, large	str. 2	318911223-xx
Betræk til sædehynde, small	str. 2	318911421-xx
Betræk til sædehynde, medium	str. 2	318911422-xx
Betræk til sædehynde, large	str. 2	318911423-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 2	318910261-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 2	318910262-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 2	318910263-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 2	318910461-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 2	318910462-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 2	318910463-60
Sædehynde, small	str. 3	318911231-xx
Sædehynde, medium	str. 3	318911232-xx
Sædehynde, large	str. 3	318911233-xx
Betræk til sædehynde, small	str. 3	318911431-xx
Betræk til sædehynde, medium	str. 3	318911432-xx
Betræk til sædehynde, large	str. 3	318911433-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 3	318910271-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 3	318910272-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 3	318910273-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 3	318910471-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 3	318910472-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 3	318910473-60
Sædehynde, small	str. 4	318911241-xx
Sædehynde, medium	str. 4	318911242-xx
Sædehynde, large	str. 4	318911243-xx
Betræk til sædehynde, small	str. 4	318911441-xx
Betræk til sædehynde, medium	str. 4	318911442-xx
Betræk til sædehynde, large	str. 4	318911443-xx
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 4	318910281-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 4	318910282-60
Sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 4	318910283-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, small	str. 4	318910481-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, medium	str. 4	318910482-60
Betræk til sædehynde, sort, inkl. gjord, uden abduktion, large	str. 4	318910483-60

Inkontinensbetræk til sæde- og ryghynder

Kan aftørres eller vaskes. Fås i farven sort. Findes til alle rygpudder og sædepudder med abduktion.

x:panda, inko. betræk sædehynde, small	str. 1	318911411-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium	str. 1	318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large	str. 1	318911413-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small	str. 2	318911412-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium	str. 2	318911422-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large	str. 2	318911423-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small	str. 3	318911431-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium	str. 3	318911432-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large	str. 3	318911433-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, small	str. 4	318911441-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, medium	str. 4	318911442-82
x:panda, inko. betræk sædehynde, large	str. 4	318911443-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small	str. 1	318912411-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium	str. 1	318912412-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large	str. 1	318912413-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small	str. 2	318912421-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium	str. 2	318912422-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large	str. 2	318912423-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small	str. 3	318912431-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium	str. 3	318912432-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large	str. 3	318912433-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, small	str. 4	318912441-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, medium	str. 4	318912442-82
x:panda, inko. betræk ryghynde, large	str. 4	318912443-82



Tilbehør og reservedele




Kaleche

Sort.

Str. 1	318740110
Str. 2	318740120
Beslag for montering	319589100

(Til x:panda str. 1-3)

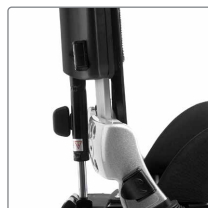

Gasfjeder kit til ryg

Dynamisk eller ikke-dynamisk.

Dynamisk str. 1+2, 50N	318911050
Dynamisk str. 1+2, 100N*	318911100
Dynamisk str. 1+2, 150N	318911125
Dynamisk str. 3, 150N*	318911150
Dynamisk str. 3, 250N	318911250
Dynamisk str. 3, 300N	318911300
Dynamisk str. 4, 350N*	318911350-4

*Monteret som standard

Ikke-dynamisk str. 1+2	318911001
Ikke-dynamisk str. 3	318911002



Hovedstøtte

For at støtte og korrigere hovedets stilling. F.eks nødvendig ved bagudklipning. For yderligere information henvises til vores hjemmeside, afsnittet om hovedstøtter under Barn/junior.



Fast stang til ryg

Fikserer ryglænet i 90° position.

Str. 1 + 2	318911501
Str. 3	318911503
Str. 4	318911504



Rygforlænger

Sort.

Str. 1	318910655-160
Str. 2	318910655-260
Str. 3	318910655-360
Betræk til str. 1	318910652-160
Betræk til str. 2	318910652-260
Betræk til str. 3	318910652-360



Mellemplade til ryg x:panda str. 1-3

Udfylder afstanden mellem sæde og ryg.

Str. 1	318910406-1
Str. 2	318910406-2
Str. 3	318910406-3



Ryg Kit

Bruges når der ønskes en lavere ryg.

Str. 1	318910409-1
Str. 2	318910409-2
Str. 3	318910409-3
Str. 4	318910409-4



Mellemplade til ryg til x:panda str. 4

Udfylder afstanden mellem sæde og ryg.

Str. 4	318910406-4
--------------	-------------

Tilbehør og reservedele



Gearsystem

Forbinder sæde og ryg. Rygvinkling.

Str. 1 + 2, venstre	31128140-1
Str. 1 + 2, højre.....	31128141-1
Str. 3, venstre.....	31128140-3
Str. 3, højre.....	31128141-3
Str. 4, venstre.....	31128140-4
Str. 4, højre.....	31128141-4



Veste og seler


Til at sikre god støtte og korrekt positionering. For yderligere information henvises til vores hjemmeside, afsnittet om Veste og seler under Barn/junior.



Faste sidestøtter

Inkl. betræk, sæt.

Type 0 (B11 x H7 cm).....	318910301-0
Type 1 (B11 x H7 cm).....	318910301-1
Type 2 (B10 x H10 cm)	318910301-2
Type 3 (B12 x H14 cm)	318910301-3
Type 4 (B16 x H9 cm).....	318910301-4
Type 5 (B16 x H15 cm)	318910301-5
Type 6 (B12 x H14 cm)	318910301-6
Betræk til type 0, sæt.....	318910301-060
Betræk til type 1, sæt.....	318910301-160
Betræk til type 2, sæt.....	318910301-260
Betræk til type 3 + 6, sæt... ..	318910301-360
Betræk til type 4, sæt.....	318910301-460
Betræk til type 5, sæt.....	318910301-560
Betræk til type 6, sæt.....	318910301-660

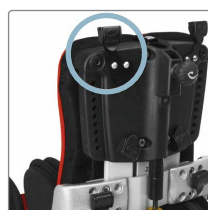

Beslag til fixlocks, sæt

Str. 1-3.....	318910260
Str. 4.....	318910260-4



Svingbare sidestøtter

Sikrer præcis positionering af truncus.

For yderligere information henvises til vores hjemmeside, afsnittet om siddestøtter under Barn/junior



Overarmsstøtter

Støtter overarmen. Kan justeres i højde og bredde. For montering på faste sidestøtter.

Str. 1 (B10 x H13 cm)	318910407-11
Str. 2 (B12 x H19 cm).....	318910407-22
Betræk til str. 1.....	318910407-161
Betræk til str. 2.....	318910407-261



Snavlås til faste og svingbare sidestøtter

Inkl. betræk, sæt.

Type 1-4 og 6.....	318910702-30
Type 5.....	318910702-40



Justerbare overarmsstøtter

Giver brugeren tryghed og ekstra støtte for overarmen.

Str. 1 (B14 x H18 cm)	318910407-10
Str. 2 (B19 x H29 cm).....	318910407-20
Betræk til str. 1.....	318910407-10160
Betræk til str. 2.....	318910407-20260

Tilbehør og reservedele



Armlæn str. 1-3

Armlæn til str. 1-3 er med enkelt stang.
Justerbar i højde og vinkel.

Str. 1 (8 x 23 x 23 cm).....	318910615-1
Str. 2 (8 x 26 x 28 cm).....	318910616-1
Str. 3 (8 x 29 x 33 cm).....	318910617-1
Kit for ny version armlæn	318910613



Polstring til borde

Blød og glat overflade, der nemt kan tørres af.

Polstring (sæt over/under)	
Passer til bord str. 1	
(svingbart og fast)	318910725-10
Polstring (under bordet)	
Passer til bord str. 1	
(svingbart og fast)	318910725-10B
Polstring (ovenpå bordet)	
Passer til bord str. 1	
(svingbart og fast)	318910725-10T
Polstring (sæt over/under)	
Passer til bord str. 2+3 (fast)	
og str. 2 (svingbart)	318910725-20B
Polstring (under bordet)	
Passer til bord str. 2+3	
(fast) og 2 (svingbart).....	318910725-20B
Polstring (ovenpå bordet)	
Passer til bord str. 2+3 (fast)	
og str. 2 (svingbart)	318910725-20



Armlæn str. 4

Justerbar i højden. Kun til str. 4.

Str. 4 med dobbelt stang	
(8 x 32 x 38 cm).....	318910618
Kit for nye armlæn på gl. x:panda	
(kun dobbelt stang)	318910613
Str 4 med enkelt stang.....	318910619



Betræk for armlæn

Sort.

Str. 1-2	318910615-20
Str. 3.....	318910616-20



Armstøtter til bord

Støtter underarm og albue.

One size (B17 x L34 cm).....	318910730
------------------------------	-----------



Bord

Bordet leveres i gråt, og kan fås med 1 eller 2 monteringsstænger.

1 monteringsstang, svingbart	
Str. 1 (60 x 52 cm)	318910720-1
Str. 2 (61 x 56 cm)	318910720-2
2 monteringsstænger	
Str. 1: 60 x 52 cm	318910725-1
Str. 2+3: 61 x 56 cm.....	318910725-2
Str. 4: 65 x 59 cm (firkantet).....	318910725-3



Gribebøjle til bord


One size.....	318910750
---------------	-----------

Tilbehør og reservedele



Aktivetsbøjle til bord

Str. 1-3.....318910740

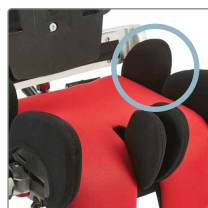

Hofstøtte

Inkl. betræk, sæt.

Str. 1+2318910404-10
 Str. 3..... 318910404-20
 Str. 4..... 318910404-40
 Betræk, sæt str. 1+2 318910404-1160
 Betræk, sæt str. 3 318910404-2260
 Betræk, sæt str. 4 318910404-4460



Hofstøtte med pude

(kun til x:panda str. 4).

Hofstøtte til armlæn med 2 monteringsstænger
 (8,5 x 19 x 3,5 cm) 318910404-44
 Hofstøtte til armlæn med 1 monteringsstang
 (8,5 x 19 x 1,3 cm)318910404-45



Polstringspuder

Polstring til ind- og udvendige knæstøtter, samt til hofstøtterne. Par.

Str. 1 (Tykkelse 2 cm) 318910404-PAD1
 Str. 2 (Tykkelse 2 cm) 318910404-PAD2
 Str. 3 (Tykkelse 2 cm) 318910404-PAD3
 Str. 4 (Tykkelse 2 cm) 318910404-PAD4



Indvendige knæstøtter

Inkl. betræk, sæt.

Str. 1+2318910402-10
 Str. 3.....318910402-20
 Str. 4.....318910402-40
 Betræk, sæt str. 1+2 318910402-1160
 Betræk, sæt str. 3 318910402-2260
 Betræk, sæt str. 4 318910402-4460



Mellemstykke til sæde

Isættes når sædebredden ændres.

Str. 1+2 medium3175081
 Str. 1+2 large3175086
 Str. 3 medium.....3175082
 Str. 3 large.....3175087
 Str. 4 medium.....3175083



Udvendige knæstøtter

Inkl. betræk, sæt.

Str. 1.....318910403-10
 Str. 2.....318910403-20
 Str. 3..... 318910403-30
 Str. 4..... 318910403-40
 Betræk, sæt str. 1 318910403-1160
 Betræk, sæt str. 2 318910403-2260
 Betræk, sæt str. 3 318910403-4460
 Betræk, sæt str. 4 318910403-4460



Sædekiler

For kontrol og bedre positionering (sæt).

Str. 1S, sæt (6 cm)..... 318910400-1
 Str. 1M+2S (8 cm)..... 318910400-2
 Str. 1L+2M (10 cm)..... 318910400-3
 Str. 2L+3M (12 cm)..... 318910400-4
 Str. 3L (15 cm)..... 318910400-5
 Str. 4S (30,5 cm)..... 318910400-11
 Str. 4M (30,5 cm)..... 318910400-12
 Str. 4L (30,5 cm)..... 318910400-13

Tilbehør og reservedele



Abduktionsklods, polstret

Med polstring og betræk. Der kan lægges et ekstra lag polstring på klodsen, for at gøre den blødere og større. Monteres foran på sædet med et ganter greb.

Str. 1+2 (17 x 7 x 17 cm) 318910408-10
 Str. 3+4 (24 x 9 x 22 cm) 18910408-20
 Betræk str. Small 3195430-10260
 Betræk str. Large 3195430-20260



Abduktionsklods

Udført i pur. Nem aftagelig.

Str. 0 (9 x 4,5 x 7 cm) 318910408-0
 Str. 1 (9 x 9 x 9 cm) 318910408-1
 Str. 2 (9 x 9 x 12 cm) 318910408-2
 Str. 3 (9 x 9 x 15 cm) 318910408-3
 Str. 4 (9 x 9 x 18 cm) 318910408-4





R82 High-low:xo udestel



R82 Combi Frame:x



R82 Strong Base



R82 High-low:xo indestel



R82 Multi Frame

Etac tilbyder mange muligheder for stel til x:panda.
Se alle mulighederne i brochuren "Stel" eller på vores hjemmeside

www.etac.dk



Version 2 - 2023 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]
Creating Possibilities