

Quick guide Cross 6

med Etac Modular Wheelsystem

Sædebredde

Cross 6 fås i følgende sædebredder: 35 cm | 37,5 cm | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 52,5 cm

Sædedybde (målt fra rygrøret til sædets forkant).

Standard ramme: 36 - 49 cm, forkortes ved justering af yderste sædedel (Funktionel siddedybde: se indstilling af sædedybde).

Lang ramme: 42 - 55 cm, forkortes ved justering af yderste sædedel (Funktionel siddedybde: se indstilling af sædedybde).

Med triangulært ryglæn kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm. Se indstilling af sædedybde.

BROCHURE




Cross 6 har max. brugervægt 135 kg

Sædehøjde med C6 hjul med 6-punkts drivringsfæste

Sædehøjde bagtil - drivhjulposition (Standard: D4 – Sædehøjde 45 cm):



Række:	Sædehøjde (cm) ift. valg af drivhjul				Placering af drivhjul: (pos. 1 er længst fremme mod forhjul) Sædehøjde standard fortil: +1,5 cm							
	20"	22"	24"	25"								
H	32,0 cm	34,5 cm	37,0 cm	38,5 cm			H4	H3	H2	H1		
G	34,0 cm	36,5 cm	39,0 cm	40,5 cm			G4	G3	G2	G1		
F	36,0 cm	38,5 cm	41,0 cm	42,5 cm	F6	F5	F4	F3	F2	F1		
E	38,0 cm	40,5 cm	43,0 cm	44,5 cm	E6	E5	E4	E3	E2	E1		
D	40,0 cm	42,5 cm	45,0 cm	46,5 cm	D6	D5	D4	D3	D2	D1		
C	42,0 cm	44,5 cm	47,0 cm	48,5 cm	C6	C5	C4	C3	C2	C1		
B	44,0 cm	46,5 cm	49,0 cm	51,5 cm	B6	B5	B4	B3	B2	B1		
A	46,0 cm	48,5 cm	51,0 cm	52,5 cm	A6	A5	A4	A3	A2	A1		

Drivhjulpositioner

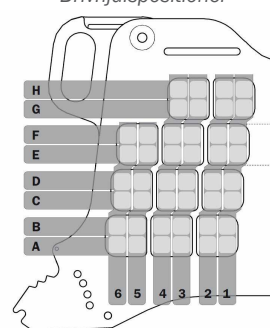

OBS: Ved 0° Camber kan drivhjul monteres i følgende positioner: G3, G1, E5, E3, E1, C5, C3, C1, A5, A3 & A1.

Forreste sædehøjdetabel 45 mm forhjulsnæv

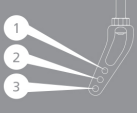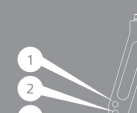
		  											
		Forhjulposition											
		Gaffel XS (alu)			Gaffel S (stål)				Gaffel M (stål)				
Forgaffelfæste	Forhjul	1	2	3	1	2	3	4	1	2	3	4	
Lav udvidet	4"*	320-360	335-375	345-385									
	5"				345-385								
H100	5"				375-415	385-425	395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	
	6"					395-435	410-450	425-465	435-475	445-485	460-500	475-515	
	8" **							445-485	460-500	475-515	495-525	495-535	
H142	8"										500-565	500-575	

Mål i millimeter. * Maks. brugervægt 100 kg. Sådan justeres forgaffelfæstet korrekt: Maks. hældning bagud 6° cm højere foran end bagud (9°), maks. hældning fremad 2 cm lavere foran end bagud (3). Flere kombinationer end ovenstående kan være mulige. ** Fungerer i afbalanceret 4-6 cm med 3° bagudvinklet sæde og standard benstøtte. Sørg for at gaffel/forhjul kan rotere frit uden at ramme kørestol eller bruger.

Justering af drivhjulposition

Højden ændres ved at flytte drivhjulet op/ned, og balancen ændres ved at flytte drivhjulet frem/tilbage. Pos. 1 = meget aktiv stol / Pos. 6 = meget stabil stol.

1. Tag drivhjulet af.
 2. Løs møtrikken på indersiden af gavlen (24 mm nøgle).
 3. Adskil camberbrikkerne, og monter dem i den ønskede position.
- OBS! Positionerne skal være ens i begge sider af kørestolen.

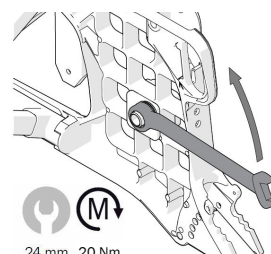


VIDEO



Justering af sædevinkel og sædehøjde fortil

1. Løsn de 2 bolte A og B i begge sider med en 6 mm unbrakonøgle.
2. Find korrekt siddehøjde og vinkel og spænd den øverste bolt i begge sider.
3. Placer forhjulshusene i vatter og spænd den nederste bolt i begge sider.

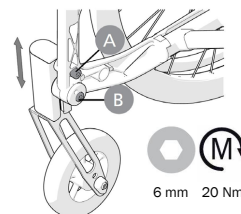


VIDEO



Justering af sædedybde

1. Sædedybden kan indstilles 0-6 cm ved at løfte den forreste sædedel og skubbe det bagud/fremad. Sædedybden påvirkes også af rygslaget indstilling. Med triangulær ryg kan sædedybden forlænges op til 7 cm bagtil vha. ryggens vinkelindstillinger og sædeforlænger (tilbehør).

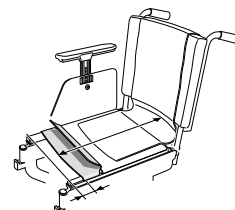



VIDEO



Justering af rygvinkel

Ryggen er trinløs justerbar -5° til 20°, også mens brugeren sidder i stolen.

1. Møtrikken på undersiden af ryglænsbeslaget løsnes med 13 mm nøgle.
2. Justér rygvinklen. Anvend stregmarkeringerne for ens rygvinkel i begge sider, eller lyt efter "klik-lyd".
3. Møtrikken spændes igen.

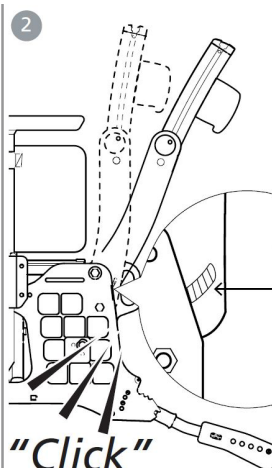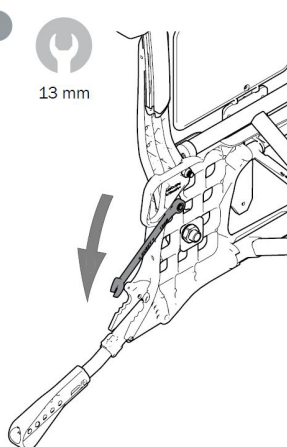




VIDEO



Justering af lumbalvinkel og ryghøjde

Ryggen er trinløs højdejusterbar 32 til 45 cm, og lumbalvinklen kan justeres -16° til 16°, også mens brugeren sidder i stolen.

1. Løsn låseskruerne (A) ca. 1 omgang
2. Justér ryghøjden ved hjælp af skalaen og markeringen på den nederste del af rygskinnen.
3. Flyt unbraconøglen til excenterbøsning (B). Indstil den ønskede lumbalvinkel ved at dreje nøglen til højre eller venstre for at opnå den ønskede vinkel.

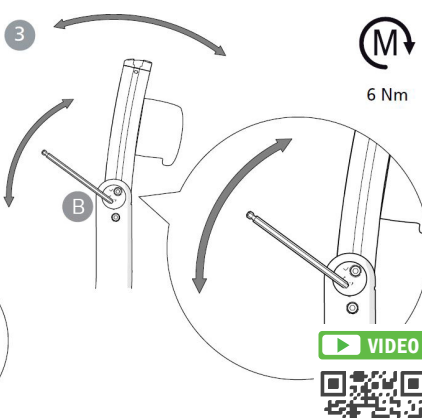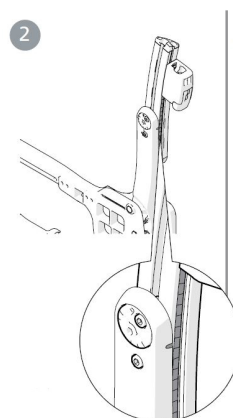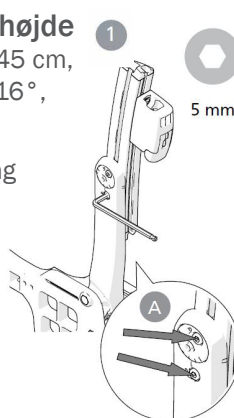


VIDEO



Spænd begge låseskruer igen og justér rygslaget så det passer.

Justering af velcro ryg

1. Alle velcrobånd løsnes, båndet på øverste del af bækkenet strammes til.
2. Øvrige bånd spændes løst.

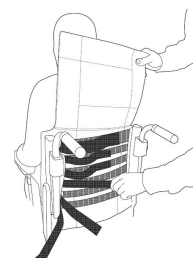

Justering af armlænsenhøjde

1. Afmonter fingerskrue/bolt (med 3 mm unbrakonøgle), vælg armlænsenhøjde og monter skruen igen. OBS: Ved at flytte armlænsbeslaget kan højden justeres yderligere: Boltene løsnes med 5 mm unbrakonøgle og monteres i det andet hul.

