

Quick guide Cross 6

Sædebredde

Cross 6 fås i følgende sædebredder: 35 cm | 37,5 cm | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm | 52,5 cm

Sædedybde (målt fra rygrøret til sædets forkant).

Standard ramme: 36 - 49 cm, forkortes ved justering af yderste sædedel (Funktionel siddedybde: se indstilling af sædedybde).

Lang ramme: 42 - 55 cm, forkortes ved justering af yderste sædedel (Funktionel siddedybde: se indstilling af sædedybde).

Med triangulært ryglæn kan sædedybden forlænges yderligere op til 7 cm. Se indstilling af sædedybde.

BROCHURE




Cross 6 har max. brugervægt 135 kg

Sædehøjde med C5 hjul med 4-punkts drivringsfæste

Sædehøjde bagtil - drivhjulposition (Standard: D4 – Sædehøjde 45 cm):										
Række:	Sædehøjde (cm) ift. valg af drivhjul				Placering af drivhjul: (pos. 1 er længst fremme mod forhjul) Sædehøjde standard fortil: +1,5 cm					
	20"	22"	24"	26"*						
H	32,0 cm	34,5 cm	37,0 cm	39,5 cm			H4	H3	H2	H1
G	34,0 cm	36,5 cm	39,0 cm	41,5 cm			G4	G3	G2	G1
F	36,0 cm	38,5 cm	41,0 cm	43,5 cm	F6	F5	F4	F3	F2	F1
E	38,0 cm	40,5 cm	43,0 cm	45,5 cm	E6	E5	E4	E3	E2	E1
D	40,0 cm	42,5 cm	45,0 cm	47,5 cm	D6	D5	D4	D3	D2	D1
C	42,0 cm	44,5 cm	47,0 cm	49,5 cm	C6	C5	C4	C3	C2	C1
B	44,0 cm	46,5 cm	49,0 cm	51,5 cm	B6	B5	B4	B3	B2	B1
A	46,0 cm	48,5 cm	51,0 cm	53,5 cm	A6	A5	A4	A3	A2	A1

Drivhjulpositioner

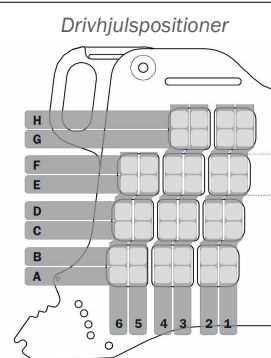

*26" drivhjul kun montering i pos. 4-6. OBS: Ved 0° Camber kan drivhjul monteres i følgende positioner: G3, G1, E5, E3, E1, C5, C3, C1, A5, A3 & A1.

Tabel for forreste sædehøjde 57 mm forhjulsnar													
		Forhjulposition											
		Ekstra kort forgaffel (stål)			Kort forgaffel (stål)			Medium forgaffel (stål)			Lang forgaffel (stål)		
Forgaffelfæste	Forhjul	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Lavt forgaffelfæste	4" *	320-360	335-380	355-400									
	5"				360-400	375-415	390-430						
Standard/ bredere forgaffelfæste	5"				375-415	390-430	405-445	430-460	450-480	460-490			
	6"					400-440	415-455	450-470	460-490	470-500			
	6½"					410-450	425-465	460-480	470-490	480-510	505-525	515-535	525-555
	7"								475-495	485-515			530-560
	8" **								480-510	490-520		525-545	535-565

*Maks. brugervægt 100 kg.


For korrekt indstilling af forgaffelfæstet: Maks. bagudvinkling 6 cm højere for end bag (9°), maks fremadvinkling 2 cm lavere for end bag (3°).

** Fungerer i afbalancering 4-6 cm med 3° bagudvinklet sæde og standard benstøtte. Sørg for at gaffel/forhjul kan rotere frit uden at ramme kørestol eller bruger. Til forhjul 8x2", anvend forgaffel Transit (giver en sædehøjde på 47-51 cm).

Justering af drivhjulposition

Højden ændres ved at flytte drivhjulet op/ned, og balancen ændres ved at flytte drivhjulet frem/tilbage. Pos. 1 = meget aktiv stol / Pos. 6 = meget stabil stol.

1. Tag drivhjulet af.
2. Løsn møtrikken på undersiden af gavlen (24 mm nøgle).
3. Adskil camberbrikkerne, og monter dem i den ønskede position.
OBS! Positionerne skal være ens i begge sider af kørestolen.

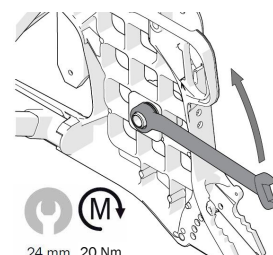


VIDEO



Justering af sædevinkel og sædehøjde fortil

1. Løs de 2 bolte A og B i begge sider med en 6 mm unbrakonøgle.
2. Find korrekt siddehøjde og vinkel og spænd den øverste bolt i begge sider.
3. Placer forhjulshusene i vatter og spænd den nederste bolt i begge sider.

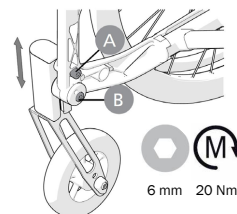


VIDEO



Justering af sædedybde

1. Sædedybden kan indstilles 0-6 cm ved at løfte den forreste sædedel og skubbe det bagud/fremad. Sædedybden påvirkes også af rygslagets indstilling. Med triangulær ryg kan sædedybden forlænges op til 7 cm bagtil vha. ryggens vinkelindstillinger og sædeforlænger (tilbehør).

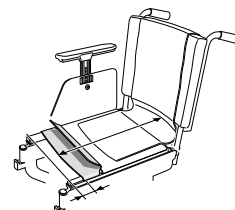


VIDEO



Justering af rygvinkel

Ryggen er trinløs justerbar -5° til 20°, også mens brugeren sidder i stolen.

1. Møtrikken på indersiden af ryglænsbeslaget løsnes med 13 mm nøgle.
2. Justér rygvinklen. Anvend stregmarkeringerne for ens rygvinkel i begge sider, eller lyt efter "klik-lyd".
3. Møtrikken spændes igen.

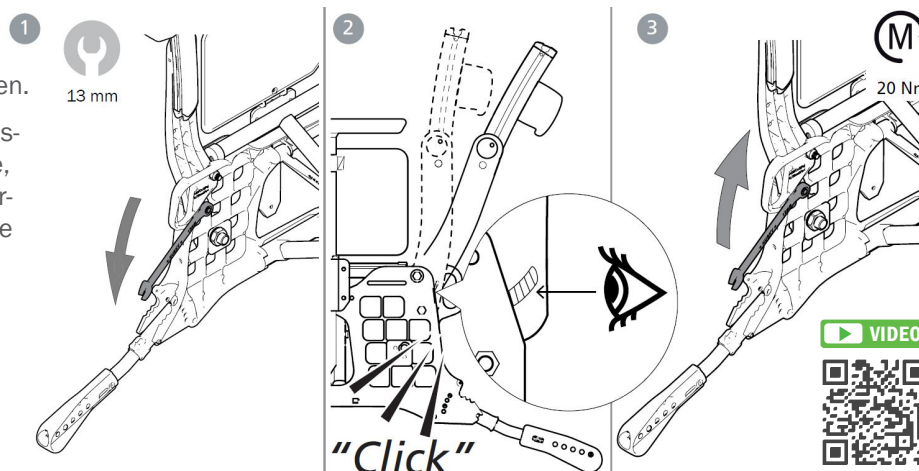


VIDEO



Justering af lumbalvinkel og ryghøjde

Ryggen er trinløs højdejusterbar 32 til 45 cm, og lumbalvinklen kan justeres -16° til 16°, også, mens brugeren sidder i stolen.

1. Løsn låseskruerne (A) ca. 1 omgang
2. Justér ryghøjden ved hjælp af skalaen og markeringen på den nederste del af rygskinnen.
3. Flyt unbraconøglen til excenterbøsning (B). Indstil den ønskede lumbalvinkel ved at dreje nøglen til højre eller venstre for at opnå den ønskede vinkel.

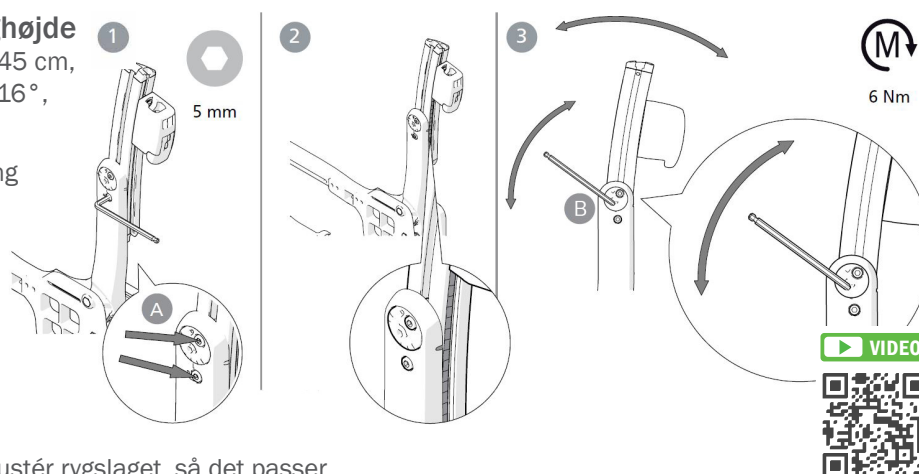

VIDEO



Spænd begge låseskruer igen og justér rygslaget, så det passer.

Justering af velcro ryg

1. Alle velcrobånd løsnes, båndet på øverste del af bækkenet strammes til.
2. Øvrige bånd spændes løst.



Justering af armlænishøjde

1. Afmonter fingerskrue/bolt (med 3 mm unbrakonøgle), vælg armlænishøjde og monter skruen igen.
- OBS: Ved at flytte armlænsbeslaget kan højden justeres yderligere:
Boltene løsnes med 5 mm unbrakonøgle og monteres i det andet hul.