




HoverMatt Quick Guide

- 1 Pasienten bør helst ligge på ryggen.
- 2 Plasser HoverMatt under pasienten, og fest sikkerhetsstroppene løst.
- 3 Se til at pasienten ligger i midten av madrassen (sjekk sentermerkene ved hode- og fotende).
- 4 Koble HoverTech-pumpen til en stikkontakt.
- 5 Sett munnstykket inn i en av de to slangeinngangene ved fotenden av HoverMatt, og klikk på plass.
- 6 Sørg for at sengene er så nærme hverandre som mulig, og lås alle hjul.
- 7 Trykk på den GRØNNE  eller RØDE  knappen for å fylle madrassen med luft. Hvilken knapp du skal velge, er avhengig av størrelse på madrassen (se oversikt til høyre).
- 8 Forflytt pasienten diagonalt med HoverMatt, gjerne med føttene først. Når madrassen er ca. halvveis over, fullføres forflytningen ved å trekke den til riktig posisjon.
- 9 Se til at pasienten ligger i riktig posisjon i sengen før madrassen tømmes for luft.
- 10 Så fort forflytningen er ferdig, trykk på STANDBY-knappen  for å skru av luftstrømmen. Koble fra pumpen.

Air Supply (pumpe)-knapper

-  **HOVERMATT, STR. 28/34:** Brukes for å fylle luft i HoverMatt str. 28" & 34".
-  **HOVERMATT, STR. 39/50 & HOVERJACK:** Gir en kraftigere luftstrøm og brukes for å fylle luft i HoverMatt og HoverSling str. 39" & 50", samt HoverJack str. 32" & 39"
-  **ADJUSTABLE:** Gir en myk start på luftstrømmen og kan brukes som en start ved sårbare og lydsensitive pasienter. NB: For å få nok luftstrøm til forflytning, må du bruke grønn eller rød knapp etter oppstarten.
-  **STANDBY:** Stopper lufttilførselen.