

Keuzehulp in-bed-glijstelsysteem

Immedia biedt een breed assortiment aan glij- en treklakens. De lakens blijven in bed liggen waardoor je fysieke belasting voor de zorgverlener voorkomt en het meer comfort biedt voor de cliënt. Voor elke fase is er een oplossing, van zelfstandige cliënt tot intensieve ondersteuning. Ontdek welk glij- en treklaken het beste bij de situatie van uw cliënt past met behulp van onderstaande keuzehulp. De keuzehulp biedt een selectie van de meest gangbare glij- en treklakens uit het Immedia assortiment.

Fase 1: cliënt heeft moeite met zelfstandig draaien in bed


Hoe verplaatst de cliënt zich in bed bij het zijwaarts draaien?



Afzetten met voeten




Schuiven met voeten

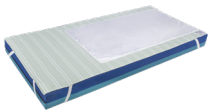

SatinSheet Basislaken Midi Corner

Basislaken met katoenen voeteneinde waarmee cliënt met de voeten kan afzetten.

EIM4157S

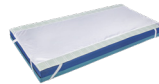

1. SatinSheet Basislaken Maxi Corner

Basislaken over volledige lengte matras.

EIM4107S



2. SatinSheet Basislaken Fit

Satijnen hoeslaken waarmee cliënt ook de benen gemakkelijk in en uit bed kan schuiven.

EIM4112S

Fase 2: zorgverlener of mantelzorgger helpt cliënt

De cliënt kan in alle richtingen verplaatst worden



Ja

SatinSheet SET INCO

1x SatinSheet Basislaken
1x 4D Treklaken Midi In2Sheet



EIM4240S

Is absorberend glijmateriaal nodig?

Nee



SatinSheet SET

1x SatinSheet Basislaken
1x 4D Treklaken Midi



EIM4231SRCNL



SatinSheet SET EXTRA

1x SatinSheet Basislaken
2x 4D Treklaken Midi



EIM4237S

Los bijbestellen

Inco
Basislaken Maxi Corner: EIM4107S
4D Treklaken Midi In2Sheet: EIM4140SH

Normaal
Basislaken Maxi Corner: EIM4107S
4D Treklaken Midi: EIM4115SH

Fase 3: cliënt is in hoge mate afhankelijk van zorgverleners




Ja

Is absorberend glijmateriaal nodig?



Nee

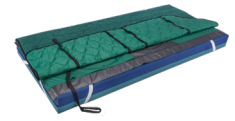

TwinSheet4Glide Set

De incontinentieuitvoering van het in-bed-glijstelsysteem voor mensen met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Verplaatst in alle richtingen.



EIM4317

4WayGlide Set

Een in-bed-glijstelsysteem voor cliënten met gereduceerde mobiliteit, pijn of drukplekken. Verplaatst in alle richtingen.



EIM4309



Los bijbestellen

Basis laken

- EIM85/200LPLNS, Nylon sheet(normaal matras 80-90 cm breed)
- EIM110/200LPLNS, Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

Treklaken

- EIM150/200N, Twinsheet 4Glide pad Long(normaal matras 80-100 cm breed)



Los bijbestellen

Basis laken

- EIM85/200LPLNS, Nylon sheet(normaal matras 80-90 cm breed)
- EIM110/200LPLNS, Nylon sheet (extra breed matras 100-120)

Treklaken

- EIM140/200LPL, 4WayGlide Mattress (normaal matras 80-100 cm breed)
- EIM180/200LPL, 4WayGlide Maxi Mattress (extra breed matras 100-120 cm breed)

Accessoires

Positioneringswig

- EIM53/80NS (lang)
- EIM53NS (kort)



MultiGlide Gloves

- EIM35



SatinSheet Kussensloop

- EIM4117S



Advies & training

John Walker

Regio Noord
Telefoon: 06 31 75 85 93

Marjan Kiers

Regio Zuid
Telefoon: 06 50 24 34 00

Frank van Geffen

België
Telefoon: +31 (0)6 54 39 52 46