

Klick Quick Set-up Guide





Snabbguide: Nödvändiga verktyg

KLAXON®

Insexnycklar Nr. 3, 4, 5, 6



Snabbguide:

Montering av Klick

KLAXON®

Klick levereras utan monterat styre och stöd.



Snabbguide:

Montering av stödet

KLAXON®

1. För att montera stödet
 - För in den övre delen på stödet genom att trycka fjädern uppåt. Detta gör att låssystemet passar i fästet när du utför nästa steg.
 - Släpp fjädern när låsningen är på plats. Detta låser stödet.
 - Kontrollera att det är korrekt isatt och att stödet sitter stabilt och är korrekt fixerat.



Snabbguide:

Montering av Styret

KLAXON®

2 För att montera styret och displayen:

- Sätt styret på plats på stangen. Var noga med att dra displaykablarna närmare styret så att de är lätta att nå när du monterar displayen.
- Sätt i plattan och lås fast styret.



Snabbguide:

Montering av Styret

KLAXON®

- Sätt i de fyra skruvarna på plattan
- Dra åt plattans alla fyra låsskruvar med en insexnyckel Nr.4 på så sätt att styret fortfarande är något rörligt. Detta kommer att hjälpa vid justering av lutningen som kommer att utföras senare.



Snabbguide:

Slutjusteringar - Styrets vinkel

3 För att justera styrets vinkel, gör följande:

- Använd insexnyckel N. 5 för att försiktigt skruva loss skruven som sitter ovanför styrenhetens väska
- Justera styrstångens vinkel till önskad position genom att rotera den inom det område som anges på bilden
- Dra åt skruven så att justeringen inte kan ändras under normal användning av enheten
- Justera styrets vinkel genom att rotera själva styret.
- Efter avslutad justering använd insexnyckeln Nr.4 för att dra åt styrplattans skruvar fullständigt.



KLAXON®

Snabbguide:

Slutjusteringar - Styrets höjd

KLAXON®

4. För att justera styrets höjd, gör så här:

- Ta bort skyddskåpan och lossa skruven som sitter ovanför stangen med hjälp av insexnyckel Nr.6
- Höj eller sänk styret till önskad höjd
- Dra åt skruven så att justeringen inte kan ändras under normal användning av enheten



Snabbguide:

Slutjusteringar - Displayens lutning

KLAXON®

Displayens fäste är fäst vid styret med en klämma och fyra skruvar.
För att justera displayens vinkel:

- Använd Insexnyckeln Nr. 3 för att lossa de fyra skruvarna på klämmorna något
- Sök Displayens önskade vinkel
- Efter avslutad justering använd insexnyckeln Nr.3 för att dra åt klämmans skruvar fullständigt




Snabbguide:

Lås upp Klick med upplåsningskoden

KLAXON®

5. För att låsa upp Klick:

- Slå PÅ Klick genom att trycka och hålla intryckt "Power" -knappen i några sekunder
- Tryck och håll intryckt "+ / M" -knappen för att komma in i menyn


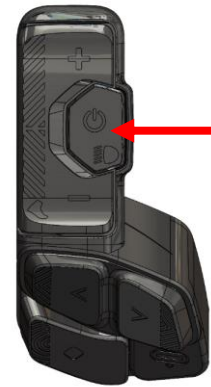


Snabbguide:

Lås upp Klick med upplåsningskoden

- Mata in upplåsningskoden
- Använd “+” eller “-” för att välja tecken
- Använd “Power” för att bekräfta tecknet och flytta till nästa (den lilla markören kommer att flytta enligt aktiverat tecken)
- När koden är inmatad, tryck in och håll intryckt “+ / M” -knappen några sekunder för att lämna menyn

KLAXON®

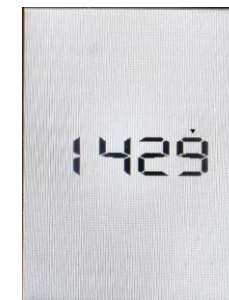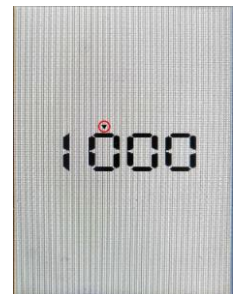

Snabbguide:

Lås upp Klick med upplåsningskoden

- Stäng av Klick genom att trycka och hålla intryckt "Power"-knappen i några sekunder
- Slå på Klick igen genom att trycka och hålla intryckt "Power"-knappen i några sekunder
- Använd enheten (dvs. accelerera)

Varning: Det är viktigt att slå AV och PÅ Klick efter inmatning av koden för att bekräfta upplåsning. Annars kommer enheten att låsas igen vid nästa start. Kom ihåg att efter upplåsning med Upplåsningskoden (genom att följa proceduren korrekt) kommer enheten alltid att förbli upplåst (även efter att ha slagit den AV och PÅ igen)

KLAXON®

