

# Montering Smart 150

Gäller: Molift Smart 150

## Montering:

1. Lossa gummibandet runt hjulen
2. Lägg ner lyften på golvet
3. Res masten upp
4. Flytta isär benen med pedalen så att masten glider ned i mastfästet



5. Lås låshandtaget för masten

6. Sätt i batteriet, ev frigör nödstoppet
7. Frigör lyftbygel från bygelhållaren



8. Klar att använda

## Demontering:

1. Kör ner lyftbygel & fäst i bygelhållaren
2. (tips) Fäst handkontrollen runt handtaget
3. Ta bort batteriet, ev tryck in nödstoppet
4. Lossa låshandtaget på masten



5. Frigör masten från mastfästet genom att lyfta den uppåt

6. Fäll ner masten
7. Tryck ihop benen med pedalen

8. Lyft upp lyften till stående  
Fäst ihop lyften med gummibandet runt hjulen



Vid frågor, kontakta:  
Etac Sverige AB  
Box 203  
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00  
fax kundservice 0371-58 73 90  
info@etac.se  
www.etac.se

© Etac Sverige AB 2019-11-08

**etac**<sup>®</sup>  
Skapar möjligheter