

Quick guide Prio 3A

Simple indstillinger for hjælpere.

Til Etac Modular Wheelsystem - C6 drivhjul og 45 mm navbredde på forhjul.

Indstillinger i håndtag

Ryginkel
- venstre håndtag.



Tipfunktion
- højre håndtag.



Kørehåndtag


Højdejusterbare.

[VIDEO](#)



Eleverbare benstøtter

Tryk knappen ind og løft/sænk.

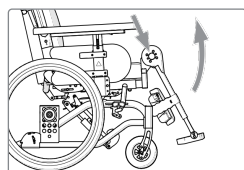

Tipsikring

Opklappelig.

[VIDEO](#)



Hovedstøtte

Aftagelig og justerbar.


[VIDEO](#)



Armlæn - aftagelige, højdeindstillelige


Løft op for at fjerne dem.

Dybdejusterbare: Løsn fingerskruen under armlænene.

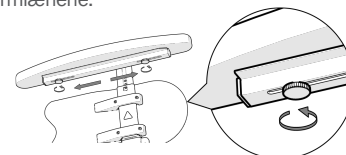


Aftagelige og svingbare benstøtter

Løft og drej.

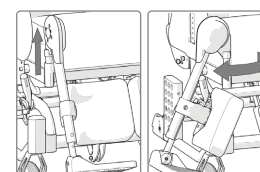

Længdejusterbare fodstøtter

Løsn fingerskruerne helt på benstøtten. Træk skruen ud. Indstil højden. Monter igen og stram ordentligt.


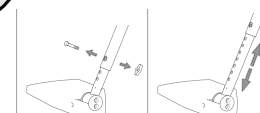


Avancerede indstillinger for fagpersonale.

Strop-ryg

Indstil med brugeren så langt tilbage i stolen som muligt.

- Rygvinklingen aktiveres til oprejst position.
- Regulér bækkenstøtten i højden svarende til lændesvajet.
(Se video: Dynamisk bækkenstabilitet)
- Giv bækkenet støtte ved at stramme bækkestroppen. Husk at denne strop slækkes automatisk, når ryglænet lænes bagover.
- Regulér derefter den øverste strop, så brugeren får støtte og balance i overkroppen.
- De resterende stropper reguleres for at give plads til bagdelen og følge ryggens naturlige rundning.

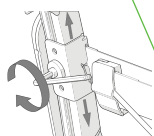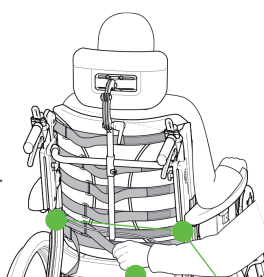

Sædedybde foran

Indstilling fra 39-51 cm.

[VIDEO](#)



Ryghøjde

Indstilling fra 46-62 cm.
52-68 cm inkl. rygforlænger.

[VIDEO](#)



Lumbal- og hoftvinkel

Indstilling fra -12° til +10°

[VIDEO](#)





Dynamisk bækkenstabilitet

Individuel indstillelig.

[VIDEO](#)




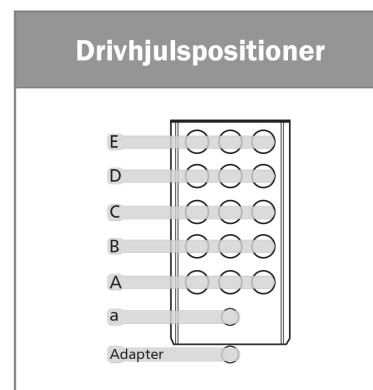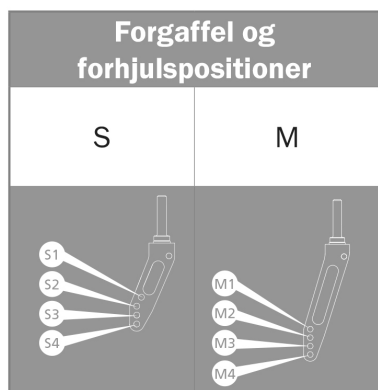

Sædehøjdetabel 45 mm navbredde

	6"	8"	6"	8"	16"	20"	22"	24"
38	S2					E		
40	S2				B			
40,5	S2					D	E	
42,5	S2	S4	M2		A			E
43	S2	S4	M2			C	D	
45	S4	S4	M2	M1	a			D
45,5	S4	S4	M2	M1		B	C	
47,5		S4	M3	M1-M4				C
48		S4	M3	M1-M4		A	B	
50			M4	M4				B
50,5			M4	M4			A	
51,5				M4	Ad			
52,5				M4				A

Tolerance i ovenstående mål +/-10 mm
Flere kombinationer end ovenstående kan være mulige.

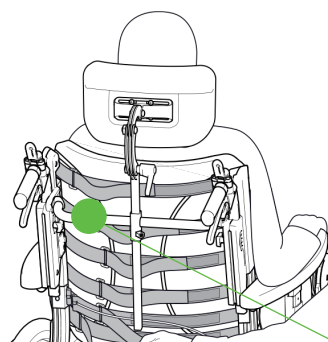

Værktøj

I ryggen er der værktøj til indstilling af de mest almindelige funktioner på stolen.

VIDEO



Find avancerede indstillinger i brugervejledningen, som medfølger stolen, eller scan qr-koden med din mobiltelefon via dit kamera og find den der.