

molift[®]

PARTNER 255

SNABBGUIDE



SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen till både personlyft och tillbehör före användning.
- SWL (Safe Working Load) är 255 kg.
- Försäkra dig om att både lyften och tillbehöret är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott skick.
- Kontrollera att lyftmast och lyftanordning är ordentligt fastsatta (se även sidan 8 i bruksanvisningen).
- Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att alla 4 öglorna på lyftselen är korrekt fastsatta på lyftkrokarna.



VIKTIGT!

Denna Snabbguide ersätter inte lyftens bruksanvisning. Bruksanvisningen kan laddas ner från www.molift.net

HANDKONTROLL ①



Batteriindikator, lyser när batteriet behöver laddas

▲ UPP

► ◀ Flytta ihop benen

◀ ► Flytta isär benen

▼ NER

Lyften aktiveras genom en tryckning på någon av knapparna. Handkontrollen är kopplad till undersidan av batterihållaren.

NÖDSTOPP ②



Genom att trycka in nödstoppet bryts strömmen till motorn och lyften stannar. Vrid knappen medurs för att återställa.

NÖDSÄNKNING ③ och ④



Om lyften slutar att fungera normalt kan man göra en nödsänkning.

Elektrisk nödsänkning:

Tryck in knappen och håll in den tills patienten har sänkts ner.

Manuell nödsänkning:

Skall bara användas när elektrisk nödsänkning inte fungerar.

Sätt nyckeln i hålet högst upp på masten och vrid tills patienten har sänkts ned.

NB! Nyckeln måste alltid tas bort från hålet efter manuell nödsänkning!



BATTERI OCH LADDNING ⑤



Miljövänligt NiMH
26,4 V batteri.

När batteriet behöver laddas lyser batterilampan på lyften och batteriindikatorn på handkontrollen.



Den här laddaren monterar permanent på lyften. Parkera lyften och koppla in i ett vanligt vägguttag. Batteriet laddas i batterihållaren. En lysdiod på batteriladdaren indikerar laddningsstatusen på batteriet.

Beskrivning av batteriladdarens indikatorlampa:

Indikatorlampa	Status
Gul	Klart för laddning
Orange	Snabbladdning
Grön/Gul	Toppladdning
Grön	Färdigladdat
Orange/Grön	Fel

SERVICE



Lyften har en serviceindikator som varnar när lyften behöver service. Lampan lyser grönt när lyften kan användas normalt.

Serviceindikator	Status
Inget ljus	Energisparläge
Grön	Klart för användning
Gul	Beställ service, lyften fungerar
Röd	Utför service
Röd + ljud	Utför service snarast

Service skall utföras av Molift-certifierad servicepersonal.

MONTERING OCH EXTRAUTRUSTNING



Läs lyftens bruksanvisning för montering av lyften. Molift Partner 255 har flera olika tillbehör, som t.ex: Olika lyftanordningar, lyftarm med vikt, gåarmar och extra lågt chassi. Beskrivning och montering av tillbehör finns i bruksanvisningen.

RENGÖRING

Lyften rengörs utvändigt med en lätt fuktad trasa med PH-neutralt rengöringsmedel. För desinficering används isopropylalkohol.

ENKEL FELSÖKNING

Om lyften inte fungerar, kontrollera att:

- nödstoppet inte är intryckt,
- batteriet är laddat,
- handkontrollen är rätt inkopplad.

Kontakta certifierad servicepersonal om lyften är behäftad med fel eller inte fungerar.

LYFT OCH FÖRFLYTNING

Molift Partner 255 har ett lodrätt lyftmönster som håller brukaren på samma avstånd från masten under hela lyftet vilket ger en säker och stabil position.

- Undvik manuella lyft - använd lyften.
- Tänk på korrekt arbetsställning för att skona din rygg! Använd sängens höj- och sänkfunktion.
- Planera lyftet och informera den som skall lyftas/förflyttas.
- Den som förflyttas skall sitta så lågt som möjligt med ansiktet vänt mot masten, gärna med fötterna på chassit.

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
N-2816 Gjøvik
NORGE
Tel: +47 4000 1004
www.molift.com

molift[®]
by Etac