

molift[®]

QUICK RAISER 2

SNABBGUIDE



HÄNDKONTROLL ①



Batteriindikator, lyser när batteriet behöver laddas

▲ UPP


► ◀ Flytta ihop benen

◀ ► Flytta isär benen

▼ NER

Lyften aktiveras genom en tryckning på någon av knapparna. Handkontrollen är kopplad till chassit.

BRUK

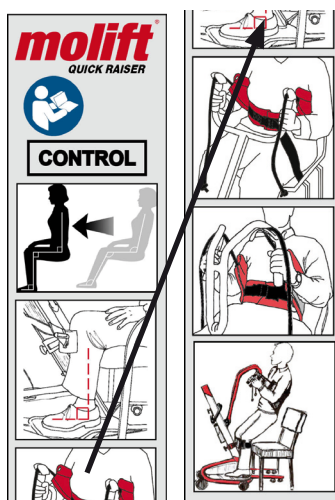

Molift Quick Raiser 2 är enkel att använda. Läs brukar manualen. På vänster sida om masten finns en lat-hund. Kontrollera att lyften inte har skador eller fel. Kontrollera att knäuddarna är anpassad och att selen er korrekt fastsat.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen till både personlyft och tillbehör före användning.
- SWL (Safe Working Load) är 160 kg.
- Försäkra dig om att både lyften och tillbehöret är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott skick.
- Kontrollera att inga delar sitter löst och att lyftarm och mast sitter fast ordentligt.
- Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att lyftselen är korrekt fastsat och att knäuddarna är korrekt anpassad brukaren.

NÖDSÄNKNING ② och ③



Om lyften slutar att fungera normalt kan man göra en nödsänkning.

Elektrisk nödsänkning:

Tryck in knappen och håll in den tills patienten har sänkts ner.

Manuell nödsänkning:

Skall bara användas när elektrisk nödsänkning inte fungerar.

Sätt nyckeln i hålet högst upp på masten och vrid tills patienten har sänkts ned.


NB! Nyckeln måste alltid tas bort från hålet efter manuell nödsänkning!



VIKTIGT!

Denna Snabbguide ersätter inte lyftens bruksanvisning. Bruksanvisningen kan laddas ner från www.molift.net

NÖDSTOPP ④

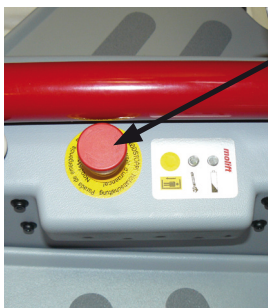

Genom att trycka in nödstoppet bryts strömmen till motorn och lyften stannar.
Vrid knappen medurs för att återställa.

SERVICE




Lyften har en serviceindikator som varnar när lyften behöver service. Lampan lyser grönt när lyften kan användas normalt.

BATTERI ⑤ OCH LADDNING



Miljövänligt NiMH 26,4 V batteri.
När batteriet behöver laddas lyser batterilampan på lyften och batteriindikatorn på handkontrollen.

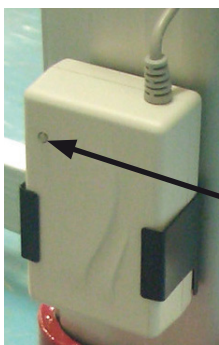

Parkera lyften och koppla laddarens kontakt i ett vanligt vägguttag.
Batteriet laddas i batterihållaren. En lysdiod på batteriladdaren indikerar laddningsstatusen på batteriet.

Serviceindikator	Status
Inget ljus	Energisparläge
Grön	Klart för användning
Gul	Beställ service, lyften fungerar
Röd	Utför service
Röd + ljud	Utför service snarast

Service skall utföras av Molift-certifierad servicepersonal.

RENGÖRING

Lyften rengörs utvändigt med en lätt fuktad trasa med PH-neutralt rengöringsmedel. För desinficering används isopropylalkohol.

Beskrivning av batteriladdarens indikatorlampa:

Indikatorlampa	Status
Gul	Klart för laddning
Orange	Snabbladdning
Grön/Gul	Toppladdning
Grön	Färdigladdat
Orange/Grön	Fel

ENKEL FELSÖKNING

Om lyften inte fungerar, kontrollera att:

- nödstoppet inte är intryckt,
- batteriet är laddat,
- handkontrollen är rätt inkopplad.

Kontakta certifierad servicepersonal om lyften är behäftad med fel eller inte fungerar.

LYFT OCH FÖRFLYTTNING

- Undvik manuella lyft - använd lyften.
- Tänk på korrekt arbetsställning för att skona din rygg!
- Planera lyftet och informera den som skall lyftas/förflyttas.
- Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att lyftselen er korrekt fastsatt och att knäkuddarna är korrekt anpassad brukaren.

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik
NORGE
Tlf: (+47) 4000 1004
www.molift.com

molift
by Etac