

molift[®]

MOVER 205

QUICK GUIDE



HÅNDKONTROLL 1



Batteriindikator, lyser når batteriet må lades

▲ OPP

▶ ◀ Samle ben

◀ ▶ Spre ben

▼ NED

Løfteren aktiveres ved å trykke på en av knappene. Håndkontrollen er koblet til undersiden av batteriholderen.

NØDSTOPP 2



Ved å trykke inn nødstoppen kuttes strømmen til motoren og løfteren stopper.

Vri knappen med klokken for å tilbake stille.

SIKKERHETSFORSKRIFTER

- Les brukermanualen til både personløfteren og tilbehør før bruk.
- SWL (Safe Working Load) er 205 kg.
- Forsikre deg om at både løfteren og tilbehøret er i sikkerhetsmessig og driftsmessig god stand.
- Kontroller at løftesøyle og oppheng er forsvarlig festet
- Før du begynner å løfte må du kontrollere at alle 4 løkkene på seilet er korrekt festet på løftekrokene.

NØDSENK 3 og 4



Det er mulig å gjennomføre nødsekk dersom løfteren slutter å fungere normalt.

Elektrisk nødsekk

Trykk inn knappen og hold inne til pasienten er senket ned.



Manuell nødsekk:

Skal kun benyttes når elektrisk nødsekk ikke fungerer.

Dra det røde håndtaket forsiktig oppover og kontroller nedsenkingen.



VIKTIG

Denne Quick Guide erstatter ikke løfterens brukermanual. Brukermanualen kan lastes ned fra www.molift.net

BATTERI OG LADING 5



Miljøvennlig NiMH 26,4 V batteri. Når batteriet har behov for lading vil batterilampen på løfteren og batteriindikatoren på håndkontrollen vil lyse.



Laderen må være tilkoblet strømmettet når batteriet skal lades. Alle nye batterier skal lades før bruk. En lysdiode på batteriladeren indikerer ladestatusen på batteriet:

Forklaring på ladelampen på batteriladeren:

Ladelampe	Status
Gul	Klar til lading
Orange	Hurtiglading
Grønn/Gul	Topp lading
Grønn	Ferdig ladet
Orange/Grønn	Feil

SERVICE



Løfteren har en servicelampe som varsler når løfteren skal ha service. Lampen lyser grønt når løfteren kan brukes normalt.

Servicelampe	Status
Ikke lys	Strømsparemodus
Grønn	Klar til bruk
Gul	Bestill service, løfter fungerer
Rød	Utfør service
Rød + lyd	Utfør service snarest

Service skal utføres av Molift sertifisert servicepersonell.

QUICK RELEASE OPPHENG 6



Molift Partner 205 har oppheng med hurtigkobling som gjør det enkelt og raskt å bytte oppheng.

Det er kun mulig å ta av og sette på opphendet når det vendes oppover.

Opphendet er låst til armen når det henger vanlig.



RENGJØRING

Løfteren rengjøres utvendig med en lett fuktet klut med PH-nøytralt rengjøringsmiddel. For desinfisering benyttes isopropylalkohol.

ENKEL FEILSØKING

Hvis løfteren ikke fungerer, kontrollerer at:

- nødstoppen ikke er trykket inn
- batteriet er ladet
- håndkontrollen er riktig tilkoblet

Kontakt sertifisert servicepersonell hvis løfteren har feil eller ikke fungerer.

LØFT OG FORFLYTTNING

- Unngå manuelle løft - bruk løfteren
- Husk korrekt arbeidsstilling for å skåne ryggen din. Bruk sengens heve- og senkefunksjon.
- Planlegg løftet og informer den som skal løftes/forflyttes.
- Den som forflyttes skal sitte så lavt som mulig med ansiktet vendt mot søylen, gjerne med føttene på chassiset.

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik
NORGE
Tlf: (+47) 4000 1004
www.molift.com

molift[®]
by Etac