

HANDKONTROLL ① OCH PEDALER




Batteriindikatorn lyser när batteriet behöver laddas.

▲ UPP

▼ NER

Lyften aktiveras genom en tryckning på någon av knapparna.

Handkontrollen är kopplad till undersidan av batterihållaren

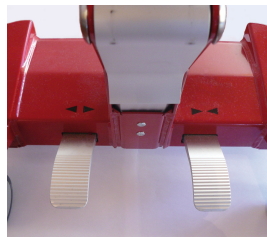

Benjustering:

◀ ▶ Flytta isär benen

▶ ◀ Flytta ihop benen


NÖDSTOPP ②



Genom att trycka in nödstoppet bryts strömmen till motorn och lyften stannar.

Vrid knappen medurs för att återställa

SNABBGUIDE

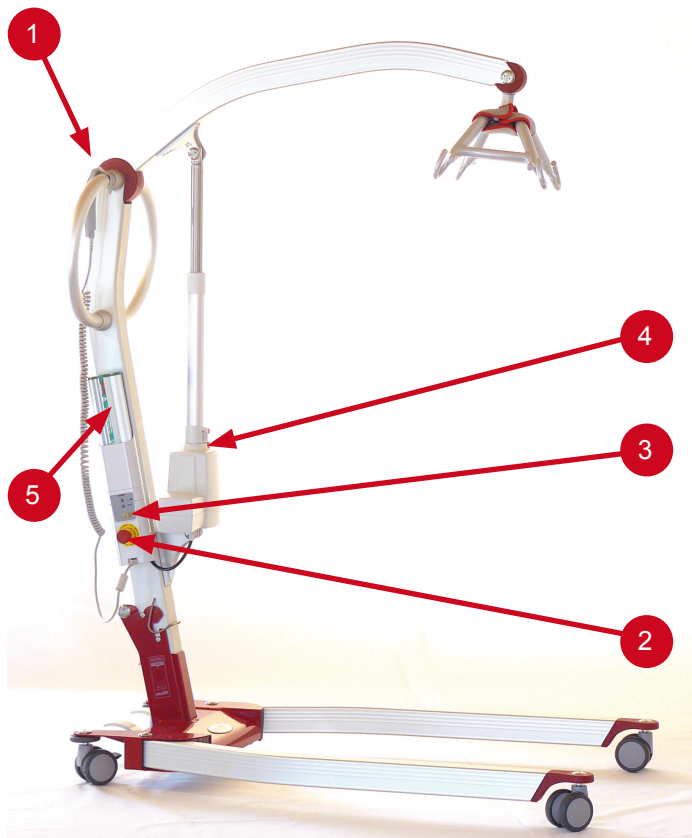

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Läs bruksanvisningen till både personlyft och tillbehör före användning.
- SWL (Safe Working Load) är 150 kg.
- Försäkra dig om att både lyften och lyfttillbehören är i säkerhetsmässigt och driftsmässigt gott skick.
- Kontrollera att lyftmast är ordentligt fastsatt.
- Innan du börjar lyfta bör du kontrollera att alla 4 öglorna på lyftselen är korrekt fastsatta på lyftkrokarna.

NÖDSÄNKNING ③ och ④



Om lyften slutar att fungera normalt kan man göra en nödsänkning.

Elektrisk nödsänkning:

Tryck in knappen och håll in den tills patienten har sänkts ner.



Manuell nödsänkning:

Skall bara användas när elektrisk nödsänkning inte fungerar.

Dra i det röda handtaget försiktigt uppåt och kontrollera nedsänkningen.



VIKTIGT!

Denna Snabbguide ersätter inte lyftens bruksanvisning. Bruksanvisningen kan laddas ner från www.etac.com

BATTERI ⑤ OCH LADDNING



Miljövänligt NiMH14,4 V batteri. När batteriet behöver laddas lyser batterilampan på lyften och batteriindikatorn på handkontrollen.



Laddaren skall vara inkopplad på elnätet när batteriet skall laddas. Alla nya batterier skall laddas före användning. En lysdiod på batteriladdaren indikerar laddningsstatusen på batteriet.

Beskrivning av batteriladdarens indikatorlampa:

Indikatorlampa	Status
Gul	Klart för laddning
Orange	Snabbladdning
Grön/Gul	Toppladdning
Grön	Färdigladdat
Orange/Grön	Fel

SERVICE




Lyften har en serviceindikator som varnar när lyften behöver service. Lampan lyser grönt när lyften kan användas normalt.

Serviceindikator	Status
Inget ljus	Energisparläge
Grön	Klart för användning
Gul	Beställ service, lyften fungerar
Röd	Utför service
Röd + lyd	Utför service snarest

Service skall utföras av Molift-certifierad servicepersonal.

MONTERING

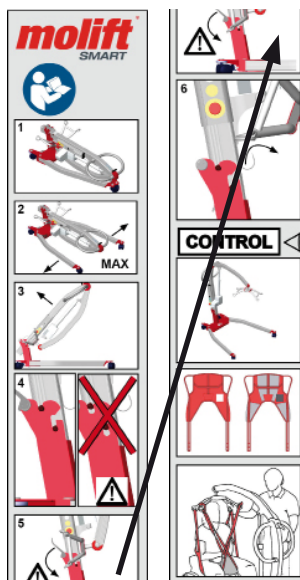

Molift Smart 150 kan lätt monteras och sätta ihop efter användning. Följ anvisningarna i bruksanvisningen och på lyften. Se till att lyftmasten är korrekt monterad och justera benen till rätt läge.

RENGÖRING

Lyften rengörs utvändigt med en lätt fuktad trasa med PH-neutralt rengöringsmedel. För desinficering används isopropylalkohol.

ENKEL FELSÖKNING

Om lyften inte fungerar, kontrollera att:

- nödstoppet inte är intryckt
- batteriet är laddat
- handkontrollen är rätt inkopplad.

Kontakta certifierad servicepersonal om lyften är behäftad med fel eller inte fungerar.

LYFT OCH FÖRFLYTNING

- Undvik manuella lyft - använd lyften.
- Tänk på korrekt arbetsställning för att skona din rygg! Använd sängens höj- och sänkfunktion.
- Planera lyftet och informera den som skall lyftas/förflyttas.
- Den som förflyttas skall sitta så lågt som möjligt med ansiktet vänt mot masten, gärna med fötterna på chassit

Etac AS
Etac Supply Gjøvik
Hadelandsveien 2
2816 Gjøvik
NORGE
Tlf: (+47) 4000 1004
www.molift.com

molift
by Etac