





Snabbguide – SV

Molift Raiser Pro

molift[®]
by Etac

QG43002 - 2025-12-01 - Rev. 2.0

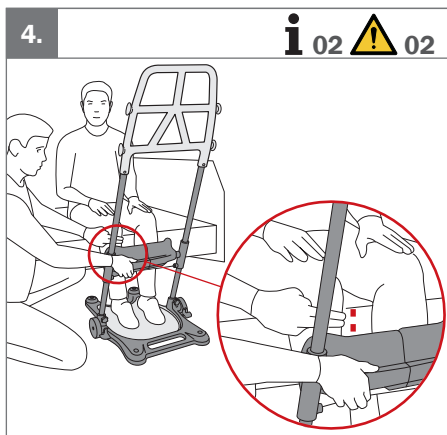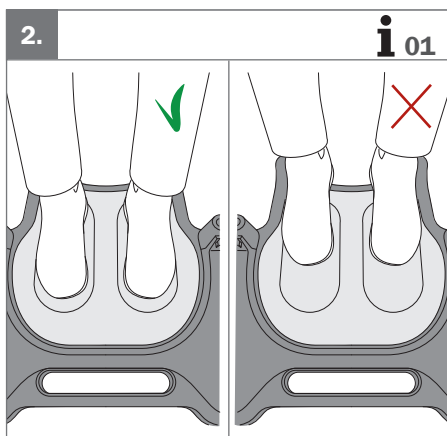


www.etac.com







5.

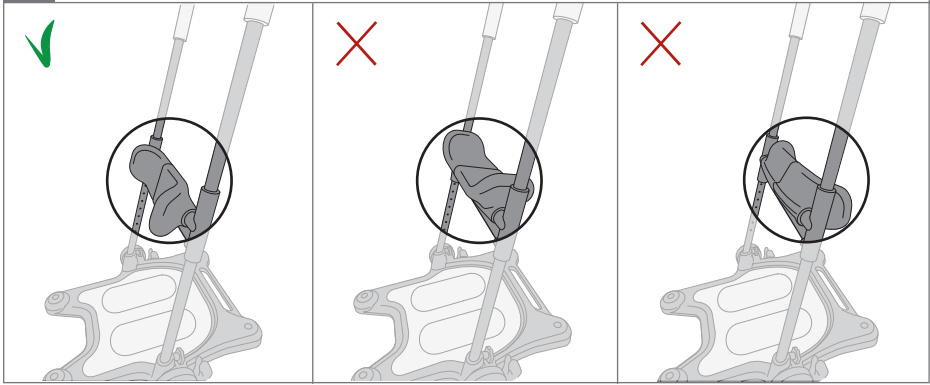


6.




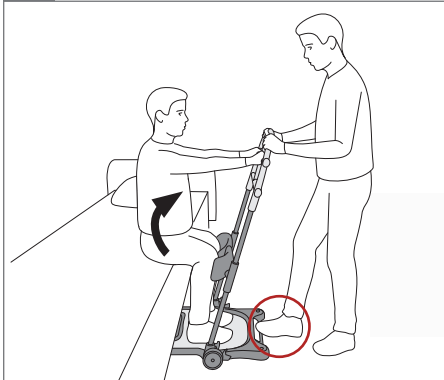


7.

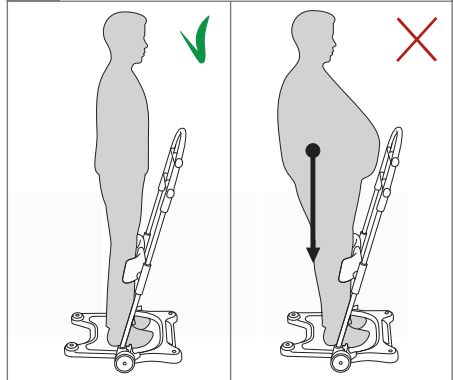

8.

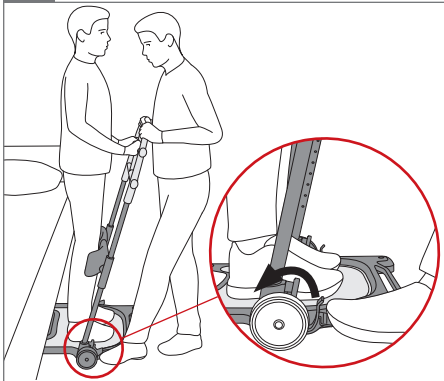

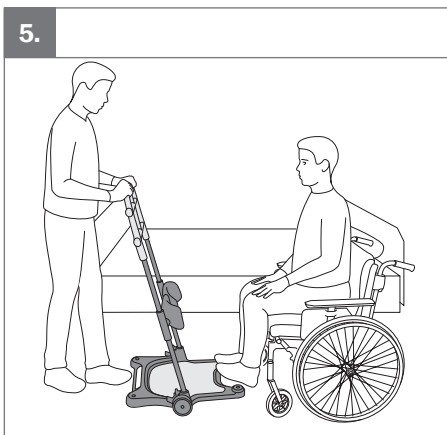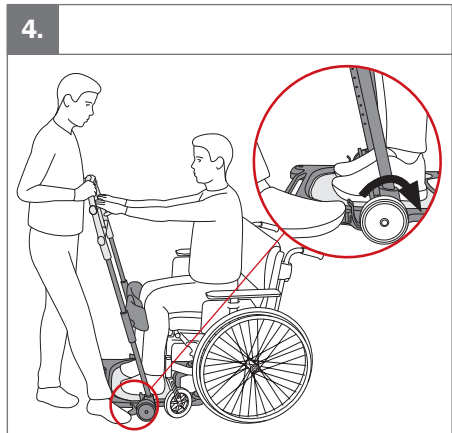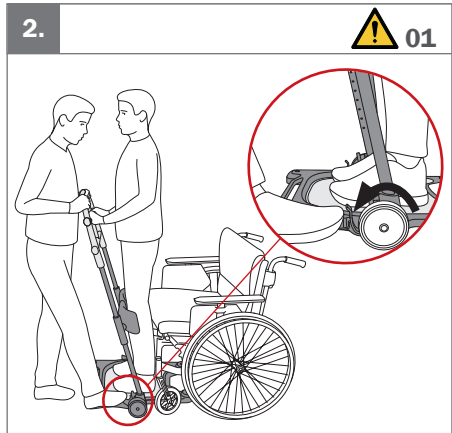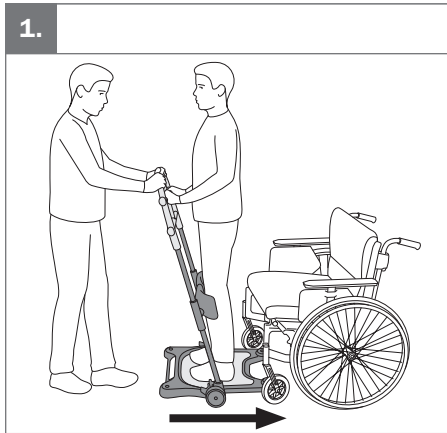

Hantering



Varningar

01. Hjulen måste alltid vara låsta när brukaren förflyttar sig mellan sittande och stående ställning.
02. Dra i frigöringsvajern och skjut benstödet till rätt höjd. Se till att båda sidorna sitter ordentligt på plats. Tryck uppåt eller nedåt tills du hör ett klickljud. Om benstödet inte är ordentligt fastsatt kan det glida ned och göra produkten osäker att använda.
03. Se till att benstödet sitter vertikalt och att frigöringsvajern pekar mot vårdgivarens sida innan brukaren reser sig upp.
04. Vårdgivaren måste alltid placera en fot på bottenplattan och motbalansera brukarens vikt när brukaren ställer sig upp eller sätter sig ner.
05. Se till att brukarens vikt är centrerad över bottenplattans mitt.
06. Brukaren ska alltid hålla i handtagen under förflyttningen.



Information

01. Fötterna måste placeras på basplattans kontur.
02. Justera benstödet så att det sitter två fingrar under brukarens knän.

Tekniska data



10,7kg
23.6lbs

Rengöring



Detta är en snabbguide. Den senaste versionen av alla bruksanvisningar kan laddas ned som "pdf-fil" från www.etac.com



Etac A/S

Parallevej 3

DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac