



Quick Guide - DA

Molift Assist


molift®
by Etac

QG62004 - 2025-12-14 - Rev. 1.0


Molift Assist Strap




Molift Assist Belt

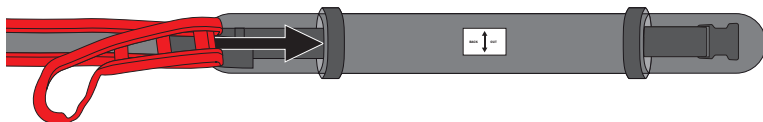

Molift Assist Sleeve

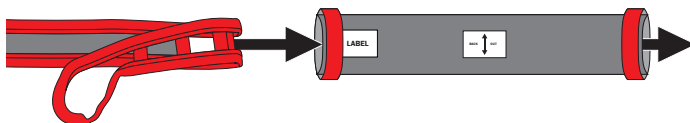

Molift Assist Sleeve Wide

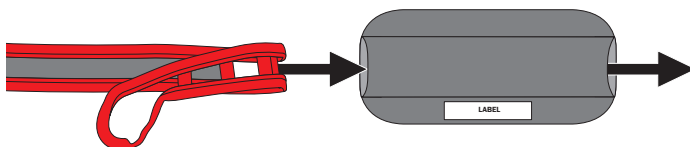


www.etac.com






1.

i 01

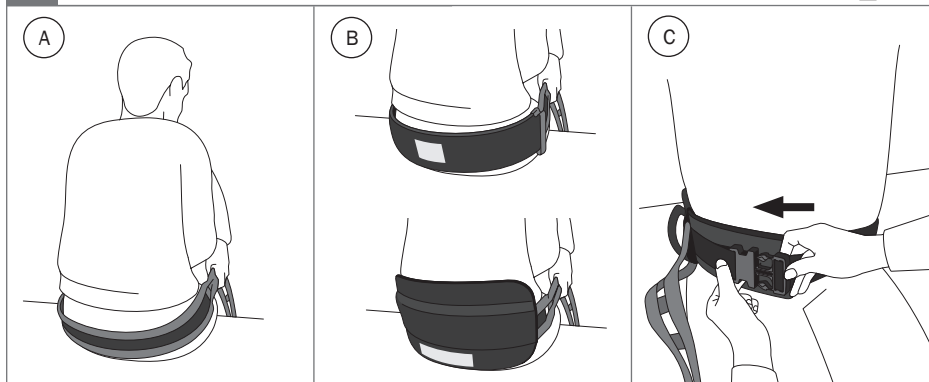

2.

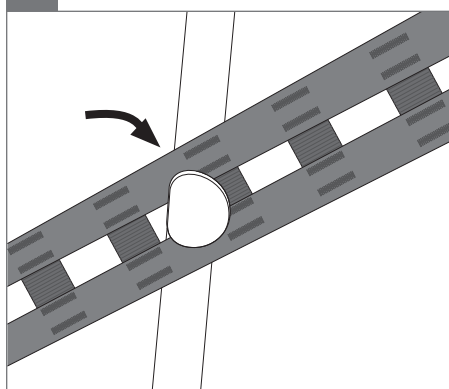


3.

! 01 **i** 02




4.

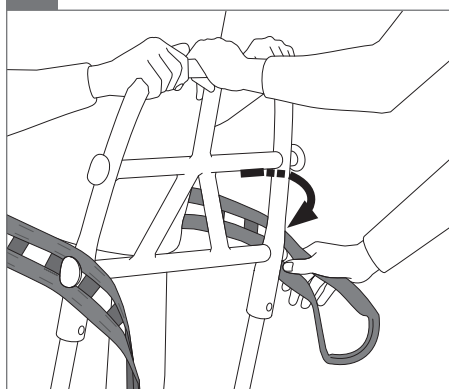


5.



! 02 **i** 03




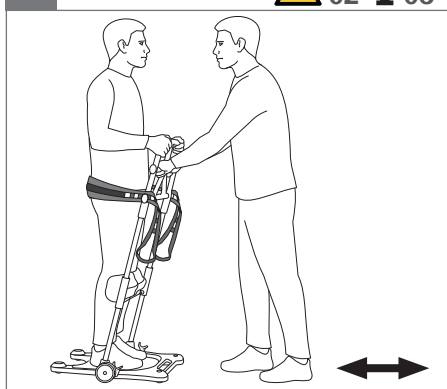




6.

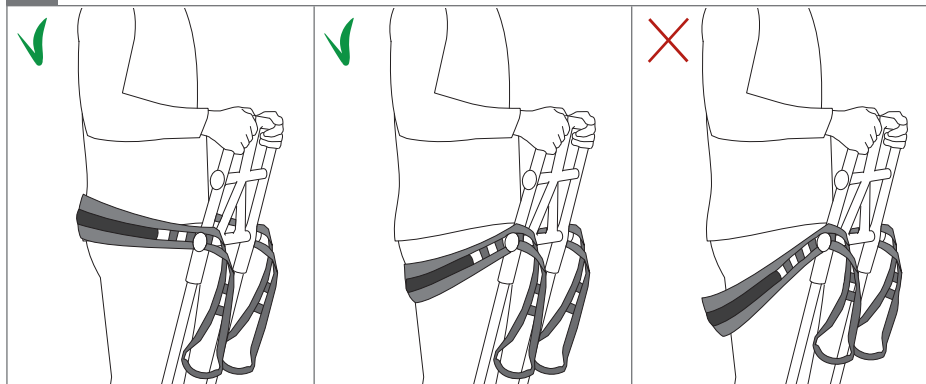


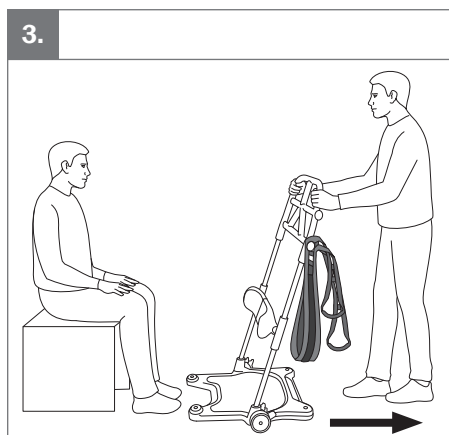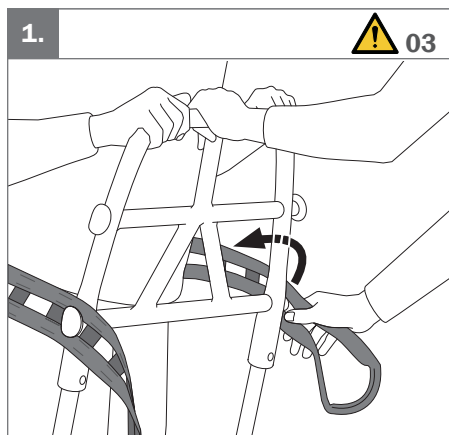

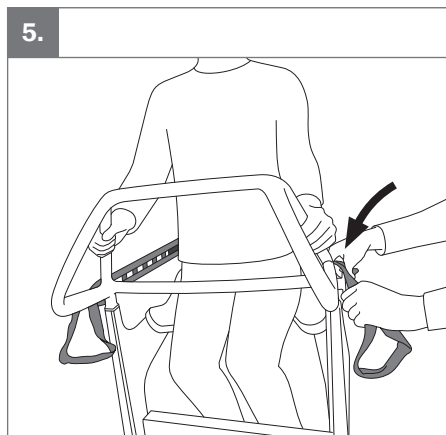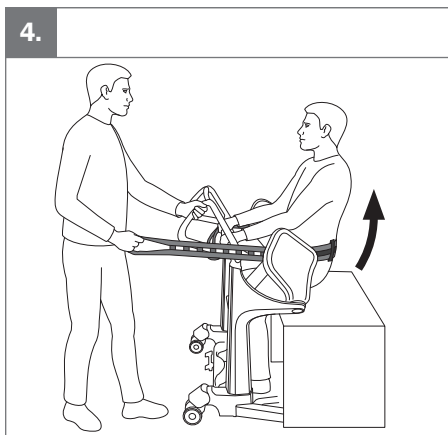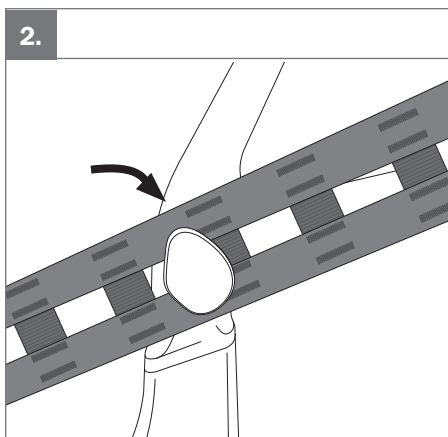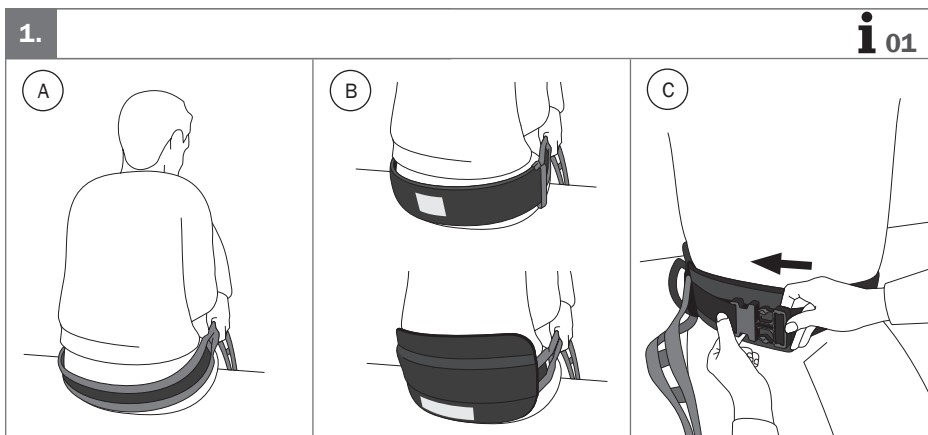




6.

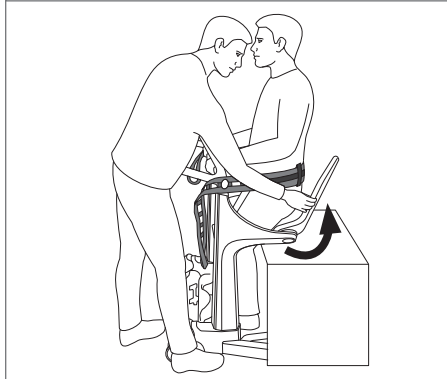


7.


i 05




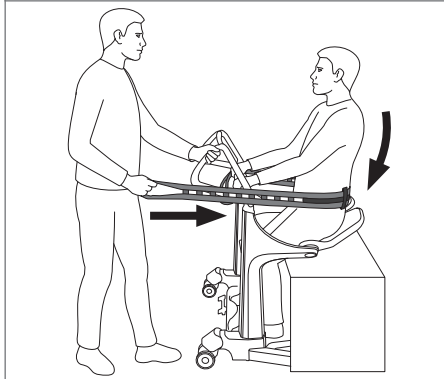


8.

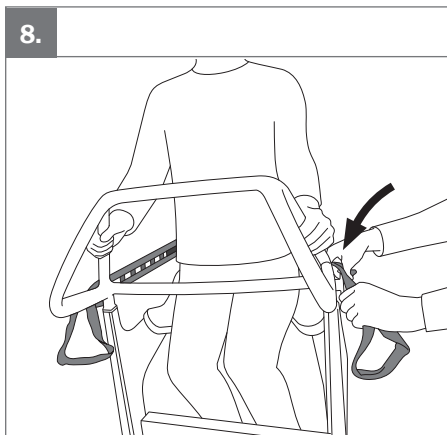


9.

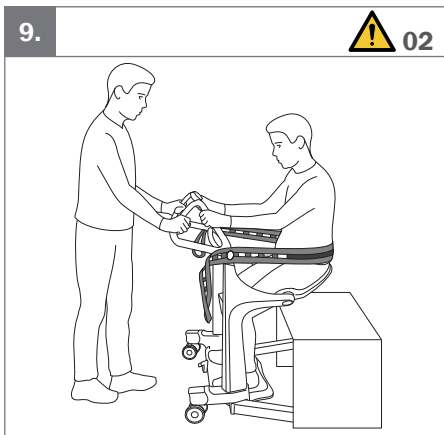

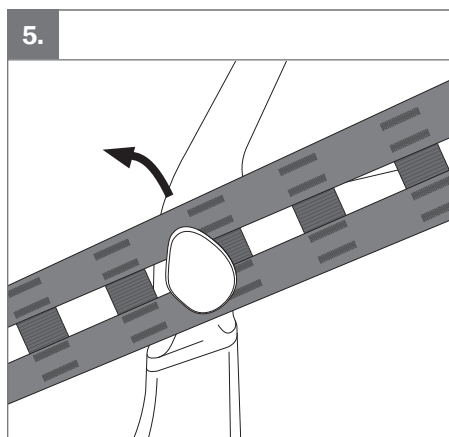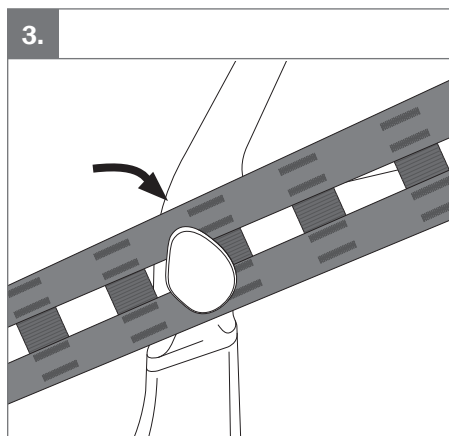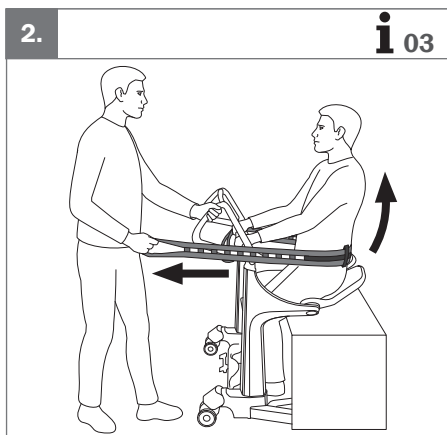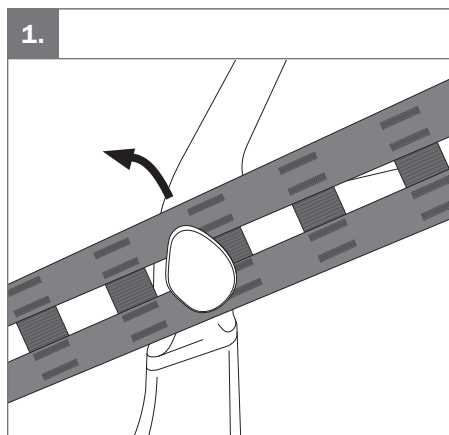




7.

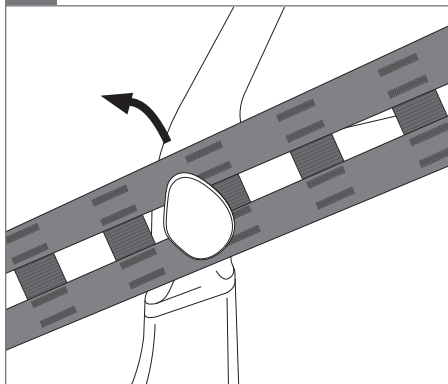

8.

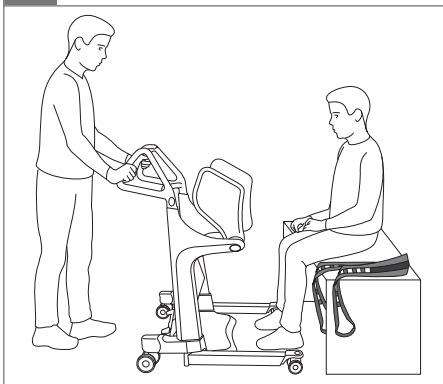

Håndtering



Advarsler

01. Hvis du bruger Sleeve, skal du sørge for at tage fat i håndtaget på Assist Strap og ikke i håndtaget på Sleeve.
02. Brugeren skal altid holde fast i håndtagene under forflytningen.
03. Sørg for, at brugeren bærer sin vægt, når Assist Strap løsnes. Frigør kun i den ene side, når brugeren sænkes tilbage til siddende stilling.
04. Brugeren skal blive stående, indtil begge sædehynder er drejet ned.

Rengøring



60-80°
140-176F



Max. 60°
/140F



Dette produkt kan rengøres med et rengøringsmiddel, der er fri for opløsningsmiddel, med et pH-niveau på 5-9 eller med et desinfektionsmiddel på 70 %.



Dette er en Quick Guide. Den seneste version af alle brugermanualer kan downloades som en "pdf-fil" fra www.etac.com

i Information

01. Vælg den relevante anvendelse ved hjælp af enten metode A (Strap), B (Sleeve/Sleeve Wide) eller C (Belt).
02. Lås hjulene, og anbring den ene fod på kanten af bundpladen. Hjælperen skal altid afbalancere brugerens vægt, når brugeren rejser sig eller sætter sig.
03. Før forflytningen udføres, skal det sikres, at stroppen er spændt og placeret enten under bagdelen eller i hoftehøjde.
04. Sørg for, at stropperne er placeret på indersiden af sædehynderne.
05. Juster stroppens fastgørelse for at løsne stroppen, mens brugeren sidder på sædehynderne.



Etac A/S

Parallelsvej 3

DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift®
by Etac