










Quick Guide – DA

Molift Transfer Pro

molift®
by Etac

QG70104 - 2025-10-07 - Rev. 1.0

Denne quick guide erstatter ikke produktets brugermanual. Det er vigtigt at forstå indholdet i brugermanualen, når produktet betjenes. Du kan downloade brugermanualen på etac.dk.

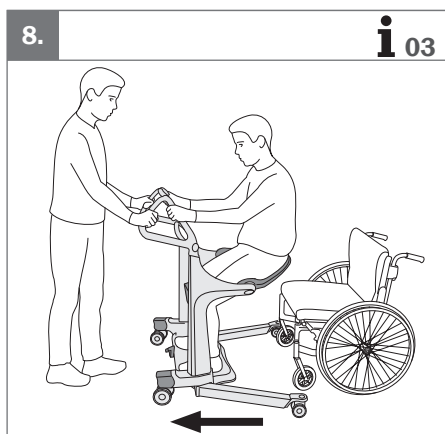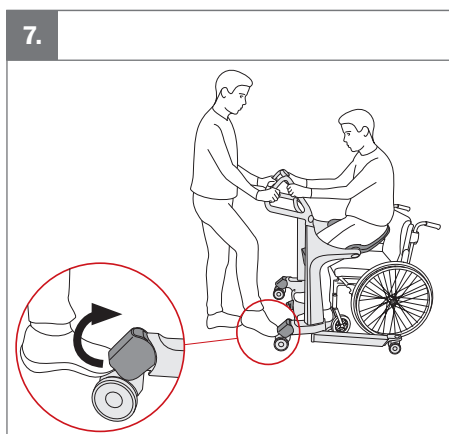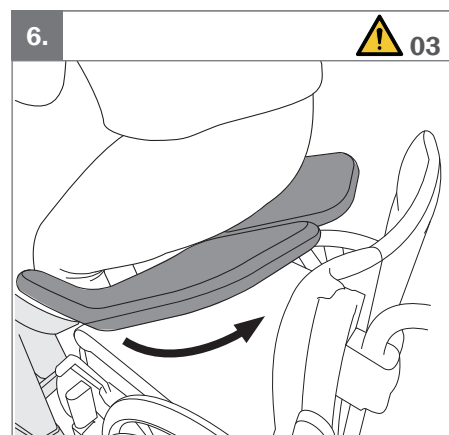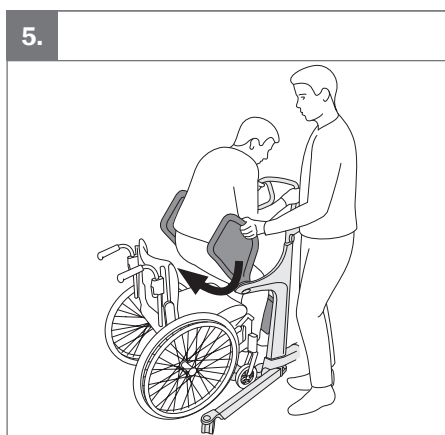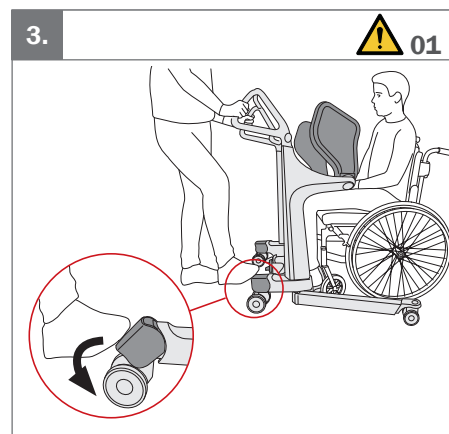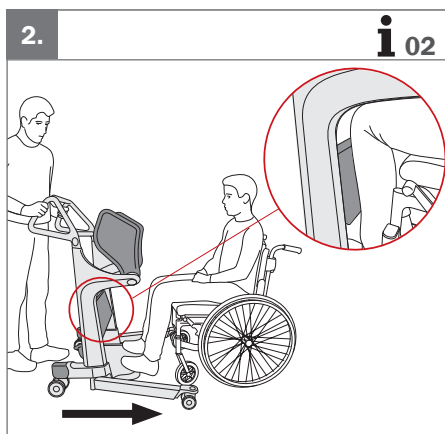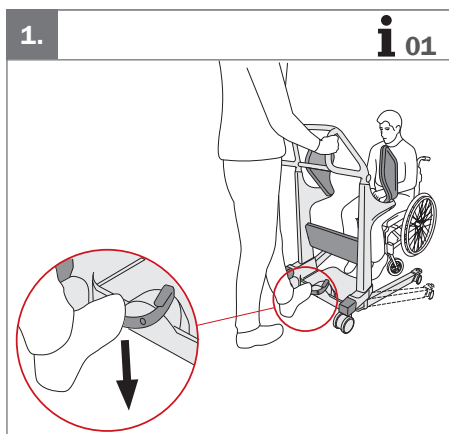










- ! Advarsler**
- 01. Hjulene skal altid være låst, når brugeren bevæger sig mellem siddende og stående stilling.
 - 02. Brugeren skal altid holde fast i håndtagene under forflytning.
 - 03. Brugeren skal blive stående, indtil begge sædeplader er klappet ned.

- i Information**
- 01. Juster benjusteringen ved hjælp af pedalen. Til venstre: bredere. Til højre: smallere.
 - 02. Placer Transfer Pro, så benstøtten når brugerens skinneben.
 - 03. Det er valgfrit at flytte benene ind under forflytning.



www.etac.com



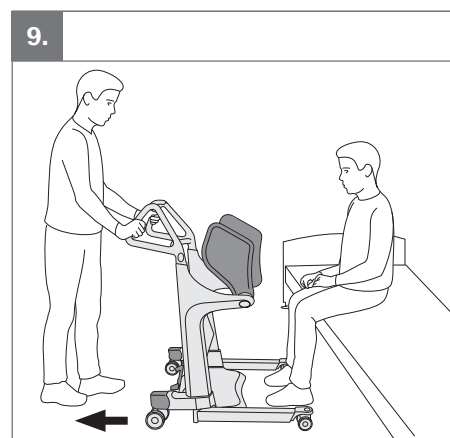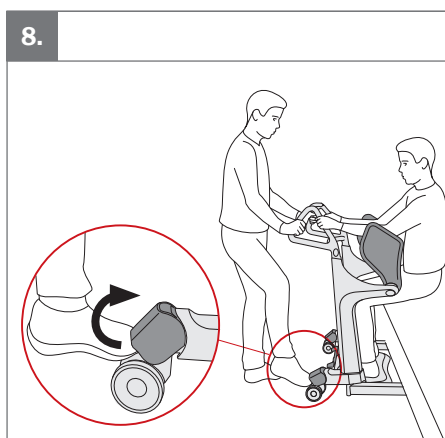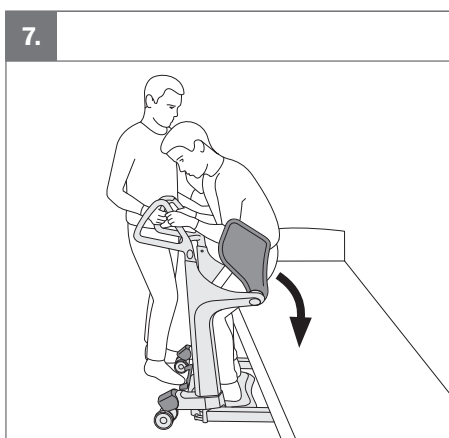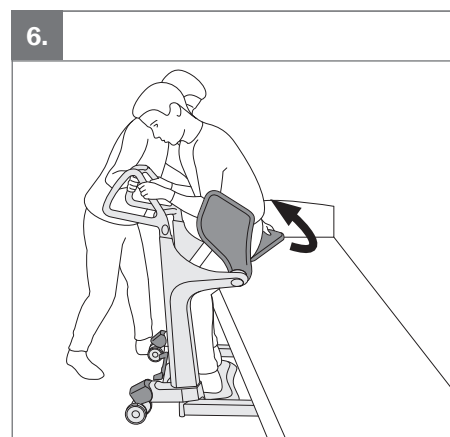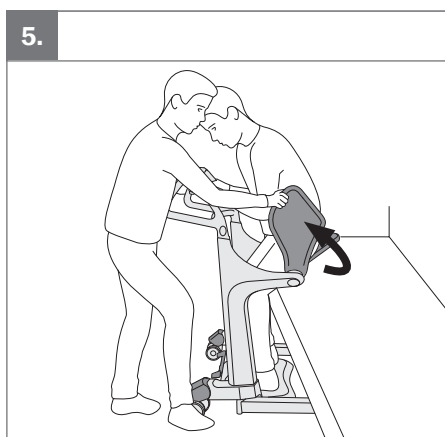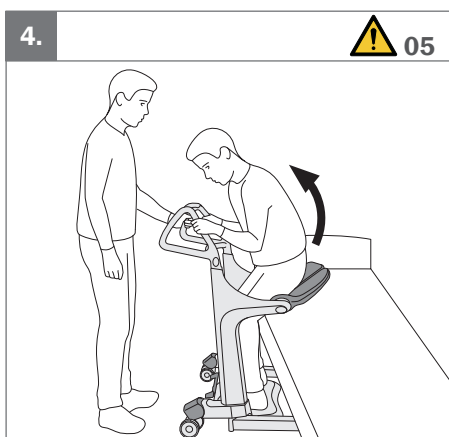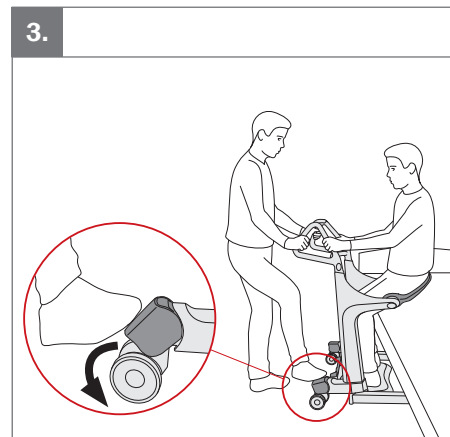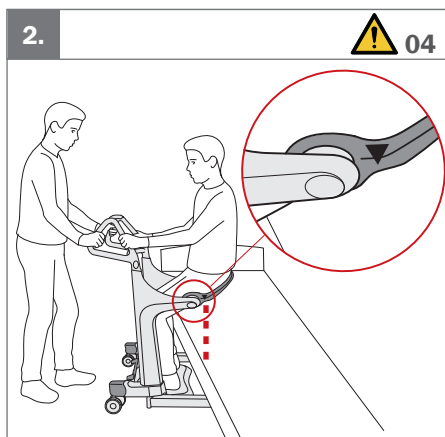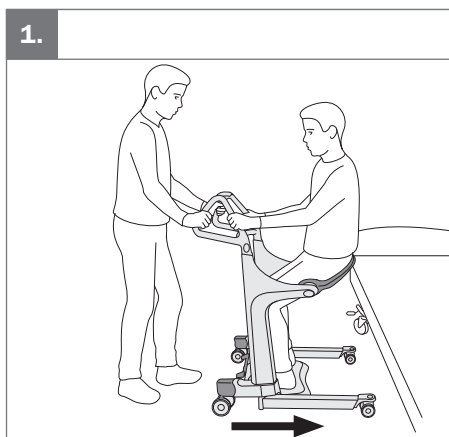

Advarsler

04. Sørg for at markeringen på sædepladen som minimum flugter med sædets kant, før brugeren sætter sig.

05. Drej altid begge sædeplader op, før brugeren sætter sig.

Teknisk data



28,2kg
62lbs



max 200 kg
max 440 lbs



max 200cm
max 149cm

Vaskeanvisning



UK REP

Etac Ltd.

Unit 60, Hartlebury Trading Estate,
Hartlebury, Kidderminster,
Worcestershire, DY10 4JB
+44 121 561 2222

CH REP



Promefa SA

Avenue de Morges 33
1027 Lonay, CH
+41 44 872 97 79



Etac A/S

Parallelvej 3
DK-8751 Gedved



+45 796 858 33



patienthandling@etac.com



www.etac.com

molift[®]
by Etac