

Quick guide Prio 3A

Simple indstillinger for hjælpere. Til hjulsystem med C5 drivhjul og forhjul med 57 mm navbredde.

Indstillinger i håndtag

Ryginkel
- venstre håndtag.



Tipfunktion
- højre håndtag.



Kørehåndtag


Højdejusterbare.

[VIDEO](#)



Eleverbare benstøtter

Tryk knappen ind og løft/sænk.

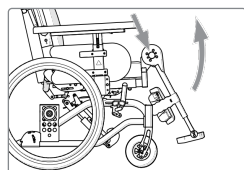

Tipsikring

Opklappelig.

[VIDEO](#)



Hovedstøtte

Aftagelig og
justerbar.


[VIDEO](#)



Armlæn - aftagelige, højdeindstillelige


Løft op for at fjerne dem.

Dybdejusterbare: Løsn fingerskruen under armlænene.

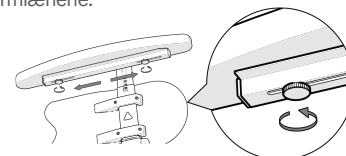


Aftagelige og svingbare benstøtter

Løft og drej.

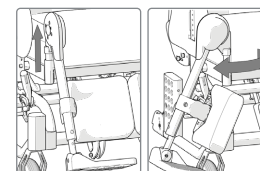

Længdejusterbare fodstøtter

Løsn fingerskruerne helt på benstøtten. Træk skruen ud. Indstil højden. Monter igen og stram ordentligt.


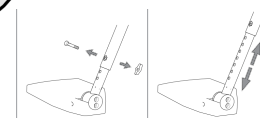


Avancerede indstillinger for fagpersonale.

Strop-ryg

Indstil med brugeren så langt tilbage i stolen som muligt.

- Rygvinklingen aktiveres til oprejst position.
- Regulér bækkenstøtten i højden svarende til lændesvajet.
(Se video: Dynamisk bækkenstabilitet)
- Giv bækkenet støtte ved at stramme bækkestroppen. Husk at denne strop slækkes automatisk, når ryglænet lænes bagover.
- Regulér derefter den øverste strop, så brugeren får støtte og balance i overkroppen.
- De resterende stropper reguleres for at give plads til bagdelen og følge ryggens naturlige rundning.

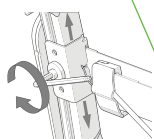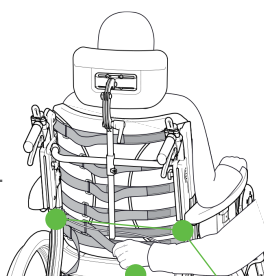

Sædedybde foran

Indstilling fra 39-51 cm.

[VIDEO](#)



Ryghøjde

Indstilling fra 46-62 cm.
52-68 cm inkl. rygforlænger.

[VIDEO](#)



Lumbal- og hoftevinkel

Indstilling fra -12° til +10°

[VIDEO](#)




Dynamisk bækkenstabilitet



Individuel indstillelig.

[VIDEO](#)




Sædehøjdetabel 57 mm navbredde

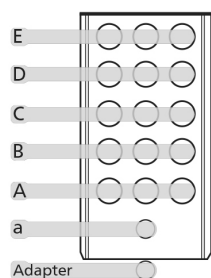

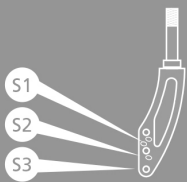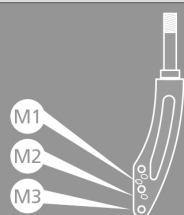Kort forgaffel										Medium forgaffel													
																							
S1	S2				S3				M1				M2				M3						
																							
6"	6"	6,5"	7"	8"	6"	6,5"	7"	8"	6"	6,5"	7"	8"	6"	6,5"	7"	8"	6"	6,5"	7"	8"			
X																							
X	X	X							X	X													
	X	X	X	X	X					X	X	X*	X										
X	X	X							X	X													
X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X*	X	X	X								
	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X						
X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X*	X	X									
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X	X					
				X	X	X	X	X				X*	X	X	X	X	X	X	X	X			
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X					
				X		X	X	X				X*			X	X	X	X	X	X			
								X							X	X	X	X	X	X			
X	X								X														
				X		X	X	X				X*	X	X	X	X	X	X	X	X			
								X								X	X	X	X	X			
																			X	X			
X	X	X	X	X	X							X*	X										
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X*	X	X	X	X	X			X			
																				X			

*Kun 8 x 13/8" (200 x 35 mm), ikke 8 x 2" (200 x 50 mm)

** Stole, der har elektrisk vinklingsfunktion, skal have monteret en klemsekring

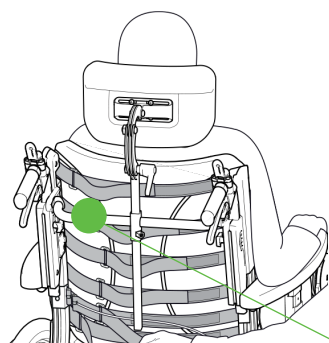

Værktøj

I ryggen er der værktøj til indstilling af de mest almindelige funktioner på stolen.

VIDEO



Find avancerede indstillinger i brugervejledningen, som medfølger stolen, eller scan qr-koden med din mobiltelefon via dit kamera og find den der.

