


Rabbit Up - Måttguide användare

En enkel guide som underlättar vid val av storlek på Rabbit Up

Mått användare

Ståstöd Rabbit Up		Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
A	Längd	870 - 1000 mm	1000 - 1390 mm	1110 - 1490 mm	1230 - 1800 mm
B	Max. höjd till armhåla	740 mm	1080 mm	1190 mm	1420 mm
Max. brukarvikt		40 kg	50 kg	60 kg	70 kg

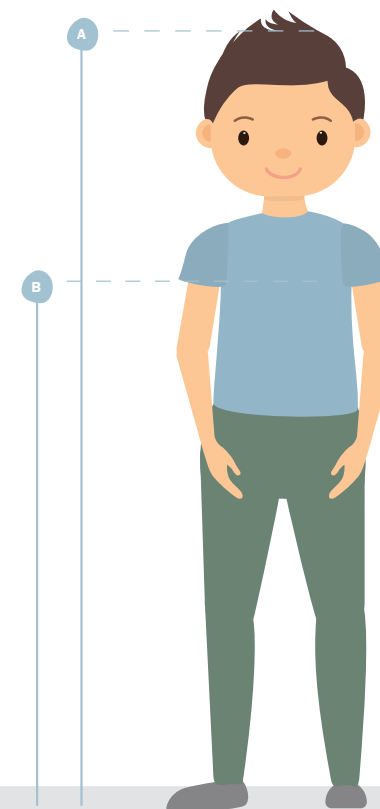

Rabbit Up - Måttguide vid val av drivhjul

Storlek	Drivhjul storlek	Ändring av cambervinkel +6°		Ändring av cambervinkel +3°		Standard		Ändring av cambervinkel -3°		Ändring av cambervinkel -6°	
		A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
1	22"	N/A	N/A	N/A	N/A	369	633	395	610	423	587
	24"	299	686	326	659	356	635	384	607	414	582
	26"	280	691	310	662	342	635	373	604	406	576
2	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460	651	493	623
	29"	337	748	371	713	409	682	444	646	482	614
	32"	318	754	355	716	396	681	435	642	476	606
3	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	510	701	543	673
	29"	387	798	421	763	459	732	494	696	532	664
	32"	368	804	405	766	446	731	485	792	526	656
4	32"	406	793	445	755	486	719	525	681	N/A	N/A
	36"	384	802	427	759	473	719	517	676	N/A	N/A

• Val av drivhjulstorlek

Vi rekommenderar att man väljer största möjliga drivhjul och hittar en lämplig höjd på fotplattan för att barnet ska få bästa position att driva på hjulen. Om det finns behov att ha fotplattan längre ner så kan man välja en mindre storlek på drivhjulen.


• Val av cambervinkel

Barnets mått över höften plus 100 mm bör vara mindre än mått A för att eventuella tillbehör ska kunna monteras på produkten (höftbredd + 100 mm < A).

Vi rekommenderar att man väljer en cambervinkel som är närmast barnets höftbredd plus 100 mm, så att barnet kommer så nära drivhjulen som möjligt.

• Tänk på omgivningen


Totala bredden på produkten (C) påverkas när man ändrar mått A

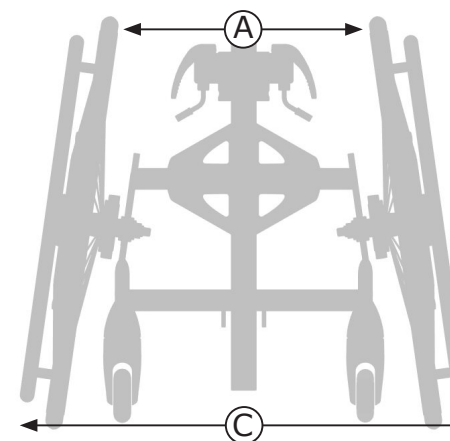

Rabbit Up – Guide för placering av camber

För instruktion hur man ändrar cambervinkel på drivhjulen hänvisar vi till bruksmanualen.

		Standard									
		Y: +6°		Y: +3°		Y: 0°		Y: -3°		Y: -6°	
Storlek	X	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A	Z (#)	A
1	22"	N/A		N/A		1		1		2	
	24"	3	14°	4	11°	5	8°	6	5°	7	2°
	26"	8		9		10		11		12	
2	26"	N/A		N/A		N/A		1		2	
	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°
	32"	13		15		16		17		18	
3	26"	N/A		N/A		N/A		1		2	
	29"	6	12°	8	9°	9	6°	10	3°	11	0°
	32"	13		15		16		17		18	
Hjul UTAN broms	32"	5	10°	7	7°	8	4°	8	1°	N/A	N/A
	36"	14		16		17		18		N/A	
Hjul MED broms	32"	8	10°	9	7°	10	4°	11	1°	N/A	N/A
	36"	17		18		19		20		N/A	

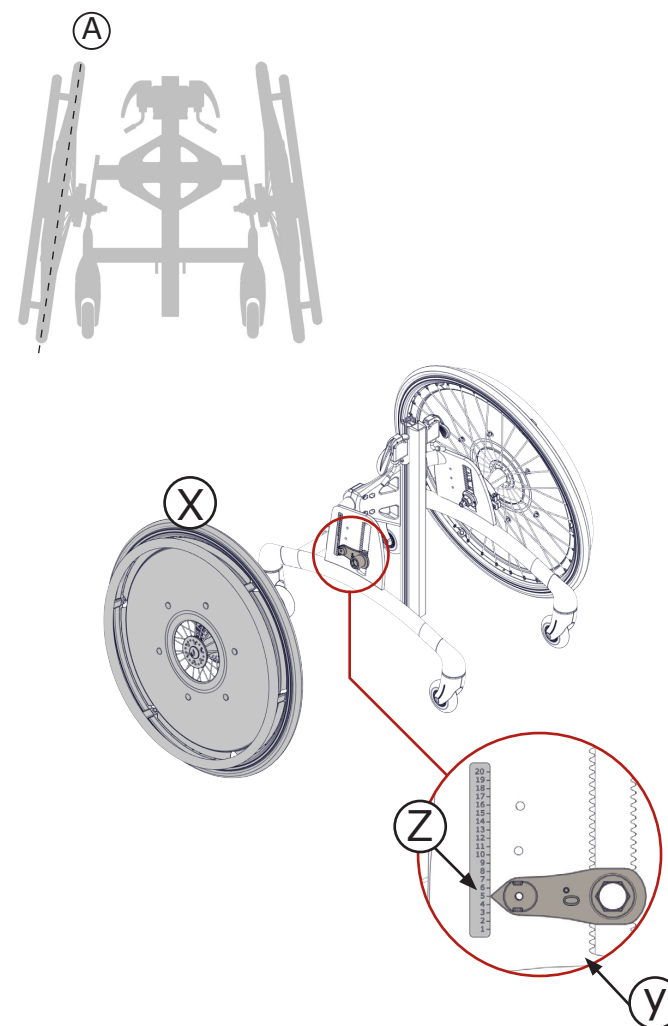

Hur du använder guiderna



Steg 1: Notera barnets mått

Längd: 1380 mm
 Höjd till armhåla: 970 mm
 Vikt: 25 kg
 Höftbredd: 260 mm

Steg 2: Välj storlek på Rabbit Up

En rekommendation är att se till barnets möjlighet att växa med den storlek av Rabbit Up man väljer, beroende på hur lång tid produkten beräknas användas innan byte av storlek kan ske.

I detta fall har vi valt storlek 2.

Steg 3: Val av drivhjulstorlek

Vi rekommenderar att man väljer så stora drivhjul som möjligt och en höjd på fotplattan så att barnet har bästa positionen för att nå hjulen och driva på framåt.

Steg 4: Val av cambervinkel (Rabbit Up - Måttguide vid val av drivhjul)

Här bör mått A tas i beaktning. För att det ska bli lagom utrymme för barnet och monterade tillbehör, samt för att barnet ska få bra avstånd till drivringarna, rekommenderar vi att lägga till 100 mm på barnets höftbredd (höftbredd + 100 mm < A).

Mått A blir i detta exempel: 260 + 100 = 360

Steg 5: Tänk på omgivningen

Slutligen bör man ta hänsyn till omgivningen. Om det finns behov för att ta sig igenom ett visst utrymme så kan man behöva ändra cambervinkel på drivhjulen för att uppnå rätt totalbredd på Rabbit Up.

Mått användare				
Ståstöd/Mobilt ståstöd Rabbit Up	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3	Storlek 4
Längd	870 - 1000 mm	1000 - 1390 mm	1110 - 1490 mm	1230 - 1800 mm
Max. höjd till armhåla	740 mm	1080 mm	1190 mm	1420 mm
Max. brukarvikt	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg
Ungefärlig ålder	1 - 3	4 - 10	5 - 12	7 - 18

Storlek	Drivhjulstorlek	Ändring av cambervinkel +6°		Ändring av cambervinkel +3°		Standard		Ändring av cambervinkel -3°		Ändring av cambervinkel -6°	
		A	C	A	C	A	C	A	C	A	C
1	22"	N/A	N/A	N/A	N/A	369	633	395	610	423	587
	24"	299	686	326	659	356	635	384	607	414	582
	26"	280	691	310	662	342	635	373	604	406	576
2	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	460	651	493	623
	29"	337	748	371	713	409	682	444	646	482	614
	32"	318	754	355	716	396	681	435	642	476	606
3	26"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	510	701	543	673
	29"	387	798	421	763	459	732	494	696	532	664
	32"	368	804	405	766	446	731	485	792	526	656
4	32"	406	793	445	755	486	719	525	681	N/A	N/A
	36"	384	802	427	759	473	719	517	676	N/A	N/A