


# Etac Clean


## Rekonditioneringsanvisning

etac®


1a21892.1 26-05-05

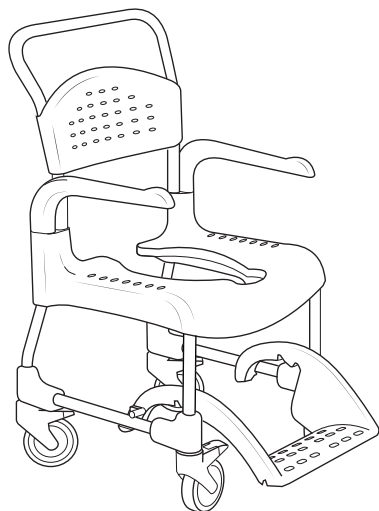

**Clean**

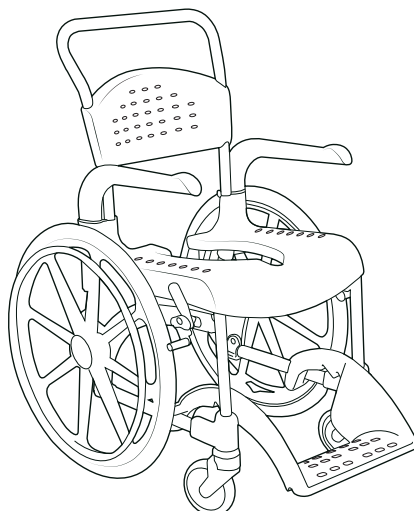

**Clean 24"**

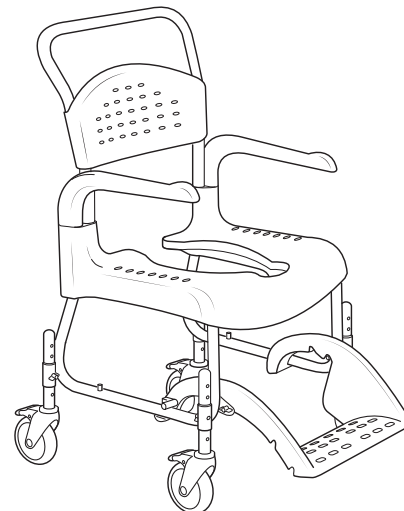

**Clean HRB**

### Rekonditionering/genanvendelse

Hvor ofte kontrol/rekonditionering skal udføres afhænger af, hvor meget og intensivt produktet anvendes. Brug altid originale dele fra Etac. Se vejledningen på [www.etac.com](http://www.etac.com) for at få yderligere information om produktet.

Vær opmærksom på, at produktets levetid er begrænset (se vejledningen). Dette er især vigtigt ved ordinerer til brugere, der kan forventes at bruge produktet i længere tid.

### Rengøring

Vaske- og rengøringsinstruktioner for produktet findes på produktet samt i produktets vejledning. Ved rengøring af stellet i vaskekabinet skal produktet stå fast og placeres lodret med låste hjul.

Produktet tåler rengøring ved 85 °C i 3 minutter.

Rengør produktet med et rengøringsmiddel uden opløsningsmidler og med en pH-værdi på 5-9 eller med 70 % sprit

### Rekonditionering

Kontrol	Afvigelse	Foranstaltning	Clean	Clean HRB	Clean 24"
Stel	Stel med lakskader	Lakskader kan udbedres med Etacs reparationsmaling. RAL 9003 (glans 90)	●	●	●
	Stellet har mekaniske skader, der kan påvirke produktets funktion/sikkerhed	Kassér produktet			
Ryglæn af plast	Plastryglænet er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift plastryglænet			
	Plastryglænet sidder ikke fast	Spænd skrueerne med 3 Nm	●	●	●
	Skrue kan ikke spændes	Udskift plastryglænet			
Blød rygpude	Det bløde ryglæn er beskadiget, har revner, huller, revnede sømme, defekte snaplåse	Udskift det bløde ryglæn	●	●	●

# Etac Clean

## Rekonditioneringsanvisning



1a21892.1 26-05-05

### Rekonditionering

Kontrol	Afvigelse	Foranstaltning	Clean	Clean HRB	Clean 24"
Armlæn	Armlæn er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift armlænet			
	Armlæn er vanskeligt at montere/afmontere	Rengør armlæn og holder			
	Armlæn er vanskeligt at montere/afmontere	Udskift den defekte del (armlæn, sæde, armlænslås)	●	●	●
	Armlæn kan ikke låses	Udskift den defekte del (armlæn, sæde, armlænslås)			
Sæde	Sædet er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift sædet			
	Sædet sidder ikke fast	Spænd skruerne under sædet med 3 Nm	●	●	●
	Skrue kan ikke spændes	Udskift sædet			
Forhjul/forhjulsbeslag	Forhjul/forhjulsbeslag er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift forhjulet			
	Slidbanen er slidt	Udskift forhjulet			
	Forhjul ruller trægt/roterer ikke	Rengør forhjul			
	Forhjul ruller trægt/roterer ikke	Udskift forhjulet	●	●	●
	Bremseren låser ikke	Udskift forhjulet			
	Forhjulet sidder ikke fast	Spænd skruerne under hjulbeslaget med 4,5 Nm			
	Skrue kan ikke spændes	Udskift forhjulet			
Fodstøtte	Beskadiget fodstøtte, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift fodstøtten	●	●	●
Højdejustering	Vingemøtrik er løs	Spænd vingemøtrikken		●	
	Vingemøtrik kan ikke spændes	Udskift skruen og vingemøtrikken			
Drivhjulsadapter	Drivhjulsadapter er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift drivhjulsadapteren			●
	Drivhjulsadapter sidder ikke fast	Spænd skruerne			
Drivhjul	Drivhjul er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift drivhjulet			
	Slidbanen er slidt	Udskift drivhjulet			●
	Drivhjul ruller trægt	Udskift drivhjulet			
	Drivhjul sidder ikke fast	Spænd skrue/møtrik			
Bremse	Bremse er beskadiget, har revner, grater eller skarpe kanter	Udskift bremsen			●
	Bremseren låser ikke	Justér bremsens position			
	Bremseren låser ikke	Udskift bremsen			