

Tvättråd dyna

Handtvätt

1. Stäng luftventilen innan tvätt.
2. Duscha i kallt vatten.
3. Tvätta med diskmedel och ljummet vatten.
(Om du inte kommer åt ordentligt mellan cellerna släpp ut luften ur dynan och stäng sedan luftventilen.)

Alternativt

Maskintvätt

1. Släpp ut luften och stäng samtliga luftventiler innan tvätt.
2. Lägg dynan/madrassen i ett örngott/tvättpåse. Använd flytande tvättmedel utan blekmedel.
3. Max 60°C i 10 min

OBS! Får ej centrifugeras eller torktumlas

Desinfektion

Punktdesinfektion:

1. Bearbeta ytan flödigt med ett desinfektionsmedel* (ex. Ytdesinfektion Plus)

Hela produkten:

2. Tvätta flödigt med ett desinfektionsmedel* (ex. Virkon, Perasafe)
3. Skölj noga

* Välj medel enligt lokala anvisningar



Tvättråd överdrag

Maskintvätt

60° C med ett kulör tvättmedel. Torktumla eller dropptorka.
Får ej kemtvättas.

Desinfektion

Blötlägg i desinfektionslösning*, skölj noga.

* Välj medel enligt lokala anvisningar

